


Entrada directa de audio (DAI)

Passport™ / Latitude™ BTE

Características de la entrada de audio de los audífonos Passport™/Latitude™ 16, 8, 4

- Cambie la tapa de la batería con la unidad de la tapa de la batería para entrada directa de audio opcional (ver instrucciones al dorso)
- Contactos integrados para una fiabilidad superior e interferencia reducida
- Puede permanecer conectado al audífono de manera indefinida.
- La entrada de audio está programada con el entorno de entrada directa de audio (DAI) en el software de ajuste
- Compatible con el sistema Phonak MLx
- Se adapta perfectamente para su uso con Phonic Ear, Phonak, Telex y otros sistemas de FM, micrófonos de solapa y muchas otras aplicaciones de audio.
- Receptáculo: Enchufe polarizado de 3 clavijas (Euroconector)

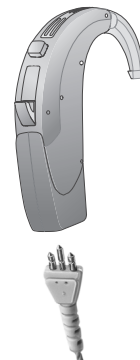

Passport™
Latitude™ 16, 8, 4

Programación de audífonos Passport™/Latitude™ 16, 8, 4 para el uso con entrada directa de audio

- El audífono Passport/Latitude 16, 8, 4 está equipado con easy-DAI
- Easy-DAI detectará automáticamente las señales de audio y pasará al programa DAI. El usuario escuchará una melodía diferente para indicar que se produjo el cambio. Cuando ya no se escuche la señal de audio, el audífono regresará al programa anterior.
- Para programar un audífono de manera que se use con entrada de audio, seleccione el entorno easy-DAI o DAI para los programas deseados en el software de ajuste.
- Para obtener sólo la señal de audio (audífono con micrófono apagado), seleccione DAI como opción de entrada en el programa DAI.
- Para obtener audio más audífono (audífono con micrófono encendido), seleccione Mic+DAI como opción de entrada. El equilibrio entre el micrófono del audífono y DAI se puede ajustar por medio del control deslizante M+DAI en el software de ajuste.

Unidad de entrada directa de audio (DAI)

Passport™, Latitude™ 16, 8, 4

054-5201-01 (beige)

054-5201-13 (transparente)

Cables de audio

Sistemas de entrenamiento de audio

(es probable que no sea compatible con todos los sistemas de FM)

Para Phonic Ear Modelo 475 y los sistemas de FM Telex

057-0053 Individual (60 cm/23,5 pulgadas, 2 clavijas)

057-0050 Cable Y (60 cm/23,5 pulgadas, 2 clavijas)

Para Phonic Ear Solaris o Phonak Micro Vox

052-5002 Individual (60 cm/23,5 pulgadas, 2 clavijas)

052-5003 Individual (75 cm/29,5 pulgadas, 3 clavijas)

052-5004 Cable Y (60 cm/23,5 pulgadas, 3 clavijas)

052-5005 Cable Y (75 cm/29,5 pulgadas, 3 clavijas)

Aplicaciones generales

Enchufe de 3,5 mm, mono, gris (TV, radio, micrófono externo)

057-5012 Individual (90 cm/35 pulgadas)

057-0090 Cable Y (80 cm/31,5 pulgadas)

Enchufe de 3,5 mm, estéreo, atenuado, beige (Walkman, receptor Phonic Ear Easy)

054-5037 Individual (52 cm/20,5 pulgadas)

054-5038 Cable Y (52 cm/20,5 pulgadas)

Para equipar los audífonos Passport™ y Latitude™ 16, 8, 4 BTE para aplicaciones de entrada directa de audio:

Cambie la tapa de la batería con la unidad de la tapa de batería para la entrada directa de audio opcional.

