

Passport™ Moxi™

Tecnología de receptor de canales
Canal Receiver Technology o CRT) de audífonos 3 12 BTE

Características exclusivas

SmartFocus™

Proporciona a los usuarios la capacidad de ajuste para lograr concentración adicional en el habla o más confort de escucha con la combinación de cuatro parámetros ajustables:

- Estrategia de micrófono
- Mejora del habla
- Reducción del ruido
- Ganancia global

Los parámetros son personalizables tanto en el programa manual como en el automático.

AutoPro4™ mejorado

Permite a los usuarios experimentar un rendimiento automático superior con transiciones rápidas y sin complicaciones.

Sistema de gestión del ruido de fondo mejorado

Ofrece intensidades ajustables para suprimir varios grados de ruido de fondo y proporcionar un rendimiento más útil.

Autoaprendizaje

Aprende de manera gradual e inteligente las preferencias del usuario para los parámetros de smartFocus™ y el control de volumen en el programa automático.

Mando a distancia Smart Control (opcional)

Mando a distancia que proporciona acceso a una amplia variedad de parámetros ajustables, que incluyen smartFocus y learnNow™


LearnNow™ (Aprende Ahora)

Captura y memoriza al instante las preferencias indicadas por el usuario para los parámetros de smartFocus y el control de volumen en el programa automático.


Funciones adicionales

- 20 canales
- 4 automáticos + 3 manuales programas
- Varias opciones de micrófono: omnidireccional, direccional fijo y direccional multibanda adaptable
- Mejora del habla LD
- Reducción del ruido
- AntiShock™
- Registro de datos
- Easy-t
- programa específico de teléfono
- OptimumFit™ con tecnología Intellivent
- Opción de 2 receptores


Guía de ajuste

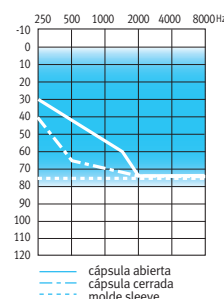

109/44
Passport Moxi (xS)

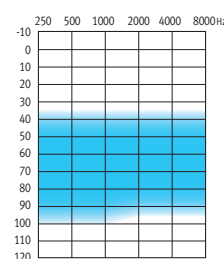

123/55
Passport Moxi Potente (xP)

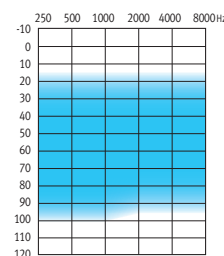

123/55
Passport Moxi OptimumFit

Passport™ Moxi™ es apropiado para personas con pérdidas auditivas de grado leve hasta severo y se puede ajustar a configuraciones de audiograma que van de pérdida inversa a pronunciada.

ANSI 3.22 1996/ANSI 3.22 2003/IEC 118-7 2CC ACOPLADOR: DATOS TÉCNICOS		ANSI 3.22 1996/ANSI 3.22 2003/IEC 118-7 2CC ACOPLADOR: DATOS TÉCNICOS	
Passport Moxi (auricular estándar xS)	Passport Moxi (auricular Potente xP)	Passport Moxi (auricular estándar xS)	Passport Moxi (auricular Potente xP)
Frecuencia de la prueba de referencia ANSI IEC 118-7 HFA 1.6 kHz		Frecuencia de la prueba de referencia IEC 118-0 1.6 kHz	
OSPL90 Valor máximo HFA a la frecuencia RTF 109 dB 104 dB 103 dB		OSPL90 Valor máximo a la frecuencia RTF 119 dB 111 dB	
Ganancia máxima (entrada de 50 dB) Valor máximo HFA a la frecuencia RTF 44 dB 36 dB 35 dB		Ganancia máxima (entrada de 50 dB) Valor máximo a la frecuencia RTF 55 dB 44 dB	
Respuesta de frecuencia básica Rango de frecuencia (Hz) Ganancia de prueba de referencia (RTG) (ANSI 1996/ANSI 2003) < 100-7700 27 dB		Respuesta de frecuencia básica Rango de frecuencia (Hz) Ganancia de prueba de referencia (RTG) (DIN 45605) < 100-8000 37 dB	
Sensibilidad de la bobina de inducción (ANSI 1996/ANSI 2003, 31,6 mA/m) HFA SPLITS (nivel de presión acústica en simulador inductivo de teléfono de media de alta frecuencia) STS/RSETS 87 dB 1 dB		Sensibilidad de la bobina de inducción Gráfico ilustrado para 31,6 mA/m a la ganancia RTG a la frecuencia RTF (1 mA/m a la ganancia máxima) Valor máximo a la frecuencia RTF 99 dB 86 dB 75 dB	
Drenaje de corriente a la ganancia RTG Duración normal de la batería Ruido equivalente de entrada a la ganancia RTG Distorsión armónica total a 500 Hz a 800 Hz a 1600 Hz Puntuación de CEM según ANSI C63-19-2001 CEM, Omni/Telebobina M4/T4		Drenaje de corriente a la ganancia RTG Duración normal de la batería Ruido equivalente de entrada a la ganancia RTG Distorsión armónica total a 500 Hz a 800 Hz a 1600 Hz Inmunidad de EMC según IEC 60118-13, Intensidad de campo 75/50 V/m, Modo Omni IRIL Banda baja/alta dB SPL 1.15 mA 130 h 24 dB 1.0% 0.5% 0.5% M4/T4	
Condición de la prueba: Batería: 312 Fuente: voltaje 1,3 V Los datos de medición obtenidos corresponden a una configuración cerrada con microtubo recto de medición (004-1393) y en la que se ha utilizado un acoplador HA-1 (ANSI-3-1995) u oído artificial ocluido (EN 60711, con ajuste del acoplador según la figura 4 de la normativa de la prueba). Audífono configurado en modo lineal y omni, con todas las funciones adaptables desactivadas.		Condición de la prueba: Batería: 312 Fuente: voltaje 1,3 V Los datos de medición obtenidos corresponden a una configuración cerrada con microtubo recto de medición (004-1393) y en la que se ha utilizado un acoplador HA-1 (ANSI-3-1995) u oído artificial ocluido (EN 60711, con ajuste del acoplador según la figura 4 de la normativa de la prueba). Audífono configurado en modo lineal y omni, con todas las funciones adaptables desactivadas.	

No se deben colocar cápsulas en pacientes con perforaciones en el tímpano, cavidades expuestas del oído medio o canales auditivos alterados mediante cirugía. En estos casos, se recomienda el uso de un molde auricular adaptado al usuario.
 Unitron se reserva el derecho a modificar los datos de las especificaciones sin previo aviso, cuando se realicen mejoras.