

Unitron Remote Plus App


Benutzerhandbuch – Remote Plus 5.3



Inhalt

Überblick über die App	3	Reiter „Lifestyle“	10
Erste Schritte	3	Hörumgebungen	10
Kompatibilitätswinformationen	3	Durchschnittliche Tragezeit	10
Onboarding	4	Schrittzähler	10
Datenschutzbenachrichtigung der App akzeptieren	4	Aktivität in Minuten	10
Mit Hörgerät(en) koppeln	4	Reiter „Hörgeräte“	11
Aktivierung von Insights	4	Tap Control	11
App Modus auswählen	4	Automatisches Einschalten	12
Reiter „Start“ – Modus „Erweitert“	5	Adaptives Bluetooth®	12
Hörgerätelautstärke einstellen	5	Fernanpassung	12
Lautstärke trennen/zusammenführen	5	Geräteortung	13
Einstellungen für Komfort und Klarheit	5	Verbindungsmanagement	13
Programmwechsel durchführen	5	Meine Geräte	13
Zusätzliche App Programme	6	Reiter „Support“	14
Programmeinstellungen	7	Reiter „Mehr“	15
Tinnitus Masker	7	App Modus	15
Umgebungsbalance	7	Insights Einstellungen	15
Klangeinstellungen	7	Benachrichtigungscenter	15
Equalizer-Einstellungen	7	Design	15
Individuelle Programmanpassung	7	Analytics	15
Reiter „Start“ – Modus „Klassisch“	8	Demo Modus	15
Hörgerätelautstärke einstellen	8	Rechtliche Informationen	15
Lautstärke trennen	8	Konformitätswinformationen	16
Einstellungen für Komfort und Klarheit	8	Konformitätserklärung	16
Programmwechsel durchführen	8	Beschreibung der Symbole	16
Bewertungen	9	Wichtige Sicherheitshinweise	17

Überblick über die App

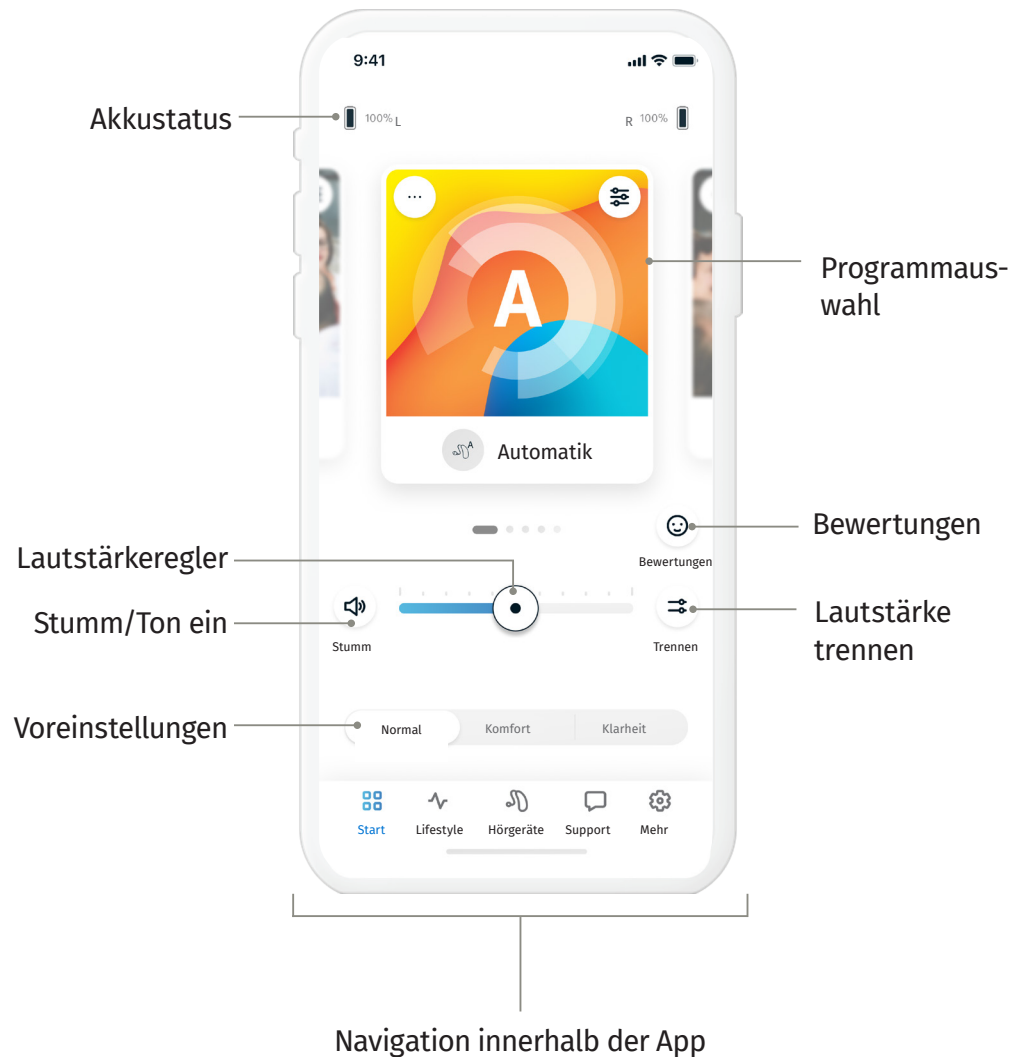

Erste Schritte

Die Unitron Remote Plus App wurde von Sonova entwickelt, einem weltweit führenden Unternehmen für Hörgeräte. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um von allen Funktionen profitieren zu können.


- ⓘ Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionen der App und wie diese durch den Benutzer bedient werden können. Lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, ehe Sie die App verwenden.
- ⓘ Für die Handhabung der App ist keine zusätzliche Einweisung erforderlich.

Dieses Benutzerhandbuch gilt für die Unitron Remote Plus App Version 5.3 und neuere Subversionen der App. Bezüglich eines Benutzerhandbuchs zu früheren Versionen der App wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter oder besuchen unsere Website unter www.unitron.com.

Kompatibilitätswinformationen


- ⚠ Zur Verwendung der Unitron Remote Plus App sind Hörgeräte mit kabelloser Bluetooth®-Konnektivität erforderlich. Die Unitron Remote Plus App kann auf Geräten mit Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) verwendet werden und ist kompatibel mit iOS Version 15 oder neuer. Die Unitron Remote Plus App kann auf zertifizierten Google Mobile Services (GMS) Android-Geräten verwendet werden, die Bluetooth® 4.2 und Android OS 8.0 oder neuere Versionen unterstützen.
- ⓘ Einige Telefone haben Töne oder Tastentöne, die auf das/die Hörgerät(e) weitergeleitet werden können. Um dies zu vermeiden, öffnen Sie das Einstellungsmenü Ihres Telefons, wählen Sie „Töne“ aus und stellen Sie sicher, dass sämtliche Töne und Tastentöne deaktiviert sind.
- ⓘ Die in der Unitron Remote Plus App verfügbaren Funktionen unterscheiden sich je nach verbundenem Hörgerät. Es sind nicht alle Funktionen für alle Hörgeräte verfügbar.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth® SIG, Inc. Apple, das Apple-Logo, iPhone und iOS sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und weiteren Ländern. Der App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Markenzeichen von Google Inc.

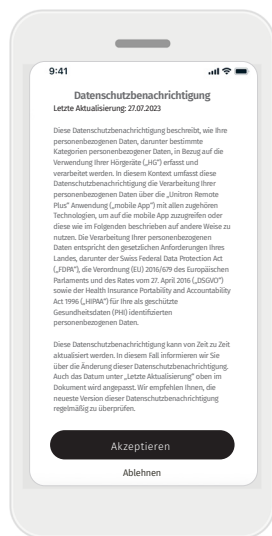


Datenschutzbenachrichtigung der App akzeptieren

Um die Unitron Remote Plus App zu verwenden, müssen Sie die Datenschutzbenachrichtigung und die anonyme Datenanalyse der App Benutzung akzeptieren.

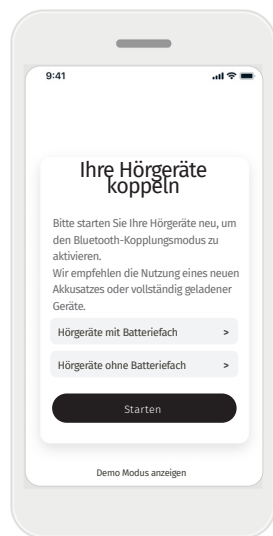


Mit Hörgerät(en) koppeln

Finden Sie Ihr(e) Hörgerät(e). Wenn Ihr(e) Hörgerät(e) ein Batteriefach hat/haben, dann starten Sie Ihr(e) Hörgerät(e) neu, indem Sie das Batteriefach öffnen und schließen. Wenn Ihr(e) Hörgerät(e) kein Batteriefach hat/haben, dann schalten Sie zunächst jedes Hörgerät aus, indem Sie auf den unteren Teil des Knopfes drücken, bis die LED rot leuchtet (4 Sek.). Schalten Sie dann jedes Hörgerät ein, indem Sie denselben Knopf drücken, bis die LED grün leuchtet (2 Sek.). Wählen Sie „Demo Modus anzeigen“ aus, um die App zu testen, ohne Ihre Hörgeräte zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass in diesem Modus die Fernanpassungsfunktion nicht verfügbar ist.

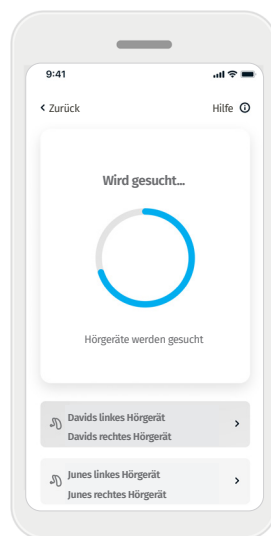


Ihr(e) Hörgerät(e) auswählen

Wenn die App mehr als ein Gerätepaar findet, drücken Sie auf den Knopf Ihres Hörgeräts. Das entsprechende Gerät wird dann in der App hervorgehoben.

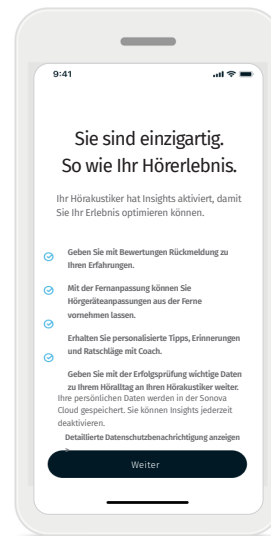


Aktivierung von Insights

Insights wird von Ihrem Hörakustiker aktiviert und ermöglicht die Nutzung von Insights Funktionen einschließlich Fernanpassung und Coach. Es wird empfohlen, Benachrichtigungen zu aktivieren und Zugriff auf Ihren Standort zu erlauben. Diese Funktionen können jederzeit unter den Insights Einstellungen auf dem Reiter **Mehr** aktiviert oder deaktiviert werden.

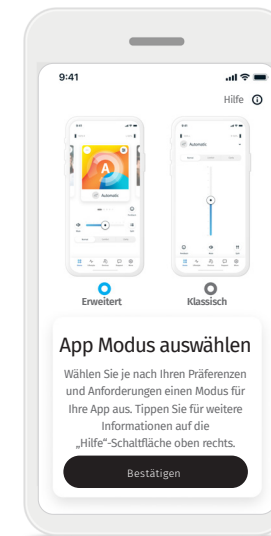

App Modus auswählen

Die App bietet auf dem Bildschirm Start zwei Modi: „Erweitert“ und „Klassisch“. Der Modus „Erweitert“ ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Funktionen und Optionen zur individuellen Anpassung. Der Modus „Klassisch“ ermöglicht den Zugriff auf grundlegende Funktionen und Optionen. Dieser Modus ist ideal für Personen geeignet, die ein einfacheres Erlebnis bevorzugen. Sie können diese Modi jederzeit innerhalb der App auf dem Reiter **Mehr** unter „App Modus“ ändern.

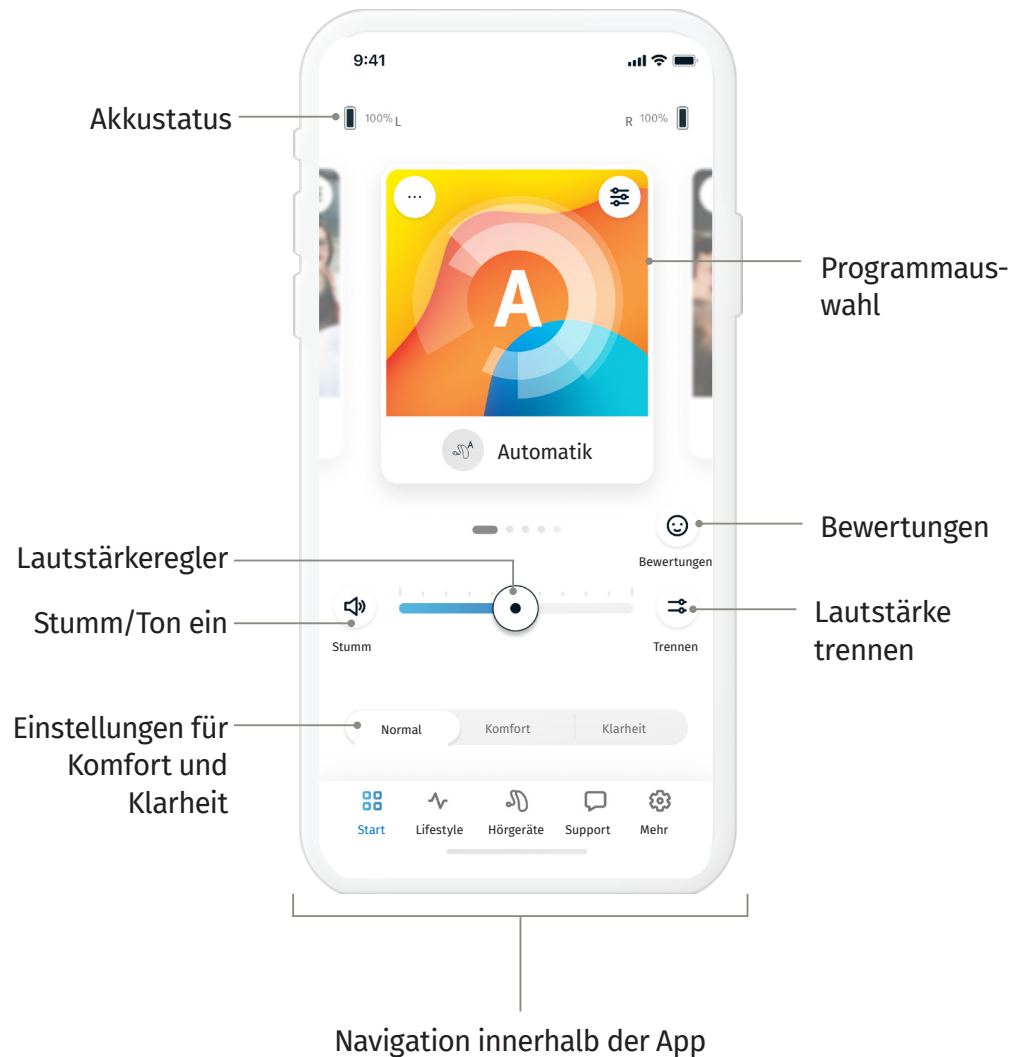

Hörgerätelautstärke einstellen

Bewegen Sie den Lautstärkeregler nach rechts oder links, um die Lautstärke der Hörgeräte auf beiden Seiten zu erhöhen oder zu reduzieren.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Stumm** (🔇) links vom Regler, um den Ton der Hörgeräte ein- oder auszuschalten.

Lautstärke trennen

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Lautstärke trennen** (🔊), um die Lautstärke auf jedem Hörgerät einzeln zu steuern.

Lautstärke zusammenführen

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Lautstärke zusammenführen** (🔊), um die Lautstärkeregler zusammenzuführen.

Einstellungen für Komfort und Klarheit*

Im Automatik-Programm können Sie zwischen **Normal**, **Komfort** oder **Klarheit** wählen. **Klarheit** verdeutlicht die Sprache; **Komfort** wird dagegen zur Reduzierung der Lautstärke verwendet, um den Hörkomfort zu verbessern. **Klarheit** und **Komfort** schließen sich gegenseitig aus und können nicht gleichzeitig aktiviert sein. **Normal** ist standardmäßig eingestellt.





Programmwechsel durchführen

Wischen Sie innerhalb der Programmauswahl nach links oder nach rechts, um alle verfügbaren Programme zu sehen. Hören Sie auf, nach links oder nach rechts zu wischen, damit das ausgewählte Programm (z. B. Restaurant) auf Ihr(e) Hörgerät(e) angewandt wird.

* Diese Funktion wird nicht von allen Hörgerätemodellen unterstützt.

Zusätzliche App Programme

Anhand einer Liste mit vordefinierten Programmen können Sie die Hörgeräte individuell an bestimmte Situationen anpassen. Die verfügbare Auswahl unter „Zusätzliche App Programme“ hängt von der Technologieebene Ihrer Hörgeräte ab.

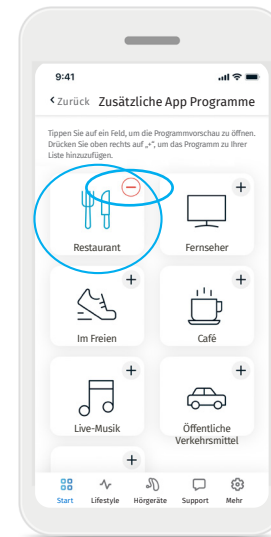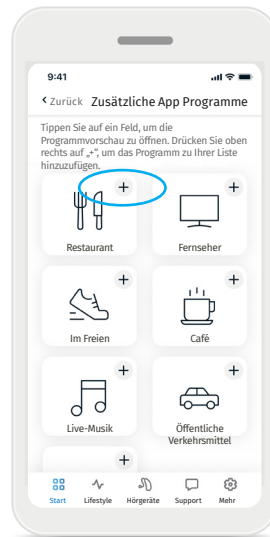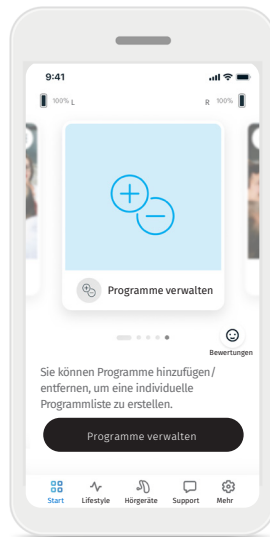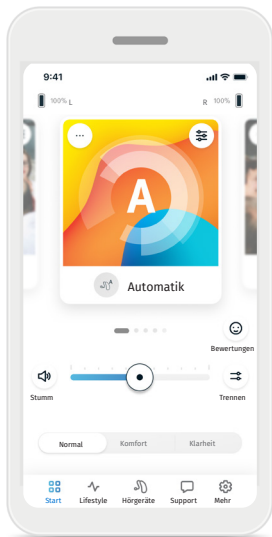

1. Öffnen Sie den Reiter **Start**.

2. Wischen Sie nach links oder rechts, bis die Abbildung bzw. das Symbol für „Programme verwalten“ zu sehen ist. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Programme verwalten**.

3. Um ein optionales Programm schnell hinzuzufügen, drücken Sie auf das (+) **Plus-Zeichen**.


4. Drücken Sie auf das (-) **Minus-Zeichen**, um das optionale Programm aus der Programmliste zu entfernen.

5. Drücken Sie auf das **Programmfeld**, um die Programmvorschau zu sehen.

6. Wenn Sie auf das **Programmfeld** drücken, gelangen Sie zum Programmvorschaubildschirm. Der Programmvorschaubildschirm wird angezeigt. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen und drücken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um das optionale Programm zur Programmliste hinzuzufügen.

Programmeinstellungen

Weitere Anpassungsmöglichkeiten stehen je nach derzeit ausgewähltem Programm, der Konfiguration Ihres Hörgeräts und den verbundenen Audioquellen zur Verfügung.

Sie können direkt auf Ihrem Startbildschirm auf zusätzliche Einstellungen zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche mit den [erweiterten Funktionen](#) () im Programmfeld oben rechts tippen. Anschließend werden die erweiterten Einstellungen geöffnet.

Tinnitus Masker

Wenn Ihr Hörakustiker den Tinnitus Masker aktiviert hat, können Sie die Lautstärke des Maskierungsgeräuschs anpassen.

Umgebungsbalance

Wenn Sie ein externes Streaminggerät (z. B. TV Connector, Musik) benutzen, können Sie den Fokus entsprechend anpassen, um das gestreamte Signal oder alternativ die Umgebung besser zu hören.

Klangeinstellungen

Sie können den Regler [Mikrofonausrichtung](#) steuern, um den Fokus nach vorne auszurichten oder auf die gesamte Umgebung zu erweitern.

Mit dem Regler [Sprache anheben](#) können Sie die Sprache auf die gewünschte Ebene erhöhen oder reduzieren.

Mit dem Regler [Störgeräusch reduzieren](#) können Sie den Rauschpegel auf die gewünschte Ebene erhöhen oder reduzieren.

Equalizer-Einstellungen

Hier können Sie die Einstellungen für den [Equalizer](#) anpassen.

Individuelle Programmanpassung

In der Remote Plus App können Sie die Programmnamen ändern, um so jedes Programm individuell zu personalisieren. Sie können den Programmnamen für jedes Programm ändern, auch für die zusätzlichen App Programme. Um den Programmnamen zu ändern:

1. Tippen Sie oben links innerhalb der Programmabbildung (oder des Symbols) auf [Programmeinstellungen](#) (...).
2. Der Bildschirm mit den Programmeinstellungen wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf [Programmnamen ändern](#).
4. Geben Sie den gewünschten Programmnamen in das Textfeld ein und drücken Sie auf [Bestätigen](#).




Hörgerätelautstärke einstellen

Bewegen Sie den Regler nach oben oder unten, um die Lautstärke der Hörgeräte auf beiden Seiten zu erhöhen oder zu reduzieren.

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Stumm** () unter dem Regler, um den Ton der Hörgeräte ein- oder auszuschalten.

Lautstärke trennen

Drücken Sie auf die Schaltfläche **Lautstärke trennen** (), um die Lautstärke auf jedem Hörgerät einzeln zu steuern.

Verwenden Sie die Lautstärkereglер, um die Lautstärke zu ändern. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Lautstärke zusammenführen** (), um die Lautstärkereglер zusammenzuführen.

Einstellungen für Komfort und Klarheit*

Im Automatik-Programm können Sie zwischen **Klarheit**, **Komfort** oder **Normal** wählen. **Klarheit** verdeutlicht die Sprache; **Komfort** wird dagegen zur Reduzierung der Lautstärke verwendet, um den Hörkomfort zu verbessern. **Klarheit** und **Komfort** schließen sich gegenseitig aus und können nicht gleichzeitig aktiviert sein. **Normal** ist standardmäßig eingestellt.

Programmwechsel durchführen

Drücken Sie auf den **Pfeil** neben dem aktuellen Programmnamen, um alle verfügbaren Programme anzuzeigen. Wählen Sie das gewünschte Programm aus (z. B. TV Connector).

* Diese Funktion wird nicht von allen Hörgerätemodellen unterstützt.

Bewertungen

Wenn Insights und Bewertungen aktiviert sind, können Sie Ihrem Hörakustiker Feedback zu Ihrem Hörerlebnis geben. Wenn aktiviert, wird ein Smiley im Modus [Erweitert](#) auf der rechten Seite des Bildschirms und im Modus [Klassik](#) am unteren Rand des Startbildschirms angezeigt.

1. Klicken Sie auf das Symbol für Bewertungen (😊).
2. Wählen Sie „Positiv“ aus, wenn Sie zufrieden sind, oder „Negativ“, wenn Sie unzufrieden sind.
3. Wählen Sie die Situation aus, die am ehesten der entspricht, in der Sie sich gerade befinden. Falls Sie eine negative Bewertung abgeben, wählen Sie eine Begründung aus der Liste aus.
4. Sehen Sie sich eine Zusammenfassung Ihrer Bewertung an und geben Sie weitere Kommentare ab (optional). Tippen Sie auf die Schaltfläche [Absenden](#), um Ihre Bewertung zu übermitteln.

Reiter „Lifestyle“

⚠ Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen dienen nur zu Bildungs- und Informationszwecken. Die Informationen im Abschnitt „Lifestyle“ dienen nicht als Ersatz für eine ärztliche Beratung und sind auch nicht als solche vorgesehen. Bei Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand und bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie stets Rücksprache mit einem Arzt oder einem anderen Gesundheitsdienstleister halten.

Durch den Reiter [Lifestyle](#) gelangen Sie zu einem Bildschirm mit Daten zu Ihrem Lifestyle, die von Ihren Hörgeräten erfasst wurden. Hier können Sie die Tragezeit Ihres Hörgeräts, Informationen zu Ihren Hörumgebungen sowie weitere Bewegungsdaten ansehen.

- [Hörumgebungen](#)
In diesem Abschnitt finden Sie eine Zusammenfassung Ihrer in den verschiedenen Umgebungen verbrachten Zeit, welche von Ihrem/Ihren Hörgerät(en) erfasst wurde.
- [Durchschnittliche Tragezeit](#)
Dieser Wert entspricht der Durchschnittszeit, für die Sie Ihr(e) Hörgerät(e) jeden Tag getragen haben (Tragezeit in Stunden).
- [Schrittzähler](#)
Der Schrittzähler* zeigt die Schrittzahl des Tages an, entsprechend des vom Beschleunigungsmesser Ihres Hörgeräts bzw. Ihrer Hörgeräte gemessenen Werts.
- [Aktivität in Minuten](#)
Die Aktivität in Minuten entspricht der an diesem Tag mit Aktivitäten verbrachten Anzahl an Minuten, z. B. die mit Laufen, Joggen oder ähnlichen Aktivitäten mittlerer bis hoher Intensität verbrachte Zeit während des Tragens Ihres Hörgeräts bzw. Ihrer Hörgeräte.

* Diese Funktion wird nicht von allen Hörgerätemodellen unterstützt.

Reiter „Hörgeräte“

Auf dem Reiter „Geräte“ können Sie die Einstellungen Ihres Hörgeräts bzw. Ihrer Hörgeräte anpassen.

Tap Control

Wenn Ihre Hörgeräte über Tap Control verfügen, können Sie das Ansprechverhalten der Geräte auf zweimaliges Antippen sowie die Antippempfindlichkeit wie folgt anpassen:

- **Streaming**
Annehmen/Beenden von Anrufen oder Streamingfunktionen – Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktion zum Annehmen/Beenden von Anrufen oder zum Verbinden mit einem Streaminggerät (z. B. TV Connector) durch zweimaliges Antippen der Ohrmuschel. Sie können die Tap Control nur dann für die Verbindung mit einem Streaming-fähigen Gerät verwenden, wenn Ihr Hörakustiker Ihre Hörgeräte für die manuelle Verbindung konfiguriert hat.
- **Kundenspezifische Funktionen**
(separat für das linke und rechte Hörgerät konfiguriert):
 - Streaming pausieren/fortsetzen – Durch doppeltes Antippen der Ohrmuschel pausieren Sie Ihr Medienstreaming oder setzen es wieder fort.
 - Sprachassistent
– Durch doppeltes Antippen der Ohrmuschel aktivieren Sie den Sprachassistenten auf Ihrem Smartphone.
 - Aus – Ein Doppeltippen führt keine Funktionen aus.
- **Empfindlichkeit der Tap Control**
(separat für das linke und rechte Hörgerät konfiguriert):
 - Sanft – am empfindlichsten.

Reiter „Hörgeräte“


- Normal – Standardempfindlichkeit.
- Fest – am wenigsten empfindlich.

Automatisches Einschalten

Sie können Ihre Hörgeräte so einstellen, dass sie sich automatisch einschalten, wenn sie aus der Ladestation genommen werden.

Adaptives Bluetooth®

Wenn Sie Probleme mit der Audioqualität bei Anrufen haben, kann die Deaktivierung dieser Funktion Ihr Hörerlebnis

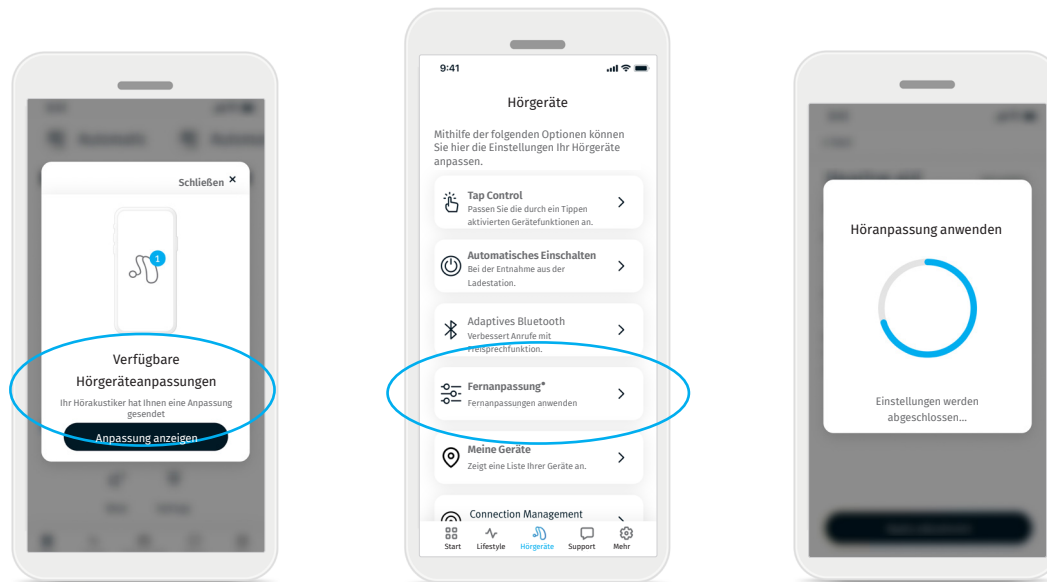

1. Sie erhalten eine individuell auf Sie zugeschnittene Nachricht von Ihrem Hörakustiker. Drücken Sie auf **Anpassung anzeigen**, um auf die Anpassung zuzugreifen.
2. Öffnen Sie alternativ die Remote Plus App und rufen Sie **Hörgeräte > Fernanpassung** auf.
3. Wählen Sie die Anpassung aus und drücken Sie auf **Anpassung anwenden**. Folgen Sie den Anweisungen, um die Änderungen anzuwenden.
4. Die Anpassung wird nun auf Ihre Hörgeräte angewendet. Wenn Sie eine andere Einstellung bevorzugen, können Sie eine verfügbare Anpassung auswählen und diese auf Ihre Hörgeräte anwenden.

Reiter „Hörgeräte“

möglicherweise verbessern.

Fernanpassung

Wenn Insights aktiviert ist, können Sie Push-Benachrichtigungen von Ihrem Hörakustiker erhalten, die Anpassungen an Ihren Hörgeräten beinhalten.

Geräteortung*

Die Funktion zur Geräteortung unterstützt Sie dabei, Ihre Hörgeräte aufzuspüren, indem sie den Ort anzeigt, an dem Ihre Hörgeräte bekanntermaßen zuletzt verbunden waren. Wenn Sie sich den Hörgeräten annähern, lotst Sie die App anhand der Signalstärke punktgenau zu ihrer Position.

Verbindungsmanagement*

Stay Connected hält die Verbindung zwischen der App und Ihren Hörgeräten dauerhaft aufrecht, damit Sie Ihre Hörgeräte nicht jedes Mal neu verbinden müssen, wenn Sie die App aufrufen. Stay Connected optimiert außerdem die Genauigkeit der Funktion zur Geräteortung. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann aber jederzeit deaktiviert werden. Stay Connected kann sich geringfügig auf die tägliche Akkulaufzeit der Hörgeräte auswirken.

Meine Geräte


Wählen Sie bei Verbindungsproblemen mit der App [Hörgeräte entfernen](#) aus und versuchen Sie erneut, Ihr Gerät zu koppeln. Wenn Sie ein anderes Hörgerätepaar mit der App verbinden möchten, müssen Sie zunächst das/die aktuell verbundene(n) Hörgerät(e) entfernen. Im Anschluss können Sie die neuen Geräte koppeln.

HINWEIS: Durch das Entfernen der Geräte wird auch die Verbindung zwischen Ihrem Hörgerät bzw. Ihren Hörgeräten und der App aufgehoben.

* Diese Funktion wird nicht von allen Hörgerätemodellen unterstützt.

Reiter „Support“

Auf dem Reiter **Support** finden Sie Informationen zu Ihren Hörgeräten.

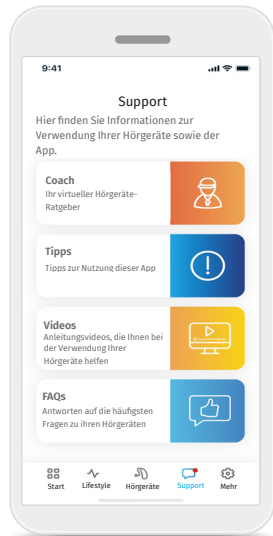

- Greifen Sie auf Ihre Coach Nachrichten zu.
- Erhalten Sie Tipps zur Verwendung der Remote Plus App.
- Sehen Sie sich Anleitungsvideos an, um Unterstützung bei der Verwendung Ihrer Geräte zu erhalten.
- Durchsuchen Sie die FAQs, um Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Ihren Hörgeräten zu erhalten.

Reiter „Mehr“

Auf dem Reiter [Mehr](#) finden Sie zusätzliche App-Einstellungen und rechtliche Informationen in Bezug auf die App.

App Modus

Der [Startbildschirm](#) bietet zwei Modi: „Erweitert“ und „Klassisch“. Der Modus [Erweitert](#) ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Funktionen und Optionen zur individuellen Anpassung. Der Modus [Klassisch](#) ermöglicht den Zugriff auf grundlegende Funktionen und Optionen. Dieser Modus ist ideal für Personen geeignet, die ein einfacheres Erlebnis bevorzugen.

Insights Einstellungen

Alle Insights Funktionen sind standardmäßig aktiviert. Bei Bedarf können Sie einzelne Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder aber Insights gänzlich deaktivieren. Durch die Deaktivierung werden alle Insights Daten gelöscht, die zuvor in die Sonova Cloud hochgeladen wurden, und alle Insights Funktionen einschließlich Coach Nachrichten und Fernanpassungen werden deaktiviert.

Benachrichtigungscenter

Coach Benachrichtigungen können aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn Coach Benachrichtigungen deaktiviert sind, können Coach Nachrichten weiterhin über den Reiter Support abgerufen werden.

Design

- [Programmbilder](#)
Drücken Sie auf die Umschalttaste, um in der App Abbildungen oder Symbole für Programme auszuwählen. Wählen Sie Abbildungen, wenn Sie lebhaftere und farbenfrohe Bilder für die Programme bevorzugen. Wählen Sie Symbole, wenn Sie ein weniger farbenfrohes Design für die Programme bevorzugen.
- [Auf Mobiltelefon abstimmen](#)
Passen Sie das Design automatisch an die Einstellung für den hellen oder dunklen Modus Ihres Mobiltelefons an. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Modus manuell auswählen.

Analytics

Hier können Sie die Weitergabe Ihrer Nutzungsdaten aktivieren oder deaktivieren. Durch die Bereitstellung Ihrer Nutzungsdaten können wir neue Erkenntnisse gewinnen und so unsere Produkte und Dienstleistungen verbessern. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals an andere Parteien verkaufen. Dies haben wir auch in unserer Datenschutzbenachrichtigung festgehalten.

Demo Modus

Hier können Sie den Demo Modus aktivieren oder deaktivieren. Mit dem Demo Modus können Sie die App testen, ohne Ihre Hörgeräte zu verbinden.

Rechtliche Informationen/Legal

Hier finden Sie rechtliche und behördliche Informationen in Bezug auf die App.

Konformitätsinformationen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Sonova AG, dass dieses Produkt die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

Das Benutzerhandbuch kann in allen verfügbaren Sprachen in elektronischer Form über www.unitron.com/appguide abgerufen werden.

Alternativ können Sie direkt über die App auf das Benutzerhandbuch zugreifen. Rufen Sie hierzu den Bereich „Mehr“ auf und wählen Sie „Über diese App“ aus. Tippen Sie dann den Link am unteren Bildschirmrand an, um die Seite „Hilfe & Unterstützung“ in einem externen Browserfenster zu öffnen. Hier können Sie dann zum Reiter „Bedienungsanleitungen“ wechseln und zum Bereich „Apps“ blättern.

Beschreibung der Symbole




Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt die Sonova AG, dass dieses Produkt die Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 erfüllt. Die nach der CE-Kennzeichnung angegebenen Nummern beziehen sich auf die zertifizierten Einrichtungen, die entsprechend der oben aufgeführten Verordnung herangezogen wurden.



Zeigt den Hersteller des Medizinprodukts an, wie in der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte definiert.



Zeigt an, dass es sich bei dem Gerät um ein Medizinprodukt handelt.

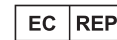

Gibt den autorisierten Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft an. Der EG REP ist auch der Importeur in die Europäische Union.



Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.



Dieses Symbol zeigt an, dass es für den Benutzer wichtig ist, die zugehörigen Informationen dieses Benutzerhandbuchs zu berücksichtigen.



Ein Hinweis darauf, dass eine elektronische Bedienungsanleitung verfügbar ist.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer die entsprechenden Warnhinweise in dieser Benutzeranleitung beachten muss.



Wichtige Information zur Handhabung und Produktsicherheit.



Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth® SIG, Inc. und werden von Marken wie die Sonova AG unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.



Copyright-Symbol.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie die App verwenden, lesen Sie sich bitte die relevanten Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten durch.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sinn und Zweck der App sind die Auswahl, Anpassung und Speicherung bestehender Hörerätefunktionen sowie die Gewährleistung des Zugriffs auf Statusinformationen sowie die Kommunikation zwischen Endbenutzer und Hörakustiker. Dies erfolgt kabellos und mithilfe von bildlichen Darstellungen.

Vorgesehene Patientenpopulation

Die vorgesehene Kundengruppe für diese Lösung sind Endbenutzer (Laien) mit unilateralem und bilateralem, leicht- bis hochgradigem Hörverlust, die ein kompatibles Hörgerät tragen und den Komfort bei der Steuerung ihrer Hörgeräte über das Smartphone zu schätzen wissen. Die App ist für Benutzer ab 17 Jahren bestimmt. Die Tinnitus-Funktion ist für Kunden ab 18 Jahren bestimmt.

Vorgesehener Anwender

Die vorgesehene Benutzergruppe umfasst Personen mit Hörverlust, die ein kompatibles Gerät nutzen.

Indikationen

Bitte beachten Sie, dass die Indikationen nicht aus der App stammen, sondern von den kompatiblen Hörgeräten abhängen. Allgemeine klinische Indikationen für die Verwendung von Hörgeräten und der Tinnitus-Funktion sind:

- Vorliegen eines Hörverlusts;
 - Einseitig oder bilateral;
 - Schalleitungs- oder Schallempfindungsschwerhörigkeit oder beides;
 - Leicht- bis hochgradig;
- Vorhandensein von chronischem Tinnitus (nur für Hörgeräte mit Tinnitus-Funktion)

Kontraindikationen

Bitte beachten Sie, dass die Kontraindikationen nicht aus der App stammen, sondern von den kompatiblen Hörgeräten abhängen. Allgemeine medizinische Ausschlusskriterien für die Verwendung von Hörgeräten und der Tinnitus-Funktion sind:

- Hörverlust liegt nicht im Anpassungsbereich des Hörgeräts (d. h. Verstärkung, Frequenzgang);
- Akuter Tinnitus
- Deformität des Ohres (d. h. verschlossener Gehörgang, fehlende Ohrmuschel)
- Neuraler Hörverlust (retrocochleäre Pathologien wie fehlender/nicht funktionsfähiger Hörnerv).

Die Hauptkriterien für die Überweisung eines Kunden an einen Arzt oder anderen Spezialisten zur medizinischen Einschätzung und/oder Behandlung lauten wie folgt:

- Sichtbare kongenitale oder traumatische Deformation des Ohrs;
- Akuter Ausfluss aus dem Ohr in den vorangegangenen 90 Tagen;
- Plötzlicher oder schnell voranschreitender Hörverlust auf einem oder beiden Ohren innerhalb der vorangegangenen 90 Tage;
- Akuter oder chronischer Schwindel;
- Audiometrische Differenz zwischen Luft- und Knochenleitung von mindestens 15 dB bei 500 Hz, 1000 Hz und 2000 Hz;
- Sichtbarer Nachweis einer signifikanten Cerumenansammlung oder eines Fremdkörpers im Gehörgang;
- Schmerzen oder Beschwerden im Ohr;
- Abnormes Erscheinungsbild des Trommelfells und des Gehörgangs wie z. B.:
 - Entzündung des äußeren Gehörgangs;

- Perforiertes Trommelfell;
- Andere Auffälligkeiten, welche der Hörakustiker für ein medizinisches Anliegen hält.

Der Hörakustiker kann entscheiden, dass eine Überweisung nicht angemessen oder im besten Interesse des Kunden ist, wenn folgende Punkte zutreffen:

- Wenn es ausreichend Belege dafür gibt, dass die Erkrankung vollständig von einem medizinischen Spezialisten untersucht wurde und jede mögliche Behandlung erfolgt ist.
- Die Erkrankung hat sich seit der vorherigen Untersuchung und/oder Behandlung weder verschlechtert noch signifikant verändert.
- Hat sich der Kunde auf der Grundlage einer informierten und fachkundigen Entscheidung dazu entschieden, den Ratschlag, ein ärztliches Gutachten einzuholen, nicht anzunehmen, ist es zulässig, mit der Empfehlung passender Hörgeräte fortzufahren, sofern folgende Aspekte beachtet werden:
 - Die Empfehlung wird sich nicht nachteilig auf die Gesundheit oder das allgemeine Wohlbefinden des Kunden auswirken.
 - Die Unterlagen belegen, dass alle notwendigen Überlegungen zum Wohl des Kunden angestellt wurden.

Falls gesetzlich vorgeschrieben, hat der Kunde eine Verzichtserklärung unterschrieben, um zu bestätigen, dass die Überweisungsempfehlung nicht angenommen wurde und dass es sich um eine bewusste Entscheidung handelt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie die App verwenden, lesen Sie sich bitte die relevanten Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten durch.

Klinischer Nutzen

Die App an sich bietet keinen direkten klinischen Nutzen für den Endbenutzer, dafür aber sonstigen Nutzen, der zum größten Teil in Zusammenhang mit der Benutzerfreundlichkeit steht. Der klinische Nutzen ergibt sich ausschließlich durch die Verwendung der Hörgeräte. Die App bietet den vorgesehenen Anwendern folgende Vorteile:

- Die Möglichkeit zur Anpassung und Speicherung von individuellen Hörgeräteeinstellungen, jedoch in einem begrenzten Rahmen wie bei der Erstanpassung vorgegeben, z. B. zur Erfüllung individueller Anforderungen. Dies kann zu einer Verbesserung des Hörkomforts sowie der Zufriedenheit mit den Hörgeräten in bestimmten Hörumgebungen beitragen (z. B. durch die Reduzierung unangenehmer Lautstärken in geräuschvollen Hörumgebungen).

Nebenwirkungen

Bitte beachten Sie, dass die Nebenwirkungen nicht aus der App stammen, sondern von den kompatiblen Hörgeräten abhängen. Physiologische Nebenwirkungen von Hörgeräten wie Tinnitus, Schwindel, Cerumenbildung, zu viel Druck, Schwitzen oder Feuchtigkeit, Blasen, Juckreiz und/oder Ausschlag, Gefühl von verstopften Ohren oder Völlegefühl und deren Folgen wie Kopf- und/oder Ohrenschmerzen können von Ihrem

Hörakustiker behoben oder reduziert werden.

Herkömmliche Hörgeräte können Patienten höheren Geräuschpegeln aussetzen, was zu einer Verschiebung der Schwellenwerte im durch Gehörtrauma betroffenen Frequenzbereich führen kann.

Nutzungsbeschränkungen

Die Nutzung der App ist auf die Fähigkeiten des kompatiblen Geräts bzw. der kompatiblen Geräte beschränkt.

Jegliche schwerwiegenden Vorkommnisse in Zusammenhang mit dieser App müssen dem Herstellervertreter und der zuständigen Behörde am Aufenthaltsort gemeldet werden. Ein schwerwiegendes Vorkommnis ist ein Vorkommnis, das direkt oder indirekt eine der nachstehenden Folgen hatte oder haben könnte:

- a. den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person;
- b. die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person
- c. eine ernsthafte Gefahr für öffentliche Gesundheit;

Bitte kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Vertreter, um einen unerwarteten Vorgang oder Ereignis zu melden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie die App verwenden, lesen Sie sich bitte die relevanten Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten durch.

Sicherheitshinweis

Patienteninformationen sind private Informationen und ihr Schutz ist wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass die Smartphones auf dem aktuellen Stand und die neuesten Sicherheitsaktualisierungen des Betriebssystems installiert sind. Aktivieren Sie automatische Aktualisierungen.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der App installiert ist.
- Verwenden Sie nur originale Sonova Apps aus den offiziellen App-Stores für Ihre Hörgeräte.
- Verwenden Sie starke Passwörter und bewahren Sie Ihre Anmeldedaten sicher auf.
- Nutzen Sie zur Entsperrung Ihres Telefons eine PIN und/oder biometrische Daten (z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung). Stellen Sie außerdem ein, dass Ihr Telefon automatisch nach mehreren Minuten der Inaktivität gesperrt wird.
- Achten Sie darauf, dass die installierten Apps nur über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.
- Starten Sie nach Möglichkeit keine Bluetooth®-Kopplung Ihrer Hörgeräte im öffentlichen Raum. Dadurch besteht das Risiko eines unerwünschten Eingriffs durch Dritte. Wir empfehlen Ihnen, die Bluetooth®-Kopplung zu Hause durchzuführen.
- Verwenden Sie KEIN Mobiltelefon, dessen Sicherheitsfunktionen mittels Jailbreaking oder Rooting umgangen wurden.

- Gewährleisten Sie jederzeit den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung nicht erschöpfend ist.
- Bei der Übertragung von Daten über unsichere Kanäle senden Sie entweder anonymisierte Daten oder verschlüsseln Sie diese.
- Schützen Sie die Datensicherungen Ihres Smartphones nicht nur vor Datenverlust, sondern auch vor Diebstahl.
- Entfernen Sie alle Daten von Smartphones, die Sie nicht länger nutzen oder entsorgen möchten.

Softwarepflege

Wir beobachten ständig das Feedback des Marktes. Falls Sie Probleme mit der neuesten Version der App haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter und/oder hinterlassen Sie Ihr Feedback im App Store oder Google Play Store.

- ⚠ Eine Änderung der Einstellung, z. B. das Reduzieren der Lautstärke, das Stummschalten Ihrer Hörgeräte oder das Verstärken von „Störgeräuschunterdrückung“, kann dazu führen, dass Sie z. B. ankommenden Verkehr nicht mehr hören.

- ① Sollten die Hörgeräte aufgrund eines ungewöhnlichen Störungsfeldes nicht reagieren, entfernen Sie sich von dem Störungsfeld. Aktivieren Sie Ihre Bluetooth-Funktion. Bluetooth muss für die Verbindung Ihrer Hörgeräte aktiviert sein. Sollten Ihre Hörgeräte nicht reagieren, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Hörgeräte eingeschaltet sind und der Akku nicht leer ist.
- ① Anleitungen sind verfügbar unter: [unitron.com/appguide](https://www.unitron.com/appguide) im Adobe® Acrobat® PDF-Format. Um diese anzeigen zu können, muss der Adobe Acrobat Reader installiert sein. Sie können ihn auf [Adobe.com](https://www.adobe.com) herunterladen.
- ① Um eine kostenlose Printversion der Anleitung zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Unitron Vertreter. Die Kopie wird Ihnen innerhalb von 7 Tagen zugesandt.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



Importeur in der Europäischen Union:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Deutschland

Australischer Sponsor:
Sonova Australia Pty Ltd.
12 Inglewood Place,
Norwest NSW 2153
Australia