

Application Remote Plus d'Unitron

Mode d'emploi




Démarrage

Utilisation prévue

L'application Remote Plus d'Unitron est conçue pour permettre aux utilisateurs d'instruments auditifs d'ajuster certains paramètres des instruments auditifs d'Unitron depuis leur appareil Android ou Apple iOS¹.


Si l'audioprothésiste propose les fonctions [Rétroactions](#) à l'utilisateur d'instruments auditifs et que celui-ci les active, l'utilisateur d'instruments auditifs peut envoyer les données de ceux-ci ainsi que les commentaires à propos de leur expérience auditive à son audioprothésiste.

Renseignements relatifs à la compatibilité :

 Les instruments auditifs sans fil Bluetooth d'Unitron sont nécessaires pour utiliser l'application Remote Plus d'Unitron.

L'application Remote Plus d'Unitron peut être utilisée sur des appareils compatibles Bluetooth^{MD} Low-Energy (BT-LE) et est compatible avec les iPhone 5s ou ultérieurs, fonctions sous iOS version 10.2 ou ultérieure.

L'application Remote Plus d'Unitron peut être utilisée sur les appareils Android disposant des services Google Mobile (GMS), prenant en charge Bluetooth 4.2 et Android OS 6.0 ou ultérieurs.

-  Certains téléphones ont des sons de touche ou des tonalités de clavier qui peuvent être diffusés aux instruments auditifs.
Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre téléphone, sélectionnez les sons et assurez-vous que tous les sons de touche et tonalités de clavier sont désactivés.

¹ Téléphones compatibles : l'application Remote Plus d'Unitron peut être utilisée uniquement sur les téléphones compatibles avec la technologie Bluetooth^{MD} basse énergie.

Le nom et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.


Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Sommaire

- Présentation de l'application 4
- Politique de confidentialité 5
- Appariement avec les instruments auditifs 6
- Écran principal 7
- Changer de programme sur les instruments auditifs 8
- Évaluations 9
- Menu Réglages10
- Renseignements relatifs à la conformité 11
- Renseignements et explication des symboles12

Présentation de l'application

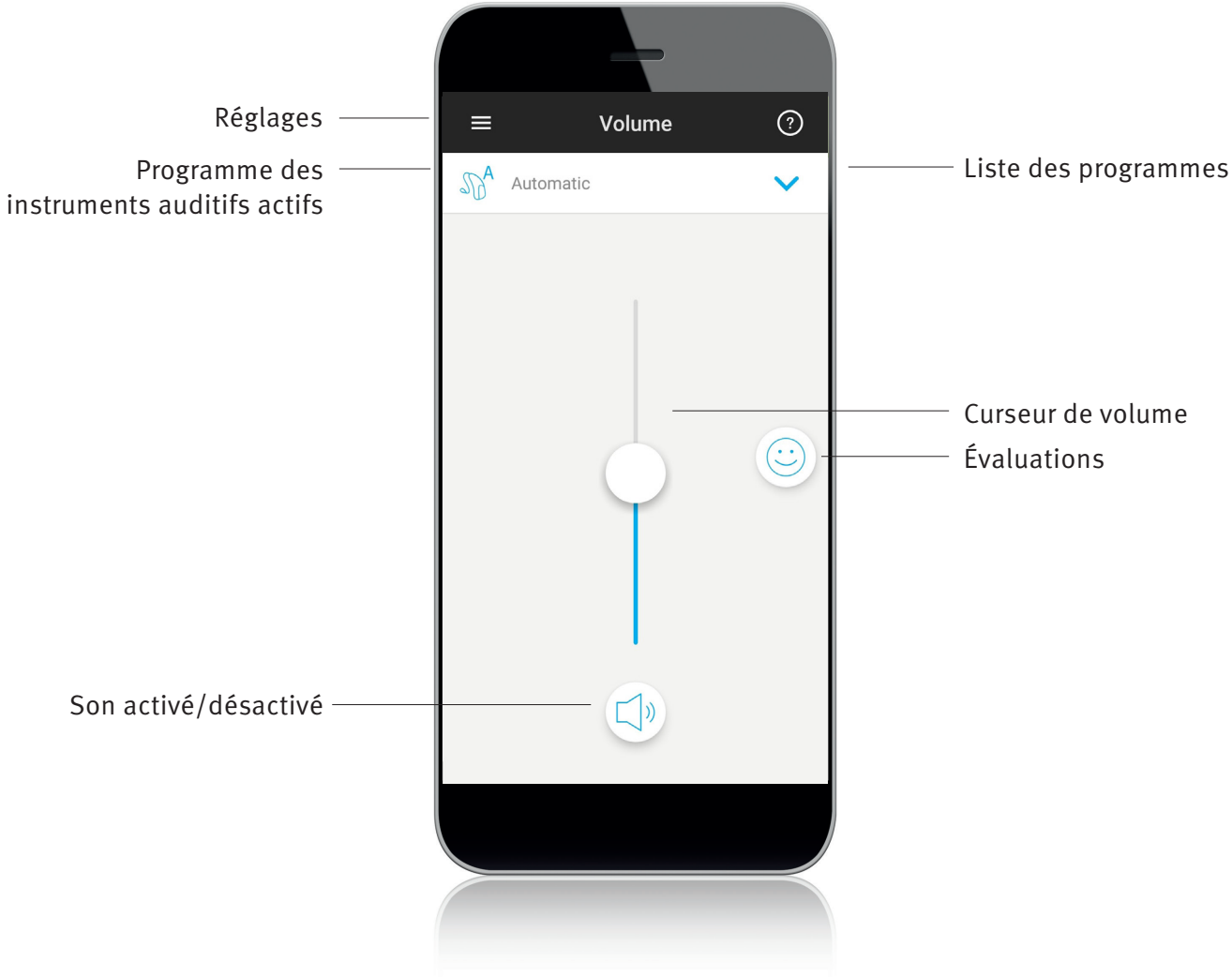

Politique de confidentialité

Accepter l'avis de confidentialité de l'application

Pour utiliser l'application Remote Plus d'Unitron, vous devez accepter l'avis de confidentialité et l'analyse des données anonymes tirées de l'utilisation de l'application.

Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Unitron Remote Plus and to improve our service, we will collect some information about you such as your first name, last name, email address, hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Unitron Remote Plus is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any personal data that we collect when you will use Unitron Remote Plus and/or that we collected through your use of previous version of Unitron Remote Plus.

Show detailed Privacy Notice

Accept

Activer la fonction Rétroactions

Pour activer la fonction **Rétroactions**, touchez le bouton d'activation. Pour sauter cette étape, touchez le bouton « Peut-être plus tard ».

Activate Insights

The Remote Plus add can allow you to send feedback and hearing aid data to your hearing care professional to help personalize your experience. We will never sell your personal information to others. It's part of our Privacy Notice


Show detailed Privacy Notice

Activate

Maybe Later


Appariement avec les instruments auditifs

Détecter votre ou vos instruments auditifs

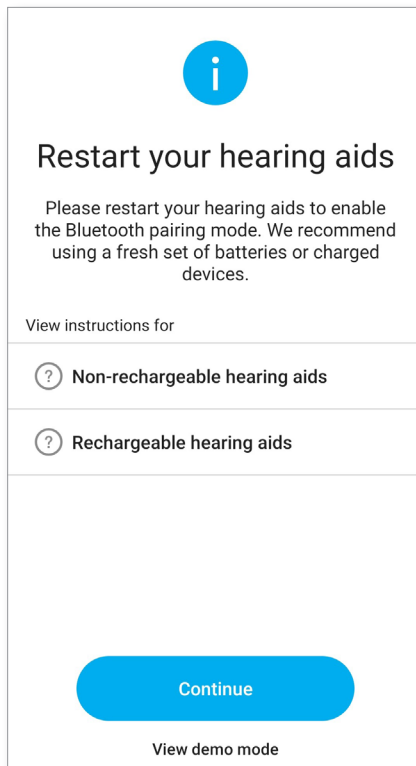

- ① Si vos instruments auditifs sont équipés d'un couvercle de compartiment à pile, redémarrez-les en ouvrant et en fermant ce couvercle. Si vos instruments auditifs n'ont pas de couvercle de compartiment à pile, éteignez d'abord chaque instrument auditif en appuyant sur la partie inférieure du bouton jusqu'à ce que la DEL devienne rouge (4 s). Allumez ensuite chaque instrument auditif en appuyant sur le même bouton jusqu'à ce que la DEL devienne verte (2 s).
- ① Vous avez la possibilité de sélectionner le mode de démonstration pour essayer l'application sans connecter d'instrument auditif Unitron et vous faire ainsi une idée des fonctions. Dans ce mode, la fonction télécommande n'est pas disponible pour votre instrument auditif.

Sélectionner votre instrument auditif

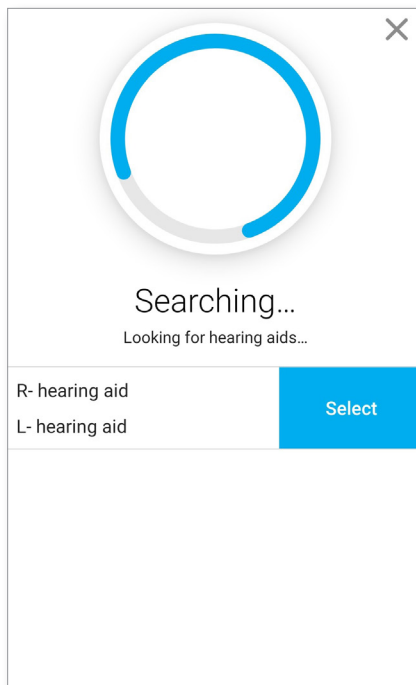


- ① Si l'application a détecté plusieurs ensembles d'appareils, appuyez sur le bouton de votre instrument auditif et l'appareil correspondant sera en surbrillance dans l'application.

Écran principal

Ajuster le volume de vos instruments auditifs


Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou baisser le volume des deux côtés.

Appuyez sur la touche de sourdine sous le curseur pour désactiver ou activer le son des instruments auditifs.

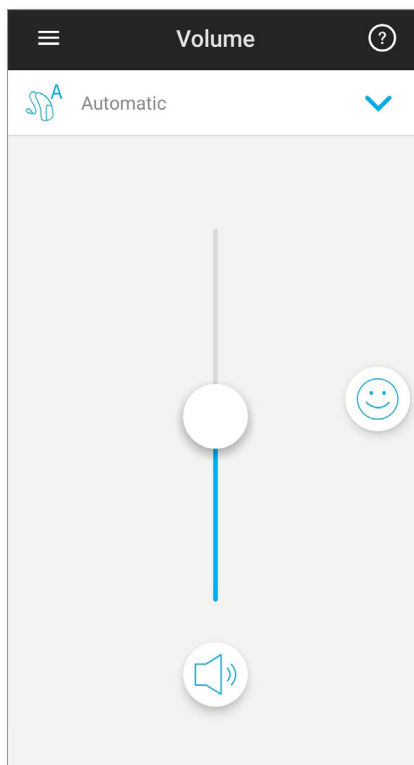

Répartir le volume


Si l'option « Sélection latérale » est activée dans les paramètres de l'application, une touche s'affiche en haut du curseur. Appuyez sur la touche « Dissocier » pour contrôler le volume de chaque instrument auditif séparément.

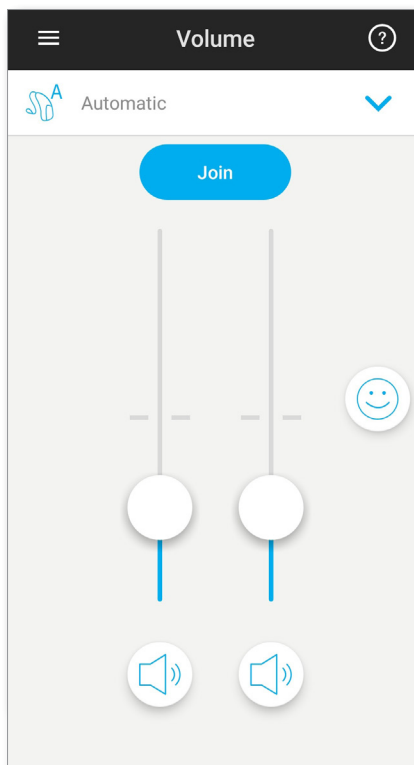


Changement de programme sur l'instrument auditif



Sélectionner un autre programme

Appuyez sur la flèche à côté du programme actuel pour voir tous les programmes disponibles. Appuyez sur le programme souhaité.

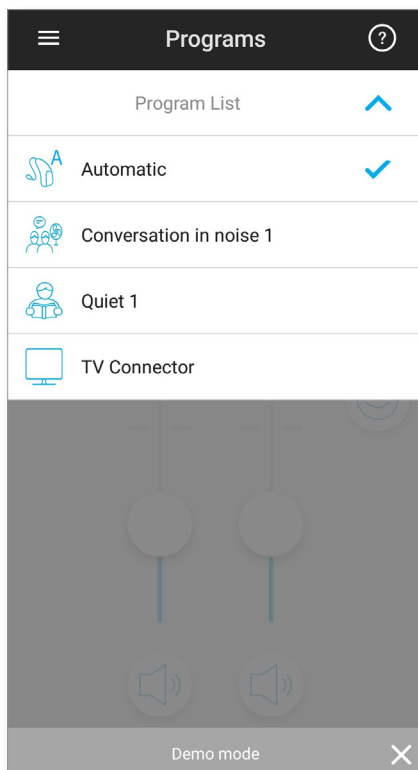

Réglages de programme avancés

D'autres réglages sont disponibles selon la configuration de votre instrument auditif ou des sources audio connectées (TV Connector). Appuyez sur la touche  en bas à droite de l'écran pour accéder aux options suivantes :

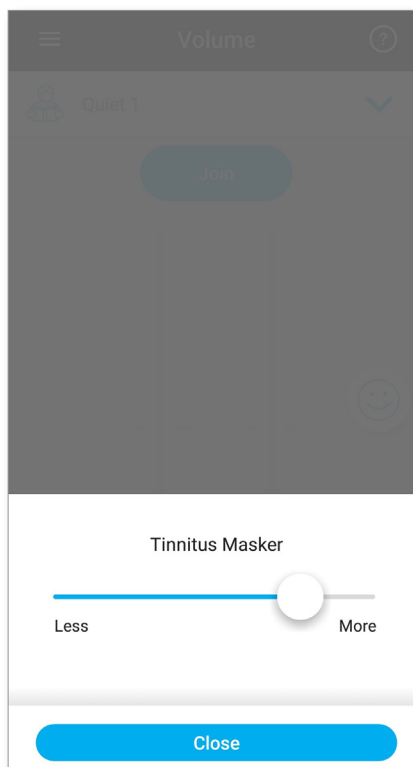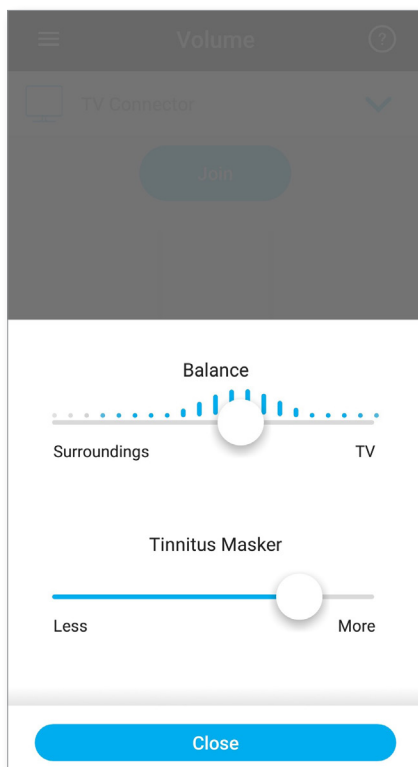


Évaluations

Si vous avez activé la fonctionnalité [Évaluations](#), une émoticône souriante (😊) s'affiche sur la droite de l'écran principal. Appuyez dessus pour envoyer un avis à votre audioprothésiste.

Noter votre expérience

A. Choisissez l'émoticône souriante ou mécontente.

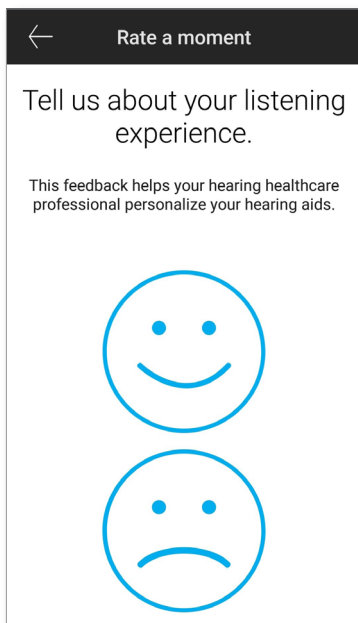

← Rate a moment


Tell us about your listening experience.

This feedback helps your hearing healthcare professional personalize your hearing aids.

😊

☹️

B. Sélectionnez l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

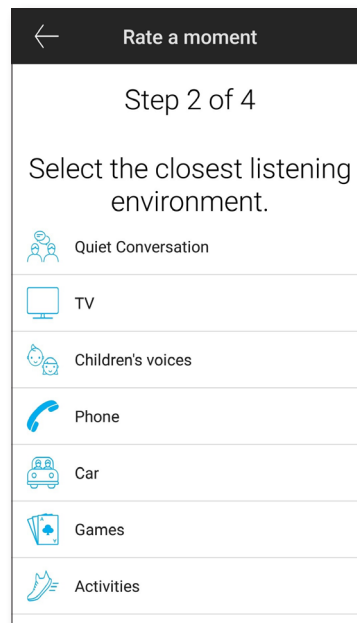


← Rate a moment

Step 2 of 4

Select the closest listening environment.

- Quiet Conversation
- TV
- Children's voices
- Phone
- Car
- Games
- Activities

C. Si vous avez choisi l'émoticône mécontente, vous pouvez choisir dans une liste prédéfinie l'option qui décrit le mieux le problème.

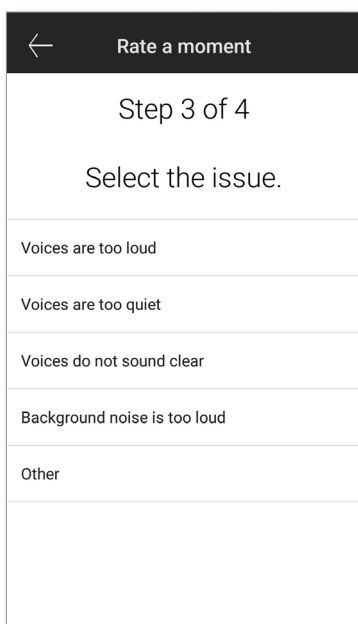


← Rate a moment

Step 3 of 4

Select the issue.

- Voices are too loud
- Voices are too quiet
- Voices do not sound clear
- Background noise is too loud
- Other

D. Vous pouvez voir un résumé de votre avis, auquel vous pouvez ajouter des commentaires (facultatif). Touchez le bouton « [Envoyer](#) » pour envoyer vos commentaires à votre audioprothésiste.

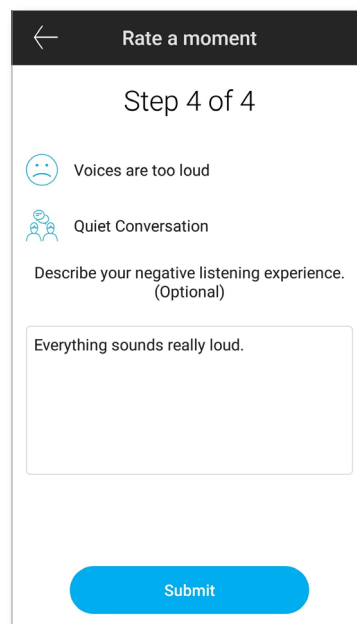

← Rate a moment

Step 4 of 4

- ☹️ Voices are too loud
- Quiet Conversation

Describe your negative listening experience. (Optional)


Everything sounds really loud.

Submit


Menu des réglages

L'application est disponible dans plusieurs langues. Elle s'adapte automatiquement à la langue du système d'exploitation de votre téléphone. Si la langue du téléphone n'est pas prise en charge, l'anglais sera sélectionné par défaut.

1) Sur l'écran principal, appuyez sur l'icône  pour accéder au menu des réglages.

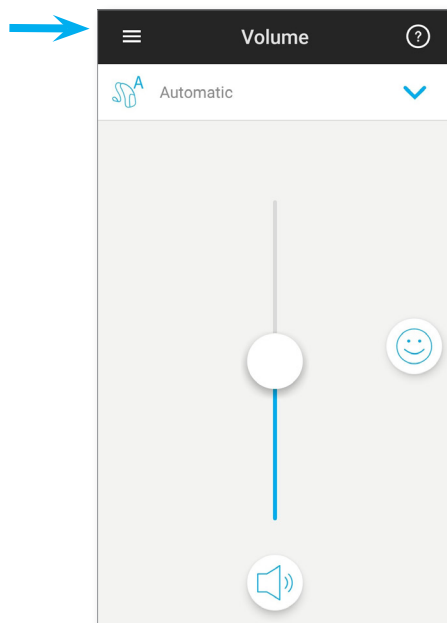

- 2) Sélectionnez « [Paramètres de l'application](#) » pour accéder aux paramètres de l'application.
- 3) Sélectionnez « [Mes instruments auditifs](#) » pour accéder aux paramètres spécifiques des instruments auditifs.
- 4) Sélectionnez « [Rétroactions](#) » pour consulter la politique de confidentialité de la fonction Rétroactions, les renseignements relatifs à cette fonction ou pour désactiver cette fonction.
- 5) Sélectionnez « [Vidéos](#) » pour regarder des tutoriels.
- 6) Sélectionnez « [FAQ](#) » pour consulter la foire aux questions concernant l'application et les instruments auditifs dans le navigateur de votre téléphone.

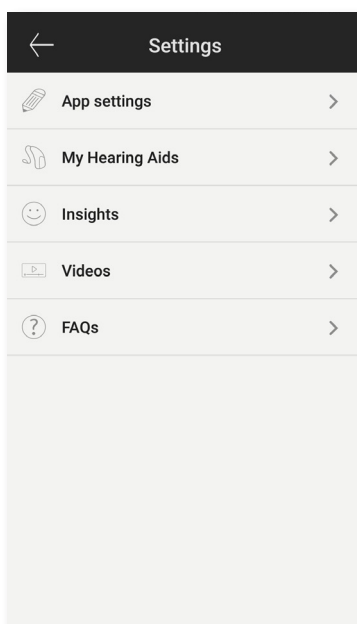

Informations sur la conformité

Déclaration de conformité

Sonova AG déclare par la présente que ce produit Unitron est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux appareils médicaux. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible chez le fabricant ou chez le représentant local Unitron dont l'adresse figure au <http://www.unitron.com> (agences internationales).

- ① Si vos instruments auditifs ne répondent pas à l'appareil à cause d'une perturbation inhabituelle due à un champ magnétique, éloignez-vous de celui-ci.
- ① Les directives sont disponibles à l'adresse : unitron.com/appguide dans le format PDF Adobe^{MD} Acrobat^{MD}. Pour pouvoir les ouvrir, vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader. Rendez-vous sur Adobe.com pour télécharger ce logiciel.
- ① Pour obtenir un exemplaire papier gratuit des directives, contactez votre représentant local Unitron. Le document vous sera envoyé dans les 7 jours.

Renseignements et explication des symboles



Le symbole CE est une confirmation par Sonova AG que ce produit Unitron — ainsi que les accessoires — satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les appareils médicaux. Les numéros après le symbole CE correspondent au code des institutions homologuées consultées, conformément aux directives susmentionnées.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur lise et prenne en compte les renseignements appropriés dans ce manuel.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur prenne connaissance des avertissements appropriés dans ce manuel d'utilisation.



Renseignements importants sur la manipulation et l'utilisation efficace de ce produit.



Symbole du droit d'auteur



Ce symbole doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant (qui met cet appareil sur le marché).



L'appellation commerciale et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées propriétés de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Unitron est faite sous licence. Toutes les autres marques déposées ou appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Suisse

unitron.com



© 2018-2019 Sonova AG. All rights reserved.
A/2019-04 029-6231-36