

Aplikácia Remote Plus Unitron

Používateľská príručka



Začíname

Určené použitie

Aplikácia Unitron Remote Plus je určená pre používateľov načúvacích prístrojov, aby mohli upraviť niektoré aspekty načúvacích prístrojov Unitron pomocou zariadení Android a Apple iOS¹.

Ak odborní zástupcovia pre načúvacie prístroje ponúknu používateľom načúvacieho prístroja funkcie **Insights**, používatelia môžu poslať údaje z načúvacieho prístroja a spätnú väzbu svojmu odbornému zástupcovi pre načúvacie prístroje.

Informácie o kompatibilite:

-  Bezdrôtové načúvacie prístroje Unitron Bluetooth musia používať aplikáciu Unitron Remote Plus. Aplikácia Unitron Remote Plus sa môže používať na zariadeniach s možnosťami Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) a je kompatibilná so zariadením iPhone 5s alebo novším, ktorý má verziu iOS 10.2 alebo novšiu. Aplikácia Unitron Remote Plus sa môže používať v Google Mobile Services (GMS) na certifikovaných zariadeniach Android, ktoré podporujú Bluetooth 4.2 a Android OS 6.0 alebo novší.

-  Niektoré telefóny vydávajú zvuky pri dotyku alebo tóny klávesnice, ktoré sa môžu preniesť do načúvacieho prístroja. Ak tomu chcete zabrániť, prejdite do nastavení svojho telefónu, vyberte zvuky a uistite sa, že sú všetky zvuky pri dotyku a tóny klávesnice deaktivované.

¹ Kompatibilné telefóny: Aplikácia Unitron Remote Plus sa môže používať iba na telefónoch s nízkoenergetickou technológiou Bluetooth®.

Značka slova a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.

Apple, logo Apple, iPhone a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.

Android, Google Play a logo Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.




0459

Značka CE použitá v roku 2018

Obsah

Prehľad aplikácie	4
Zásady ochrany osobných údajov.....	5
Párovanie s načúvacími prístrojmi	6
Hlavná obrazovka	7
Zmena programov na načúvacích prístrojoch	8
Hodnotenia	9
Menu nastavení	10
Informácie o dodržiavaní nariadení	11
Informácie a vysvetlivky symbolov	12


Prehľad aplikácie

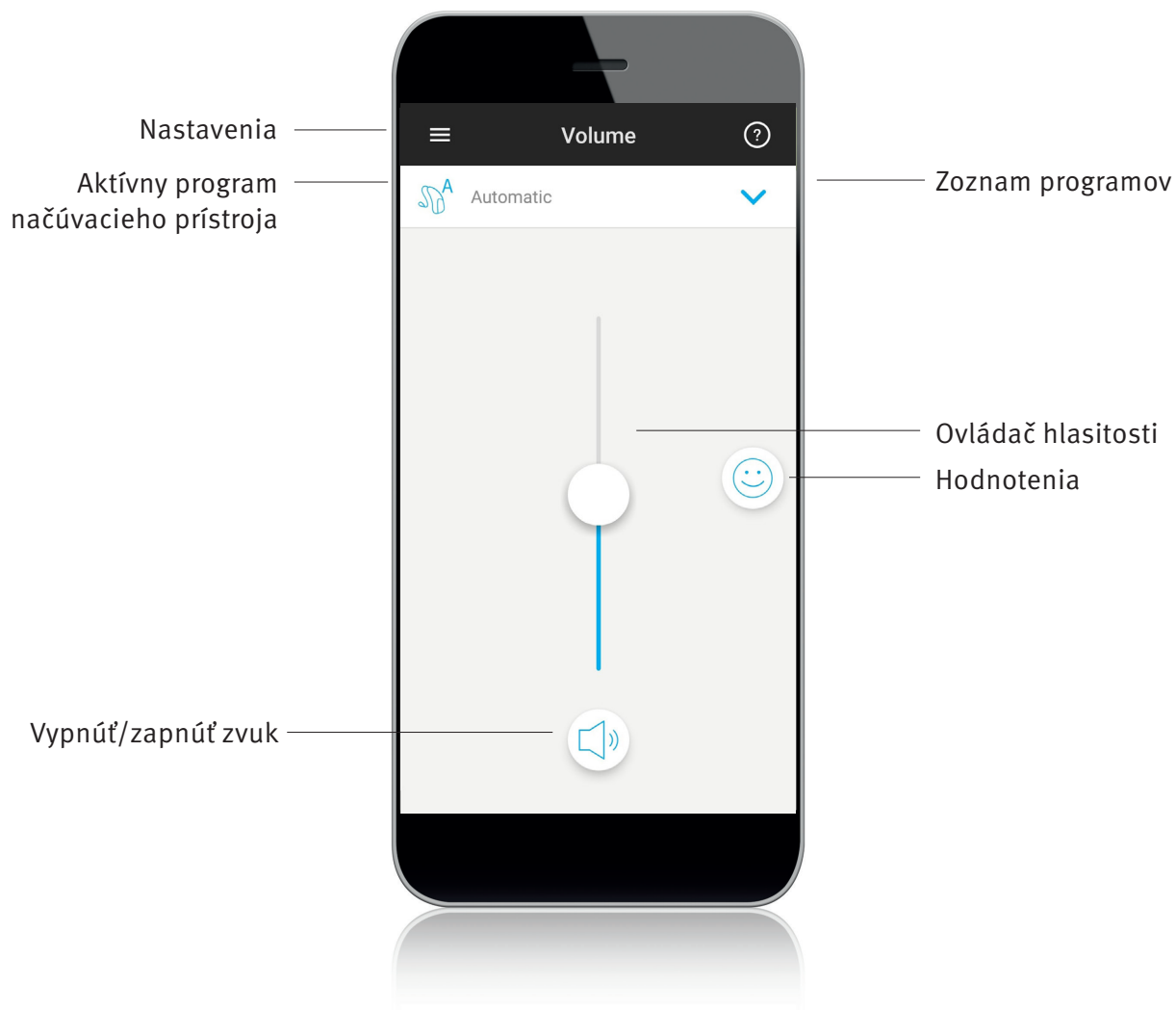

Zásady ochrany osobných údajov


Prijatie oznámenia o ochrane osobných údajov aplikácie

Ak chcete používať aplikáciu Unitron Remote Plus, musíte prijať oznámenie o ochrane osobných údajov a analýzu anonymných údajov používania aplikácie.

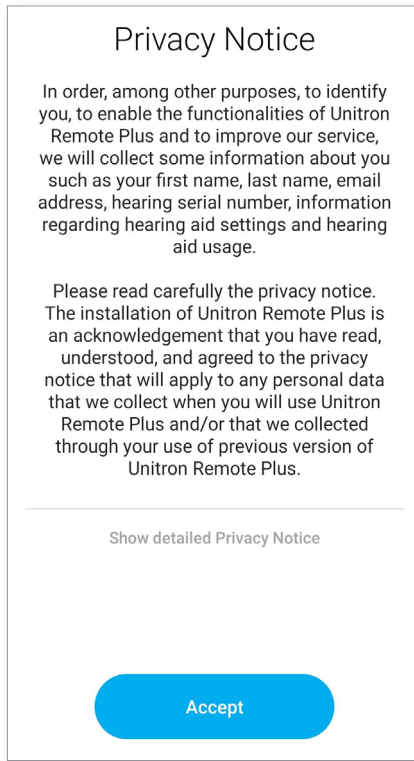


Aktivácie funkcie Insights

Ak chcete aktivovať funkciu **Insights**, klepnite na tlačidlo aktivácie. Ak chcete preskočiť tento krok, klepnite na tlačidlo „Možno neskôr“.

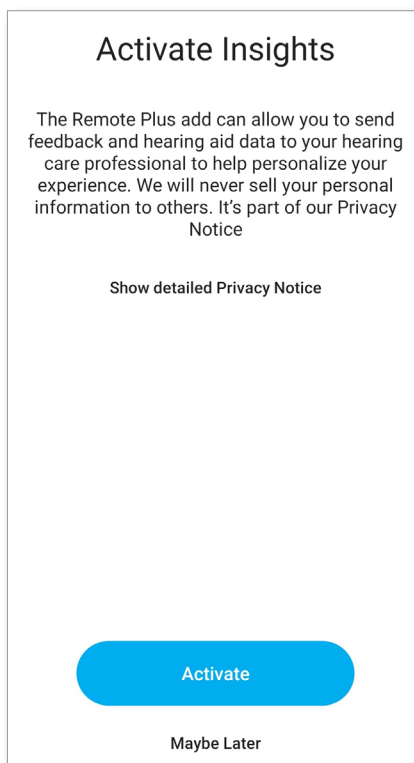


Párovanie s načúvacími prístrojmi

Detekcia načúvacieho prístroja (prístrojov)

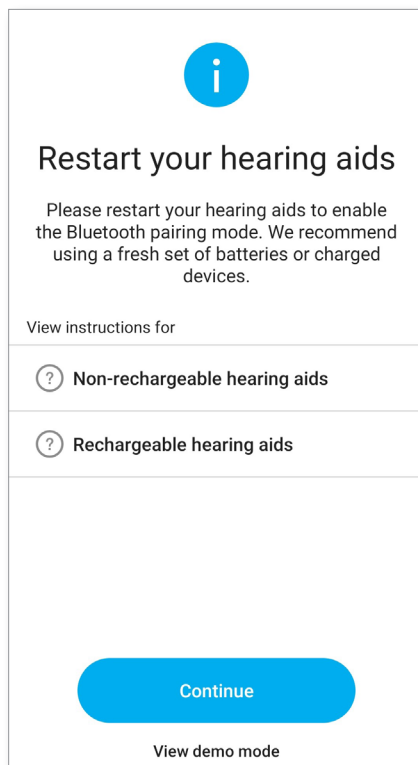

- ① Ak vaše načúvacie prístroje majú dvierka priestoru na batérie, reštartujete ich tak, že dvierka otvoríte a zatvoríte. Ak vaše načúvacie prístroje nemajú dvierka priestoru na batérie, najprv ich vypnite stlačením spodnej časti tlačidla, až kým kontrolka LED nebude svietiť načerveno (4 sekundy). Potom zapnite každý načúvací prístroj stlačením toho istého tlačidla, až kým kontrolka LED nebude svietiť nazeleno (2 sekundy).
- ① Ak chcete vyskúšať aplikáciu bez pripojenia načúvacieho prístroja Unitron a chcete získať prvé dojmy z funkcií, môžete si vybrať režim „demo“. V tomto režime nie sú dostupné funkcie diaľkového ovládania pre vaše načúvacie prístroje.

Výber načúvacieho prístroja (prístrojov)

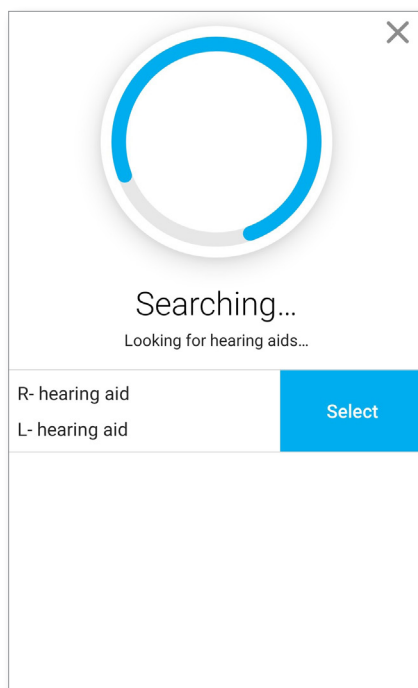


- ① Ak aplikácia zaznamenala viac ako jeden súbor zariadení, stlačte tlačidlo na načúvacom prístroji a príslušné zariadenie bude v aplikácii zvýraznené.

Hlavná obrazovka


Nastavenie hlasitosti načúvacieho prístroja

Posuňte ovládačom nahor alebo nadol, aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť načúvacieho prístroja na obidvoch stranách. Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvuk načúvacích prístrojov, stlačte tlačidlo vypnutia zvuku pod ovládačom.

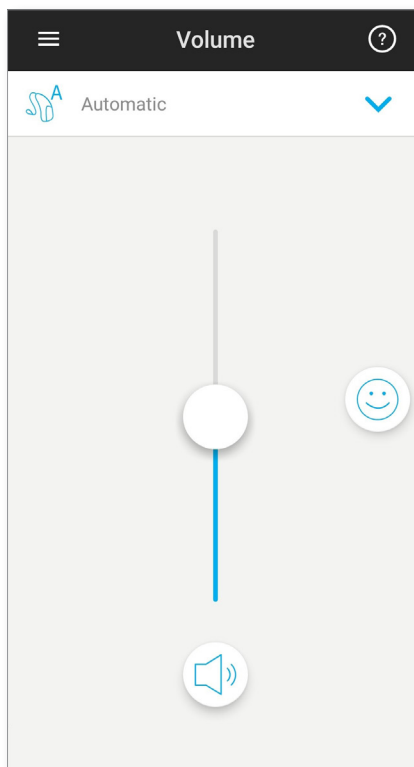

Rozdelenie hlasitosti


Ak je v nastaveniach aplikácie zapnutá možnosť „Výber strany“, tlačidlo sa objaví na vrchnej časti ovládača. Na ovládanie hlasitosti na jednotlivých stranách načúvacieho prístroja oddelene stlačte tlačidlo „Rozdeliť“.

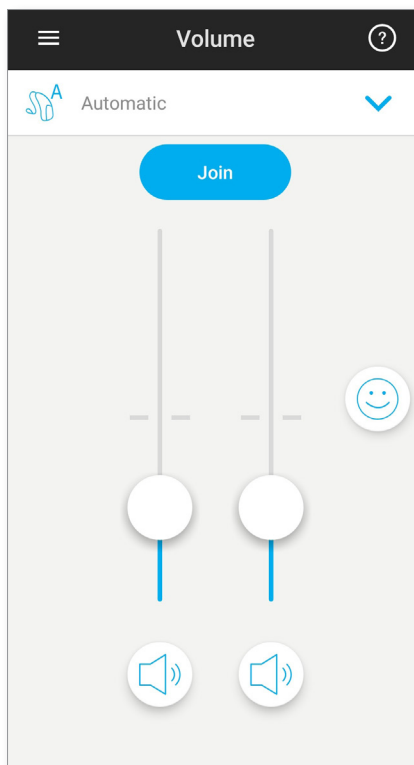


Zmena programov na načúvacích prístrojoch



Výber iného programu

Ak chcete zobrazíť všetky dostupné programy, klepnite na šípku vedľa aktuálneho názvu programu. Klepnite na požadovaný program.

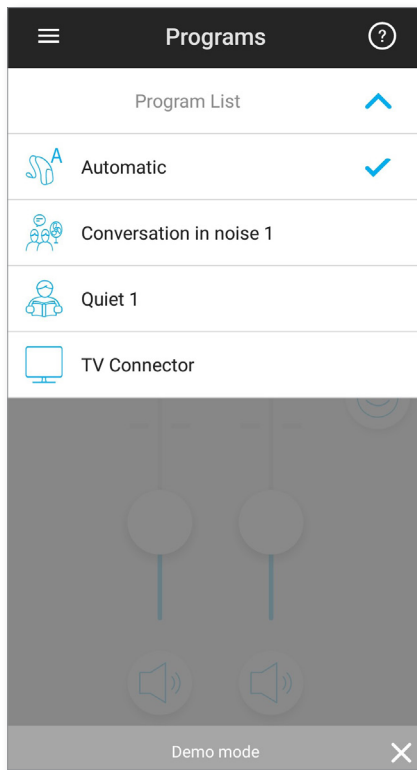

Pokročilé nastavenia programu

Ďalšie nastavenia sú dostupné v závislosti od konfigurácie vášho načúvacieho prístroja alebo zapojených zvukových zdrojov (TV Connector). Ak chcete získať prístup k týmto možnostiam, klepnite na tlačidlo  v pravom dolnom rohu:

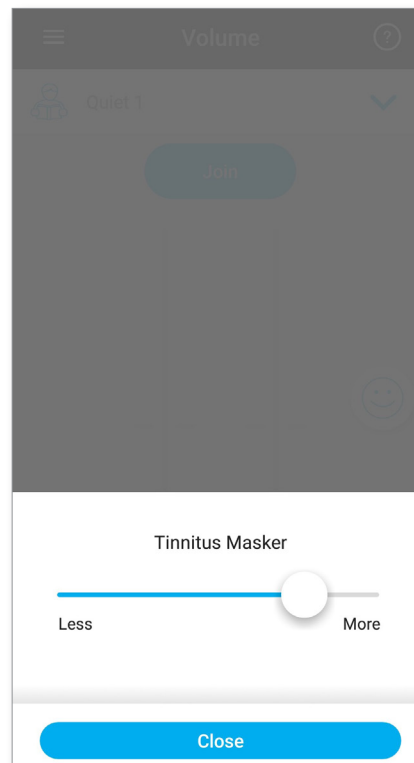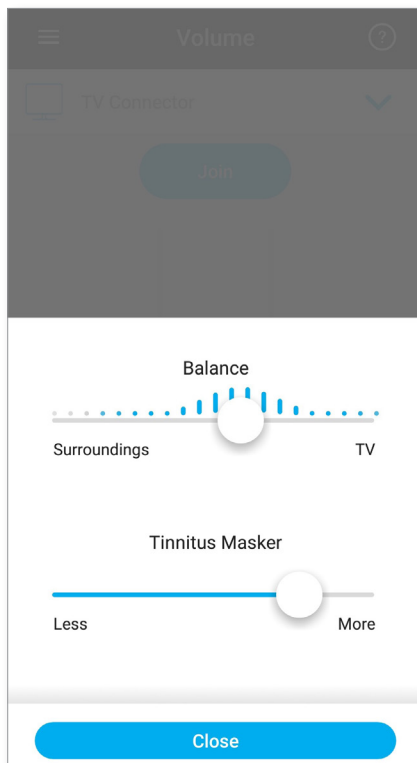


Hodnotenia

Ak ste vybrali funkciu **Hodnotenia**, na pravej strane hlavnej obrazovky sa vám zobrazí ikona šťastnej tváre (😊). Ak chcete odoslať spätnú väzbu svojmu lekárovi, klepnite na ikonu.

Hodnotenie skúsenosti

A. Vyberte z možnosti spokojný alebo nespokojný.

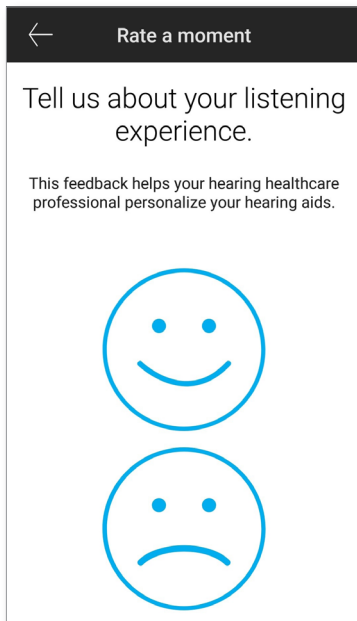

← Rate a moment


Tell us about your listening experience.

This feedback helps your hearing healthcare professional personalize your hearing aids.

😊

☹️

B. Vyberte prostredie, v ktorom sa momentálne nachádzate.

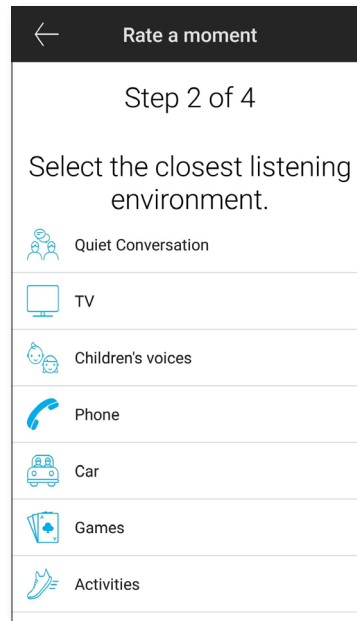


← Rate a moment

Step 2 of 4

Select the closest listening environment.

- Quiet Conversation
- TV
- Children's voices
- Phone
- Car
- Games
- Activities

C. Ak vyberiete možnosť nespokojný, z preddefinovaného zoznamu si potom môžete vybrať možnosť, ktorá najlepšie popisuje problém.

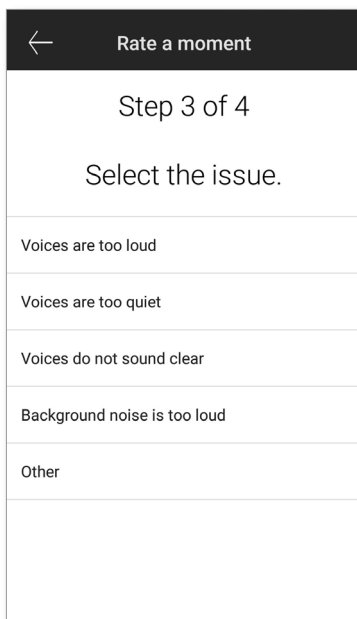


← Rate a moment

Step 3 of 4

Select the issue.

- Voices are too loud
- Voices are too quiet
- Voices do not sound clear
- Background noise is too loud
- Other

D. Pozrite si zhrnutie svojej spätnej väzby a poskytnite viac komentárov (voliteľné). Ak chcete odoslať spätnú väzbu svojmu odbornému zástupcovi pre načúvacie prístroje, klepnite na tlačidlo „Odoslať“.

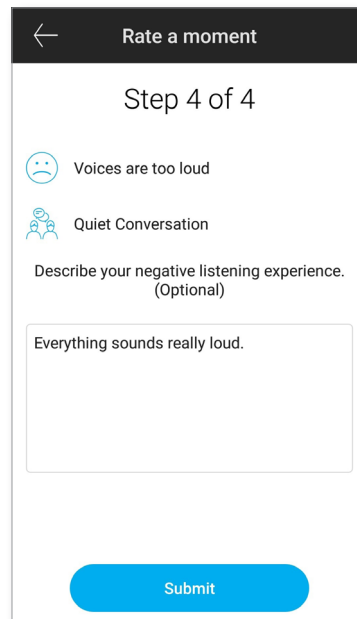

← Rate a moment

Step 4 of 4

- Voices are too loud
- Quiet Conversation

Describe your negative listening experience. (Optional)


Everything sounds really loud.

Submit


Menu nastavení

Aplikácia je dostupná v rôznych jazykoch. Automaticky sa prepne do jazyka operačného systému telefónu. Ak jazyk telefónu nie je podporovaný, predvolený jazyk je angličtina.

1) Ak chcete získať prístup do menu nastavení, klepnite na ikonu  na hlavnej obrazovke.

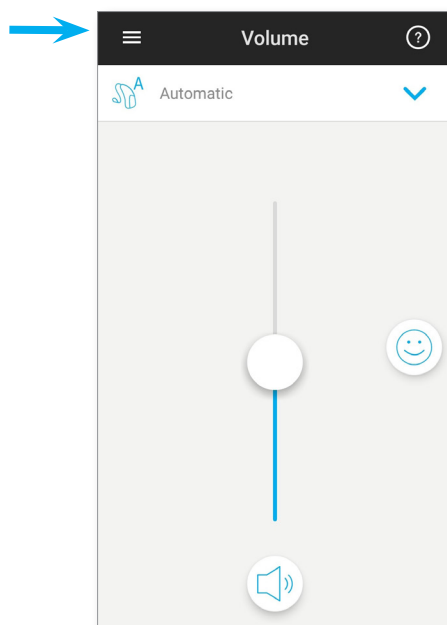

- 2) Ak chcete získať prístup do nastavení aplikácie, vyberte možnosť „[Nastavenia aplikácie](#)“.
- 3) Ak chcete získať prístup do špecifických nastavení načúvacieho prístroja, vyberte možnosť „[Moje načúvacie prístroje](#)“.
- 4) Ak chcete zobraziť zásady ochrany osobných údajov pre funkciu Insights a informácie o tejto funkcii alebo ak chcete túto funkciu deaktivovať, vyberte možnosť „[Insights](#)“.
- 5) Ak chcete sledovať videá, vyberte možnosť „[Videá](#)“.
- 6) Ak chcete zobraziť často kladené otázky týkajúce sa aplikácie a načúvacích prístrojov v internetovom prehliadači telefónu, vyberte možnosť „[FAQs](#)“.

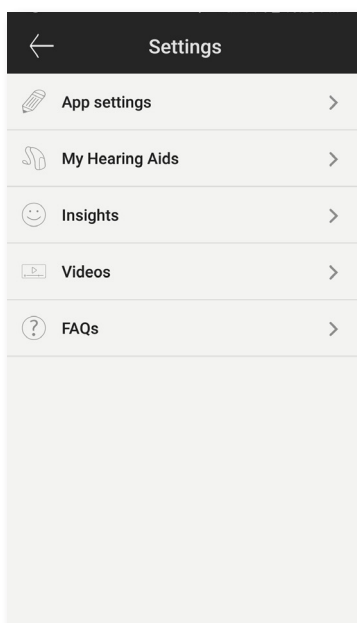

Informácie o dodržiavaní nariadení

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Sonova AG týmto vyhlasuje, že tento produkt Unitron spĺňa základné požiadavky smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS. Úplné znenie vyhlásenia o zhode môžete získať od výrobcu alebo miestneho zástupcu pre produkty Unitron, ktorých adresu môžete nájsť v zozname na stránke <http://www.unitron.com> (miesta na celom svete).

- ① Ak načúvacie prístroje nereagujú na zariadenie z dôvodu neobvyklého rušenia poľa, presuňte sa mimo rušivého poľa.
- ① Pokyny sú dostupné na stránke: unitron.com/appguide vo formáte Adobe® Acrobat® PDF. Aby ste ich mohli zobrazovať, musíte mať nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader. Ak ho chcete stiahnuť, navštívte stránku Adobe.com.
- ① Ak chcete získať bezplatnú kópiu pokynov v papierovej forme, obráťte sa na svojho miestneho zástupcu pre produkty Unitron. Kópia vám bude zaslaná do 7 dní.

Informácie a vysvetlenia symbolov



Pomocou symbolu CE spoločnosť Sonova AG potvrdzuje, že tento produkt Unitron – vrátane príslušenstva – spĺňa požiadavky smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS. Číslo uvedené za označením CE zodpovedajú kódu certifikovaných zariadení, ktoré boli pod vyššie menovanými smernicami konzultované.



Tento symbol informuje, že používateľ by si mal prečítať relevantné informácie v tejto používateľskej príručke a dodržiavať ich.



Tento symbol informuje, že používateľ by mal venovať náležitú pozornosť príslušným varovaniam v tejto používateľskej príručke.



Dôležité informácie týkajúce sa narábania s produktom a jeho efektívneho využitia.



Symbol autorského práva



Symbol by mali sprevádzať názov a adresa výrobcu (ktorý uvádza toto zariadenie na trh).



Značka slova a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Unitron ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

unitron.com



© 2018-2019 Sonova AG. All rights reserved.
A/2019-04 029-6231-46