

Application Hearing Remote

Guide d'utilisation



Pour commencer

Utilisation prévue

L'application Hearing Remote est conçue pour permettre aux utilisateurs d'aides auditives d'ajuster certains paramètres des aides auditives depuis leur appareil Android et Apple iOS¹.

Informations concernant la compatibilité :

- ⚠ Les aides auditives sans fil Bluetooth sont nécessaires pour utiliser l'application Hearing Remote.
L'application Hearing Remote peut être utilisée sur les appareils avec Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) à basse consommation et elle est compatible avec les iPhone 5s ou ultérieurs, utilisant la version iOS 10.2 ou ultérieure.
L'application Hearing Remote peut être utilisée sur les appareils Android disposant des services Google Mobile (GMS), prenant en charge Bluetooth 4.2 et Android OS 6.0 ou ultérieurs.

- ⓘ Certains téléphones ont des sons tactiles ou des tonalités de clavier qui peuvent être transmis aux aides auditives. Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre téléphone, allez dans les réglages des sons et assurez-vous que l'ensemble des sons des touches et des tonalités de clavier sont désactivés.

¹ Téléphones compatibles : l'application Hearing Remote peut être utilisée uniquement sur les téléphones dotés de la technologie Bluetooth® à basse consommation.

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques commerciales appartenant à Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.


Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.



Sommaire

- Présentation de l'application 4
- Politique de confidentialité.....5
- Appairage de votre ou vos aides auditives 6
- Écran principal.....7
- Changement de programme sur l'aide auditive 8
- Menu Réglages 9
- Informations sur la conformité.....10
- Informations et explication des symboles 11

Présentation de l'application

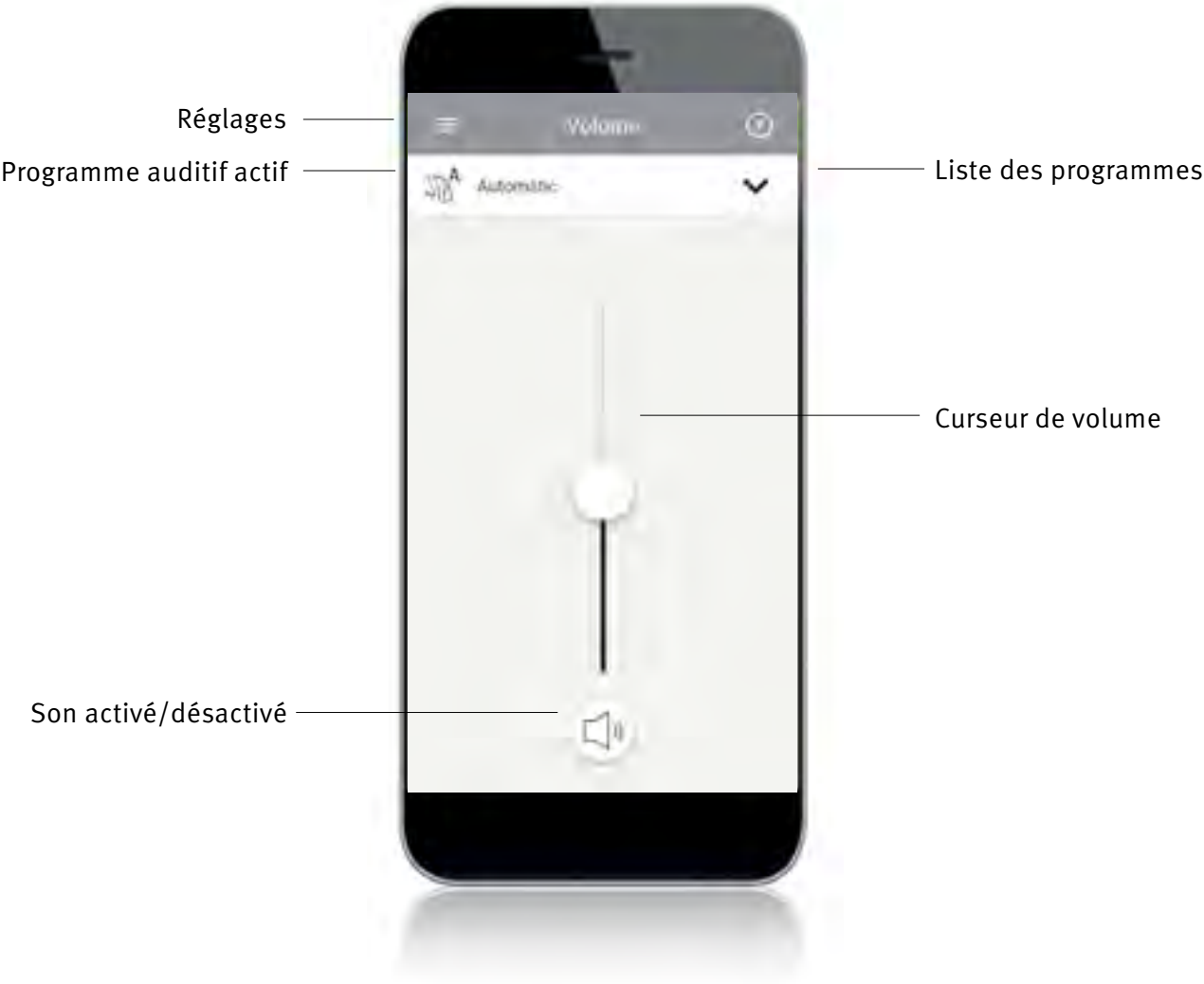

Politique de confidentialité

Acceptation de l'avis de confidentialité de l'application

Pour utiliser l'application Hearing Remote, vous devez accepter l'avis de confidentialité et l'analyse anonyme des données d'utilisation de l'application.

Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Hearing Remote and to improve our service, we will collect some information about you such as hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Hearing Remote is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any data that we collect when you will use Hearing Remote and/or that we collected through your use of previous version of Hearing Remote.

Privacy Notice


Last updated: 2019 April 8

Sonova AG respects your privacy and is committed to protecting it through our compliance with this notice. This notice describes the types of information we may collect from you or that you may provide when you are using the Hearing Remote (the "Application" or "Hearing Remote") and our practices for collection, usage, maintenance, protection and

Accept


Appairage de votre ou vos aides auditives

Détecter votre ou vos aides auditives

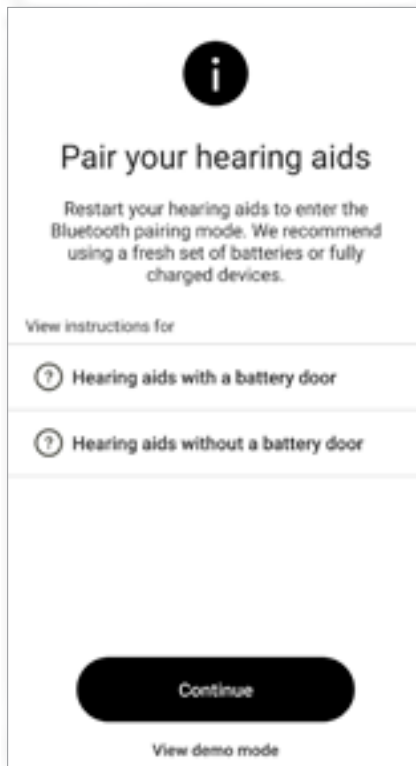

- ① Si vos aides auditives sont munies d'un tiroir pile, redémarrez vos aides auditives en ouvrant et en fermant le tiroir pile. Si vos aides auditives n'ont pas de tiroir pile, éteignez d'abord chaque aide auditive en appuyant sur la partie inférieure du bouton jusqu'à ce que la LED devienne rouge (4 secondes). Allumez ensuite chaque aide auditive en appuyant sur le même bouton jusqu'à ce que la LED devienne verte (2 secondes).
- ① Vous avez la possibilité de sélectionner le mode de démonstration pour essayer l'application sans connecter une aide auditive et vous faire ainsi une première impression des fonctions. Dans ce mode, la fonction télécommande n'est pas disponible pour vos aides auditives.

Sélectionner votre ou vos aides auditives

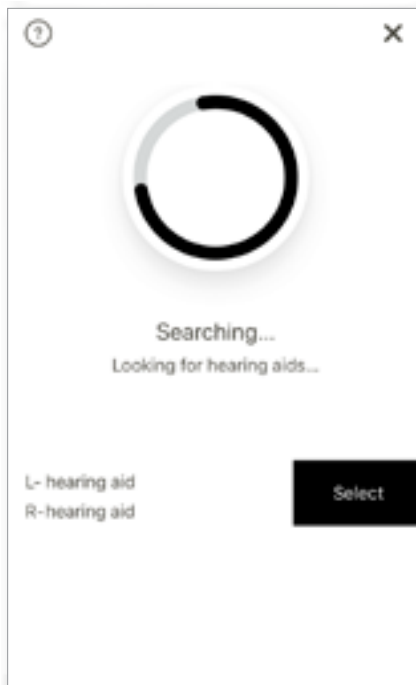

- ① Si plusieurs appareils ont été détectés par l'application, appuyez sur le bouton de votre aide auditive et l'appareil correspondant sera surligné dans l'application.

Écran principal

Ajuster le volume des aides auditives

Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou baisser le volume des deux aides auditives. Appuyez sur la touche de sourdine sous le curseur pour désactiver ou activer le son des aides auditives.



Répartir le volume


Si l'option « Sélection du côté » est activée dans les paramètres de l'application, une touche s'affiche en haut du curseur. Appuyez sur la touche « Dissocier » pour régler le volume de chaque aide auditive séparément.




Changement de programme sur l'aide auditive



Sélectionner un autre programme

Appuyez sur la flèche à droite du programme actuel pour voir tous les programmes disponibles. Appuyez sur le programme souhaité.

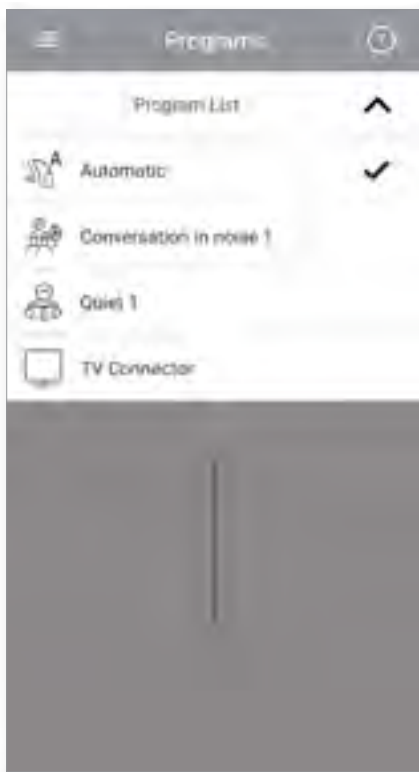

Réglages avancés

D'autres réglages sont disponibles selon la configuration de votre aide auditive ou des sources audio connectées (TV Connector). Appuyez sur la touche  en bas à droite de l'écran pour accéder aux options suivantes :

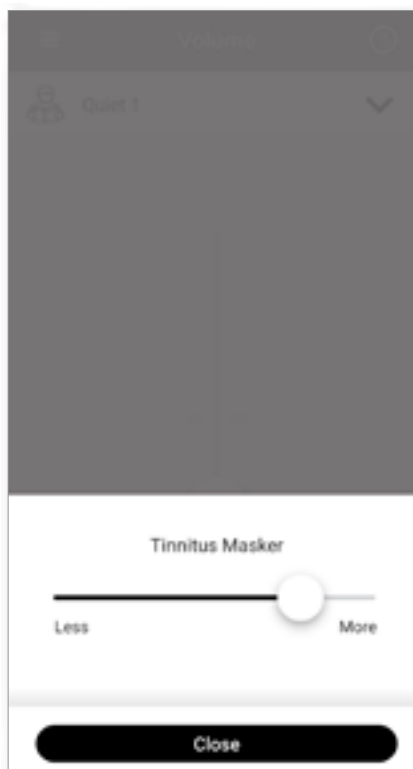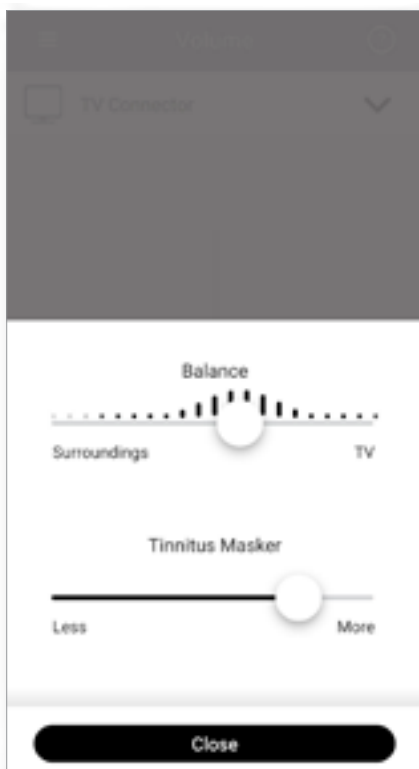

Menu Réglages

L'application est disponible dans plusieurs langues. Elle s'adapte automatiquement à la langue du système d'exploitation de votre téléphone. Si la langue du téléphone n'est pas prise en charge, l'anglais sera sélectionné par défaut.

- 1) Sur l'écran principal, appuyez sur l'icône ☰ pour accéder au menu des réglages.



- 2) Sélectionnez « Paramètres de l'application » pour accéder aux paramètres de l'application.
- 3) Sélectionnez « Mes aides auditives » pour accéder aux réglages de l'aide auditive.
- 4) Sélectionnez « FAQ » pour consulter les questions fréquentes concernant l'application et les aides auditives dans le navigateur de votre téléphone.



Informations sur la conformité

Déclaration de conformité

Sonova AG déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible chez le fabricant ou chez le représentant local du fabricant dont l'adresse figure sur <http://www.sonova.com>.

- ① Si les aides auditives ne réagissent pas aux signaux envoyés par l'appareil en raison d'un champ électromagnétique perturbant inhabituel, éloignez-vous du champ perturbant.
- ① Les instructions sont disponibles à l'adresse : unitron.com/appguide au format PDF Adobe® Acrobat®. Pour pouvoir les ouvrir, vous devez disposer d'Adobe Acrobat Reader. Rendez-vous sur Adobe.com pour télécharger ce logiciel.
- ① Pour obtenir un exemplaire papier gratuit des instructions, contactez votre représentant local Sonova. Le document vous sera envoyé dans les 7 jours.

Informations et explication des symboles



Avec le symbole CE, Sonova AG confirme que ce produit, y compris ses accessoires, satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. Le nombre qui suit le symbole CE correspond au code des institutions certifiées consultées dans le cadre des directives susmentionnées.



Ce symbole indique qu'il est essentiel que l'utilisateur lise les informations importantes de ce mode d'emploi et en tienne compte.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur accorde une attention particulière aux avertissements de ce mode d'emploi.



Informations importantes concernant la manipulation et l'utilisation de ce produit.



Symbole du droit d'auteur



Ce symbole doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant (qui commercialise cet appareil sur le marché).



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Unitron s'effectue sous licence. Les autres noms de marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

