



تطبيق Unitron Remote Plus

دليل المستخدم

Unitron Remote Plus 5.4



المحتويات

4.....	البدء
5.....	نظرة عامة
5.....	الوضع المتقدم
5.....	الوضع الكلاسيكي
6.....	تنصيب التطبيق
6.....	إعداد التطبيق
6.....	الاقتران بالمعينات السمعية من Unitron
6.....	استخدام التطبيق من دون إقران المعينات السمعية
6.....	علامة تبويب "الصفحة الرئيسية": التحكم عن بُعد (الوظائف الأساسية)
6.....	حالة البطارية
6.....	شريط/قائمة البرامج
6.....	شريط تمرير مستوى الصوت
7.....	كتم/إلغاء كتم الصوت
7.....	تقسيم/دمج مستوى الصوت
7.....	خيارات ضبط الراحة والوضوح*
7.....	التصنيفات
7.....	علامة تبويب "الصفحة الرئيسية": التحكم عن بُعد (الوظائف المتقدمة)
7.....	اسم البرنامج
7.....	إعدادات البرنامج
8.....	المعادل
8.....	إلغاء طنين الأذن
8.....	التوازن
8.....	برامج التطبيقات الاختيارية*

- 8..... علامة تبويب "الأجهزة"
- 8..... العثور على أجهزتي *
- 9..... تقنية Bluetooth® التكيفية
- 9..... علامة تبويب "نمط الحياة"
- 9..... علامة التبويب "الدعم"
- 10..... علامة التبويب "المزيد"
- 10..... استكشاف الأعطال وإصلاحها
- 10..... لغة التطبيق
- 10..... خطأ في توصيل المعينات السمعية
- 10..... نسيان الأجهزة
- 10..... معلومات الامتثال
- 10..... إعلان الامتثال
- 11..... وصف الرموز
- 12..... معلومات السلامة المهمة
- 12..... الاستخدام المقصود
- 12..... فئة المرضى المستهدفين
- 12..... المستخدم المستهدف
- 12..... دواعي الاستعمال
- 12..... موانع الاستعمال
- 12..... الفائدة السريرية
- 12..... الآثار الجانبية
- 12..... قيود الاستخدام
- 13..... إشعار الأمان
- 13..... صيانة البرنامج
- 14..... معلومات التوافق

البدء

تطبيق Unitron Remote Plus هو تطبيق طورته شركة Sonova، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول المعينات السمعية. اقرأ تعليمات المستخدم جيداً لتستفيد من كل الإمكانيات التي يقدمها.

① يوضح دليل المستخدم هذا ميزات التطبيق وكيف يمكن للمستخدم تشغيل هذه الميزات. اقرأ دليل المستخدم هذا، قبل البدء في استخدام التطبيق.

① لا يحتاج التعامل مع التطبيق أي تدريب إضافي.

يسري دليل المستخدم هذا على الإصدار 5.4 من تطبيق Unitron Remote Plus والإصدارات الفرعية الأحدث من التطبيق. وللحصول على الإصدارات السابقة من دليل مستخدم التطبيق، يُرجى الاتصال بمندوب الشركة المحلي لديك أو الرجوع إلى موقع الويب www.unitron.com.

نظرة عامة

يوفر التطبيق وضعين للشاشة الرئيسية: الوضع المتقدم والوضع الكلاسيكي. يتم تحديد وضع التطبيق عندما تقوم بإعداد التطبيق، ويمكن تغييره من علامة التبويب "المزيد".

الوضع المتقدم

يعدُّ الوضع المتقدم الخيار المثالي لمن يريد الوصول إلى الميزات المتقدمة وخيارات التخصيص، مثل إعدادات المعادل وبرامج التطبيقات الاختيارية.



الوضع الكلاسيكي

يعدُّ الوضع الكلاسيكي الخيار المثالي لمن يريدون الوصول إلى الميزات والخيارات الأساسية. يُوصى بهذا الوضع لمن يفضلون أن ينعموا بتجربة أبسط.



تثبيت التطبيق

- وصل هاتفك الذكي بالإنترنت عبر شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول.
- شغل اتصال البلوتوث (Bluetooth®) في هاتفك الذكي.
- نزل تطبيق Unitron Remote Plus من المتجر.
- افتح التطبيق.

إعداد التطبيق

بعد فتح التطبيق للمرة الأولى، سيوجهك خلال عدة خطوات لإعداده للاستخدام. وهذا يشمل الاقتران بمعيناتك السمعية والسماح بالأذونات المطلوبة عند المطالبة بها.

الاقتران بالمعينات السمعية من Unitron

اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإقران معيناتك السمعية، أو ارجع إلى دليل مستخدم المعينات السمعية للاطلاع على مزيد من المعلومات.

استخدام التطبيق من دون إقران المعينات السمعية

اختر "عرض وضع العرض التوضيحي" لتجربة التطبيق دون توصيل معيناتك السمعية. تُرجى ملاحظة أنه لا تتوفر وظيفة التحكم عن بُعد في هذا الوضع.

علامة تبويب "الصفحة الرئيسية": التحكم عن بُعد (الوظائف الأساسية)

تتوفر وظائف التحكم عن بُعد الأساسية في كل من وضعي التطبيق "المتقدم" و"الكلاسيكي". انظر القسم "نظرة عامة" لمعرفة موضع عناصر التحكم.

حالة البطارية

تشير أيقونات حالة البطارية إلى الشحن المتبقي في بطارية المعينات السمعية. وهي متاحة للأجهزة القابلة لإعادة الشحن فقط.

شريط/قائمة البرامج



في الوضع المتقدم، اسحب شريط البرامج لليساار أو لليمين لرؤية كل البرامج المتاحة. عندما تتوقف عن السحب، سيتم تطبيق البرنامج المحدد (على سبيل المثال، المطعم) على معيناتك السمعية.

في الوضع الكلاسيكي، انقر فوق قائمة البرامج في الجزء العلوي من الشاشة لعرض قائمة منسدلة بالبرامج المتاحة. انقر فوق أي برنامج لتحديده وتطبيقه على معيناتك السمعية.


شريط تمرير مستوى الصوت


حرك شريط تمرير مستوى الصوت لزيادة مستوى الصوت أو خفضه في المعينات السمعية في كلتا الأذنين.

كتم/إلغاء كتم الصوت

اضغط على زر كتم الصوت لكتم صوت المعينات السمعية أو إلغاء كتمه.  

تقسيم/دمج مستوى الصوت


اضغط على زر تقسيم مستوى الصوت للتحكم في مستوى الصوت في كل معينة سمعية بشكل منفصل. 

اضغط على زر دمج مستوى الصوت لدمج أشرطة تمرير مستوى الصوت. 

خيارات ضبط الراحة والوضوح*

بالنسبة إلى البرنامج التلقائي، يمكنك الاختيار من بين العادي، أو الراحة أو الوضوح. يتوفر خيار الوضوح لتعزيز الكلام، بينما يتم استخدام خيار الراحة لتقليل الضجيج بما يؤدي إلى تحسين مستوى الراحة في أثناء الاستماع بشكل عام. خيارا الوضوح والراحة هما أمران لا يجتمعان معًا، ولا يمكن أن يكونا في حالة "التشغيل" في الوقت نفسه. الوضع العادي هو الإعداد الافتراضي.


التصنيفات

عند تنشيط "الرؤى" وتمكين "التقييمات"، يمكنك النقر فوق أيقونة "التقييمات" لمشاركة ملاحظتك حول تجربة السمع مع أخصائي السمعيات. 

علامة تبويب "الصفحة الرئيسية": التحكم عن بُعد (الوظائف المتقدمة)


وظائف التحكم عن بُعد المتقدمة متاحة فقط في الوضع المتقدم.

اسم البرنامج

يمكن تغيير اسم البرنامج المحدد عن طريق النقر فوق زر المزيد الموجود في لوحة البرنامج. 

إعدادات البرنامج

قد تتوفر تعديلات إضافية وفقًا للبرنامج المحدد حاليًا، وتكوين المعينة السمعية، ومصادر الصوت المتصلة.

يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات من شاشتك الرئيسية عن طريق النقر فوق زر الميزات المتقدمة في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة البرنامج للحصول على إعدادات أكثر تقدمًا. 

إعدادات الصوت

- يمكنك ضبط عنصر التحكم تركيز الميكروفون للتركيز أكثر على الأصوات القادمة من الأمام أو الاستماع إلى كل ما يحيط بك.

* هذه الميزة غير متوفرة في كل موديلات المعينات السمعية.

○ يتيح لك عنصر التحكم **تحسين الكلام** تعزيز الكلام أو تقليله إلى مستوى الراحة المطلوب.

يتيح لك عنصر التحكم **تقليل الضجيج** زيادة مستوى الضجيج أو تقليله إلى مستوى الراحة المطلوب.

المعادل

تغيير إعدادات المعادل.

إلغاء طنين الأذن

إذا قام أخصائي السمعيات بتفعيل **إلغاء طنين الأذن**، فسيكون لديك خيار ضبط مستوى صوت ضجيج الإخفاء.

التوازن

إذا كنت تستخدم جهاز بث خارجيًا (مثل TV Connector، أو موسيقى)، يمكنك ضبط **التوازن** لسماع المزيد من إشارة البث أو المزيد من البيئة المحيطة.

برامج التطبيقات الاختيارية*

برامج التطبيقات الاختيارية متاحة فقط في الوضع المتقدم.

- انقر فوق **إدارة البرامج** في شريط البرامج لعرض كل برامج التطبيقات الاختيارية المتاحة.
- لإضافة أحد برامج التطبيقات الاختيارية إلى شريط البرامج، انقر فوق علامة زائد (+)، وإزالة أحد برامج التطبيقات الاختيارية، انقر فوق علامة ناقص (-).
- لمعاينة أحد برامج التطبيقات الاختيارية، انقر فوق **لوحة البرنامج**. غير الإعدادات وانقر فوق **حفظ** لإضافة برنامج التطبيقات الاختيارية إلى شريط البرامج.

علامة تبويب "الأجهزة"

علامة التبويب "الأجهزة" هي المكان الذي يمكنك فيه تعديل إعدادات المعينات السمعية. وكذلك يمكنك من خلاله الوصول إلى ميزة "العثور على أجهزتي".

العثور على أجهزتي*

تساعدك ميزة "العثور على أجهزتي" في تحديد موقع معيناتك السمعية من خلال إظهار آخر موقع معروف تم فيه توصيل معيناتك السمعية. وكلما اقتربت من معيناتك السمعية، يُوجّهك التطبيق بحسب قوة الإشارة، ما يساعدك على تحديد موقعها بدقة.

* هذه الميزة غير متوفرة في كل موديلات المعينات السمعية.

تقنية Bluetooth® التكيفية

إذا كنت تواجه مشاكل في جودة الصوت في أثناء المكالمات، فقد يؤدي تعطيل هذه الميزة إلى تحسين تجربتك.

علامة التبويب "نمط الحياة"

△ المعلومات الواردة في هذا القسم معروضة للأغراض التعليمية والمعلوماتية فقط. يجب ألا تستخدم المعلومات الموضحة في قسم نمط الحياة بديلاً للمشورة الطبية من اختصاصي، وينبغي ألا تحل محلها. إذا كانت لديك أي أسئلة حول صحتك، أو قبل بدء برنامج للتمارين الرياضية، يجب عليك دائماً استشارة الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية.

تحتوي علامة التبويب **نمط الحياة** على بيانات نمط الحياة التي تتعقبها معيناتك السمعية. ويمكنك عرض وقت ارتداء المعينات السمعية، وبيانات الاستماع وبيانات النشاط البدني.

- متوسط وقت الارتداء في اليوم
 - متوسط الوقت الذي ترتدي فيه معيناتك السمعية كل يوم.
- بيانات الاستماع
 - الوقت الذي قضيته في مختلف البيئات كما رصدته معيناتك السمعية. انقر فوق كل بيئة استماع لمعرفة المزيد عنها.
- عدّاد الخطوات
 - يعرض عداد الخطوات* عدد الخطوات التي قطعتها خلال اليوم وفقاً لقياس مقياس التسارع في معيناتك السمعية.
- دقائق النشاط
 - عدد الدقائق التي قضيتها في ممارسة نشاط بدني خلال اليوم، مثل المشي أو الركض أو أي نشاط مماثل متوسط إلى شديد في أثناء ارتداء معيناتك السمعية.

علامة التبويب "الدعم"

ابحث عن معلومات مفيدة لدعم رحلتك السمعية في علامة التبويب **الدعم**، بما في ذلك:

- رسائل المدرب
- نصائح استخدام التطبيق
- مقاطع الفيديو الإرشادية
- الأسئلة الشائعة

* هذه الميزة غير متوفرة في كل موديلات المعينات السمعية.

علامة التبويب "المزيد"

علامة التبويب المزيد هي الموضوع الذي يمكنك فيه العثور على إعدادات التطبيق الإضافية والمعلومات القانونية المتعلقة بالتطبيق.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

للحصول على مزيد من المعلومات حول استكشاف الأعطال وإصلاحها، تفضل بزيارة صفحة دعم Unitron على موقع الويب unitron.com/support

لغة التطبيق

التطبيق متوفر بعدة لغات. وستتم مطابقة لغة التطبيق تلقائيًا مع لغة نظام تشغيل الهاتف، بشرط أن تكون اللغة مدعومة في التطبيق. إذا كانت لغة الهاتف غير مدعومة، فإن اللغة الافتراضية ستكون الإنجليزية.

خطأ في توصيل المعينات السمعية

إذا كنت تواجه مشكلة في الاتصال بالتطبيق، يمكنك اختيار نسيان الأجهزة ومحاولة إقرانها مرة أخرى.

إذا كنت تريد توصيل زوج مختلف من المعينات السمعية بالتطبيق، يجب عليك أولاً نسيان المعينات السمعية المتصلة حاليًا. ويمكنك بعد ذلك إقران أجهزة جديدة.

نسيان الأجهزة

انتقل إلى أجهزتي لإزالة أجهزتك. بعد النقر فوق زر نسيان الأجهزة، تظهر رسالة منبثقة تطلب منك تأكيد رغبتك في إزالة أجهزتك.

ملاحظة: بعد نسيان أجهزتك، ستحتاج إلى إقران المعينات السمعية مرة أخرى لاستخدام التطبيق.

معلومات الامتثال

إعلان الامتثال

بموجب هذا تعلن شركة Sonova AG أن هذا المنتج يفي بمتطلبات لائحة الأجهزة الطبية (EU) 2017/745.

وصف الرموز

<p>باستخدام رمز CE، تؤكد Sonova AG أن هذا المنتج يفي بمتطلبات لائحة الأجهزة الطبية. تتوافق الأرقام التي تظهر بعد رمز CE مع رمز المؤسسات المعتمدة التي تمت استشارتها بموجب اللائحة المذكورة أعلاه.</p>	
<p>الرمز المركب "الشركة المُصنَّعة للأجهزة الطبية" و"تاريخ التصنيع" على النحو المحدد في لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/745 (EU).</p>	 الاسم والعنوان والتاريخ
<p>يشير إلى الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي. والممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي هو أيضًا الجهة المستوردة للمنتج في الاتحاد الأوروبي.</p>	
<p>يشير إلى أن الجهاز عبارة عن جهاز طبي.</p>	
<p>يشير إلى رقم كتالوج الشركة المُصنَّعة حتى يمكن التعرف على الجهاز الطبي.</p>	
<p>إشارة إلى توفر تعليمات استخدام إلكترونية.</p>	
<p>يشير هذا الرمز إلى أنه من الضروري على المستخدم قراءة المعلومات ذات الصلة الواردة في أدلة المستخدم هذه وأخذها بعين الاعتبار.</p>	
<p>يشير هذا الرمز إلى ضرورة أن يولي المستخدم اهتمامًا بإشعارات التحذير ذات الصلة في دليل المستخدم هذا.</p>	
<p>معلومات مهمة للمناولة وسلامة المنتج.</p>	
<p>علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth® SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات بواسطة شركة Sonova AG يتم بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.</p>	
<p>رمز حقوق النشر والطباعة.</p>	

معلومات السلامة المهمة

تُرجى قراءة معلومات السلامة ذات الصلة في الصفحات التالية قبل استخدام التطبيق.

الاستخدام المقصود

يتمثل الاستخدام المقصود للتطبيق في تحديد وظائف المعينة السمعية الحالية وتعديلها وحفظها، والوصول إلى معلومات الحالة والاتصال بين المستخدم النهائي واختصاصي العناية السمعية، لاسلكيًا وبطريقة مرئية.

فئة المرضى المستهدفين

هذا الجهاز مخصص للمرضى الذين يعانون من فقدان السمع في إحدى الأذنين أو كليهما من سن 17 عامًا فما فوق.

المستخدم المستهدف

المستخدم المقصود هو الشخص الذي يعاني من فقدان السمع والذي يستخدم جهازًا متوافقًا.

دواعي الاستعمال

تُرجى ملاحظة أن دواعي الاستعمال ليست مستمدة من التطبيق، ولكن من المعينات السمعية المتوافقة.

موانع الاستعمال

تُرجى ملاحظة أن موانع الاستعمال ليست مستمدة من التطبيق، ولكن من المعينات السمعية المتوافقة.

الفائدة السريرية

لا تُستمد الفائدة السريرية من التطبيق، ولكن من المعينات السمعية المتوافقة.

يتيح التطبيق الفوائد التالية للمستخدمين المقصودين:

- توفير إمكانية ضبط إعدادات المعينات السمعية وحفظها وفقًا للاحتياجات الشخصية، ضمن النطاق المسموح به في التركيب الأولي.
- قدرة المستخدم النهائي على البقاء على اتصال مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به عبر وظيفة الدعم عن بُعد.

الآثار الجانبية

تُرجى ملاحظة أن الآثار الجانبية ليست مستمدة من التطبيق، ولكن من المعينات السمعية المتوافقة.

قيود الاستخدام

يقتصر استخدام التطبيق على إمكانيات الجهاز/الأجهزة المتوافقة.

يجب إبلاغ مندوب الشركة المصنعة والسلطة المختصة في دولة الإقامة عن أي حادث خطير يحدث في ما يتعلق بالتطبيق. تُوصف الحادثة الخطيرة بأنها أي حادثة أدت، أو ربما أدت، أو قد تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي مما يلي:

- وفاة مريض أو مستخدم أو أي شخص آخر
- تدهور خطير مؤقت أو دائم في الحالة الصحية لمريض أو مستخدم أو أي شخص آخر
- تهديد خطير للصحة العامة

للإبلاغ عن عملية أو حدث غير متوقع، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو مندوبها.

يمكن الوصول إلى دليل المستخدم لكل إصدارات التطبيق بكل اللغات المتاحة في شكل إلكتروني عبر الرابط <https://www.unitron.com/appguide>.

أو يمكن الوصول إلى الإصدار الحالي من دليل مستخدم Unitron مباشرة من التطبيق بالانتقال إلى شاشة المزيد، واختيار **حول التطبيق**، ثم النقر فوق رابط دليل المستخدم في أسفل الشاشة.

إشعار الأمان

بيانات المريض هي بيانات خاصة، وحمايتها مهمة:

- تأكد من أن الهاتف الذكي مُحدَّث بأخر تحديثات أمان نظام التشغيل. قم بتمكين التحديث التلقائي.
- تأكد من تحديث إصدار التطبيق المثبت لديك.
- لا تستخدم إلا تطبيقات Sonova الأصلية التي يتم تنزيلها من المتاجر الرسمية مع معيناتك السمعية.
- تأكد من استخدام كلمات مرور قوية والحفاظ على سرية بيانات الاعتماد.
- قم بتأمين هاتفك باستخدام رقم تعريف شخصي (PIN) و/أو المقاييس الحيوية (مثل بصمة الإصبع والوجه) واضبط الهاتف بحيث يتم قفله تلقائيًا بعد عدة دقائق من عدم النشاط.
- تأكد من أن التطبيقات المثبتة تتوفر لها الأذونات التي تحتاج إليها فقط.
- تجنب إنشاء اقتران Bluetooth® مع معيناتك السمعية في منطقة عامة. ويرجع السبب في ذلك إلى خطر التداخل غير المرغوب فيه من طرف ثالث. نوصيك بإجراء إقران اتصال Bluetooth® هذا في المنزل.
- لا تستخدم هاتفًا مُعدلاً أو مكسور الحماية أو صلاحيات الجذر مفتوحة عليه. تأكد من الحفاظ على أمان البيانات في كل الأوقات. يرجى العلم بأن هذه القائمة ليست شاملة.
- عند نقل البيانات عبر قنوات غير آمنة، قم بإرسال بيانات مجهولة المصدر أو تشفيرها.
- وفر الحماية للنسخ الاحتياطية لبيانات هاتفك الذكي ليس فقط من فقدان البيانات ولكن أيضًا من السرقة.
- يُنصح بإزالة كل البيانات من الهاتف الذكي الذي لم تُعد استخدامه أو ستخلص منه.

صيانة البرنامج

نراقب باستمرار التعليقات الواردة من السوق. إذا كنت تواجه أي مشكلات مع أحدث إصدار من التطبيق، يرجى الاتصال بمندوب الشركة المصنعة المحلي و/أو تقديم تعليقات في App Store أو Google Play Store.

- قد يؤدي تغيير الإعدادات، على سبيل المثال خفض مستوى الصوت أو كتم صوت المعينات السمعية أو زيادة "خفض الضجيج"، إلى مخاطر مثل عدم سماع حركة المرور المحيطة.
- إذا لم تستجب معيناتك السمعية للجهاز بسبب خلل غير عادي في المجال، فابتعد عن المجال المسبب للخلل. قم بتنشيط تقنية Bluetooth. يجب تمكين تقنية Bluetooth ليتسنى لك الاتصال بمعيناتك السمعية. إذا لم تستجب المعينات السمعية، فالرجاء التحقق مما إذا كانت قيد التشغيل وأن البطارية ليست فارغة.
- تتوفر التعليمات على: [unitron.com/appguide](https://www.unitron.com/appguide) بتنسيق Adobe® Acrobat® PDF. لعرضها، يجب أن يكون برنامج Adobe Acrobat Reader مثبتًا لديك. تفضل بزيارة [Adobe.com](https://www.adobe.com) لتنزيله.
- للحصول على نسخة ورقية مجانية من التعليمات، يُرجى الاتصال بمندوب Unitron المحلي الذي تتعامل معه. وسيتم إرسال نسخة في غضون 7 أيام.

معلومات التوافق

يلزم استخدام المعينات السمعية المزودة بإمكانات الاتصال اللاسلكي عبر تقنية Bluetooth® ليتسنى استخدام تطبيق Unitron Remote Plus. ويمكن استخدام تطبيق Unitron Remote Plus على الأجهزة المزودة بإمكانات تقنية Bluetooth® المنخفضة الطاقة (BT-LE)، وهو متوافق مع الإصدار 16 من نظام التشغيل iOS أو الإصدارات الأحدث منه. يمكن استخدام تطبيق Unitron Remote Plus على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android، والحاصلة على اعتماد Google Mobile Services (GMS)، والتي تدعم الإصدار 4.2 من تقنية Bluetooth® والإصدار 10.0 من نظام التشغيل Android أو الإصدارات الأحدث.

تحتوي بعض الهواتف على أصوات اللمس أو نغمات لوحة المفاتيح، والتي قد يتم بثها إلى المعينات السمعية. لتجنب ذلك، انتقل إلى إعدادات هاتفك، وحدد الأصوات وتأكد من إلغاء تنشيط كل أصوات اللمس ونغمات لوحة المفاتيح.

تختلف الميزات المتاحة في تطبيق Remote Plus من Unitron باختلاف المعينات السمعية المتصلة. بعض الميزات لا تتوفر لكل المعينات السمعية.

App Store هي علامة خدمة مملوكة لشركة Apple Inc. وتعدُّ Android وGoogle Play وشعار Google Play علامات تجارية مملوكة لشركة Google Inc.

يسري دليل المستخدم هذا على الإصدار 5.4 من تطبيق Unitron Remote Plus والإصدارات الفرعية الأحدث من تطبيق Unitron Remote Plus 5. وللحصول على الإصدارات السابقة من دليل مستخدم التطبيق، يُرجى الاتصال بمندوب الشركة المحلي لديك أو الرجوع إلى موقع الويب.

CE
0459



والمستورد للاتحاد الأوروبي:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen . ألمانيا

· Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.unitron.com

sonova
HEAR THE WORLD