



# Unitron Remote Plus app

Hướng dẫn sử dụng

Unitron Remote Plus 5.4



# Mục lục

Bắt đầu.....	4
Tổng quan.....	5
Chế độ Advanced (Nâng cao).....	5
Chế độ Classic (Cổ điển).....	5
Cài đặt ứng dụng.....	6
Thiết lập ứng dụng.....	6
Ghép đôi với máy trợ thính Unitron .....	6
Sử dụng ứng dụng khi không ghép đôi với máy trợ thính .....	6
Tab Home (Màn hình chính): điều khiển từ xa (các chức năng cơ bản).....	6
Trạng thái pin .....	6
Vòng quay/danh sách chương trình.....	6
Thanh trượt âm lượng.....	7
Tắt/bật tiếng .....	7
Chia tách/kết hợp âm lượng .....	7
Điều chỉnh chế độ Comfort (Thoải mái) và Clarity (Rõ nét)* .....	7
Ratings (Xếp hạng) .....	7
Tab Home (Màn hình chính): điều khiển từ xa (các chức năng nâng cao) .....	7
Tên chương trình .....	7
Cài đặt chương trình .....	8
Equalizer (Bộ chỉnh âm).....	8
Bộ chống ù tai .....	8
Cân bằng.....	8
Chương trình ứng dụng tùy chọn*.....	8
Tab Devices (Thiết bị).....	9
Find my Devices (Tìm thiết bị của tôi)*.....	9

Adaptive Bluetooth® (Bluetooth® thích ứng).....	9
Tab Lifestyle (Lối sống).....	9
Tab Support (Hỗ trợ).....	10
Tab More (Thêm).....	10
Khắc phục sự cố.....	10
Ngôn ngữ ứng dụng .....	10
Lỗi kết nối máy trợ thính.....	10
Quên thiết bị.....	10
Thông tin tuân thủ .....	11
Tuyên bố hợp chuẩn.....	11
Mô tả biểu tượng .....	11
Thông tin an toàn quan trọng .....	12
Mục đích sử dụng .....	12
Đối tượng bệnh nhân dự kiến .....	12
Người dùng dự kiến .....	12
Chỉ định.....	12
Chống chỉ định .....	12
Lợi ích lâm sàng.....	12
Tác dụng phụ .....	13
Hạn chế sử dụng.....	13
Thông báo bảo mật.....	13
Bảo trì phần mềm.....	14
Thông tin về khả năng tương thích.....	15

## Bắt đầu

Unitron Remote Plus app là một ứng dụng được phát triển bởi Sonova – nhà cung cấp các giải pháp trợ thính hàng đầu thế giới. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để khai thác lợi ích của tất cả các tiềm năng sử dụng đến từ ứng dụng.

- ① Hướng dẫn sử dụng này mô tả các tính năng của ứng dụng và cách dùng những tính năng này. Đọc hiểu toàn bộ hướng dẫn sử dụng này trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng.
- ① Không cần đào tạo thêm khi thao tác ứng dụng.


Hướng dẫn sử dụng này có thể áp dụng cho Unitron Remote Plus app phiên bản 5.4 và những phiên bản phụ được phát hành về sau của ứng dụng. Để biết thêm thông tin về các phiên bản trước của hướng dẫn sử dụng ứng dụng, vui lòng liên hệ với đại diện tại địa phương hoặc truy cập [www.unitron.com](http://www.unitron.com).

# Tổng quan

Ứng dụng cung cấp hai chế độ cho màn hình Home (Màn hình chính): chế độ Advanced (Nâng cao) và chế độ Classic (Cổ điển). Chế độ ứng dụng được chọn khi thiết lập ứng dụng và bạn có thể thay đổi bằng cách vào tab **More** (Thêm).


## Chế độ Advanced (Nâng cao)

Chế độ Advanced (Nâng cao) phù hợp cho người dùng muốn sử dụng các tính năng nâng cao và tùy chọn tùy chỉnh như cài đặt bộ chỉnh âm và các Chương trình ứng dụng tùy chọn.

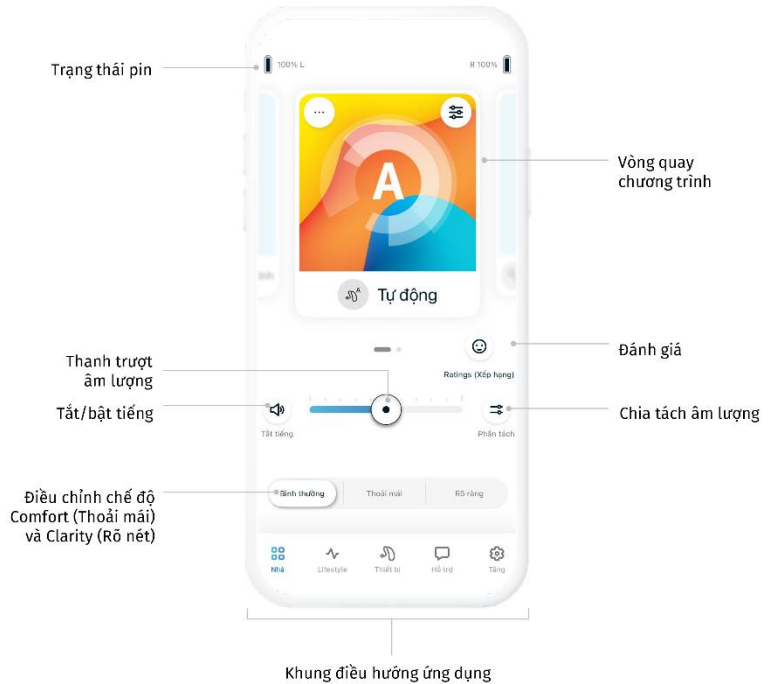

## Chế độ Classic (Cổ điển)

Chế độ Classic (Cổ điển) phù hợp cho người dùng muốn sử dụng các tính năng và tùy chọn cơ bản. Người dùng thích trải nghiệm đơn giản hơn nên sử dụng chế độ này.

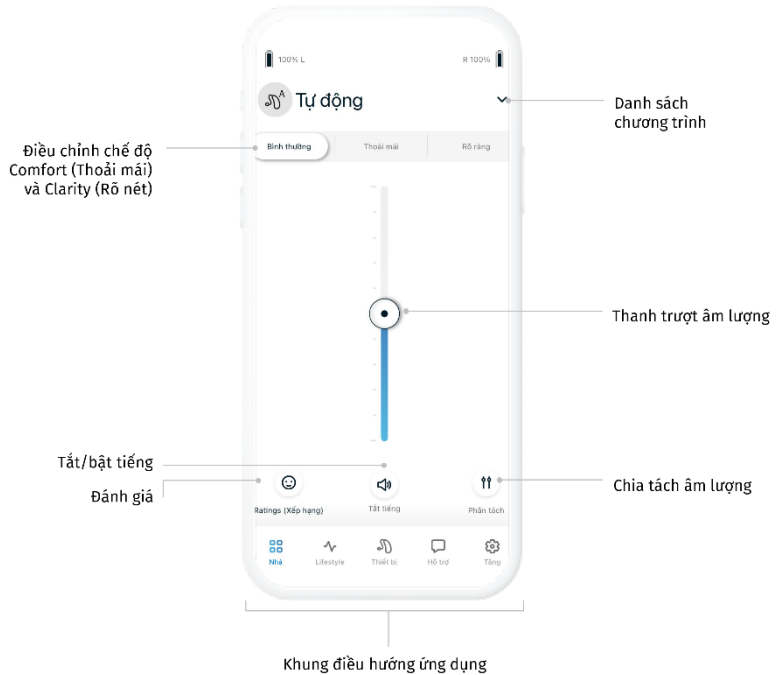

## Cài đặt ứng dụng

- Sử dụng Wifi hoặc dữ liệu di động để kết nối điện thoại thông minh với Internet.
- Bật Bluetooth® trên điện thoại thông minh.
- Tải xuống Unitron Remote Plus app từ cửa hàng.
- Mở ứng dụng.

## Thiết lập ứng dụng

Sau khi mở ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ được hướng dẫn hoàn thành lần lượt một số bước để thiết lập ứng dụng trước khi sử dụng. Quá trình thao tác bao gồm ghép đôi với máy trợ thính và cho phép các quyền theo yêu cầu khi màn hình xuất hiện thông báo.

### Ghép đôi với máy trợ thính Unitron

Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để ghép đôi thiết bị trợ thính hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng máy trợ thính để biết thêm thông tin.

### Sử dụng ứng dụng khi không ghép đôi với máy trợ thính

Chọn “View Demo Mode” (Xem Chế độ thử nghiệm) để thử ứng dụng khi chưa kết nối với máy trợ thính. Lưu ý rằng chế độ này không có chức năng điều khiển từ xa.

## Tab Home (Màn hình chính): điều khiển từ xa (các chức năng cơ bản)

Bạn có thể sử dụng các chức năng điều khiển từ xa cơ bản ở cả chế độ Advanced (Nâng cao) và Classic (Cổ điển) của ứng dụng. Xem phần Tổng quan để biết vị trí của các nút điều khiển.

### Trạng thái pin

Biểu tượng **trạng thái pin** cho biết lượng pin còn lại của máy trợ thính. Chức năng này chỉ được cung cấp ở thiết bị có pin sạc.

### Vòng quay/danh sách chương trình

Ở chế độ Advanced (Nâng cao), vuốt sang trái hoặc sang phải trên **vòng quay chương trình** để xem toàn bộ các chương trình hiện có. Khi dừng vuốt, chương trình được chọn (chẳng hạn như Restaurant (Nhà hàng)) sẽ được áp dụng cho máy trợ thính.

Ở chế độ Classic (Cổ điển), nhấn vào **danh sách chương trình** ở trên cùng của màn hình để xem menu thả xuống liệt kê các chương trình hiện có. Nhấn vào một chương trình để chọn và áp dụng chương trình đó vào máy trợ thính.

### Thanh trượt âm lượng

Di chuyển **thanh trượt âm lượng** để tăng hoặc giảm âm lượng của máy trợ thính ở cả hai bên tai.

### Tắt/bật tiếng



Nhấn vào nút **Mute** (Tắt tiếng) để tắt hoặc bật tiếng máy trợ thính.

### Chia tách/kết hợp âm lượng



Nhấn vào nút **Split** (Chia tách) âm lượng để kiểm soát âm lượng trên từng máy trợ thính riêng biệt.



Nhấn vào nút **Join** (Kết hợp) âm lượng để hợp nhất các thanh trượt âm lượng.

### Điều chỉnh chế độ Comfort (Thoải mái) và Clarity (Rõ nét)\*

Đối với Chương trình Automatic (Tự động), bạn có thể chọn một trong những chế độ sau: **Normal** (Bình thường), **Comfort** (Thoải mái) hoặc **Clarity** (Rõ nét). **Clarity** (Rõ nét) dùng để làm rõ lời nói, trong khi đó, **Comfort** (Thoải mái) dùng để giảm tiếng ồn nhằm cải thiện mức độ thoải mái tổng thể khi nghe. **Clarity** (Rõ nét) và **Comfort** (Thoải mái) là hai chế độ cài đặt loại trừ lẫn nhau và không thể đồng thời ở trạng thái “On” (Bật). **Normal** (Bình thường) là chế độ cài đặt mặc định.

### Ratings (Xếp hạng)



Khi kích hoạt Insights và bật Ratings (Xếp hạng), bạn có thể nhấn vào biểu tượng Ratings (Xếp hạng) để chia sẻ phản hồi về trải nghiệm nghe của mình với chuyên gia chăm sóc thính lực.

## Tab Home (Màn hình chính): điều khiển từ xa (các chức năng nâng cao)

Bạn chỉ có thể sử dụng các chức năng điều khiển từ xa nâng cao ở chế độ Advanced (Nâng cao).

### Tên chương trình



Thay đổi tên chương trình được chọn bằng cách nhấn vào **nút thêm** trên ô chương trình.

\* Tính năng chỉ được cung cấp ở một số mẫu máy trợ thính.

## Cài đặt chương trình

Tùy thuộc vào chương trình đang được chọn, cấu hình máy trợ thính của bạn và các nguồn âm thanh được kết nối có thể được điều chỉnh thêm.



Từ màn hình Home (Màn hình chính), truy cập những cài đặt này bằng cách nhấn vào **nút tính năng nâng cao** ở góc trên cùng bên phải của ô chương trình để xem thêm các cài đặt nâng cao khác.

- Cài đặt âm thanh
  - Bạn có thể điều chỉnh nút điều khiển **Focus Mic** (Mic tập trung) để tập trung hơn vào âm thanh từ phía trước hoặc nghe xung quanh bạn.
  - Nút điều khiển **Enhance Speech** (Làm rõ lời nói) cho phép làm rõ lời nói hoặc giảm hiệu ứng làm rõ lời nói đến mức thoải mái mong muốn.

Nút điều khiển **Reduce Noise** (Giảm tiếng ồn) cho phép tăng hoặc giảm mức tiếng ồn đến mức thoải mái mong muốn.

## Equalizer (Bộ chỉnh âm)

Thay đổi cài đặt **Equalizer** (Bộ chỉnh âm).

## Bộ chống ù tai

Nếu chuyên gia chăm sóc thính lực đã bật **bộ chống ù tai**, bạn sẽ có thể tùy chọn điều chỉnh âm lượng của tiếng ồn che phủ.

## Cân bằng

Nếu sử dụng thiết bị truyền trực tiếp bên ngoài, (ví dụ: TV Connector, âm nhạc), bạn có thể điều chỉnh mức độ **cân bằng** để nghe tín hiệu truyền trực tiếp nhiều hơn hoặc nghe môi trường xung quanh nhiều hơn.

## Chương trình ứng dụng tùy chọn\*

Bạn chỉ có thể sử dụng các Chương trình ứng dụng tùy chọn (OAP) ở Chế độ Advanced (Nâng cao).

- Nhấn vào **Manage Programs** (Quản lý chương trình) trong vòng quay chương trình để xem toàn bộ các OAP hiện có.
- Để thêm OAP vào vòng quay, hãy nhấn vào dấu cộng (+) và để gỡ OAP, hãy nhấn vào dấu trừ (-).
- Để xem trước OAP, hãy nhấn vào **ô chương trình**. Thay đổi cài đặt và nhấn vào **Save** (Lưu) để thêm OAP vào vòng quay chương trình.

\* Tính năng chỉ được cung cấp ở một số mẫu máy trợ thính.

## Tab Devices (Thiết bị)

Tab Devices (Thiết bị) cho phép bạn có thể sửa đổi cài đặt máy trợ thính của mình. Bạn cũng có thể vào tab này để truy cập tính năng Find my Devices (Tìm thiết bị của tôi).

### Find my Devices (Tìm thiết bị của tôi)\*

Tính năng Find my Devices (Tìm thiết bị của tôi) giúp bạn xác định vị trí máy trợ thính bằng cách hiển thị vị trí cuối cùng đã biết mà thiết bị được kết nối. Khi bạn tiến lại gần máy trợ thính, ứng dụng sẽ dựa vào cường độ tín hiệu để hướng dẫn bạn dễ dàng xác định vị trí của máy trợ thính.

### Adaptive Bluetooth® (Bluetooth® thích ứng)

Nếu gặp sự cố về chất lượng âm thanh trong khi gọi, bạn có thể cải thiện trải nghiệm của mình bằng cách tắt tính năng này.

## Tab Lifestyle (Lối sống)

△ Thông tin trong phần này chỉ nhằm mục đích tham khảo và tìm hiểu thêm. Bạn không nên sử dụng thông tin hiển thị trong phần Lifestyle (Lối sống) thay cho lời khuyên y tế chuyên môn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sức khỏe của mình hoặc trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện, hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác.

Tab Lifestyle (Lối sống) chứa dữ liệu về lối sống được máy trợ thính của bạn theo dõi. Bạn có thể xem thời gian đeo máy trợ thính, môi trường nghe và dữ liệu về hoạt động thể chất.

- **Average wearing time per day (Thời gian đeo trung bình mỗi ngày)**
  - Thời gian trung bình đã đeo máy trợ thính mỗi ngày.
- **Listening environments (Môi trường nghe)**
  - Thời gian đeo máy trợ thính trong các môi trường khác nhau theo kết quả phát hiện của (các) máy trợ thính. Nhấn vào từng môi trường nghe để tìm hiểu thêm về môi trường đó.
- **Step counter (Bộ đếm bước)**
  - Bộ đếm bước (Bộ đếm bước)\* hiển thị số bước đã đi trong ngày theo kết quả đo bằng gia tốc kế trong (các) máy trợ thính.
- **Active minutes (Số phút hoạt động)**
  - Số phút đã dành để thực hiện hoạt động trong ngày, chẳng hạn như đi bộ, chạy hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động tương tự nào có cường độ trung bình đến cao khi đang đeo (các) máy trợ thính.

\* Tính năng chỉ được cung cấp ở một số mẫu máy trợ thính.

## Tab Support (Hỗ trợ)

Tìm thông tin hữu ích để hỗ trợ hành trình gắn bó với máy trợ thính trong tab **Support** (Hỗ trợ), bao gồm:

- Thông báo từ Coach
- Mẹo dùng ứng dụng
- Video hướng dẫn
- Các câu hỏi thường gặp

## Tab More (Thêm)

Tab **More** (Thêm) cho phép bạn tìm thêm các cài đặt ứng dụng và thông tin pháp lý liên quan đến ứng dụng.

## Khắc phục sự cố

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy truy cập trang hỗ trợ của Unitron tại [unitron.com/support](https://unitron.com/support)

### Ngôn ngữ ứng dụng

Ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ứng dụng sẽ tự động khớp với ngôn ngữ của hệ điều hành điện thoại nếu ngôn ngữ đó được hỗ trợ. Nếu ngôn ngữ của điện thoại không được hỗ trợ, ngôn ngữ mặc định sẽ là tiếng Anh.

### Lỗi kết nối máy trợ thính

Nếu đang gặp sự cố khi kết nối với ứng dụng, bạn có thể chọn **Forget Devices** (Quên thiết bị) và thử ghép đôi lại.

Nếu muốn kết nối một cặp máy trợ thính khác với ứng dụng thì trước tiên, bạn phải xóa thông tin ghép đôi của các máy trợ thính hiện đang kết nối. Sau đó, bạn có thể ghép đôi các thiết bị mới.

### Quên thiết bị

Đi tới **My Devices** (Thiết bị của tôi) để xóa thiết bị của bạn. Sau khi nhấn vào nút **Forget devices** (Quên thiết bị), sẽ xuất hiện một thông báo bật lên yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa thiết bị của mình.





LƯU Ý: sau khi quên thiết bị, bạn sẽ cần ghép đôi lại máy trợ thính để sử dụng ứng dụng.


## Thông tin tuân thủ

### Tuyên bố hợp chuẩn

Theo đây, Sonova AG tuyên bố rằng sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của Quy định về thiết bị y tế (EU) 2017/745.

### Mô tả biểu tượng

	Với biểu tượng CE, Sonova AG xác nhận rằng sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của Quy định về thiết bị y tế (EU) 2017/745. Các số nằm sau biểu tượng CE tương ứng với mã của các cơ quan được chứng nhận, đóng vai trò là bên tham vấn theo quy định nêu trên.
 Tên, địa chỉ, ngày	Biểu tượng kết hợp “nhà sản xuất thiết bị y tế” và “ngày sản xuất” theo định nghĩa trong Quy định (EU) 2017/745 của Liên minh châu Âu.
	Cho biết Đại diện được ủy quyền tại Liên minh châu Âu. EU REP cũng là đơn vị nhập khẩu vào Liên minh châu Âu.
	Cho biết thiết bị này là thiết bị y tế.
	Cho biết số danh mục của nhà sản xuất để có thể nhận dạng thiết bị y tế.
	Chỉ dẫn này cho biết hiện đã có hướng dẫn sử dụng phiên bản điện tử.
	Biểu tượng này cho biết người dùng nhất thiết phải đọc và xem xét những thông tin liên quan trong các tài liệu hướng dẫn sử dụng này.
	Biểu tượng này cho biết người dùng cần chú ý đến các thông báo cảnh báo có liên quan trong hướng dẫn sử dụng này.
	Thông tin quan trọng về xử lý và an toàn sản phẩm.

	<p>Từ hiệu và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth® SIG, Inc. và việc Sonova AG sử dụng các nhãn hiệu như vậy đã được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác thuộc về các chủ sở hữu tương ứng.</p>
<p>©</p>	<p>Biểu tượng bản quyền.</p>

## Thông tin an toàn quan trọng

Vui lòng đọc thông tin an toàn liên quan trên các trang dưới đây trước khi dùng ứng dụng.

### Mục đích sử dụng

Mục đích sử dụng của ứng dụng là để lựa chọn, điều chỉnh và lưu các chức năng hiện có của máy trợ thính, truy cập thông tin trạng thái và giao tiếp không dây giữa Người dùng cuối và Chuyên gia chăm sóc thính lực theo cách trực quan.

### Đối tượng bệnh nhân dự kiến

Thiết bị này dành cho bệnh nhân bị mất thính lực một bên và cả hai bên từ 17 tuổi trở lên.

### Người dùng dự kiến

Người dùng dự kiến là người bị mất thính lực đang sử dụng một thiết bị tương thích.

### Chỉ định

Lưu ý rằng các chỉ định không lấy từ ứng dụng mà xuất phát từ các máy trợ thính tương thích.

### Chống chỉ định

Lưu ý rằng các chống chỉ định không lấy từ ứng dụng mà xuất phát từ các máy trợ thính tương thích.

### Lợi ích lâm sàng

Các lợi ích lâm sàng không lấy từ ứng dụng mà xuất phát từ các máy trợ thính tương thích.

Ứng dụng cung cấp các lợi ích sau cho người dùng dự kiến:

- Giúp người dùng có thể điều chỉnh và lưu cài đặt máy trợ thính theo nhu cầu cá nhân, trong phạm vi hạn chế như được xác định trong lần điều chỉnh ban đầu.
- Giúp Người dùng cuối giữ liên lạc với HCP của họ thông qua chức năng hỗ trợ từ xa.

### Tác dụng phụ

Lưu ý rằng các tác dụng phụ không lấy từ ứng dụng mà xuất phát từ các máy trợ thính tương thích.

### Hạn chế sử dụng

Việc sử dụng ứng dụng sẽ bị hạn chế bởi khả năng của (các) thiết bị tương thích.

Bạn cần báo cho phía đại diện nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền tại tiểu bang nơi cư trú nếu xảy ra bất kỳ biến cố nghiêm trọng nào liên quan đến ứng dụng này. Sự cố nghiêm trọng là sự cố bất kỳ, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến, có thể đã dẫn đến hoặc có thể dẫn đến bất kỳ điều nào sau đây:

- bệnh nhân, người dùng hoặc người khác bị tử vong
- sự suy giảm nghiêm trọng tạm thời hoặc vĩnh viễn tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, người dùng hoặc người khác
- mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng

Để báo cáo một hoạt động hoặc sự việc không mong muốn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại diện.

Để xem dạng điện tử của hướng dẫn sử dụng dành cho toàn bộ các phiên bản ứng dụng bằng tất cả các ngôn ngữ áp dụng, bạn có thể truy cập <https://www.unitron.com/appguide>.

Ngoài ra, để truy cập trực tiếp phiên bản hướng dẫn sử dụng Unitron hiện tại từ ứng dụng, bạn có thể chuyển đến màn hình **More** (Thêm), chọn **About the app** (Giới thiệu về ứng dụng) và sau đó, nhấn vào đường liên kết hướng dẫn sử dụng ở cuối màn hình.

### Thông báo bảo mật

Dữ liệu bệnh nhân là dữ liệu riêng tư và việc bảo vệ dữ liệu này rất quan trọng:

- Đảm bảo điện thoại thông minh được cập nhật phiên bản bảo mật Hệ điều hành mới nhất. Bất tính năng cập nhật tự động.
- Đảm bảo đã cài đặt phiên bản ứng dụng mới nhất.

- Chỉ sử dụng các ứng dụng chính hãng của Sonova từ các cửa hàng chính thức cho máy trợ thính.
- Đảm bảo đặt mật khẩu mạnh và bảo mật thông tin đăng nhập.
- Khóa điện thoại bằng mã PIN và/hoặc tính năng sinh trắc (ví dụ: dấu vân tay, khuôn mặt) và cài đặt điện thoại để tự động khóa sau một vài phút không hoạt động.
- Đảm bảo chỉ cấp quyền cần thiết cho các ứng dụng đã cài đặt.
- Tránh tạo kết nối ghép đôi Bluetooth® cho máy trợ thính ở nơi công cộng. Điều này là nhằm tránh rủi ro bị bên thứ ba can thiệp một cách không mong muốn. Bạn nên tạo kết nối ghép đôi Bluetooth® vừa nêu tại nhà.
- KHÔNG sử dụng điện thoại bị bẻ khóa hoặc bị root. Đảm bảo dữ liệu luôn an toàn. Lưu ý rằng danh sách này không đầy đủ.
- Khi truyền dữ liệu qua các kênh không an toàn, hãy gửi dữ liệu ẩn danh hoặc mã hóa dữ liệu.
- Bảo vệ các bản sao lưu dữ liệu của điện thoại thông minh tránh khỏi mất dữ liệu và bị trộm cắp.
- Xóa tất cả dữ liệu khỏi điện thoại thông minh mà bạn không còn sử dụng hoặc sẽ thải bỏ.

### **Bảo trì phần mềm**

Chúng tôi liên tục theo dõi phản hồi từ thị trường. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với phiên bản ứng dụng mới nhất, vui lòng liên hệ với đại diện nhà sản xuất tại địa phương và/hoặc cung cấp phản hồi trong App Store hoặc Cửa hàng Google Play.

- Thao tác thay đổi cài đặt, ví dụ: giảm âm lượng, tắt tiếng máy trợ thính hoặc tăng độ “Giảm tiếng ồn”, có thể dẫn đến các mối nguy hiểm như không còn nghe thấy tiếng phương tiện giao thông đang đi đến.
- **Nếu máy trợ thính không phản hồi với thiết bị do nhiễu trường bất thường, hãy di chuyển ra khỏi trường nhiễu. Kích hoạt Bluetooth. Bạn phải bật Bluetooth để kết nối với máy trợ thính. Nếu máy trợ thính không phản hồi, vui lòng kiểm tra đảm bảo máy trợ thính đã bật và còn pin.**
- **Bạn có thể tìm đọc hướng dẫn tại: [unitron.com/appguide](http://unitron.com/appguide) ở định dạng PDF Adobe® Acrobat®. Để xem các hướng dẫn, bạn phải cài đặt Adobe Acrobat Reader. Truy cập Adobe.com để tải xuống.**
- **Để có được bản sao các hướng dẫn miễn phí, vui lòng liên hệ với đại diện Unitron tại địa phương của bạn. Bạn sẽ nhận được bản sao trong vòng 7 ngày.**

### **Thông tin về khả năng tương thích**

Để sử dụng Unitron Remote Plus app, bạn cần có máy trợ thính Unitron kết nối không dây Bluetooth®. Bạn có thể sử dụng Unitron Remote Plus app trên các thiết bị có khả năng kết nối Bluetooth® Năng lượng thấp (BT-LE) và tương thích với iOS từ Phiên bản 16 trở lên. Bạn có thể sử dụng Unitron Remote Plus app trên các thiết bị Android được Google Mobile Services (GMS) chứng nhận, có hỗ trợ Bluetooth® 4.2 và HĐH Android phiên bản từ 10.0 trở lên.

**Một số điện thoại có âm cảm ứng hoặc âm bàn phím, những loại âm thanh này có thể được truyền trực tiếp đến (các) máy trợ thính. Để tránh điều này, hãy đi đến phần cài đặt của điện thoại, chọn âm thanh và đảm bảo rằng tất cả âm cảm ứng và âm bàn phím đều bị tắt.**

**Các tính năng có trong Unitron Remote Plus app sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại máy trợ thính được kết nối. Chỉ một số tính năng mới có sẵn ở tất cả các máy trợ thính.**

App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. Android, Google Play và logo Google Play là nhãn hiệu của Google Inc.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28 ·  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
[www.unitron.com](http://www.unitron.com)

**sonova**  
HEAR THE WORLD



Và đơn vị nhập khẩu dành cho Liên minh châu Âu:  
Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen · Germany

**CE**  
0459

Hướng dẫn sử dụng này có thể áp dụng cho Unitron Remote Plus app phiên bản 5.4 và những phiên bản phụ được phát hành về sau của Unitron Remote Plus 5 app. Để biết thêm thông tin về các phiên bản trước của hướng dẫn sử dụng ứng dụng, vui lòng liên hệ với đại diện tại địa phương hoặc truy cập trang web.