


Easy Line™ Pro

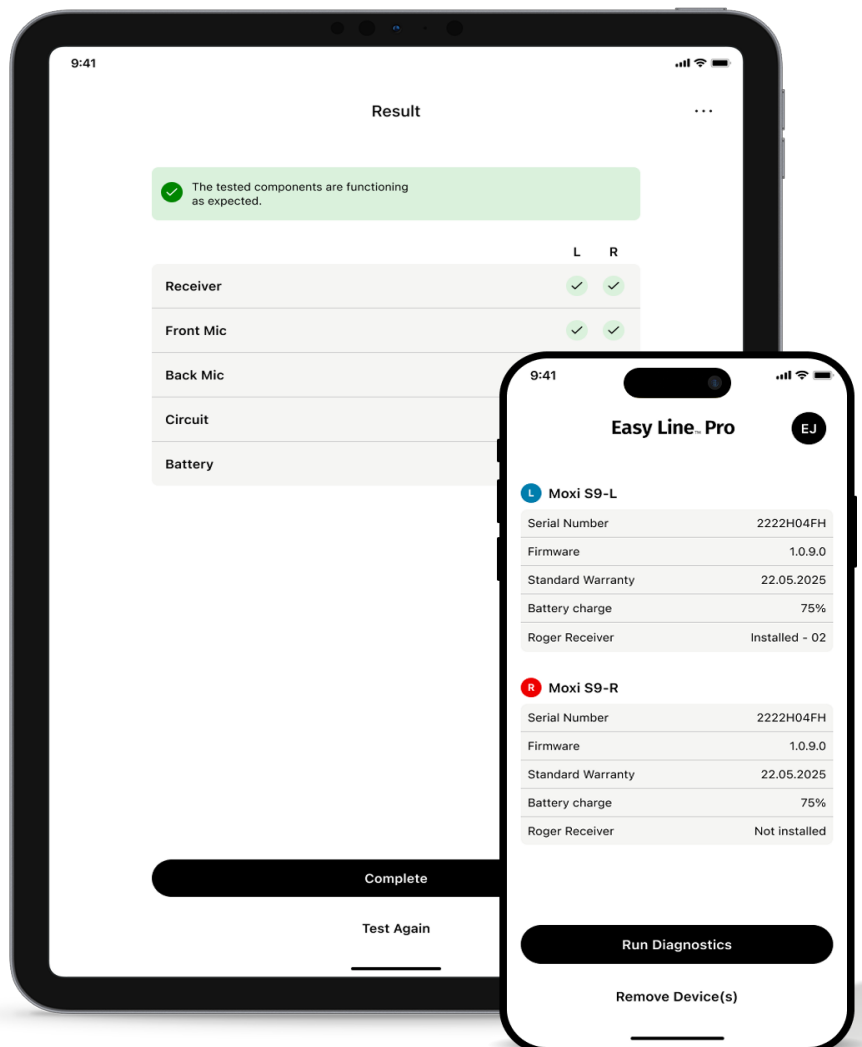

Mode d'emploi — Easy Line Pro 1.0



Démarrage

Easy Line Pro est une application de Sonova, leader mondial de solutions auditives basé à Zurich, en Suisse.

Ce mode d'emploi présente les fonctions qui sont à la disposition des utilisateurs de l'application.

-  Lisez minutieusement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'application afin de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.
-  Aucune formation supplémentaire n'est requise pour utiliser l'application.



Informations concernant la compatibilité :

Des aides auditives avec connectivité sans fil Bluetooth® sur des plateformes spécifiques d'Unitron, de Hansaton, de marques privées, d'Amplifon et de Sennheiser sont requises pour utiliser l'application Easy Line Pro. Pour obtenir la liste complète des produits, veuillez contacter votre représentant local.

- Easy Line Pro peut être utilisé sur des appareils iOS® disposant de la fonctionnalité Bluetooth® Low Energy (LE) fonctionnant sous iOS® 18 ou version ultérieure.
- Easy Line Pro peut être utilisé sur les appareils Android™ certifiés Google Mobile Services (GMS) prenant en charge le Bluetooth® 4.2 et Android OS 13.0 et versions ultérieures.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sonova AG est faite sous licence.

iOS® est une marque déposée ou une marque de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays.


Android est une marque de commerce de Google LLC.

Table des matières

Installation de Easy Line Pro	4
Connexion à Easy Line Pro : myUnitron	5
Connexion à Easy Line Pro : compte Invité	6
Appairage avec des aides auditives	7
Vue d'ensemble de la page d'accueil	8
Résolution des problèmes : appairage	9
Évaluation diagnostique	10
Instructions de diagnostic – Préparer les appareils pour le test	11
Instructions de diagnostic	12
Erreurs possibles	12
Test de diagnostic	13
Résultats de diagnostic	14
Résultats de diagnostic de l'acoustique et du circuit	15
Résultats de diagnostic de la batterie	16
Commencer une demande de réparation	17
Saisie de la demande de réparation	18
Rapport de l'aide auditive (PDF)	19
Informations de sécurité importantes	20
Explication des symboles	21

Installation de Easy Line Pro

1. Connectez votre tablette ou votre smartphone à Internet par Wi-Fi ou par données cellulaires.
2. Téléchargez Easy Line Pro à partir de la boutique et installez l'application sur votre appareil.
3. Ouvrez l'application.

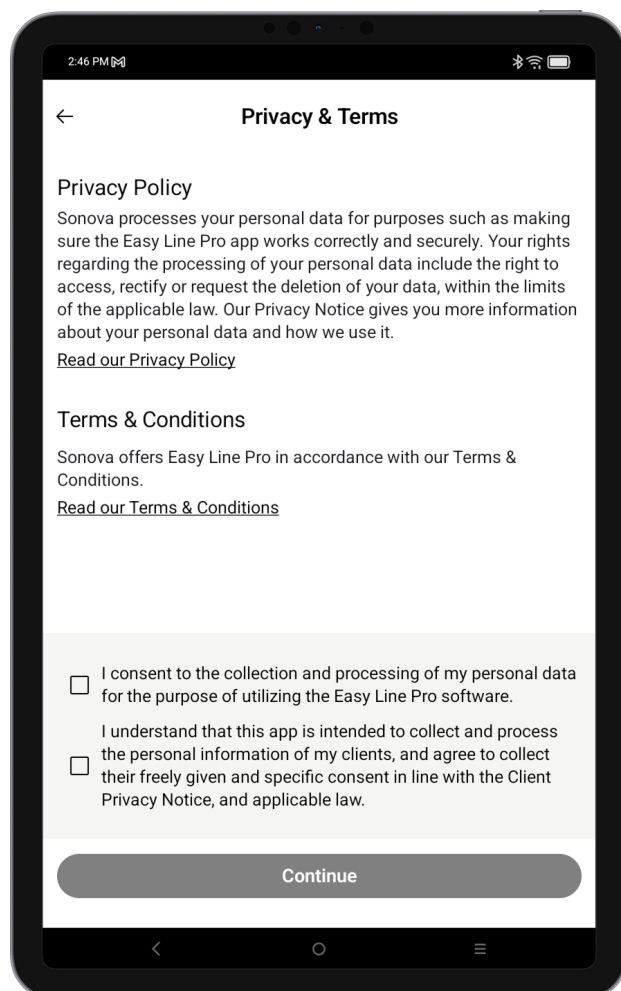

Politique de confidentialité

Pour pouvoir utiliser cette application, sélectionnez la case à cocher après avoir lu la Politique de confidentialité et les Conditions générales.


Puis, appuyez sur **Continue (Continuer)**.

Données patient

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir obtenu l'autorisation du patient pour partager ses données avec Sonova.


Connexion à Easy Line Pro : myUnitron

- Pour utiliser l'application, vous devez vous connecter à votre compte myUnitron.
Si vous n'avez pas de compte myUnitron, veuillez contacter votre représentant Unitron.

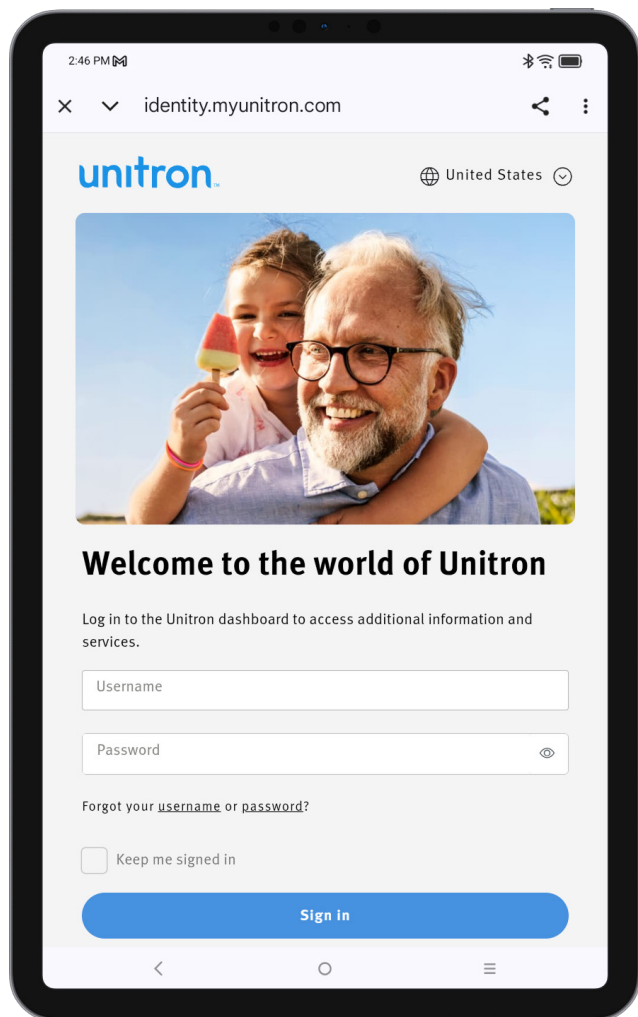

Page de connexion

Renseignez vos identifiants myUnitron ou le nom d'utilisateur et le mot de passe envoyés par Unitron afin d'accéder aux fonctionnalités de Easy Line Pro.

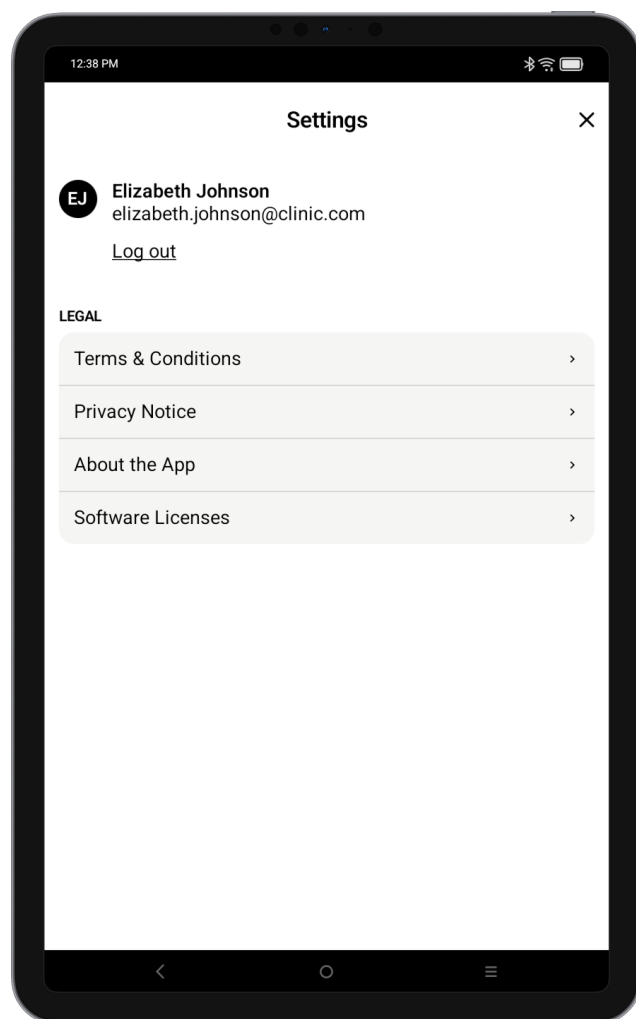


Détails personnels

Une fois connecté, vous pouvez afficher votre nom, la section relative aux mentions légales et vous déconnecter depuis l'application.


Connexion à Easy Line Pro : compte Invité

- Si vous ne pouvez pas utiliser de compte myUnitron, vous pouvez vous connecter en tant qu'Invité. Veuillez contacter votre représentant local pour que votre adresse e-mail soit ajoutée à la connexion en tant qu'Invité.
- Veuillez noter que certaines fonctionnalités, telles que consulter la garantie ou Commencer une demande de réparation, ne sont pas accessibles en tant qu'Invité.

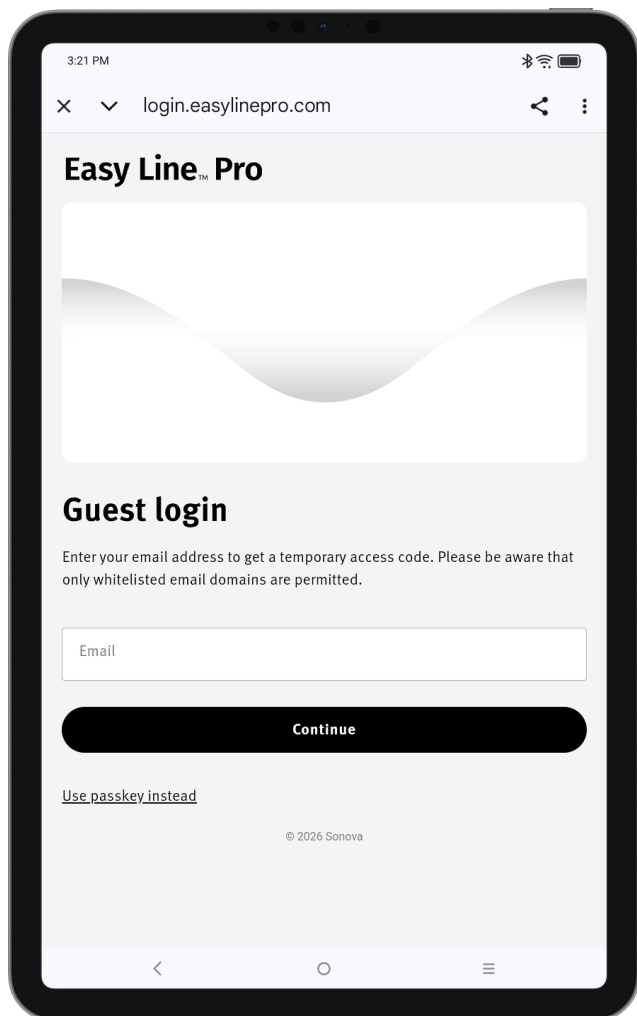

Connexion en tant qu'invité

Renseignez votre adresse e-mail.

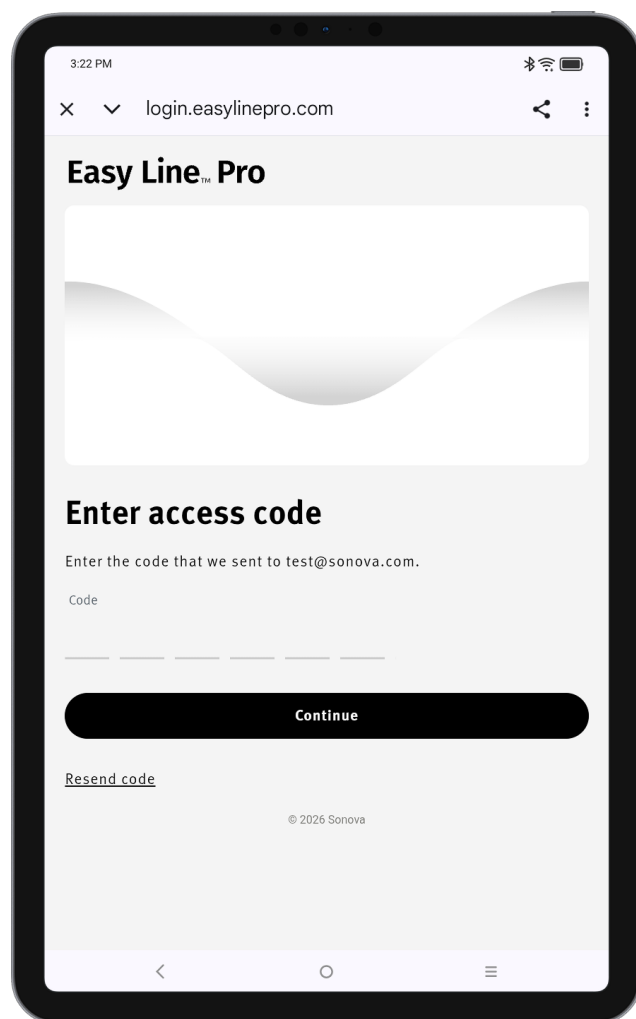


Saisir le code

Si votre adresse e-mail est autorisée à accéder à Easy Line Pro, vous recevrez un code d'accès à usage unique (One Time Passcode, OTP). Saisissez-le ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer un mot de passe pour passer l'étape de l'OTP lors de votre prochaine connexion.


Appairage avec des aides auditives

Pour connecter des aides auditives avec fonctionnalité Bluetooth® à Easy Line Pro, après avoir vérifié que le Bluetooth est bien activé, suivez les instructions ci-dessous.

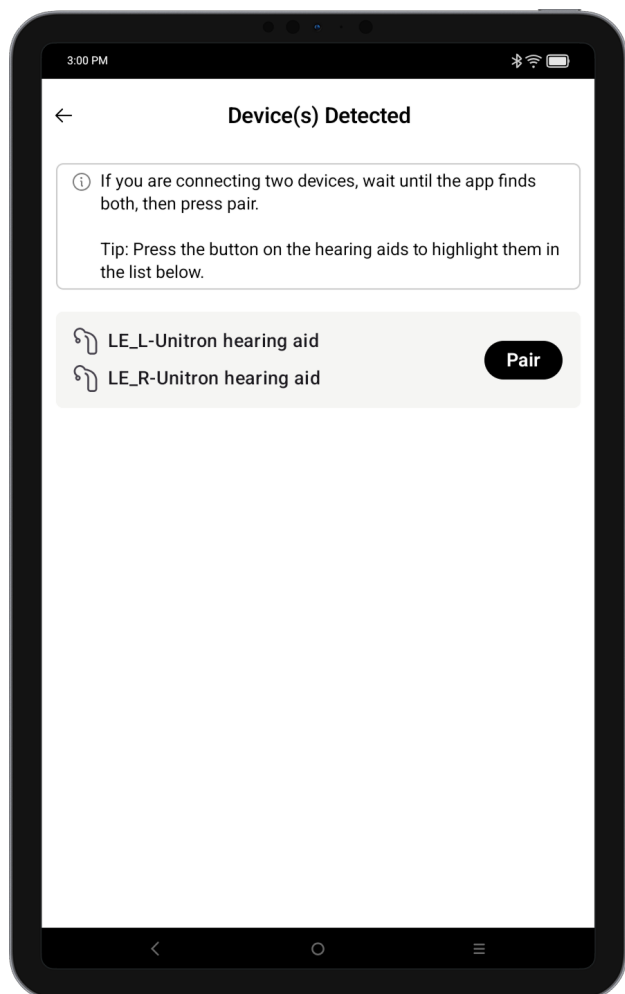

Recherche en cours

L'application cherche des aides auditives compatibles. Cela peut prendre quelques secondes. Si vous connectez deux appareils, attendez que l'application trouve les deux. Confirmez l'appairage en appuyant sur **Pair (Appairer)** dans la fenêtre contextuelle.

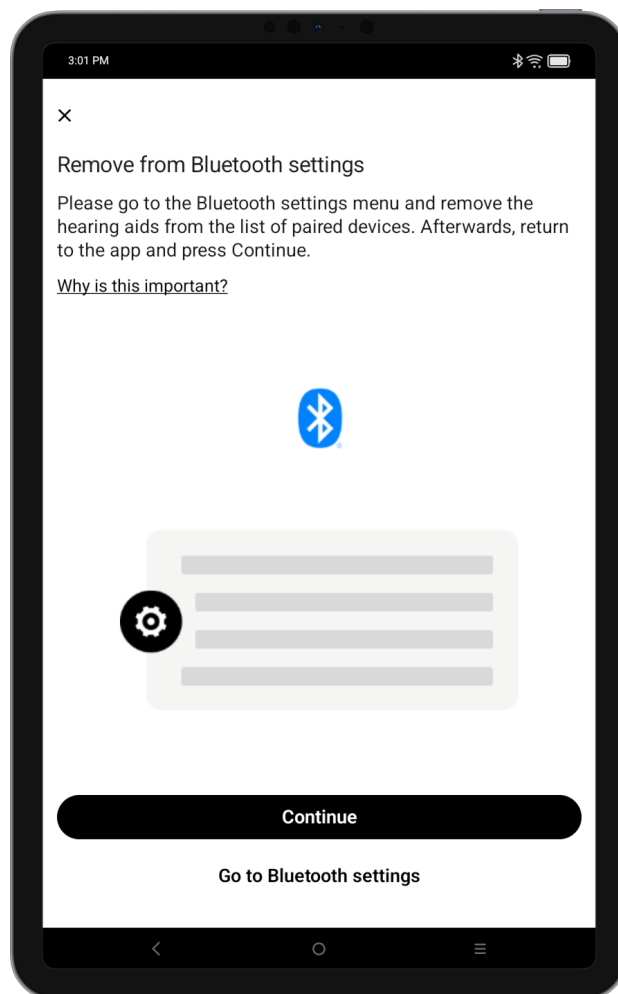

Gestion de l'appareil


Lorsque vous devez connecter un nouvel ensemble d'aides auditives, retirez les anciens appairages Bluetooth après chaque session. Cette action permet d'assurer le bon fonctionnement du système et d'éviter les problèmes de connexion à long terme. Afin d'assurer la stabilité du système, supprimez les appairages du menu du système Bluetooth après chaque session. Cela permet de prévenir l'accumulation de connexions et de simplifier toute utilisation future. Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion de nouveaux appareils, vérifiez que les anciens appairages ont été supprimés.

i Sur les appareils Android, vous devez activer les services de localisation lorsque vous appairez des appareils Bluetooth® pour la première fois. Après la première configuration, vous pourrez à nouveau désactiver les services de localisation. Cette application ne suit pas votre position.


i Si les aides auditives ne répondent pas, veuillez vous assurer que vous êtes suffisamment proche du téléphone ou de la tablette, que les appareils sont allumés/en mode appairage et que les batteries ne sont pas vides. Si un appareil à proximité crée des interférences, essayez de vous en éloigner.

Vue d'ensemble de la page d'accueil

Page d'accueil (appareils appairés)

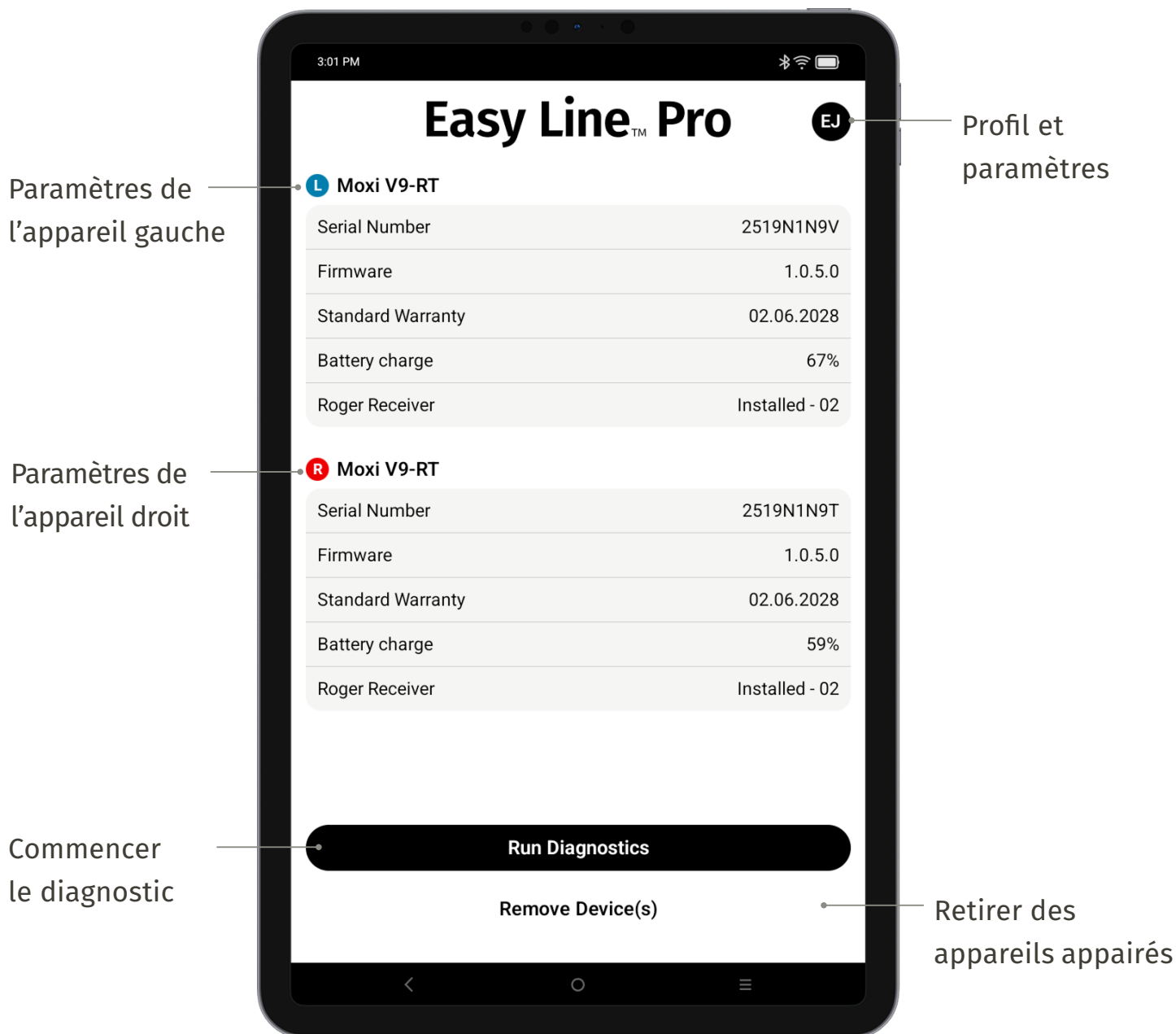

Résolution des problèmes : appairage

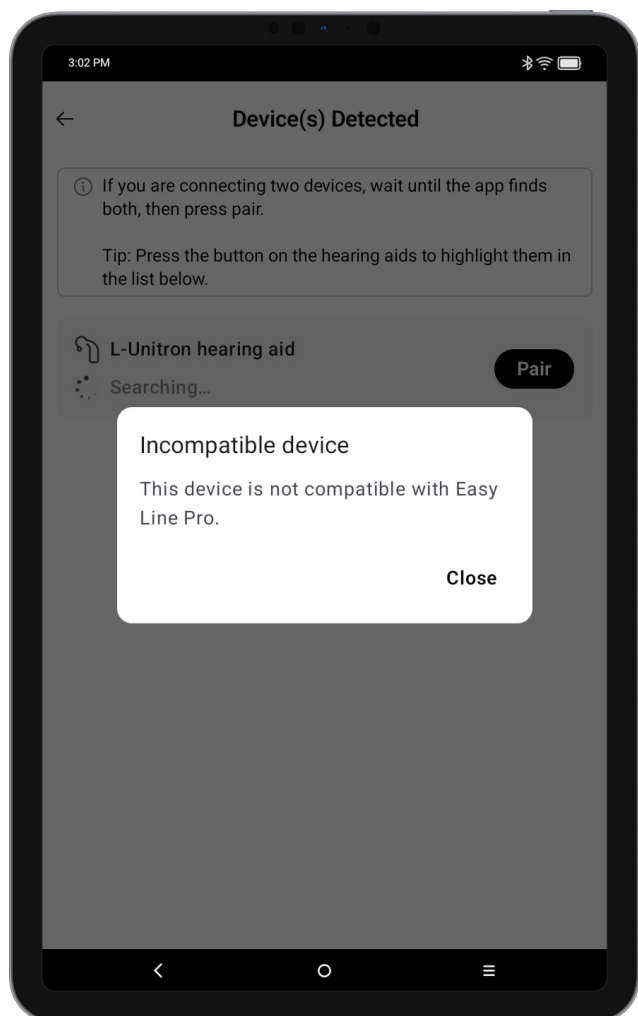


Appareils incompatibles

L'application ne parvient pas à se connecter aux aides auditives, car celles-ci ne sont pas compatibles.

Erreur de connexion à l'aide auditive

Si l'appairage d'une des aides auditives échoue, appuyez sur **Try again (Réessayer)** pour redémarrer le mode appairage.

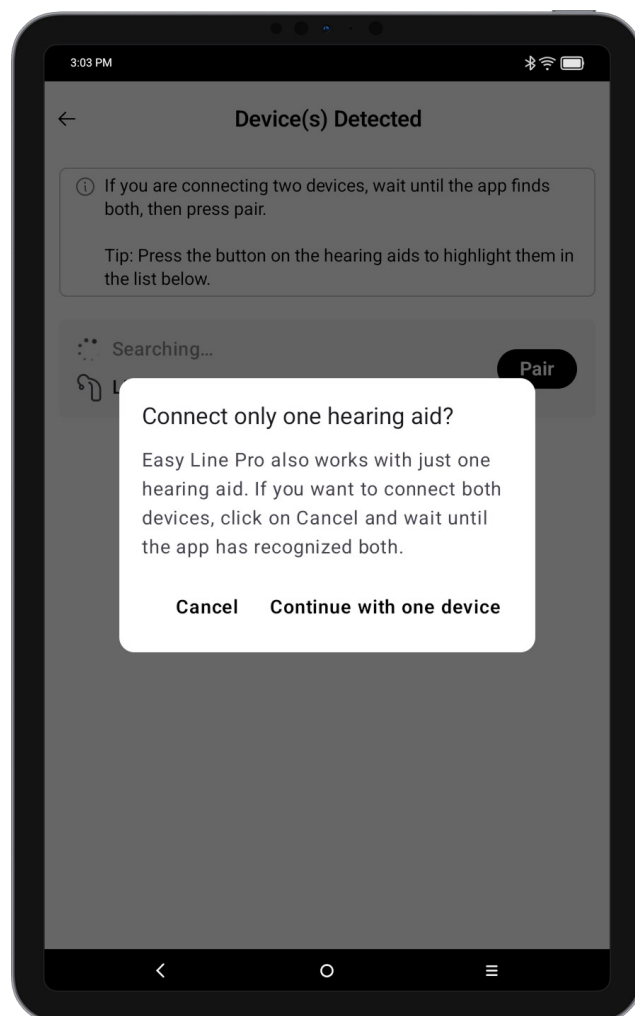


Les aides auditives peuvent être testées individuellement.

Si l'appareil appairé n'est pas disponible ou ne fonctionne pas.

Aides auditives sans appareillage

Une aide auditive sans appareillage ne peut être testée qu'en tant qu'appareil monaural. Veuillez tester les appareils en séquence.

Évaluation diagnostique

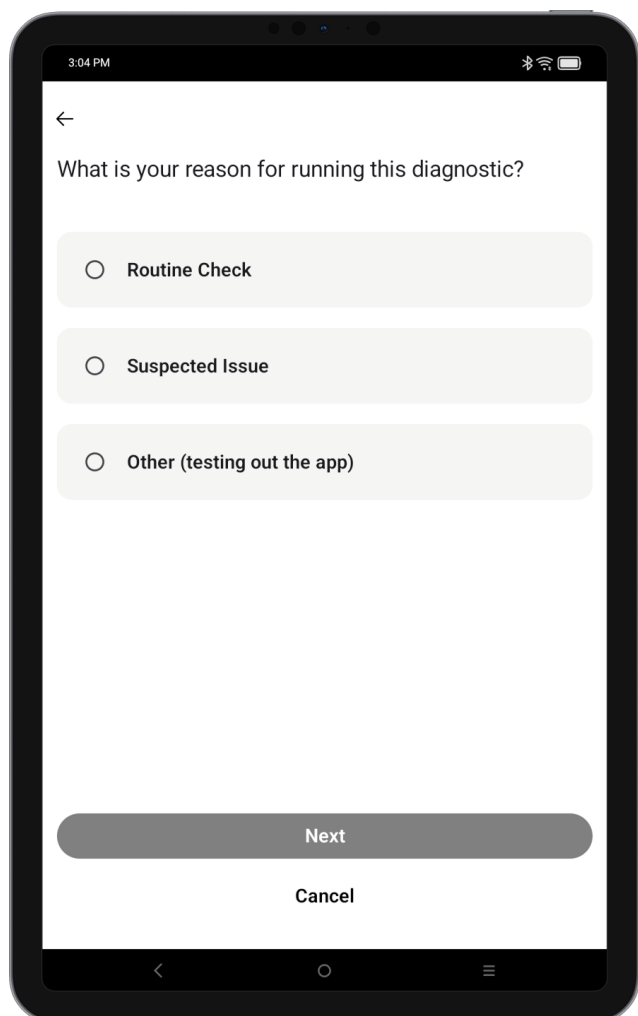

3:04 PM

←

What is your reason for running this diagnostic?

- Routine Check
- Suspected Issue
- Other (testing out the app)

Next


Cancel

Sélectionnez la raison du test de diagnostic

Vérification de routine si vous voyez un patient et qu'aucun problème n'est signalé.

Problème suspecté si vous ou le patient remarquez un problème avec l'aide auditive.

Autre si vous vous familiarisez simplement avec l'application.

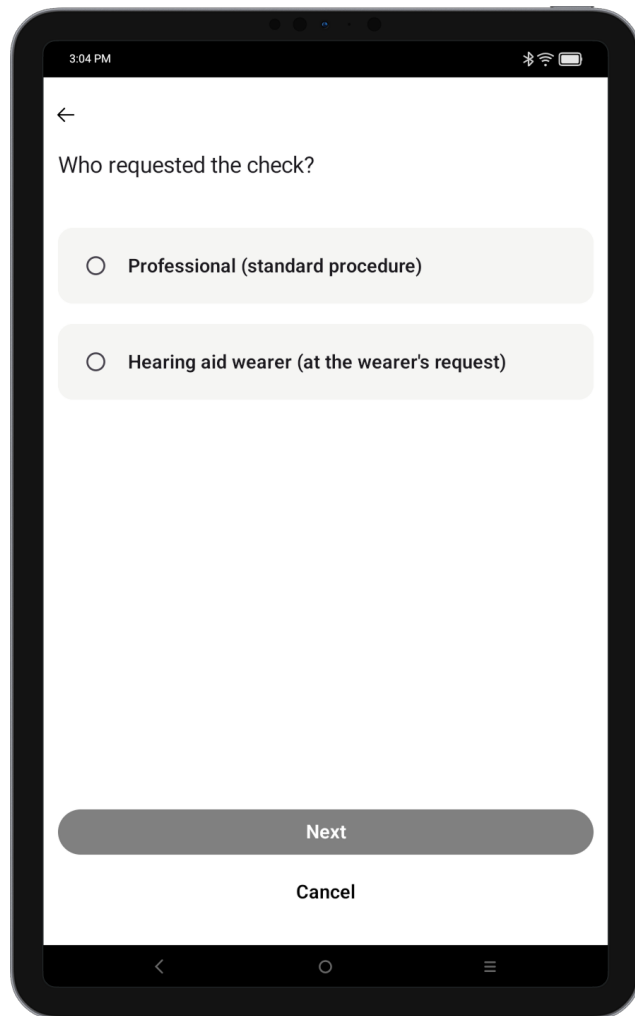

3:04 PM

←

Who requested the check?

- Professional (standard procedure)
- Hearing aid wearer (at the wearer's request)



Next

Cancel

Qui demande cette vérification, cette information nous aidera à améliorer notre service et à mieux vous servir.

Instructions de diagnostic

Préparer les appareils pour le test

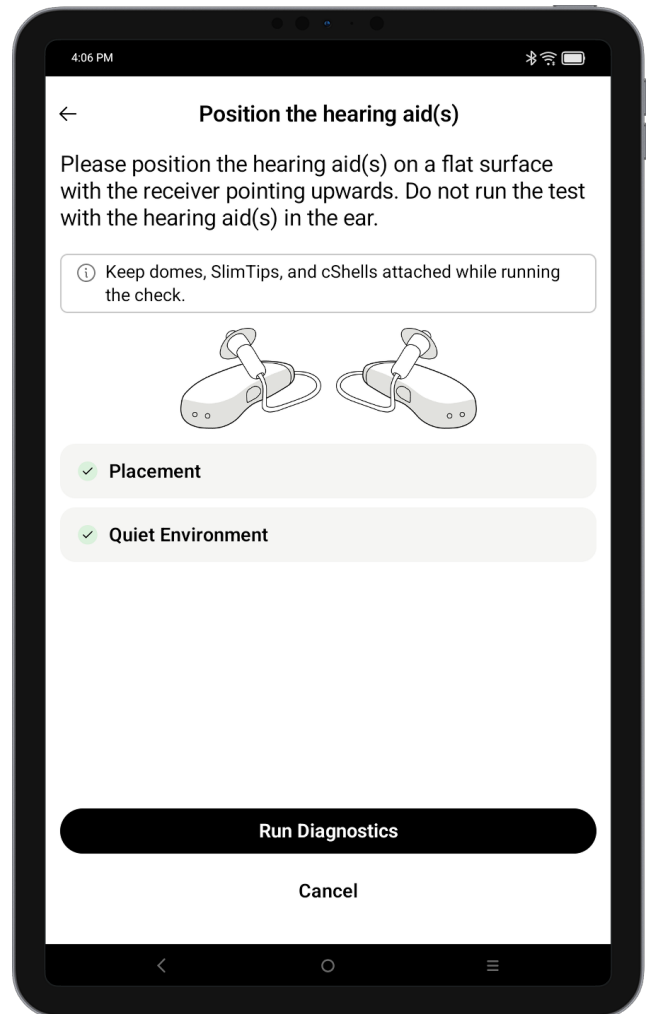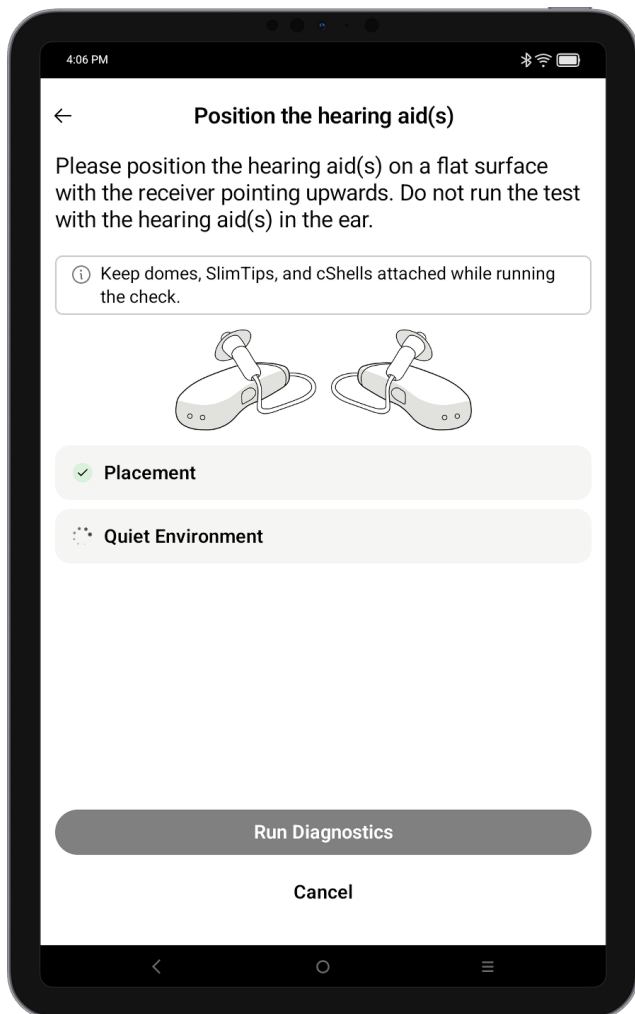

Vérification de l'orientation et du bruit environnemental


Avant d'effectuer les diagnostics, l'application vérifie si les aides auditives sont placées sur la table, le récepteur vers le haut. Pour garantir le bon déroulement du test, un test de bruit ambiant est effectué.

Lancer le diagnostic

Le test peut être lancé si toutes les vérifications ont été réalisées avec succès. En cas d'avertissement, veuillez suivre les instructions sur l'écran afin de résoudre le problème avant de lancer le diagnostic.


Instructions de diagnostic

Préparer les appareils pour le test

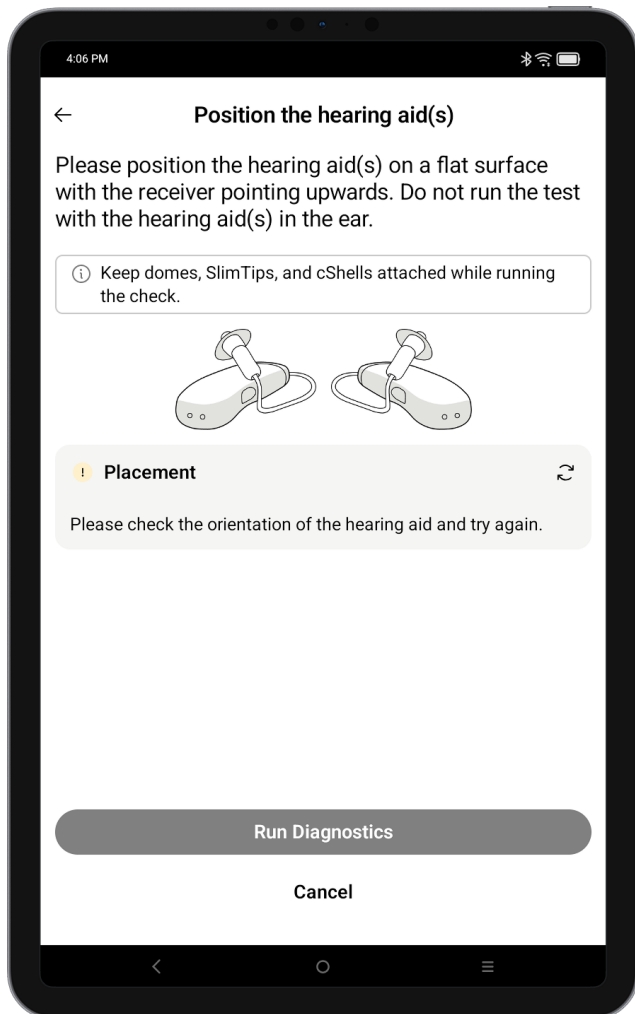

Vérifier l'orientation

Le récepteur doit être placé face vers le haut sur une surface plane. L'application vérifie l'orientation grâce à l'accéléromètre présent dans les aides auditives. Cliquez sur l'icône de rafraîchissement pour vérifier à nouveau l'orientation. Vous ne serez pas en mesure de poursuivre tant que l'orientation n'aura pas été vérifiée.

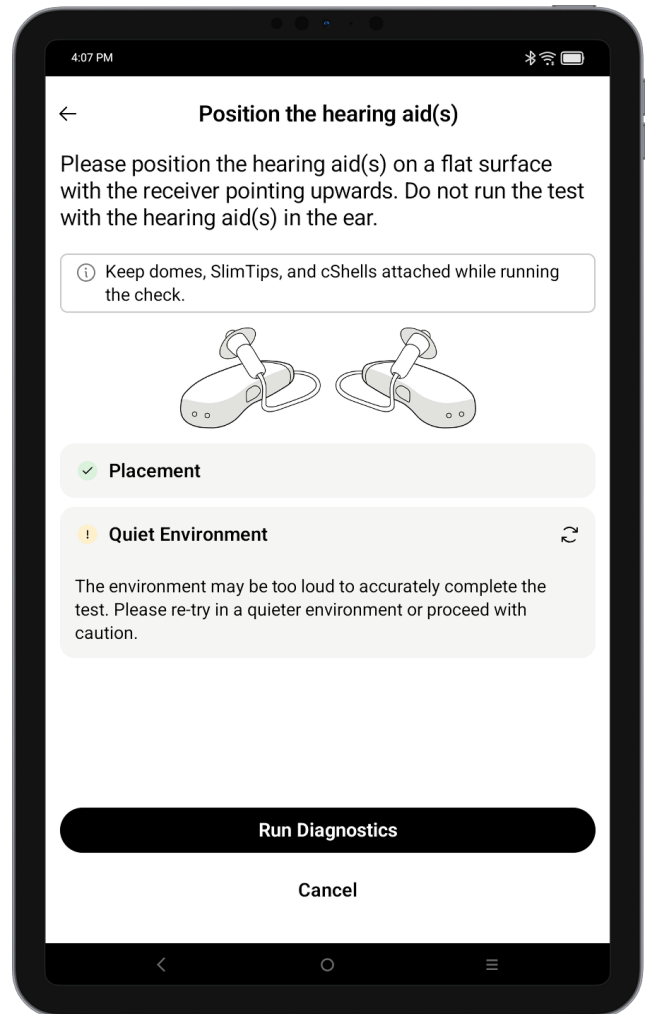


Environnement intense

L'application effectue une vérification du niveau de bruit dans l'environnement actuel et veille à ce que celui-ci ne soit pas suffisamment bruyant pour perturber les résultats du test. Si le contrôle échoue, veuillez vous assurer que les aides auditives soient dans un environnement calme, puis appuyez sur l'icône de rafraîchissement pour vérifier à nouveau les niveaux de bruit. Si l'environnement est toujours trop bruyant, vous pouvez poursuivre et effectuer le test, mais vous devrez garder à l'esprit que les résultats peuvent être impactés.


Test de diagnostic

La durée du test est d'environ 6 à 8 secondes par appareil. Un appareillage binaural sera testé en séquence.

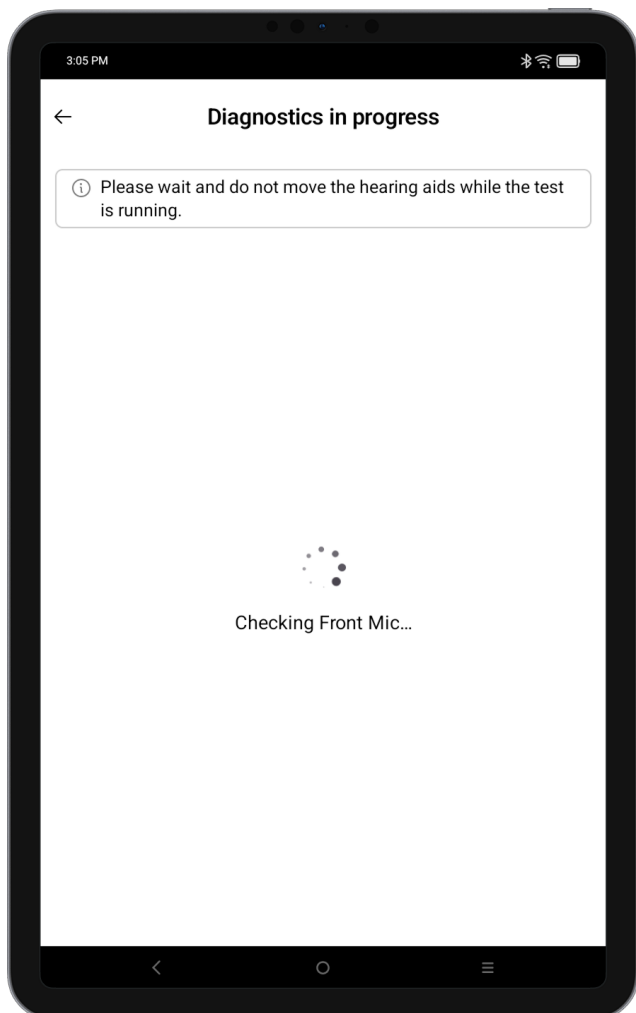

Pendant le test


Évitez de déplacer les appareils ou de générer davantage de bruit pendant l'exécution du test.

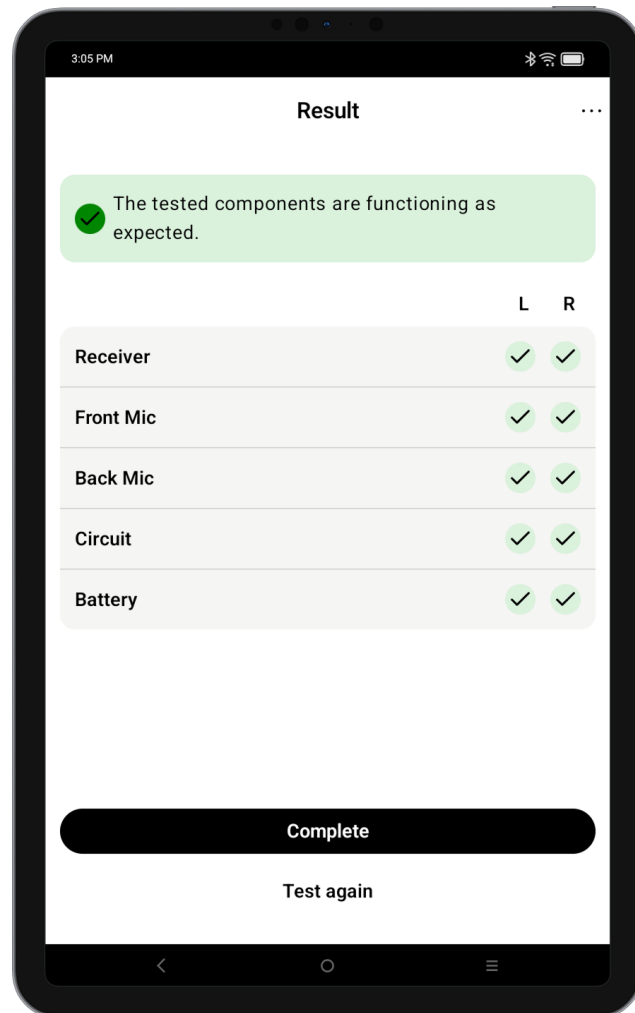

Résultats du test

Le test vérifie chaque fonction du composant. Vous aurez accès à une vue d'ensemble des résultats pour l'aide auditive droite et l'aide auditive gauche séparément.

Résultats de diagnostic

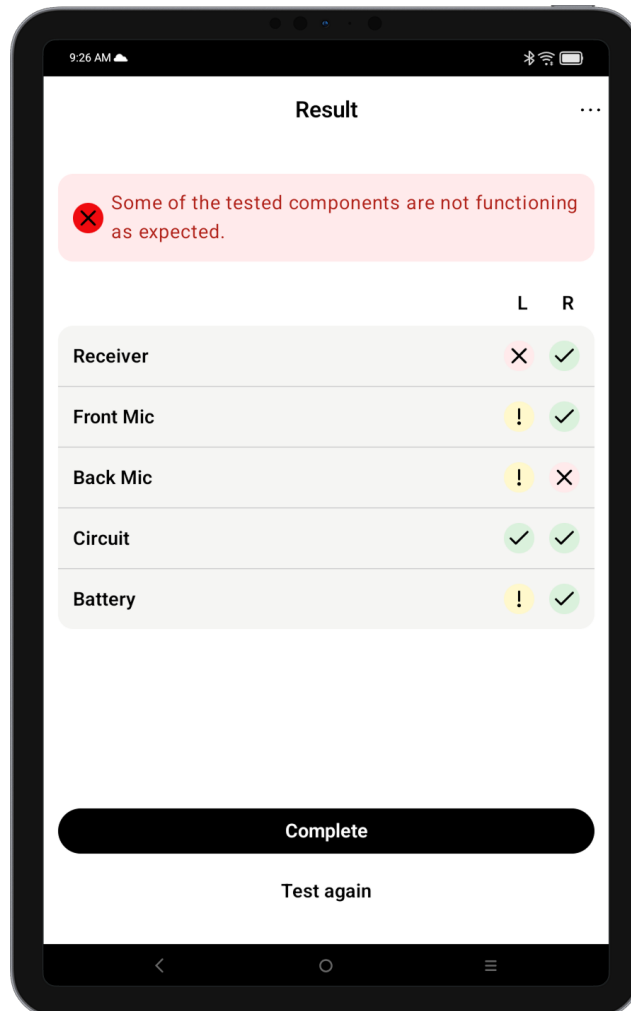


Gestion des erreurs

Si un composant testé échoue au test, il sera affiché ici. Remarque : si le test du récepteur échoue, les microphones ne peuvent pas être vérifiés et seront marqués « non concluant » jusqu'à ce que le récepteur soit remplacé et le test de nouveau effectué.

Résultats de diagnostic de l'acoustique et du circuit

Lors du test, le récepteur et les microphones avant et arrière seront vérifiés. Vous obtiendrez un rapport détaillé de tout problème détecté pour chaque appareil. La vérification du circuit vérifie si les aides auditives s'appairent correctement et effectuent les contrôles diagnostiques.

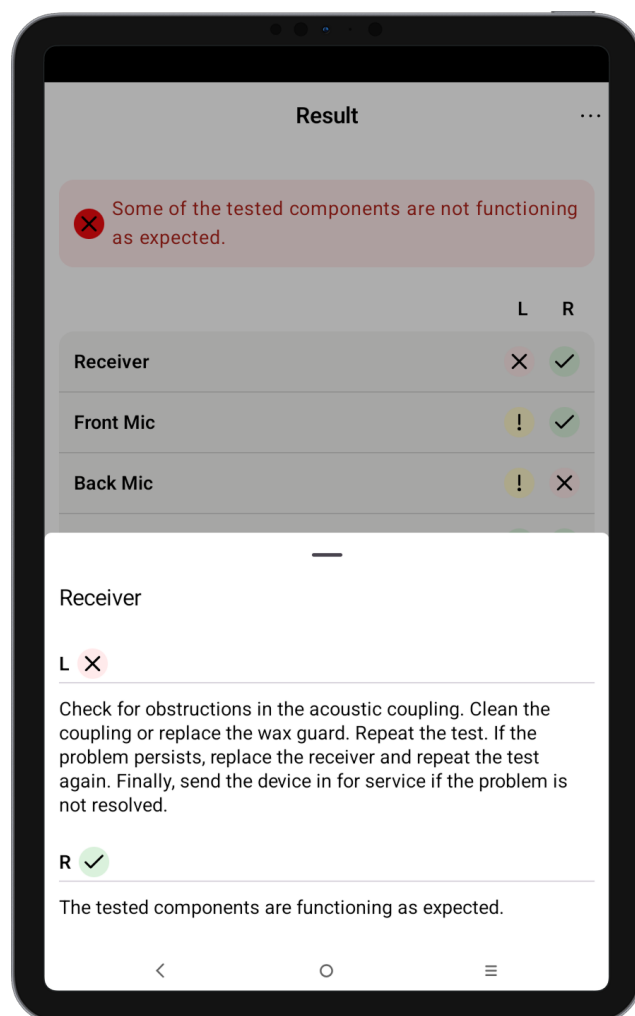


Informations détaillées

Les composants peuvent être sélectionnés afin d'obtenir plus d'informations et des instructions de dépannage supplémentaire.

Résultats de diagnostic de la batterie

Pendant le test, les batteries rechargeables sont vérifiées. Vous obtiendrez un rapport détaillé pour chaque appareil.

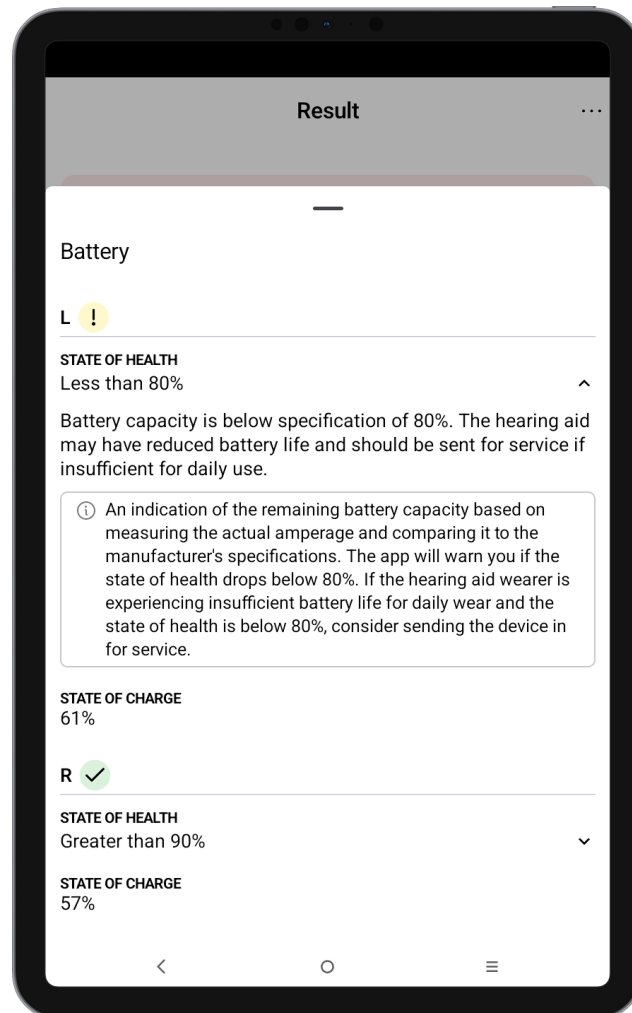


Informations concernant la pile


Les composants de la batterie peuvent être sélectionnés, et vous pouvez consulter l'état de santé et de charge de la pile ou de la batterie.

Commencer une demande de réparation

- Une fois le test terminé, une demande de réparation peut être initiée directement depuis l'application si le professionnel est connecté à son compte myUnitron.
- Les problèmes détectés seront renseignés automatiquement dans le formulaire de demande de réparation.

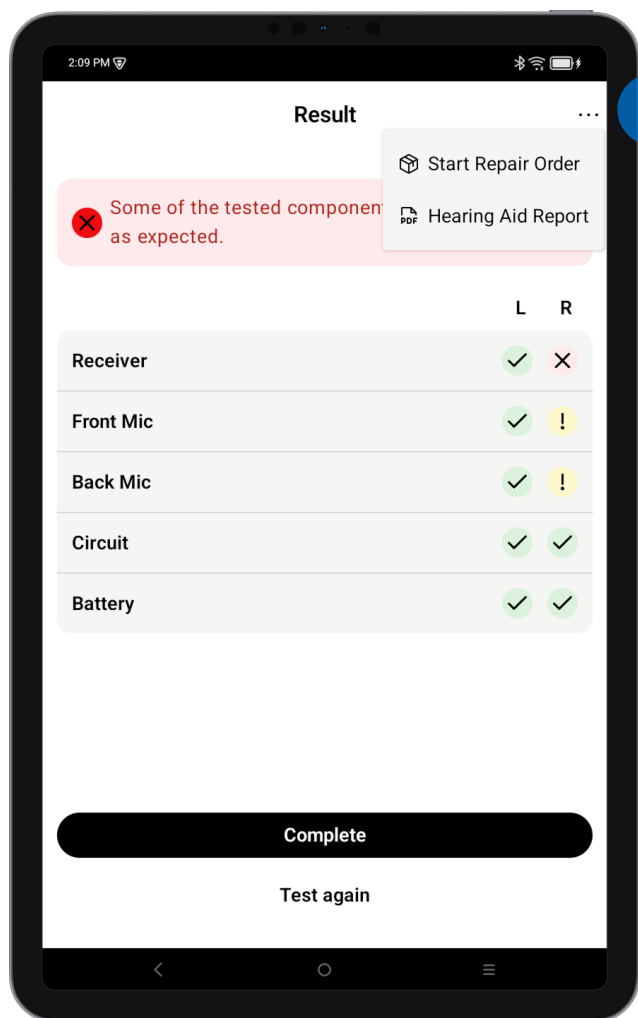

1

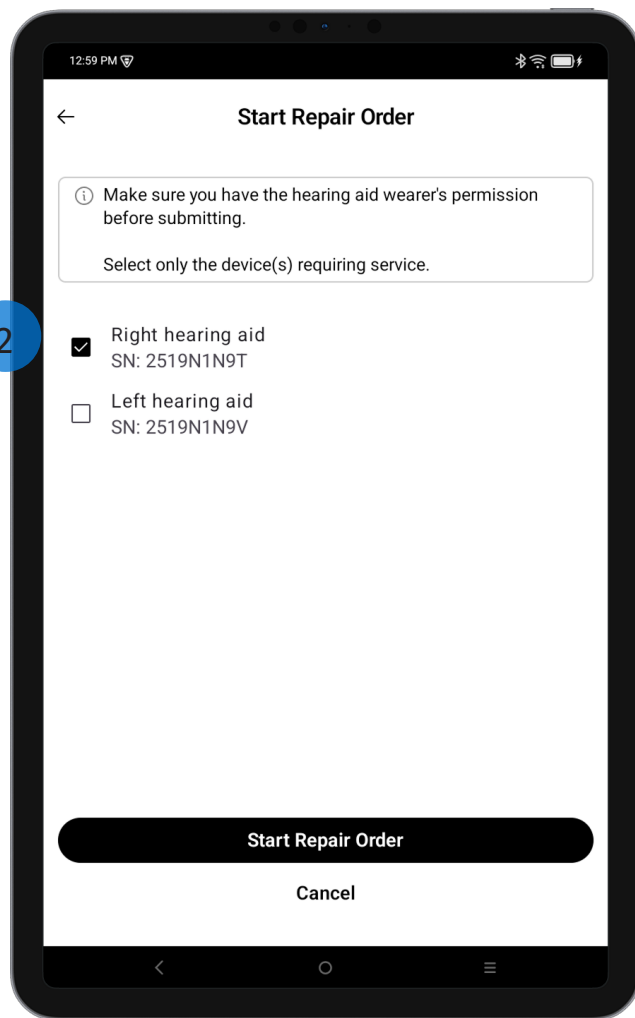

2

1 Menu des résultats

Appuyez sur les trois points en haut à droite pour ouvrir le menu. Appuyez sur **Start Repair Order (Commencer la demande de réparation)** pour sélectionner les appareils pour lesquels vous souhaitez initier une demande de service.

2 Sélectionner les appareils

Sélectionnez les aides auditives que vous souhaitez envoyer en réparation, puis sélectionnez **Start Repair Order (Commencer la demande de réparation)**.

i Cette fonctionnalité n'est disponible que dans les pays où la saisie de demande de réparation est déjà disponible via la boutique Unitron.

Saisie de la demande de réparation

- Le formulaire de demande de réparation de la boutique Unitron s'ouvrira dans le navigateur mobile.
- Remplissez le formulaire comme vous le feriez sur votre ordinateur.

3:34 PM

b2b-s1.myunitron.com

Repair Order

Enter details Summary Confirmation

Repair Order

1 Select Reason

SERIAL #	PRODUCT	REASON	
2516N2XCY	Moxi V-R FLEX:TRIAL (platinum)	[Dead]	Select...
2516N2XD0	Moxi V-R FLEX:TRIAL (platinum)	[Output resp Too weak]	Select...

Next 1

2 Service Type

Créer une demande de réparation

Les aides auditives sélectionnées seront déjà renseignées dans le formulaire de demande de réparation. De plus, si l'application a détecté un problème, le code motif approprié sera présélectionné.

Si l'application n'a détecté aucun problème, veuillez sélectionner un code motif.

1

Appuyez sur **Next (Suivant)** pour continuer à remplir le formulaire.

Go to summary 2

3:35 PM

Patient ID

Purchase Order #

Remarks

Optional Information Edit

Patient Name

Patient Address

City

Province

Postal code

Patient Phone Number

Submit Order 3

Love the experience.

© Sonova. All rights reserved.

A Sonova brand Privacy Policy Terms and Conditions Repair Terms and Conditions

f t i n @

2

Complétez toutes les sections du **formulaire** en défilant vers le bas et en appuyant sur chaque catégorie jusqu'à ce que vous voyiez **Go to summary (Aller au résumé)**.

3


Vérifiez le résumé. Si toutes les informations sont exactes, appuyez sur **Submit Order (Soumettre la demande)**.

Vérifiez votre e-mail

Pour imprimer la demande de réparation et la joindre aux appareils.

Rapport de l'aide auditive (PDF)


- Lorsque le test est terminé, un rapport de l'aide auditive peut être généré au format PDF.
- Un résumé des résultats du diagnostic est présenté dans un format accessible pour le patient.
- Le document PDF peut être partagé grâce aux options de partage du système d'exploitation.

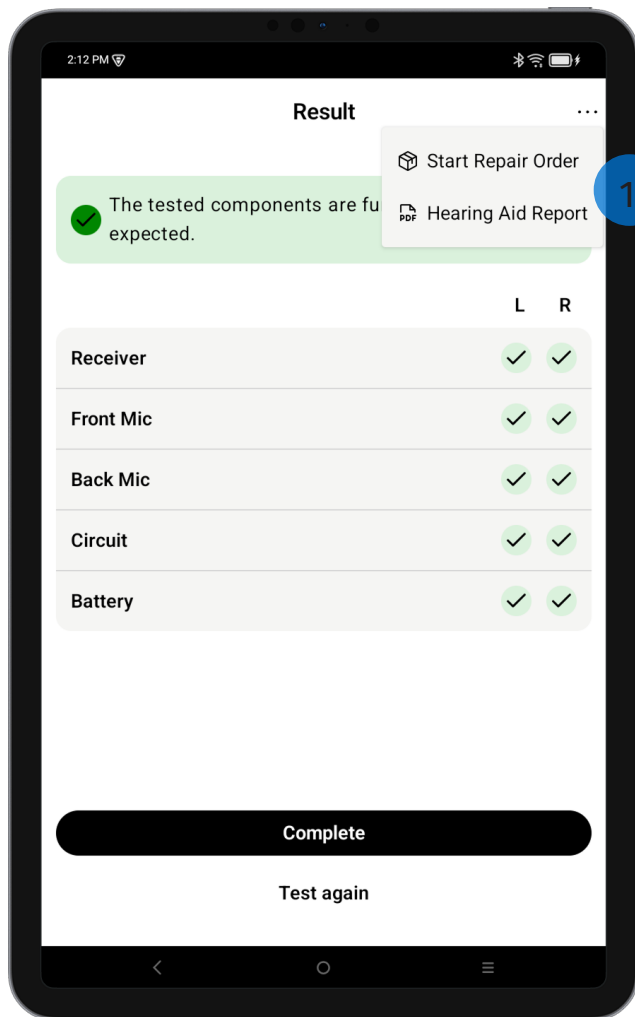

1

Rapport de l'aide auditive

Appuyez sur les trois points en haut à droite pour ouvrir le menu. Appuyez sur **Hearing Aid Report (Rapport de l'aide auditive)** pour générer un résumé des résultats au format PDF.

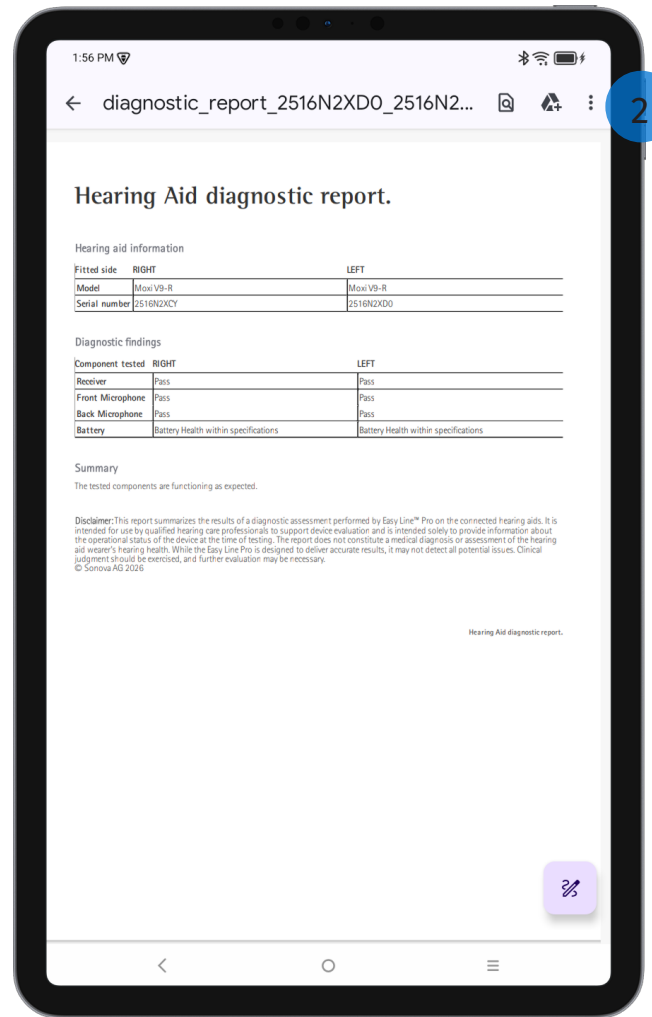

2

Partager le rapport

Sélectionnez le menu de partage dans votre visionneuse PDF et partagez le document avec votre patient selon votre méthode préférée.

Informations de sécurité importantes

Veillez lire les informations de sécurité pertinentes fournies dans les pages suivantes avant d'utiliser votre application.

Notice de sécurité

Les données du patient sont privées et leur protection est essentielle :

- Assurez-vous que les smartphones sont à jour avec les dernières mises à jour de sécurité du système d'exploitation. Activez la mise à jour automatique.
- Assurez-vous que la version de l'application que vous avez installée est à jour.
- N'utilisez que des applications Sonova authentiques provenant de magasins officiels avec vos aides auditives.
- N'installez que des applications réputées provenant de boutiques officielles.
- Veillez à utiliser des mots de passe forts et à garder vos identifiants secrets.
- Verrouillez votre téléphone avec un code PIN et/ou des données biométriques (p ex., empreinte digitale, visage) et réglez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.
- Assurez-vous que les applications installées ne disposent que des autorisations dont elles ont besoin pour fonctionner.
- Évitez de créer un appairage Bluetooth avec vos aides auditives dans un lieu public. Cela est dû au risque d'interférence involontaire d'un tiers. Nous vous recommandons d'effectuer cet appairage Bluetooth à la maison.
- N'utilisez PAS de téléphone débridé ou rooté. Veillez à toujours protéger vos données. Sachez que cette liste n'est pas exhaustive.
- Lors du transfert de données par des canaux non sécurisés, envoyez des données anonymes ou cryptez-les.
- Protégez les sauvegardes de données de votre smartphone, non seulement contre les pertes de données, mais aussi contre le vol.
- Supprimez toutes les données d'un smartphone qui n'est plus utilisé par vous ou qui va être mis au rebut.

Explication des symboles



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur veille aux précautions importantes signalées dans ce mode d'emploi.



Informations importantes pour la manipulation et la sécurité du produit.




Indique que des instructions d'utilisation électronique sont disponibles. Le mode d'emploi est accessible sur le site Internet www.unitron.com



Indique le numéro de catalogue du fabricant.

Fabricant :
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suisse

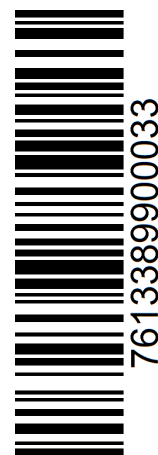

029-7034-04 / V1.00 / 2026-02 / CZ © 2026 Sonova AG Tous droits réservés.

Ce mode d'emploi est applicable à Easy Line Pro 1.0 et aux sous-versions ultérieures de l'application Easy Line Pro.

Pour obtenir le mode d'emploi d'une version antérieure de l'application, veuillez contacter votre représentant local, ou consultez le site Internet.

Pour obtenir gratuitement un exemplaire papier des instructions d'utilisation, contactez votre représentant Sonova. Un exemplaire vous sera envoyé sous un délai de 7 jours.