



Ajuste Remoto


Guia rápido



O Ajuste Remoto oferece suporte conveniente aos seus pacientes com as regulagens de ajuste fino que podem ser aplicadas sempre que forem necessárias. Ele proporciona a flexibilidade para fornecer atendimento profissional independentemente da localização de seu paciente. Com o Ajuste Remoto, você pode ampliar seu atendimento para além da clínica de modo a propiciar uma experiência auditiva aprimorada que é personalizada de acordo com as necessidades auditivas reais de seus pacientes.

Como fazer um ajuste


Etapa 1: ative os Insights

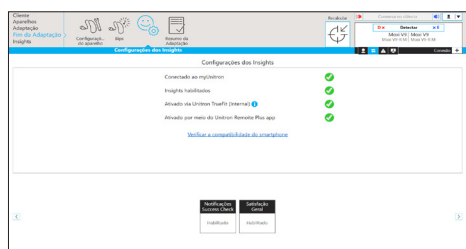

Fim da Adaptação > Configurações dos Insights

- Para realizar um ajuste, certifique-se de fazer o login em **myUnitron** com os Insights habilitados no momento da adaptação
- Garanta que seu paciente instale o aplicativo Remote Plus e ative os Insights
- Você pode verificar se seu paciente ativou os Insights na tela **Fim da Adaptação** > **Configurações dos Insights**

Etapa 2: inicie uma sessão de Ajuste Remoto

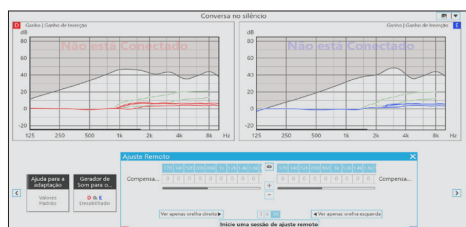

Na tela **Ajuste Fino** > **Ajuste Remoto**, selecione **Iniciar uma sessão de Ajuste Remoto**

- Para iniciar uma sessão de Ajuste Remoto, abra a sessão mais recente de seu paciente no software Unitron TrueFit
- Vá para **Adaptação** > **Ajuste Fino**
- Clique na caixa de ferramentas do Ajuste Remoto na parte inferior e selecione o botão **Iniciar uma sessão de Ajuste Remoto**

Observação: não é possível iniciar uma sessão de Ajuste Remoto se houver aparelhos auditivos conectados ao software de adaptação.

Como funciona o Ajuste Remoto

Este fluxo de trabalho fácil o capacita para simplificar a jornada auditiva para você e para seus pacientes



O ajuste é feito no software de adaptação Unitron TrueFit™



O ajuste é enviado para a nuvem da Sonova




O paciente recebe uma notificação no smartphone por meio do aplicativo Remote Plus, e com um clique seleciona para aplicar o ajuste



O aplicativo Remote Plus aplica o ajuste aos aparelhos auditivos.

Etapa 3: inicie os ajustes

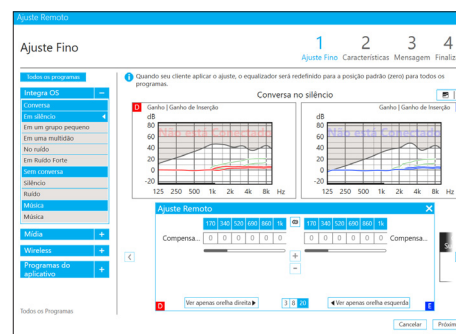


- O TrueFit apresentará um passo-a-passo com os ajustes que você pode fazer para o paciente.
- Primeiro, faça os ajustes de compensação de ganho, de acordo com a necessidade



Observação: caso o paciente esteja usando configurações diferentes daquelas da sessão que você abriu no software de adaptação TrueFit, você será solicitado a selecionar a quais configurações os ajustes devem ser aplicados. Caso ele esteja usando as mesmas configurações, você não precisará fazer isso.

Etapa 4: ajuste as características adaptativas

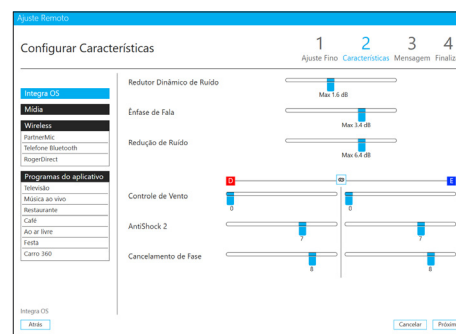


- Em seguida, faça os ajustes nas características adaptativas na tela **Configurar Características**

Os ajustes de características adaptativas não estão disponíveis para o Discover Next.

A Sonova brand




Etapa 5: envie o ajuste

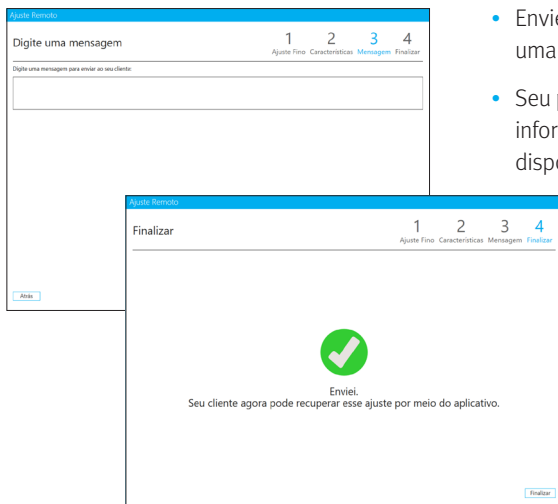

- Envie o ajuste ao seu paciente, junto com uma mensagem opcional personalizada
- Seu paciente receberá uma notificação informando-o de que possui um ajuste disponível

Etapa 6: consultas de acompanhamento

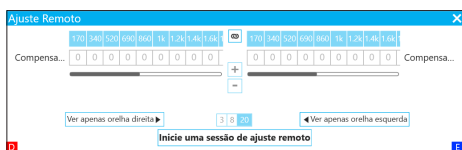

- Nas consultas de acompanhamento, após fazer a detecção dos dispositivos de seu paciente, você conseguirá ver os valores de compensação de ganho atualmente aplicados
- Você terá a opção de redefinir os valores de compensação de ganho para zero, sendo possível desfazer essa ação sempre que for preciso



A Unitron torna a vida vibrante com soluções auditivas incríveis projetadas para facilitar a experiência. **Love the experience.**™ Porque todo mundo merece amar a experiência.

© 2024 Sonova AG ou suas afiliadas.
029-6872-43/V2.00/2024-04/ARG

unitron.com

Como os pacientes recebem e aplicam os ajustes

Etapa 1: recebimento de uma notificação

Tornamos o uso do Ajuste Remoto fácil e objetivo: quando você enviar um ajuste, seu paciente receberá automaticamente uma notificação

Etapa 2: aplicação do ajuste

- Clique na notificação ou navegue para **Dispositivos > Ajuste Remoto** no aplicativo Remote Plus e toque no botão **Aplicar ajuste**
- O paciente ouvirá um bipe confirmando que o ajuste foi aplicado
- O paciente consegue reverter facilmente para as configurações anteriores ao selecionar **Ajuste Original**



Observação: você pode mandar vários ajustes. Todos os ajustes ficarão disponíveis no aplicativo Remote Plus até a próxima vez em que os aparelhos auditivos forem conectados ao software de adaptação.



Sonova AG,
Laubisrütistrasse 28,
CH-8712 Stäfa,
Switzerland



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oefflingen,
Germany



sonova
HEAR THE WORLD