



Ajuste remoto


Guía de inicio rápido



El ajuste remoto ofrece un apoyo conveniente para los paciente con ajustes finos que puedan aplicarse cuando sea necesario. Permite que pueda brindar atención médica sin importar donde se encuentre el paciente. Con el ajuste remoto puede expandir su atención médica más allá de la clínica para brindar una experiencia auditiva mejor, que esté a la medida de las necesidades auditivas del mundo real del paciente.

Realizar un ajuste


Paso 1: Activar Percepciones

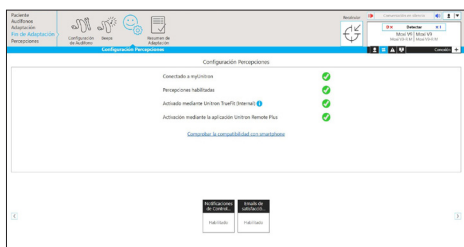

Finalizar adaptación > Configurar Percepciones

- Para realizar un ajuste, asegúrese de haber iniciado sesión en [myUnitron](#) y tener las percepciones habilitadas al momento de la adaptación
- Asegúrese que el paciente instale la aplicación Remote Plus y active Percepciones
- Puede revisar que el paciente haya activado Percepciones en [Finalizar adaptación](#) > pantalla [Configuración de Percepciones](#)

Paso 2: Iniciar una sesión de ajuste remoto

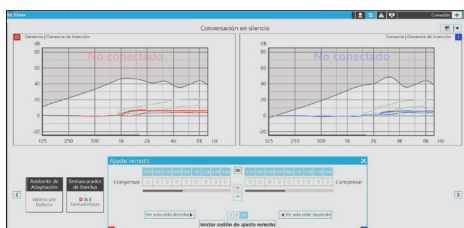

Desde la pantalla [Ajuste fino](#) > [Ajuste remoto](#), seleccione [Iniciar una sesión de ajuste remoto](#)

- Para iniciar una sesión de ajuste remoto, abra la sesión más reciente del paciente en el software de adaptación Unitron TrueFit
- Vaya a [Adaptación](#) > [Ajuste fino](#)
- Haga clic en las herramientas de ajuste remoto en la parte inferior y seleccione el botón [Iniciar una sesión de ajuste remoto](#)

Nota: No puede iniciar una sesión de ajuste remoto si los audífonos están conectados al software de adaptación.

Cómo funciona el ajuste remoto

Este fácil flujo de trabajo permite simplificar la trayectoria auditiva para el paciente y para usted



El ajuste se hace en el software de adaptación Unitron TrueFit™



Se envía el ajuste a la nube de Sonova




El paciente recibe una notificación en su smartphone por medio de la aplicación Remote Plus* y pulsa para aplicar el ajuste



La aplicación Remote Plus se encarga de aplicar el ajuste a los audífonos

Paso 3: Empezar el ajuste

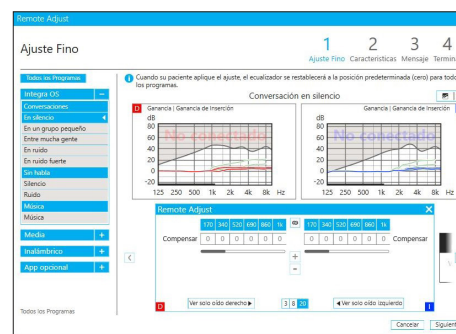


- El software de adaptación TrueFit le guiará paso a paso a través de los ajustes que puede hacer para la adaptación del paciente
- Primero, realice los ajustes de compensación de ganancia que sean necesarios



Nota: Si el paciente está usando una configuración diferente de la sesión que tiene abierta en el software de adaptación TrueFit, se le pedirá que seleccione la configuración que debe aplicar al ajuste. Si está usando la misma configuración, se omitirá este paso.


Paso 4: Ajustar las funciones adaptativas

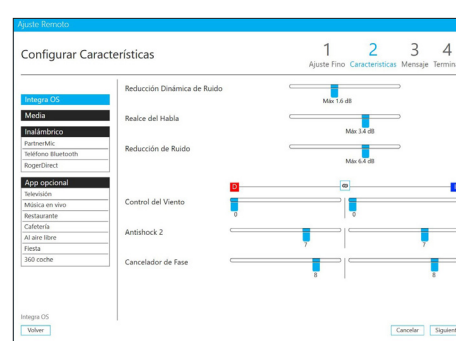

- Luego, ajuste las características adaptativas en la pantalla [Configurar funciones](#)




Paso 5: Enviar el ajuste

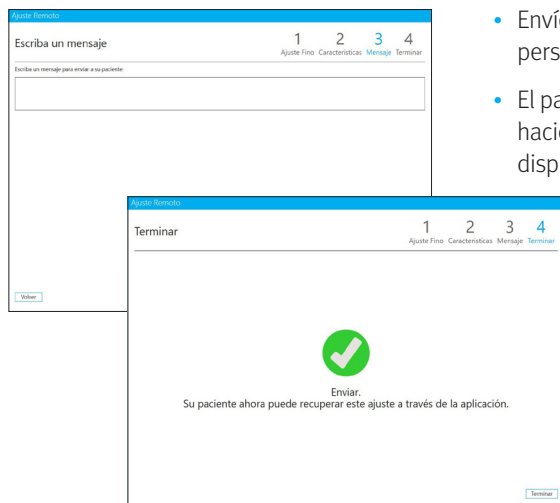

- Envíe el ajuste junto con un mensaje personalizado opcional para el paciente
- El paciente recibirá una notificación haciéndole saber que tiene un ajuste disponible

Paso 6: Citas de seguimiento

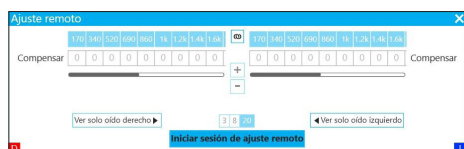

- En las citas de seguimiento, después de que haya detectado el dispositivo del paciente, podrá ver los valores de compensación de ganancia aplicados en ese momento
- Tendrá la opción de restablecer los valores de compensación de ganancia a cero, una acción que se puede deshacer en cualquier momento si es necesario



Unitron hace que la vida sea más emocionante con sus increíbles soluciones auditivas diseñadas para facilitar la experiencia. Porque todo el mundo merece **amar la experiencia**.

Cómo los pacientes reciben y aplican los ajustes

Paso 1: Recibir una notificación automática

El uso del ajuste remoto es simple y sencillo: cuando envíe un ajuste, el paciente recibirá una notificación automática

Paso 2: Aplicar el ajuste

- Haga clic en la notificación o diríjase a **Dispositivos > Ajuste remoto** en la aplicación Remote Plus y toque el botón **Aplicar ajuste**
- El paciente oír un pitido que confirma que se ha aplicado el ajuste
- El paciente puede revertir fácilmente los ajustes previos al seleccionar **Ajuste original**



Nota: Puede enviar múltiples ajustes. Todos los ajustes están disponibles en la aplicación Remote plus hasta la próxima vez que los audífonos estén conectados al software de adaptación.

