

# Guide d'utilisation du chargeur Unitron Combi BTE 2



Une marque Sonova

**unitron**™ Love the  
experience

## Merci

---

Merci d'avoir choisi ce chargeur Unitron Combi BTE 2.

Selon Unitron, fabricant de solutions auditives, chacun devrait pouvoir vivre une expérience de soins auditifs vraiment agréable. L'intelligence de nos produits, de nos services et de nos programmes offre un niveau de personnalisation absolument unique au monde. Préparez-vous à **adorer l'expérience.**

Ce guide d'utilisation s'applique aux produits suivants :

Accessoires de charge filaires



Unitron Charger Combi BTE 2

Power Pack optionnel



## Votre chargeur combi BTE

---

Aucune formation n'est requise pour la manipulation de cet appareil.

Le chargeur Unitron Combi BTE 2 est destiné à recharger les aides auditives rechargeables.

Un audioprothésiste vous aidera à configurer les aides auditives selon vos propres préférences.

Audioprothésiste : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Garantie : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

## Détails de votre chargeur

---

- ① Veuillez également lire les informations de sécurité concernant la manipulation du chargeur (chapitre 11).
- ① Le Power Pack contient une batterie au lithium polymère rechargeable intégrée et non amovible.

## Appareil

---

Le chargeur Unitron Combi BTE 2 comprend un adaptateur d'alimentation et un câble USB (< 1 m)

Le chargeur Unitron Combi BTE 2 est destiné à recharger les aides auditives rechargeables.

Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation pour vous assurer que vous comprenez et tirez le meilleur parti de votre chargeur. Pour plus d'informations concernant les fonctions, les avantages, l'installation, l'utilisation, l'entretien ou encore les réparations de votre appareil, contactez votre audioprothésiste ou le représentant du fabricant. Des informations supplémentaires sont disponibles sur la fiche technique de votre produit.

## Modèles d'aides auditives compatibles

---

- ☐ Stride B-PR (9/7/5/3/1)
- ☐ DX Stride PR (9/7/5/3)


## Table des matières

---


1. Votre chargeur en un coup d'œil.....	2
2. Préparation du chargeur.....	4
3. Chargement des aides auditives .....	5
4. Utilisation du Power Pack optionnel.....	11
5. Conditions d'utilisation, de transport et de stockage.....	13
6. Entretien et maintenance.....	14
7. Maintenance et garantie.....	16
8. Informations sur la conformité .....	18
9. Informations et explications sur les symboles.....	21
10. Guide de dépannage .....	24
11. Informations de sécurité.....	25

# 1. Votre chargeur en un coup d'œil


## Chargeur

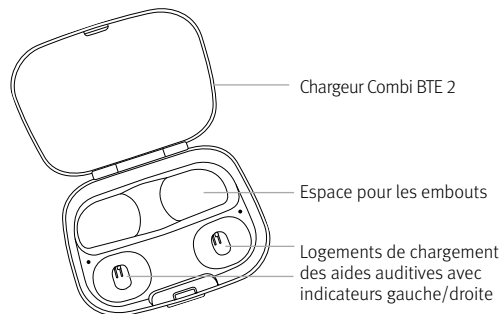


## Chargeur Combi BTE 2 avec Power Pack optionnel

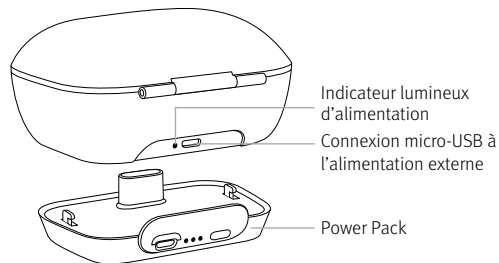

Connexion micro-USB à l'alimentation externe

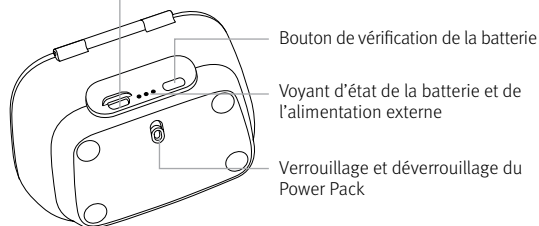

## Accessoires

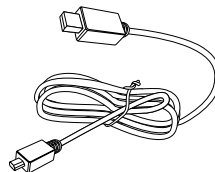

Câble USB (< 1 m)



Alimentation

Pour le chargeur, utilisez uniquement un équipement certifié IEC 60950-1\*, IEC 62368-1 et/ou IEC 60601-1 avec une puissance de sortie de 5 VCC, 500 mA au minimum.


## Spécifications de l'alimentation électrique et du chargeur

Tension de sortie de l'alimentation :	5 VCC +/- 5 %, courant 500 mA - 1 A
Tension d'entrée de l'alimentation :	100-240 VCA, 50/60 Hz, courant 0,25 A
Tension d'entrée du chargeur :	5 VCC +/- 5 %, courant 300 mA
Spécifications du câble USB :	5 V min. 1 A, USB-A vers micro-USB, longueur maximale de 1 m

\* Remarque : il est possible que cette norme ne soit plus valide dans votre pays ; veuillez vous référer à la norme IEC 62368-1

## 2. Préparation du chargeur

### Connexion de l'alimentation

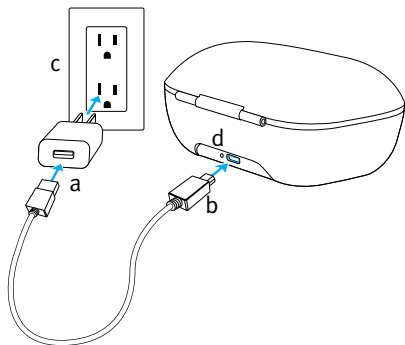


- a) Branchez la plus grande fiche du câble de charge sur l'alimentation.
- b) Branchez la plus petite fiche sur le port micro-USB du chargeur.
- c) Branchez l'alimentation sur une prise murale.
- d) L'indicateur lumineux s'allume en vert lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation.

## 3. Chargement des aides auditives

- ① Batterie faible : Deux bips seront émis pour indiquer que la batterie de l'aide auditive est faible. Vous disposerez alors de 60 minutes environ avant de devoir charger les aides auditives (ce délai peut varier selon les réglages des aides auditives).
- ① Avant d'utiliser vos aides auditives pour la première fois, il est recommandé de les charger pendant 3 heures.
- ① Les aides auditives doivent être sèches avant leur mise en charge (voir le chapitre 6).
- ① Assurez-vous de charger et d'utiliser les aides auditives à une température conforme à leur plage de température de fonctionnement normal : +5° à +40° Celsius.


Veuillez vous reporter au chapitre 2 pour savoir comment installer le chargeur.

1. Insérez les aides auditives dans les logements de chargement. Les aides auditives s'arrêtent automatiquement lorsqu'elles sont insérées dans le chargeur.

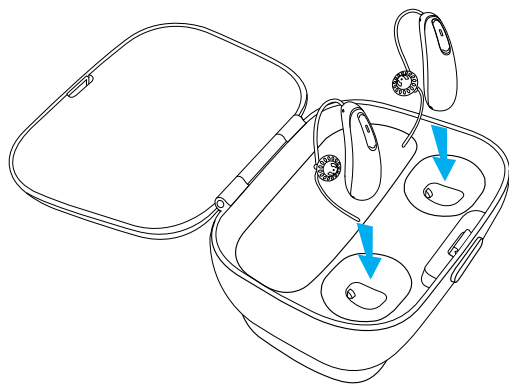

- ① Assurez-vous que les repères des aides auditives gauche et droite correspondent aux indicateurs gauche (bleu) et droite (rouge) situés à côté des logements de chargement.

2. Les voyants lumineux des aides auditives indiquent l'état de charge des batteries jusqu'à ce que les aides auditives soient complètement chargées. Une fois les aides auditives totalement chargées, les indicateurs lumineux restent allumés en vert fixe.

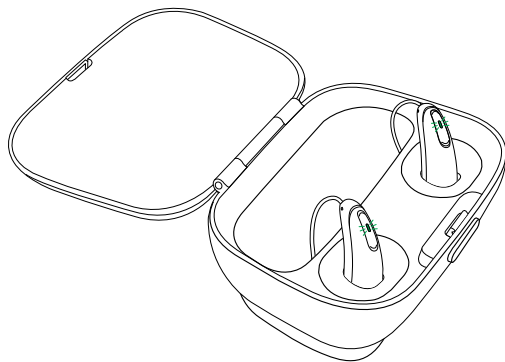


Le processus de charge s'arrête automatiquement lorsque les batteries sont totalement chargées. Par conséquent, il est possible de laisser les aides auditives dans le chargeur sans aucun danger. Recharger les aides auditives peut prendre jusqu'à 3 heures. Il est possible de fermer le couvercle du chargeur pendant la charge.

### Temps de chargement

Indicateur lumineux de l'aide auditive	État de charge	Temps de charge approximatifs
● ● ●	0-10 %	
● ● ●	11-80 %	30 min (30 %) 60 min (50 %) 90 min (80 %)
● ● ●	81-99 %	
■	100 %	3 h

3. Pour retirer les aides auditives des logements de chargement :

1. inclinez légèrement les aides auditives vers l'arrière ;
2. soulevez-les hors du chargeur.

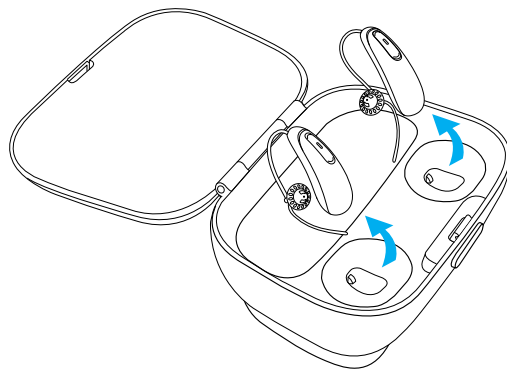

❶ Ne retirez pas les aides auditives du chargeur en les tenant par le fil, au risque d'endommager ce dernier.


Les aides auditives s'allument automatiquement dès que vous les retirez du chargeur. Les voyants lumineux commencent à clignoter. Les voyants lumineux restent allumés en vert brièvement lorsque les aides auditives sont prêtes.

Pour éteindre le chargeur, débranchez l'alimentation de la prise murale.

- ① Désactivez vos aides auditives avant de les insérer dans le chargeur déconnecté pour les ranger.
- ① Fermez toujours le couvercle lorsque vous chargez vos aides auditives dans un environnement humide.
- ① Si vous débranchez le chargeur pendant que les aides auditives sont en cours de charge à l'intérieur, veuillez les éteindre afin d'éviter qu'elles ne se déchargent.

## 4. Utilisation du Power Pack optionnel


1. Fixez le Power Pack au bas du chargeur et verrouillez-le.
  2. Branchez la fiche micro-USB et connectez l'alimentation à une source d'alimentation externe. Le Power Pack et les aides auditives seront chargés en même temps. Lorsque le Power Pack est connecté à une source d'alimentation externe, son témoin lumineux indique l'état de charge actuel de sa batterie.
- ① Avant d'utiliser le Power Pack pour la première fois, il est recommandé de le charger pendant 3 heures.

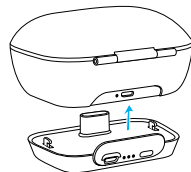



3. Pour connaître la capacité restante de la batterie du Power Pack, appuyez sur le bouton de vérification de la batterie. Les voyants lumineux indiqueront l'état de charge de la batterie.

Connexion micro-USB à l'alimentation externe

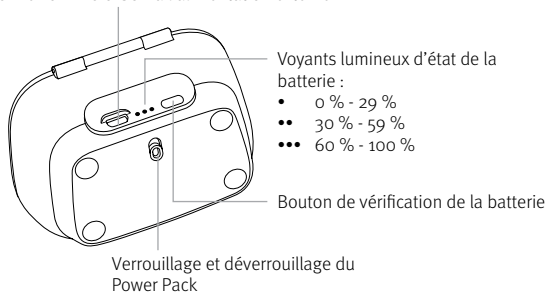

- ① Assurez-vous de charger le Power Pack à une température conforme à sa plage de température de fonctionnement normal : +5° à +40° Celsius.
- ① Si l'appareil a été soumis à des conditions de stockage et de transport non conformes aux conditions d'utilisation recommandées, attendez 15 minutes avant de le mettre en marche.
- ① Ce chargeur est classé IP22. Cela signifie qu'il est protégé des gouttes d'eau tombant verticalement lorsqu'il est incliné selon un angle maximum de 15 degrés par rapport à l'horizontale. L'indice IP22 est valide lorsque le couvercle du chargeur est fermé.

## 5. Conditions d'utilisation, de transport et de stockage

Veuillez vous assurer d'utiliser, de transporter et de stocker les accessoires de charge conformément aux conditions suivantes :

	Utilisation	Transport	Stockage*
<b>Température</b> Plage maximale	+5 °C à +40 °C	-20 °C à +60 °C	-20 °C à +60 °C
<b>Humidité</b> Plage maximale	DE 0 à 85 % (sans condensation)	DE 0 à 90 % (sans condensation)	DE 0 à 70 % (sans condensation)
<b>Pression atmosphérique</b>	800 hPa à 1 060 hPa	500 hPa à 1 060 hPa	500 hPa à 1 060 hPa

\* Stockage du Power Pack pendant un an ou plus : pour éviter d'endommager la batterie, la plage de température maximale doit être comprise entre -20° et 25° Celsius, et la batterie doit être déchargée et rechargée au moins une fois tous les trois mois.

## 6. Entretien et maintenance

---

### Durée de vie prévue

Le chargeur a une durée de vie prévue de cinq ans. Pendant cette durée, l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

### Période de service commercial

Un entretien régulier de votre chargeur contribuera à ce qu'il délivre longtemps d'excellentes performances. Pour garantir une longue durée de vie, Sonova AG propose une période de service minimale de cinq ans après la date de cessation de vente du chargeur. Veuillez suivre les recommandations ci-dessous. Pour obtenir des informations supplémentaires sur la sécurité du produit, veuillez vous reporter au chapitre 11.

### Informations générales

Veillez à ce que le chargeur soit utilisé et entretenu comme indiqué dans ce guide d'utilisation.

#### Chaque jour

Vérifiez que les logements de chargement sont propres. N'utilisez jamais de produits de nettoyage tels que des détergents ménagers, du savon, etc. pour nettoyer le chargeur.

#### Chaque semaine

Retirez la poussière ou les saletés présentes dans les logements de chargement.

- ① Vérifiez toujours que les aides auditives et le chargeur sont secs et propres avant le chargement.
- ① Vérifiez toujours que le chargeur est déconnecté de l'alimentation secteur avant de le nettoyer.

## 7. Maintenance et garantie

---

### Garantie locale

Veillez consulter l'audioprothésiste auprès duquel vous avez acheté votre chargeur pour connaître les conditions de la garantie locale.

### Garantie internationale

Sonova AG fournit une garantie internationale limitée d'un an, valable à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de matériel du chargeur. La garantie n'est valide que sur présentation d'une preuve d'achat.

La garantie internationale n'a aucune incidence sur vos droits en vertu de la législation nationale applicable sur la vente de biens de consommation.

### Limitation de garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une manipulation ou un entretien incorrect, une exposition à des produits chimiques ou une sollicitation excessive. Les dommages causés par des tiers ou des centres de service non autorisés rendent la garantie nulle et non avenue. Cette garantie n'inclut pas les actes de maintenance effectués par un audioprothésiste dans son centre.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Audioprothésiste  
agréé (cachet/signature) :  
  
\_\_\_\_\_

## 8. Informations sur la conformité

### Déclaration de conformité

La société Sonova AG déclare par la présente que ce produit satisfait aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et à la réglementation 2022 du Royaume-Uni relative aux dispositifs médicaux.

### Notice 1

Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

### Notice 2

Toute altération ou modification apportée à ce dispositif sans l'accord exprès de Sonova AG peut mettre fin à l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil.

### Notice 3

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de Classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de procurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes en installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet équipement vient à produire des interférences nuisibles aux réceptions radio et télévisées, ce qui peut être déterminé en éteignant, puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de les supprimer en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Augmenter l'éloignement entre l'appareil et le récepteur
- Connecter le dispositif à une prise ou à un circuit différent de celui du récepteur
- Contacter le revendeur ou solliciter l'assistance d'un technicien radio/TV expérimenté
- Veiller à respecter une distance d'au moins 20 cm entre le chargeur et le corps humain pendant l'utilisation

## Conformité aux normes d'émission et d'immunité

Normes d'émission	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	EN 55011
	CISPR11
	CISPR25
	EN 55025
Normes d'immunité	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	IEC 60601-1-11
	EN 61000-4-2
	IEC 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	IEC 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	IEC 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	IEC 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	IEC 61000-4-6
	EN 61000-4-8
	IEC 61000-4-8
	EN 61000-4-11
	IEC 61000-4-11
	IEC 60601-1
	ISO 7637-2

## 9. Informations et explications sur les symboles



Avec le symbole CE, Sonova AG confirme que ce produit satisfait aux exigences du règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



Indique le représentant agréé dans l'Union européenne. Le représentant agréé dans l'Union européenne est également l'importateur au sein de l'Union européenne.



Ce symbole indique qu'il est essentiel que l'utilisateur lise les informations importantes de ce guide d'utilisation et en tienne compte.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur accorde une attention particulière aux avertissements de ce guide d'utilisation.



Information importante pour la manipulation et la sécurité du produit



Symbole de droits d'auteur



Ce symbole certifie que les interférences électromagnétiques de l'appareil sont inférieures aux limites approuvées par la Federal Communications Commission des États-Unis.



Indique le numéro de série attribué par le fabricant, qui permet d'identifier un dispositif médical spécifique.



Indique le numéro de catalogue du fabricant qui permet d'identifier le dispositif médical.



Indique que l'appareil est un appareil médical.



Ce symbole indique qu'il est essentiel que l'utilisateur lise les informations importantes de ce guide d'utilisation et en tienne compte.

## IP 22

Indice IP = Indice de protection d'enveloppe. L'indice IP22 indique que l'appareil est protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre égal ou supérieur à 12,5 mm et qu'il est également protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le boîtier est incliné selon un angle maximum de 15 degrés.



Indique les températures limites auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.



Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.



Indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.



Pendant le transport, garder au sec.



Le symbole représentant une poubelle barrée vous indique qu'il ne faut pas jeter ce chargeur et le Power Pack avec les déchets ménagers. Veuillez mettre au rebut vos appareils inutilisés ou anciens dans les sites de mise au rebut des déchets électroniques ou donner votre appareil à un professionnel de l'audition qui se chargera de sa mise au rebut. Une mise au rebut appropriée contribue à protéger l'environnement et la santé.



La marque commerciale RCM (Regulatory Compliance Mark) atteste la sécurité électrique des équipements conformes à la réglementation EESS.

## Symboles applicables uniquement à l'alimentation électrique européenne



Alimentation avec double isolation



Appareil conçu pour une utilisation en intérieur uniquement



Transformateur d'isolement de sécurité, résistant aux courts-circuits

## 10. Guide de dépannage

Problème	Solution possible
<b>Problème : le chargement ne démarre pas</b>	
Chargeur non connecté à une source d'alimentation	Connectez le chargeur à une source d'alimentation (voir le chapitre 2, « Préparation du chargeur »).
Aides auditives incorrectement insérées dans le chargeur	Insérez correctement les aides auditives dans le chargeur (voir le chapitre 3, « Chargement des aides auditives »).

Pour tout problème non traité dans ce guide d'utilisation ou si un problème persiste, contactez votre professionnel de l'audition.

## 11. Informations de sécurité

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire les informations concernant la sécurité et les restrictions fournies dans les pages suivantes.

### Usage prévu

Le chargeur est destiné à charger la batterie des aides auditives rechargeables.

Le Power Pack est destiné à permettre au chargeur compatible de recharger la batterie des aides auditives rechargeables lorsqu'aucune source d'alimentation externe n'est disponible.

### Utilisateur visé

Cet appareil est destiné aux personnes malentendantes utilisant des aides auditives rechargeables compatibles ainsi qu'à leurs aidants et à leur audioprothésiste.

### Population de patients visée

La population de patients visée concerne les utilisateurs d'aides auditives compatibles.

## Indications

Les indications ne sont pas liées aux accessoires de charge, mais aux aides auditives compatibles. Les indications cliniques générales à l'utilisation des aides auditives et de la fonctionnalité Masqueur d'acouphènes sont les suivantes :

- Présence d'une perte auditive
- Unilatérale ou bilatérale
- De transmission, neurosensorielle ou mixte
- Légère à profonde
- Présence d'acouphènes chroniques (applicable uniquement aux appareils dotés de la fonctionnalité Masqueur d'acouphènes)

## Contre-indications

Les contre-indications ne sont pas liées aux accessoires de charge, mais aux aides auditives compatibles. Les contre-indications cliniques générales à l'utilisation des aides auditives et de la fonctionnalité Masqueur d'acouphènes sont les suivantes :

- La perte auditive n'entre pas dans la plage d'appareillage de l'aide auditive (c.-à-d. gain, réponse en fréquence)
- Acouphènes aigus

- Déformation de l'oreille (c.-à-d. conduit auditif fermé ; absence de pavillon)
- Perte auditive neurosensorielle (pathologies rétrocochléaires telles que l'absence ou la non-viabilité du nerf auditif)

Les principaux critères d'orientation d'un patient vers un médecin ou un spécialiste pour avis médical et/ou traitement sont les suivants :

- Malformation congénitale ou déformation traumatique visible de l'oreille ;
- Écoulement de liquide dans l'oreille au cours des trois derniers mois ;
- Perte auditive soudaine ou progressive rapide dans une ou les deux oreilles au cours des trois derniers mois ;
- Vertiges chroniques ou aigus ;
- Écart audiométrique aérien/osseux supérieur ou égal à 15 dB à 500 Hz, 1 000 Hz et 2 000 Hz ;
- Accumulation visible et importante de cérumen ou présence d'un corps étranger dans le conduit auditif ;



- Douleur ou inconfort dans l'oreille ;
- Aspect anormal du tympan et du conduit auditif tel que :
  - Inflammation du conduit auditif externe,
  - Tympan perforé,
  - Autres anomalies que l'audioprothésiste considère comme préoccupantes sur le plan médical.

L'audioprothésiste peut juger qu'une orientation vers un médecin n'est pas justifiée et pas non plus dans l'intérêt du patient dans les conditions suivantes :

- Lorsqu'il existe des preuves suffisantes que l'état du patient a fait l'objet d'un examen approfondi par un médecin spécialiste et que tout traitement possible a été prodigué ;
- L'état ne s'est pas aggravé et n'a pas évolué de manière significative depuis l'examen précédent et/ou le traitement suivi.

Dans le cas où le patient a fait part de sa décision éclairée et compétente de décliner votre conseil de demander un avis médical, vous êtes autorisé à recommander des systèmes d'aides auditives appropriés sous réserve des considérations suivantes :

- La recommandation n'aura aucun effet indésirable sur la santé ou le bien-être général du patient ;
- Les dossiers confirment que toutes les considérations nécessaires concernant l'intérêt du patient ont été prises en compte. Si la loi l'exige, le patient a signé une décharge de responsabilité pour confirmer qu'il a refusé de demander un avis médical et qu'il s'agit bien d'une décision éclairée de sa part.

## Bénéfices cliniques

Les accessoires de charge en eux-mêmes n'apportent pas de bénéfice clinique direct. Ils apportent un bénéfice clinique indirect en permettant aux aides auditives rechargeables de remplir leur fonction prévue.

Tout incident grave en lien avec les accessoires de charge doit être déclaré au représentant du fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente du pays de résidence. Un incident grave est décrit comme un incident ayant conduit, failli conduire ou qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'une des situations suivantes :

- le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne
- la détérioration grave, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne
- une menace grave pour la santé publique

Pour déclarer un fonctionnement ou événement inattendu, veuillez contacter le fabricant ou un représentant.

Veuillez noter que les effets secondaires ne sont pas liés au chargeur, mais aux aides auditives compatibles.

## Avertissements de danger

- ⚠ Les aides auditives doivent être sèches avant leur mise en charge. Dans le cas contraire, leur chargement correct n'est pas garanti.
- ⚠ Vos aides auditives et le Power Pack contiennent des batteries lithium-ion avec une capacité en Wattheure inférieure à 20 Wh, qui ont été testées conformément aux dispositions UN 38.3 du « Manuel d'épreuves et de critères ». Elles doivent être transportées en conformité avec toutes les règles et réglementations relatives au transport sécurisé des batteries lithium-ion.
- ⚠ N'utilisez pas les accessoires de charge dans des zones à risque d'explosion (mines ou zones industrielles présentant un danger d'explosion, environnements riches en oxygène ou endroits où des produits anesthésiques inflammables sont manipulés). L'appareil n'est pas certifié ATEX.
- ⚠ Ne couvrez pas l'ensemble du chargeur pendant le chargement, par ex. avec un chiffon, etc.
- ⚠ L'utilisation de cet équipement à proximité ou associé à d'autres équipements doit être évitée afin de prévenir tout risque de dysfonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, les équipements doivent être examinés afin de vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

- ⚠ Les mises en garde suivantes s'appliquent uniquement aux personnes munies de dispositifs médicaux implantables actifs (pacemakers, défibrillateurs, etc.) : Maintenez le chargeur à au moins 15 cm de l'implant actif. En cas d'interférences, n'utilisez pas le chargeur et contactez le fabricant de l'implant actif. Veuillez noter que les interférences peuvent également être provoquées par des lignes électriques, une décharge électrostatique, des détecteurs de métaux dans les aéroports, etc.
- ⚠ L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles différents de ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement, et ainsi engendrer des dysfonctionnements.
- ⚠ Ne touchez pas les contacts du chargeur lorsqu'il est sous tension.
- ⚠ Les câbles et cordons enroulés autour du cou peuvent provoquer une strangulation. Ne laissez pas l'appareil et ses composants sans surveillance en présence d'enfants, de personnes souffrant de déficiences mentales ou d'animaux domestiques.

- ⚠ Le port USB du chargeur doit être utilisé dans le but préconisé uniquement.
- ⚠ Pour le chargeur, utilisez uniquement un équipement certifié IEC 60950-1\*, IEC 62368-1 et/ou IEC 60601-1 avec une puissance de sortie de 5 VCC. 500 mA au minimum.
- ⚠ Seul un technicien agréé est autorisé à ouvrir l'accessoire de charge en raison d'un risque électrique possible.
- ⚠ Utilisez uniquement les chargeurs et le Power Pack approuvés décrits dans ce guide d'utilisation pour charger vos aides auditives, au risque d'endommager les appareils.
- ⚠ Les aides auditives rechargeables et le Power Pack contiennent des batteries lithium-ion qu'il est possible d'emporter dans un bagage cabine à bord d'un avion. Le Power Pack doit être transporté dans un bagage cabine uniquement, pas dans un bagage enregistré en soute.

\*Remarque : il est possible que cette norme ne soit plus valide dans votre pays ; veuillez vous référer à la norme IEC 62368-1

## Sécurité des produits

- ① Protégez vos accessoires de charge de la chaleur et de la lumière directe du soleil (ne les laissez jamais près d'une fenêtre ou à l'intérieur d'un véhicule). N'utilisez jamais de four à micro-ondes ou d'autres appareils de chauffage pour sécher vos accessoires de charge (en raison d'un risque d'incendie ou d'explosion). Demandez à votre audioprothésiste quelles sont les méthodes de séchage qui conviennent.
- ① Ne placez pas les accessoires de charge à proximité d'une plaque de cuisson à induction. Les structures conductrices à l'intérieur des accessoires de charge pourraient absorber l'énergie inductive, entraînant une destruction thermique.
- ① Ne laissez pas tomber vos accessoires de charge. Un choc contre une surface dure peut endommager les accessoires de charge.
- ① Les accessoires de charge et l'alimentation doivent être protégés contre les chocs. Si les accessoires de charge ou l'alimentation électrique sont endommagés après un choc, vous ne devez plus les utiliser.
- ① N'utilisez pas les accessoires de charge dans les zones où les équipements électroniques sont interdits.

## Vos observations

Notez vos besoins spécifiques ou vos préoccupations et apportez-les lors de votre première visite suivant l'acquisition de vos aides auditives.

Ceci permettra à votre audioprothésiste de mieux répondre à vos besoins.

☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Notes complémentaires

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Et importateur pour l'Union européenne :

Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Str. 20

70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Brevets : [www.sonova.com/en/intellectualproperty](http://www.sonova.com/en/intellectualproperty)

Pour connaître la liste des  
filiales Unitron, visitez le site  
[www.unitron.com](http://www.unitron.com)

Distributeur

029-1301-04/v1.00/2023-08/cz © 2022 Sonova AG. All rights reserved.



Fabricant :  
Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Switzerland  
unitron.com



**sonova**

