




Consenti ai tuoi clienti di provare gli apparecchi acustici al di fuori del centro acustico, negli ambienti dove vivono, lavorano e si divertono. Con FLEX:TRIAL™ puoi dare l'opportunità di provare gli apparecchi acustici subito dopo la valutazione dell'udito. Quando analizzerai i risultati dell'audiogramma, avrai la certezza che i clienti possono sentire tutti i materiali audio condivisi. Ora puoi offrire loro un percorso di protesizzazione acustica sicuro e personalizzato.

Programmazione degli apparecchi acustici per il periodo di prova


Passaggio 1: rilevamento dell'apparecchio o degli apparecchi acustici

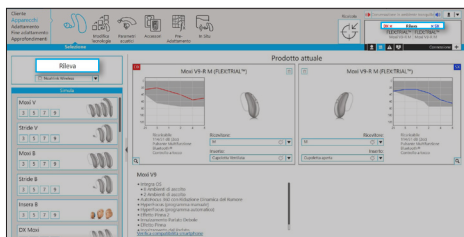

- Collegare l'apparecchio o gli apparecchi acustici al software di adattamento Unitron TrueFit™ utilizzando l'interfaccia di programmazione compatibile
- Fare clic sul pulsante **Detect** (Rileva)
- A questo punto, la finestra di dialogo di rilevamento indica quando l'apparecchio o gli apparecchi acustici sono stati rilevati con successo

Passaggio 2: adattamento dell'apparecchio o degli apparecchi acustici


- Quando i dispositivi FLEX:TRIAL sono rilevati per la prima volta, o quando si seleziona l'opzione relativa ad un nuovo adattamento, c'è un passaggio aggiuntivo all'inizio del flusso di lavoro First Fit (Primo adattamento)
- Da questo passaggio è possibile selezionare il livello di tecnologia desiderato
- Fare clic su **Next** (Avanti) e seguire il flusso di lavoro First Fit (Primo adattamento) normalmente

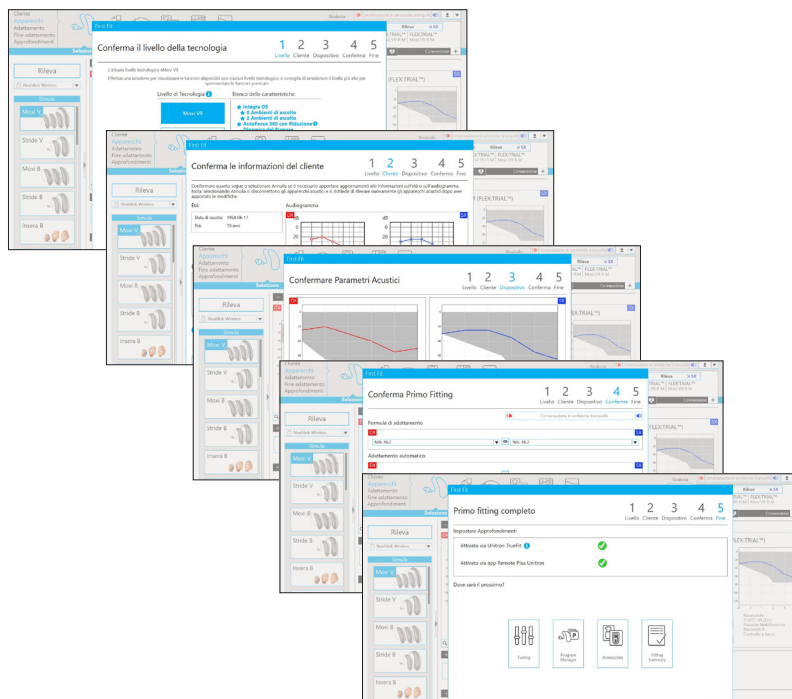

Consultare la Guida rapida al primo adattamento per ulteriori informazioni su come impostare il relativo flusso di lavoro

Passaggio 3: conferma o regolazione della durata del periodo di prova

- La durata preimpostata della prova è di circa 4 settimane. Selezionare **End Fitting** (Adattamento finale) > **Beeps** (Segnali acustici) per modificare il periodo di prova
- Da questa schermata è anche possibile modificare ed attivare i segnali acustici che il cliente sentirà alla fine del periodo di prova

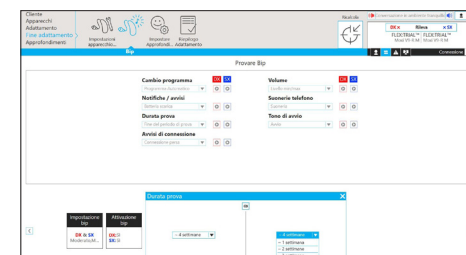

È possibile accedere alle impostazioni dei segnali acustici dalla schermata **End Fitting** (Adattamento finale) > **Beeps** (Segnali acustici)




A meno che non ci siano situazioni particolari, lasciare la durata preimpostata del FLEX:TRIAL (circa 4 settimane) per impedire ai clienti di sentire i segnali acustici che indicano la fine della prova.



Passaggio 4: salvataggio dell'adattamento ed inizio del periodo di prova


- Dopo aver salvato l'adattamento, gli apparecchi acustici sono pronti per essere testati in situazioni concrete

Passaggio 5: consulenza al cliente per garantire il successo del periodo di prova

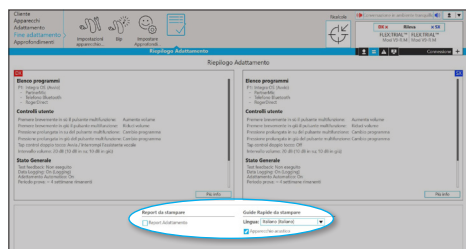

- Stampare la guida introduttiva o inviarla al cliente via e-mail: funge da guida utente per i dispositivi di prova ed include tutte le informazioni applicabili in materia normativa
- Per personalizzare il modello, selezionare **Options** (Opzioni) > **Preferences** (Preferenze) > **Email Templates** (Modelli e-mail)

Seguire il percorso **End Fitting** (Adattamento finale) > **Fitting Summary** (Riepilogo adattamento) per accedere alla guida introduttiva

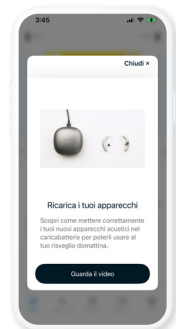

- Consigliamo di assistere il cliente nell'installazione dell'app Remote Plus e attivare la funzione Approfondimenti per il periodo di prova. La funzionalità Coach fornirà al cliente un'assistenza quotidiana nell'utilizzo degli apparecchi acustici grazie all'invio di notifiche e consigli. I controlli e i contenuti di supporto dell'app consentono di ottimizzare i risultati del periodo di prova.




Unitron rende la vita più brillante con soluzioni acustiche eccezionali progettate per semplificare l'esperienza. **Love the experience™**: tutti lo meritano.

© 2024 Sonova AG o sue affiliate. Pubblicazione riservata agli operatori di settore. All rights reserved.
029-5909-05/V2.00/2024-04/ARG

unitron.com/it

Passaggio 6: Conclusione del periodo di prova

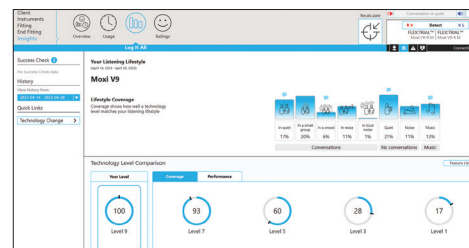

Visualizza i dati Log It All sulla schermata **Valutazioni** > **Log It All**



Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida rapida **Log It All**

- Se il cliente decide di procedere all'acquisto, è possibile ottenere una valutazione accurata dello stile di vita dalla sezione **Log It All** prima di consigliare una particolare soluzione tecnologica
- È possibile trasferire l'adattamento dagli apparecchi acustici FLEX:TRIAL utilizzando la procedura guidata **Transfer** (Trasferimento), disponibile al percorso **Hearing Instruments** (Apparecchi acustici) > **Transfer Fitting** (Trasferimento adattamento)



Importante : fissare una visita di controllo prima della fine del periodo di prova.



Sonova AG,
Laubisrütistrasse 28,
CH-8712 Stäfa,
Svizzera



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Offingen,
Germany



sonova
HEAR THE WORLD