




Il nostro flusso di lavoro primo adattamento consente di effettuare l'adattamento per i clienti in soli quattro clic. Grazie al primo adattamento, potrai offrire ai clienti un punto di partenza confortevole e sicuro nel percorso di protesizzazione acustica e semplificare l'adattamento dei nuovi utenti di apparecchi acustici. Grazie a questo processo rapido ed efficiente, potrai risparmiare tempo prezioso e dedicarlo finalmente alla consulenza, all'assistenza e alla creazione di relazioni.


Programmazione degli apparecchi acustici con primo adattamento

Passaggio 1: Rilevare gli apparecchi acustici

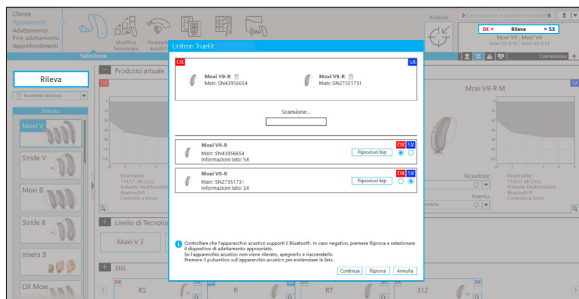

Nella schermata **Strumenti > Selezione**, fai clic su **Rileva**


- Collega l'apparecchio acustico al software di adattamento Unitron TrueFit™ utilizzando l'interfaccia di programmazione compatibile
- Fai clic sul pulsante **Rileva**
- A questo punto, la finestra di dialogo di rilevamento indica che l'apparecchio o gli apparecchi acustici sono stati rilevati con successo

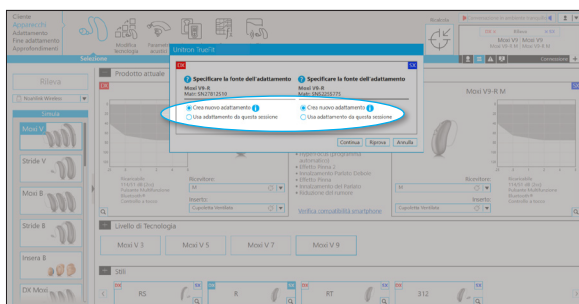

Seleziona **Crea nuovo adattamento**


- Assicurati di aver selezionato l'opzione **Crea nuovo adattamento** per avviare il flusso di lavoro primo adattamento

Passaggio 2: Verificare le informazioni del cliente

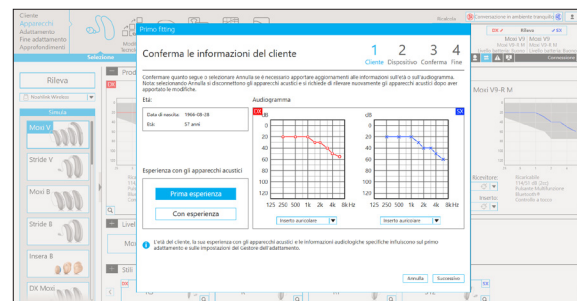

- Verifica i dettagli, come l'età del cliente e le informazioni sull'audiogramma
- Scegli tra utente alle prime armi e utente a lungo termine, a seconda dell'esperienza del cliente con gli apparecchi acustici
 - » L'età del cliente, la sua esperienza con gli apparecchi acustici e le sue informazioni audiologiche specifiche incideranno sulle impostazioni del primo adattamento e della Gestione Automatica dell'adattamento


Passaggio 3: Verificare l'acustica del dispositivo

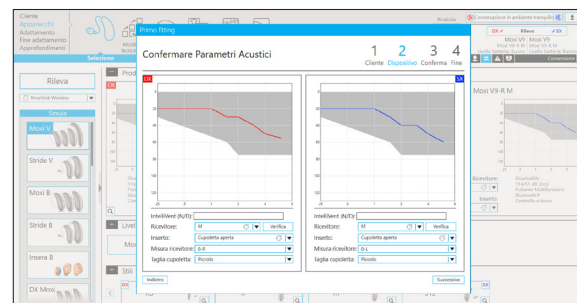

- Assicurati che l'accoppiamento acustico scelto per il cliente sia in linea con le informazioni qui riportate
- Facendo clic su **Avanti** verrà eseguito il calcolo del primo adattamento e verrà attivato l'audio degli apparecchi acustici




Passaggio 4: Verificare le impostazioni del primo adattamento e della Gestione Automatica dell'Adattamento

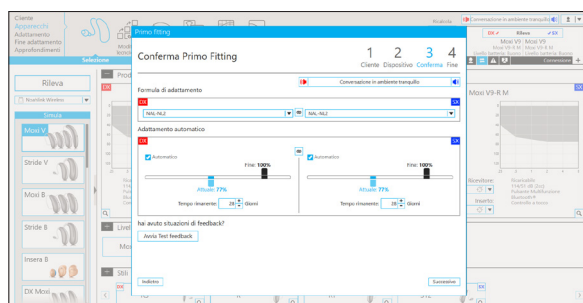

- Qui puoi scegliere la formula di adattamento e regolare le impostazioni della Gestione Automatica dell'Adattamento
- Esegui il **test di feedback** solo se il cliente è attivamente coinvolto nel feedback


Passaggio 5: Primo adattamento completato

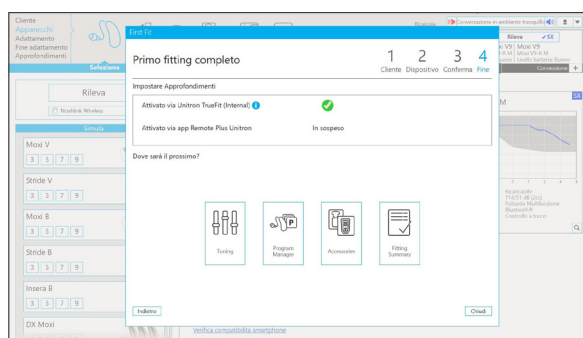


- Se si è connessi all'account myUnitron e Insights è abilitato, Insights verrà automaticamente attivato per questo adattamento nel software di adattamento TrueFit; in questo caso ti verrà ricordato di invitare il cliente ad abilitare Insights nell'app Remote Plus
- Scegli cosa fare adesso utilizzando i tasti di scelta rapida disponibili oppure chiudi il flusso di lavoro

Ulteriori regolazioni

Una volta completato il flusso di lavoro primo adattamento, puoi salvare e chiudere la sessione o eseguire ulteriori regolazioni, ad esempio:

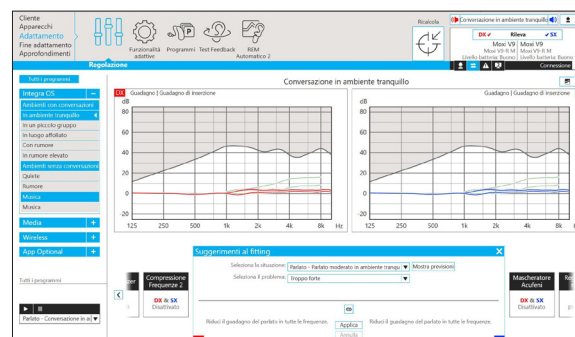

- Seleziona **Adattamento > Sintonizzazione** per mettere a punto manualmente gli apparecchi acustici dalle impostazioni predefinite
- Se necessario, puoi utilizzare la funzione **Consigli di adattamento** per suggerire e applicare modifiche di messa a punto

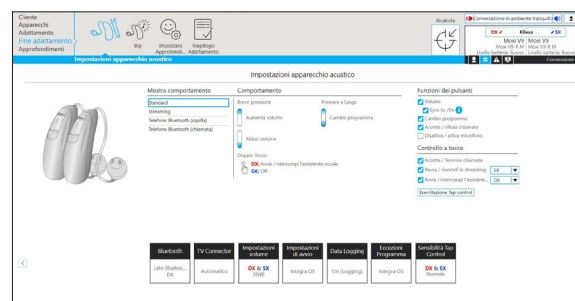

- Vai su **Adattamento finale** per configurare le impostazioni dell'apparecchio acustico, comprese le funzioni dei pulsanti e il controllo tramite tocco (se applicabile)
- Regola e lancia una demo dei segnali acustici nella schermata **Adattamento finale > Segnali acustici**
- Vai su **Adattamento finale > Riepilogo dell'adattamento** per stampare la guida introduttiva e inviare l'e-mail introduttiva



Unitron rende la vita più brillante con soluzioni acustiche eccezionali progettate per semplificare l'esperienza. **Love the experience™**: tutti lo meritano.