




Log It All acquisisce dati in tempo reale permettendo di offrire ai clienti raccomandazioni basate sulle loro reali abitudini di ascolto. I dati vengono presentati con visualizzazioni facili da capire, che mostrano un'analisi dell'ambiente di ascolto e della direzione del parlato del cliente, rendendo semplice capire il grado di ottimizzazione del supporto alle singole necessità da parte di ciascun livello tecnologico.

Passaggio 1: rilevamento dell'apparecchio o degli apparecchi acustici

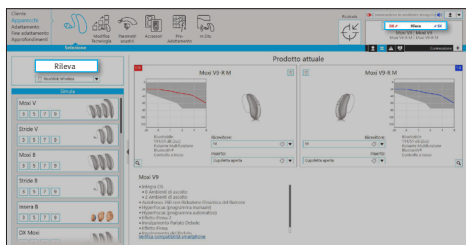


Nella schermata **Strumenti** > **Selezione**, fare clic su **Rileva**

- Collegare l'apparecchio o gli apparecchi acustici al software di adattamento Unitron TrueFit™ utilizzando l'interfaccia di programmazione compatibile
- Fare clic sul pulsante **Rileva**
- A questo punto, la finestra di dialogo di rilevamento indica quando l'apparecchio o gli apparecchi acustici sono stati rilevati con successo

Nota: è possibile visualizzare le informazioni su Log It All dei clienti senza connettersi agli apparecchi acustici; vedere la guida rapida di Success Check per ulteriori informazioni.


Passaggio 2: visualizzazione dei dati nella sezione Approfondimenti

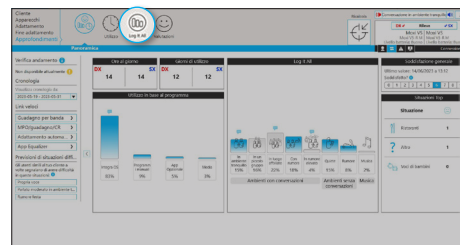

Andare su **Approfondimenti** > **Log It All**

- Dopo il rilevamento di apparecchi acustici già adattati, il software di adattamento TrueFit apre la schermata della panoramica di Insights; in alternativa è possibile raggiungere questa pagina da **Approfondimenti**
- Fare clic sul pulsante **Log It All** per visualizzare i dettagli delle abitudini di ascolto del cliente

Passaggio 3: revisione dei dati sulla copertura

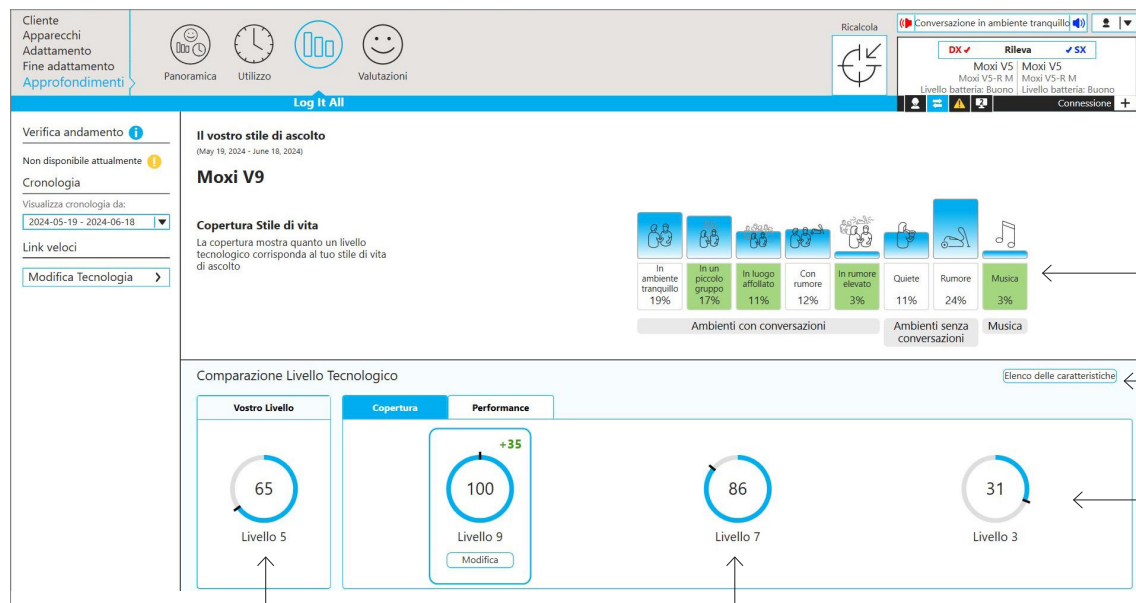

Le barre rappresentano la quantità di tempo passata dal cliente in ciascun ambiente

Le barre blu rappresentano gli ambienti supportati per il livello tecnologico visualizzato

Le barre verdi mostrano gli ambienti che si aggiungono ad un livello tecnologico più alto e le barre rosse mostrano gli ambienti che non sono supportati ad un livello tecnologico più basso


Suggerimento:
Fare clic su **Elenco funzionalità** per visualizzare una panoramica di confronto tra il livello tecnologico corrente ed il nuovo livello tecnologico, incluso quali funzionalità vengono aggiunte o perse

Selezionare ciascuno livello tecnologico nella parte bassa della schermata per evidenziare quali sono le funzionalità aggiuntive o perdute corrispondenti

Il punteggio per copertura è la percentuale di tempo trascorso in ambienti supportati da ciascun livello tecnologico



Passaggio 4: revisione dei dati sulle prestazioni

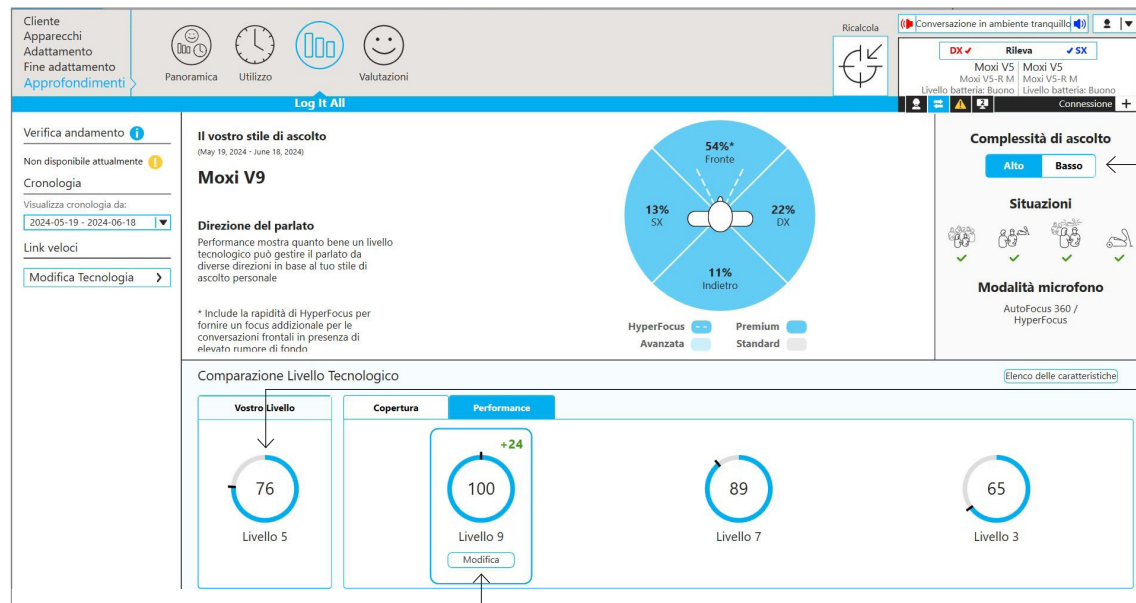

Selezionare alta o bassa in complessità per visualizzare la direzione del parlato e la capacità di consapevolezza sonora, oltre agli ambienti di ascolto supportati ed alla modalità microfono al massimo

Il punteggio per le prestazioni è derivato da:

1. Confronto del tempo trascorso in ambienti con complessità alta o bassa
2. Frequenza con cui il parlato arriva da direzioni diverse in situazioni di ascolto complesse
3. Funzionalità disponibili in corrispondenza di ciascun livello tecnologico



Consiglio utile

Se il cliente decide di cambiare il proprio livello tecnologico, è possibile fare clic sul pulsante **Cambio** per avviare automaticamente il procedimento di cambio di tecnologia



Unitron rende la vita più brillante con soluzioni acustiche eccezionali progettate per semplificare l'esperienza. **Love the experience™**: tutti lo meritano.

