

Hearing Remote app

Gebruikershandleiding



Aan de slag

Beoogd gebruik

Met de Hearing Remote-app kunnen dragers van hoortoestellen bepaalde aspecten compatibele hoortoestellen aanpassen via Android- en Apple iOS-apparaten¹.

Compatibiliteitsinformatie:

- ⚠ U hebt de Hearing Remote-app nodig om het draadloze Bluetooth-hoortoestel te kunnen gebruiken.
De Hearing Remote app kan worden gebruikt op apparaten met de Bluetooth® Low-Energy (BT-LE)-functionaliteit en is compatibel met de iPhone 5s of nieuwer met iOS-versie 10.2 of nieuwer.
De Hearing Remote app kan worden gebruikt op Android-apparaten die GMS-gecertificeerd (Google Mobile Services) zijn, waarop Bluetooth 4.2 en Android OS 6.0 of nieuwer worden ondersteund.

- ❗ Sommige telefoons laten een geluid horen bij het aanraken van het scherm of toetsenbord, dit kan worden gestreamd naar het/de hoortoestel(len).
Als u dit niet wilt, gaat u naar de instellingen van uw telefoon. U selecteert Geluiden en zorgt ervoor dat alle geluiden bij het aanraken van het scherm of toetsenbord zijn uitgeschakeld.

¹ Compatibele telefoons: de Hearing Remote app kan gebruikt worden op apparaten met Bluetooth® Low-Energy-functionaliteit.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Apple, het Apple-logo, iPhone en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.


Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.



Inhoud

App overzicht.....	4
Privacybeleid	5
Koppelen met hoortoestel(len)	6
Hoofdmenu.....	7
Programma's op hoortoestel(len) wijzigen	8
Instellingen	9
Informatie over Naleving.....	10
Informatie en verklaring van symbolen.....	11

App overzicht

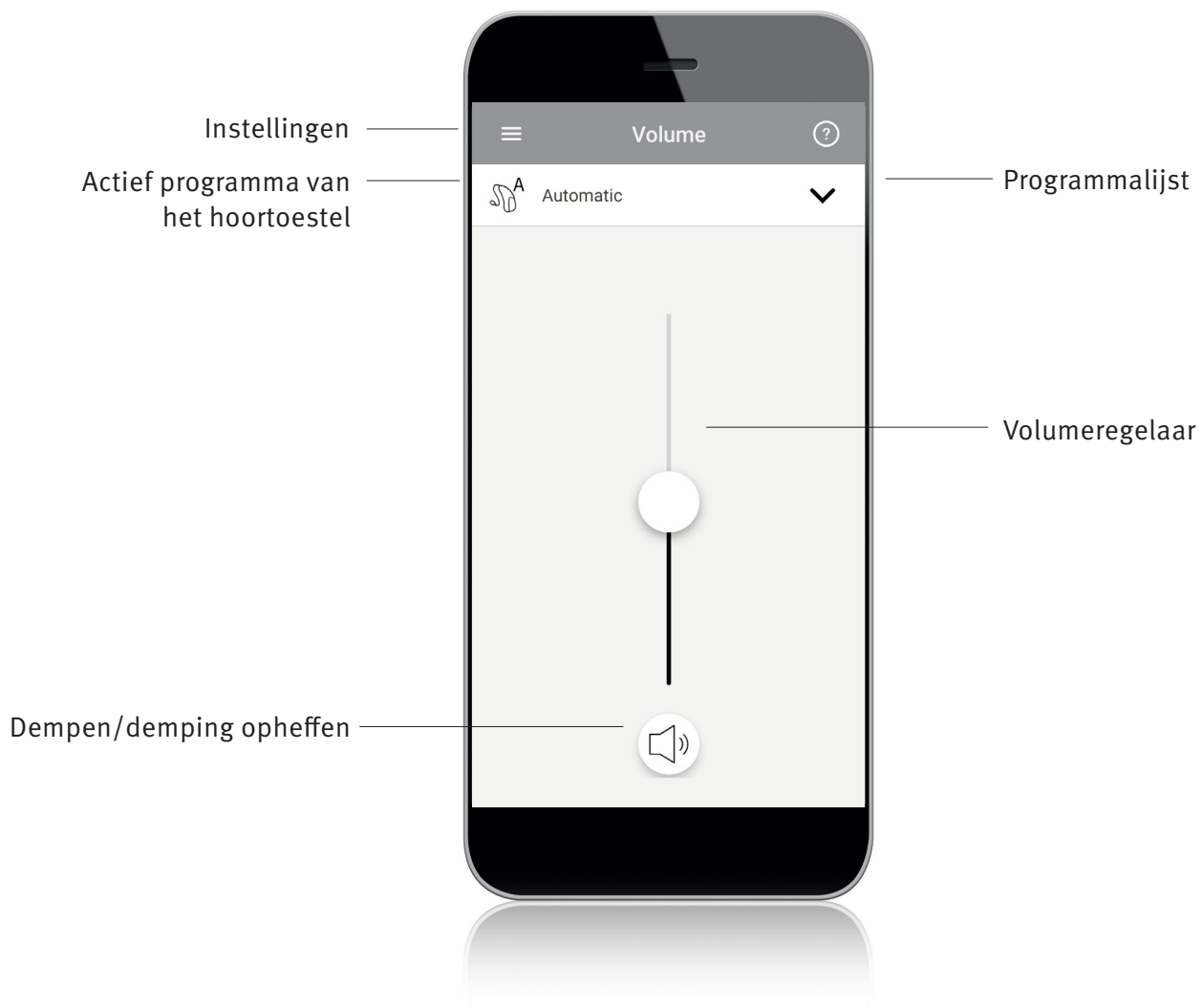

Privacybeleid

Accepteren Privacy verklaring van de app

Om gebruik te kunnen maken van de Hearing Remote app dient u de privacy verklaring en de anonieme gegevensanalyse van het gebruik van de app te accepteren.

Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Hearing Remote and to improve our service, we will collect some information about you such as hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Hearing Remote is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any data that we collect when you will use Hearing Remote and/or that we collected through your use of previous version of Hearing Remote.

Privacy Notice


Last updated: 2019 April 8

Sonova AG respects your privacy and is committed to protecting it through our compliance with this notice. This notice describes the types of information we may collect from you or that you may provide when you are using the Hearing Remote (the "Application" or "Hearing Remote") and our practices for collecting, using, maintaining, protecting and

Accept


Koppelen met hoortoestel(len)

Uw hoortoestel detecteren

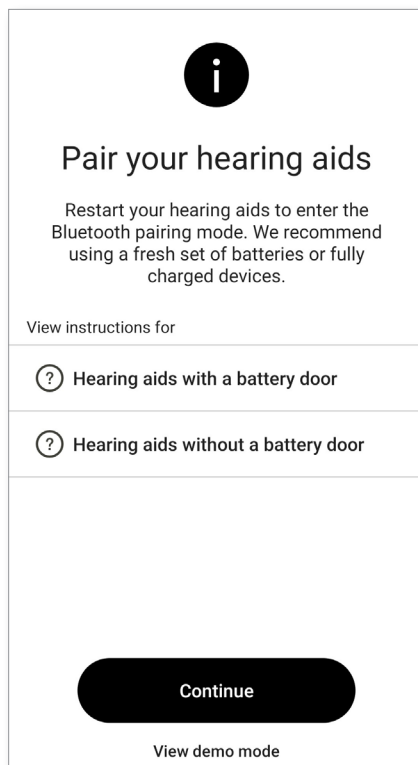

- ① Wanneer uw hoortoestel een batterijklepje heeft, start u uw hoortoestel opnieuw op door het klepje te openen en te sluiten. Wanneer uw hoortoestel geen batterijklepje heeft, zet u het hoortoestel uit door op het onderste deel van de knop te drukken totdat het led-lampje rood kleurt (4 sec.). Vervolgens zet u de hoortoestellen weer aan door op dezelfde knop te drukken totdat het led-lampje groen kleurt (2 sec.).
- ① U kunt altijd de 'demo'-modus van de app selecteren om de app uit te proberen zonder verbinding te maken met een hoortoestel. Zo kunt u een eerste indruk krijgen van de functies van de app. In deze demomodus is de afstandsbedieningsfunctie niet beschikbaar voor uw hoortoestellen.

Uw hoortoestel(len) selecteren

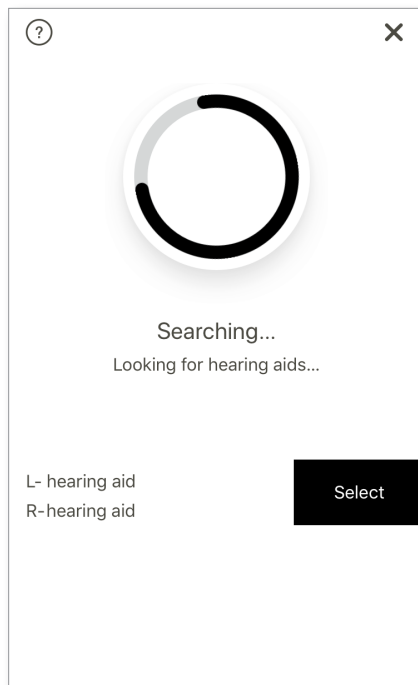


- ① Indien er door de app meerdere toestellen worden gevonden, drukt u op de knop van uw hoortoestel. Het betreffende hoortoestel wordt nu gemarkeerd in de app.

Hoofdmenu

Volume van het hoortoestel aanpassen


Beweeg de schuifregelaar omhoog of omlaag om het volume van het hoortoestel aan beide kanten te verhogen of te verlagen.

Druk op de dempknop onder de schuifregelaar om de hoortoestellen te dempen of het dempen op te heffen.

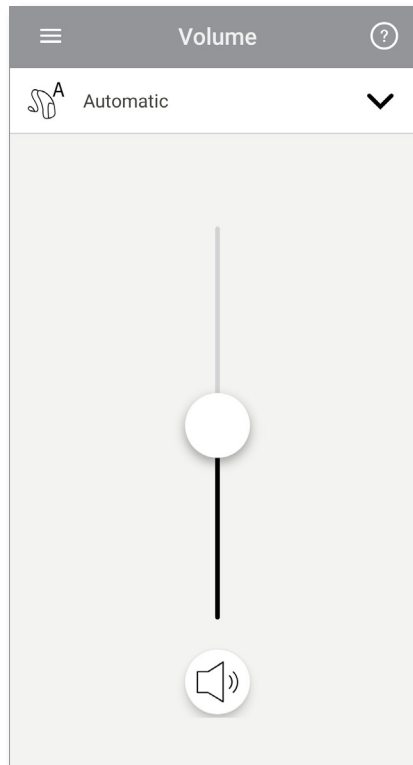

Het volume splitsen


Als de functie "Selecteer zijde" is ingeschakeld in de app-instellingen, verschijnt er een knop boven de schuifregelaar. Druk op de knop **Splitsen** om het volume van beide hoortoestellen afzonderlijk te regelen.

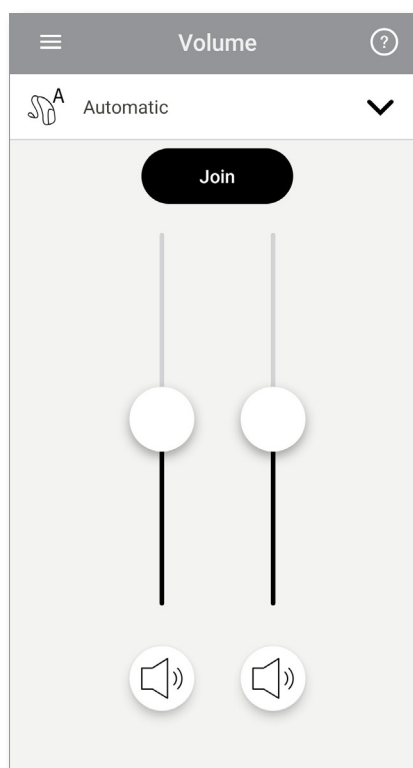

Programma's op hoortoestel(len) wijzigen



Een ander programma selecteren

Klik op het pijltje naast de naam van het huidige programma om alle beschikbare programma's te bekijken. Tik op het gewenste programma.

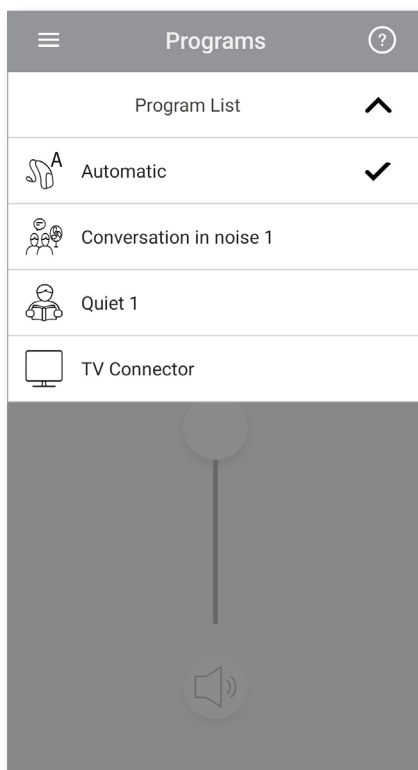

Geavanceerde programma-instellingen


Er zijn nog meer aanpassingen mogelijk afhankelijk van de configuratie van uw hoortoestel of de aangesloten audiobronnen (TV Connector). Tik op de  knop rechtsonderin om naar deze opties te gaan:

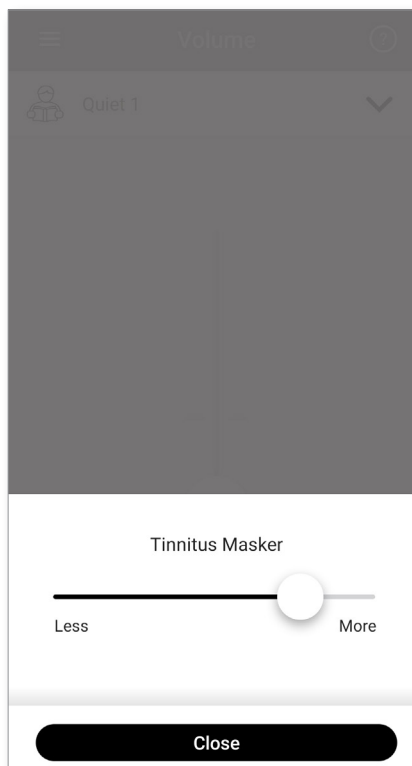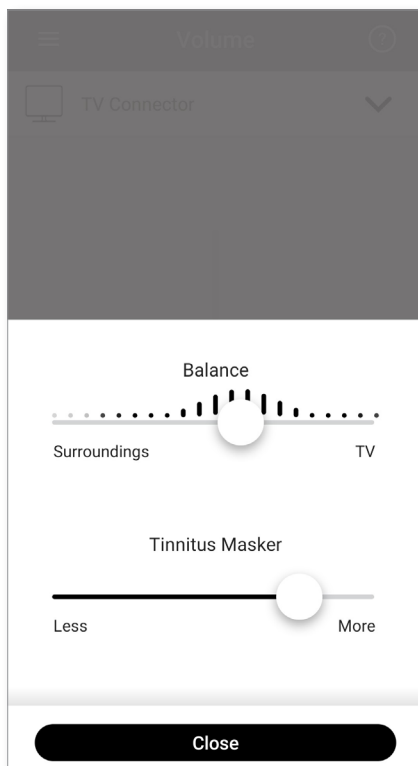


Instellingen

De app is verkrijgbaar in verschillende talen. Hij past zich automatisch aan de taal van het besturingssysteem van de telefoon aan. Als de taal van de telefoon niet wordt ondersteund, is Engels de standaardtaal.

1) Tik op het  pictogram in het hoofdmenu om naar de instellingen te gaan.

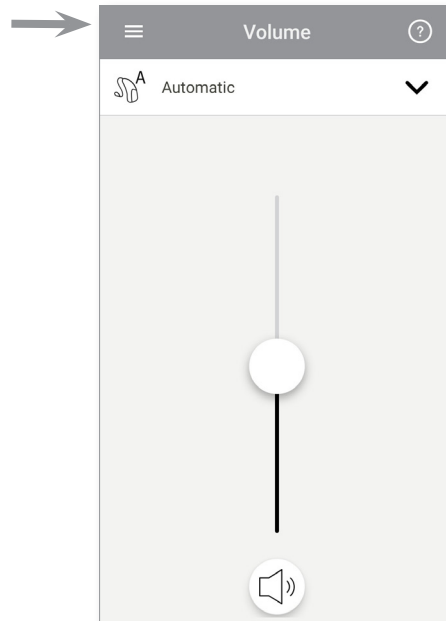

- 2) Selecteer App-instellingen om naar de instellingen van de applicatie te gaan.
- 3) Selecteer Mijn hoortoestellen om naar specifieke hoortoestel-instellingen te gaan.
- 4) Selecteer Veelgestelde vragen om veelgestelde vragen over de app en de hoortoestellen te bekijken via de internetbrowser van de telefoon.

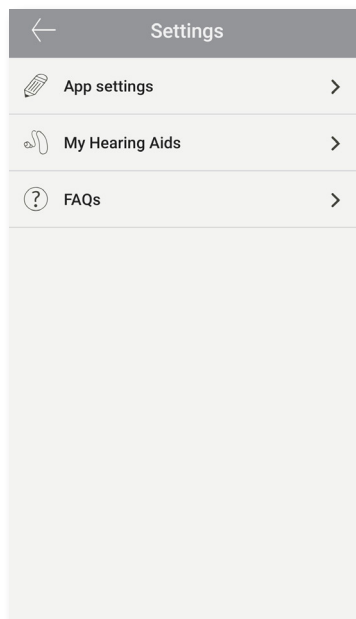

Informatie over Naleving

Conformiteitsverklaring

Sonova AG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de belangrijkste vereisten van Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG. De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant de plaatselijke vertegenwoordiger. Kijk voor de adressen op <http://www.sonova.com>.

- ① Als de hoortoestellen niet op het apparaat reageren vanwege ongewone veldstoringen, dient u het storingsveld te verlaten.
- ① Instructies zijn verkrijgbaar op: unitron.com/appguide in Adobe® Acrobat® pdf-formaat. Om deze te kunnen bekijken hebt u Adobe Acrobat Reader nodig. Ga naar Adobe.com om deze te downloaden.
- ① Als u graag een gratis papieren versie van de instructies wilt, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Sonova. We sturen dan binnen zeven dagen een papieren versie naar u toe.

Informatie en verklaring van symbolen



Met het CE-symbool verklaart Sonova AG dat dit product, inclusief accessoires, voldoet aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/ EEG.

De getallen achter het CE-symbool zijn de getallen van de geraadpleegde officiële instanties onder bovengenoemde richtlijnen.



Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker belangrijk is om de relevante informatie in deze gebruikershandleiding te lezen en te benutten.



Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker belangrijk is om te letten op de relevante waarschuwingen in deze gebruikershandleiding.



Belangrijke informatie over de bediening en het efficiënt gebruik van het product.



Copyright-symbool



Aan dit symbool moeten de naam en het adres van de fabrikant (die het apparaat op de markt brengt) zijn toegevoegd.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Unitron onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de betreffende eigenaars.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

