

# Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung

# Sony Ericsson

## Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit Ihrem Sony Ericsson Mobiltelefon

Laden Sie das Mobiltelefon und uDirect™ 2 auf, und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

### Bluetooth®-Funktion des Sony Ericsson® einschalten

- Suchen Sie die Verbindungseinstellungen Ihres Telefons. Für die meisten Sony Ericsson -Modelle trifft eine der folgenden Navigationsoptionen zu:

**Menü > Einstellungen > Tab Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte**, oder

**Menü > Konnektivität > Bluetooth > Meine Geräte**, oder  
(Extras oder Hauptmenü) **> Systemsteuerung > Verbindungen > Tab Bluetooth-Geräte**, oder

**Anwendungen > Einstellungen > Wireless + Netzwerke > Bluetooth**

### uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen


Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (<>)Taste von uDirect 2 ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

### uDirect 2 mit dem Mobiltelefon koppeln

- Wählen Sie im Bluetooth Menü „**Neue Geräte**“, „**Hinzufügen**“ oder „**lassen Sie nach neuen Geräten suchen**“.

*Hinweis: Falls Sie die Bluetooth-Funktion nicht aktiviert haben, werden Sie möglicherweise gefragt, ob Sie Bluetooth einschalten möchten. Damit wird die Suche nach Bluetooth-Geräten gestartet.*

- Aus der Liste verfügbarer Geräte wählen Sie „**uDirect 2**“, und falls Sie nach dem Kenncode gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein. Warten Sie bis die Kopplung der Geräte abgeschlossen ist. Am Mobiltelefon wird uDirect 2 als gekoppeltes Gerät angezeigt und am uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam. Dies zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

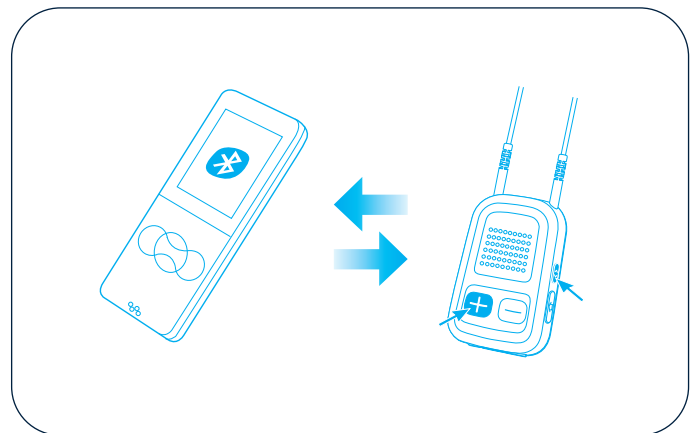

### uDirect 2 mit Ihrem Mobiltelefon verbinden

Zusätzlich zur Kopplung, die nur einmal durchgeführt werden muss, müssen uDirect 2 und das Mobiltelefon miteinander verbunden werden.

- Wählen Sie „**uDirect 2**“ im Menü „**Meine Geräte**“ oder „**Menü Bluetooth**“ aus.
- Wählen Sie dann „**Verbinden**“.

Bei einigen Telefonen können Sie die automatische Anbindung in den Zugangseinstellungen für die Geräte-Details konfigurieren. Dann kann uDirect 2 die Verbindung ohne Bestätigung automatisch herstellen.

- Falls Sie aufgefordert werden, die automatische Verbindung zu gestatten, tun Sie dies. Dann können uDirect und das Mobiltelefon immer wieder eine Verbindung herstellen, wenn sie sich in Reichweite zueinander befinden.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Navigieren zu den Bluetooth-Einstellungen haben, ziehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons zu Rate oder wenden Sie sich an Ihren Mobiltelefon-Fachhändler.