


Moxi familien

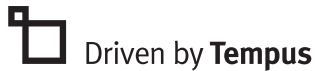

Unitron TrueFit tilpasningsvejledning

Denne hurtige tilpasningsvejledning vil guide dig igennem tilpasningen af et Moxi™ høreapparat med Unitron TrueFit™ tilpasningssoftware.

Unitron TrueFit-software kan fås enten som en fritstående version, eller som et modul inden for NOAH.

Før Moxi-høreapparater registreres, skal du vælge den ønskede programmeringsgrænseflade.

- Hvis du vælger iCube II, så sæt batterier i høreapparaterne og luk batteridøren.
- Hvis du vælger NOAHlink / HI-PRO, åbn batteridøren og indsæt programmeringskablet i programmeringsporten.

Under programmering er de følgende funktioner deaktiverede; automatisk program, høreapparatets betjeningselementer, tilbehør, easy-t, lydstreaming og adaptive mikrofon-funktioner.

Indtast klientens information

Information (fritstående version)


Under [Klient](#) skal du klikke på [Information](#). Klik på knappen [Ny Klient](#), indtast klientens information og klik på [Gem](#). Klik på knappen [Tom Session](#) for at begynde en ny session.

Audiogram (selvstændig version)

Under [Klient](#) skal du klikke på [Audiogram](#) og angive kundens audiogram og derefter vælge transduceren, der blev anvendt til audiometri.

Erfaring

Under [Klient](#) skal du klikke på [Erfaringsniveau](#) og indtast klientens erfaring med høreapparater.

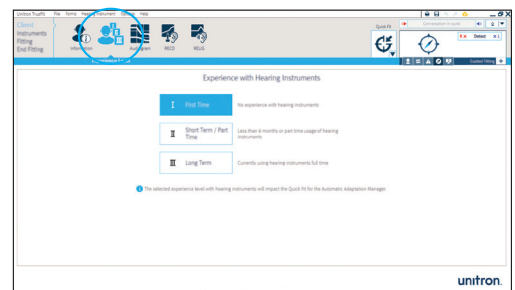

Registrer høreapparater

I menuen **Høreapparater** skal du klikke på **Valg** og vælge den ønskede programmeringsgrænseflade fra rullemenuen under registreringsknappen.

Klik på knappen **Detekter**. Høreapparatets model-, stil- og serienummer vises og kommunikationsstatus opdateres.


Guidet tilpasning

Denne tilpasningsindstilling er automatisk tilgængelig for alle høreapparater uden en gemt tilpasning. Guidet tilpasning kan også tilgås via ruden Hurtig visning.

Tilpasninger kan udføres ved at følge de angivne trin.

Markeringer bekræfter, hvilke trin der er udført, mens et spørgsmålstegn angiver trin, der skal udføres. Markeringer i en boks angiver, at trinnet er valgfrit.

Programmeringen af dine høreapparater er udført, efter alle de nødvendige trin har markeringer.

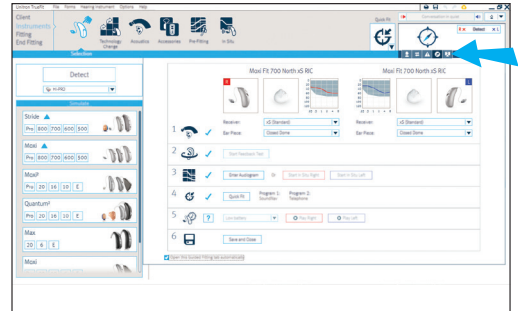

Traditionel tilpasning

I menuen Høreapparater

For at vælge akustik

Under Høreapparater skal du klikke på **Akustik**.

- Indtast IntelliVent-koden for automatisk konfiguration af udluftning for brugertilpasset ørestykke (hvis anvendeligt)
- Vælg modtagertype (dvs. xS, xP)
- Vælg ørestykke (dvs. åben, lukket)
- Vælg Lufthul for manuel konfiguration af udluftning (hvis anvendeligt)
- Vælg kabellængde for registrering

Quick Fit-høreapparater

Klik på knappen **Quick Fit** ved siden af ruden Hurtig visning.

Ændringer til software kan betyde at Quick Fit-knappen bliver gul. Hvis dette sker, klik på Quick Fit-knappen for at installere programmeringsændringer.



Tilbehør til parring

Under [Høreapparater](#) skal du klikke på [Tilbehør](#). Du skal bruge et USB-kabel til tilslutning af tilbehør. Klik på det tilbehørsikon, som du vil parre med et eller flere høreapparater.

Klik på knappen [Aktiver](#) for at tilføje det valgte tilbehør. Følg instruktionerne på skærmen.

I menuen Tilpasning

Feedback optimering

Under [Tilpasning](#) skal du trykke på [Feedback Optimering](#). Klik på knappen [Start feedback-test](#), og følg vejledningen på skærmen.

Bemærk: Lav en feedback optimeringstest, hvis hørlig feedback er til stede eller rapporteres.

Justering

Under [Tilpasning](#) skal du klikke på [Justering](#) for at finindstille høreapparater manuelt fra standardindstillinger.

Klik på [Tilpasningsadministrator](#) for at ændre fra anbefalede indstillinger. Der findes en markeringsboks til at deaktivere automatisk tilpasning, hvis det ønskes.

Hvis nødvendigt kan råd til tilpasning bruges til at foreslå og anvende løsninger til finjustering.

I menuen Afslut tilpasning

Konfigurer høreapparatets opsætning


Under [Afsluttende tilpasning](#) skal du vælge [HA-opsætning](#) for at konfigurere høreapparater fra standard HA-opsætning.

Konfigurer bip

Under [Afsluttende tilpasning](#) skal du vælge [bip](#) for at demonstrere og konfigurere bip fra standardindstillinger.

For at afslutte tilpasning

For at afslutte tilpasningen skal du klikke på [Tilpasningsoversigt](#) og vælge knapperne [Udskriv](#), [Gem](#) og [E-mail](#). Luk sessionen ved at bruge knappen [Luk session](#).

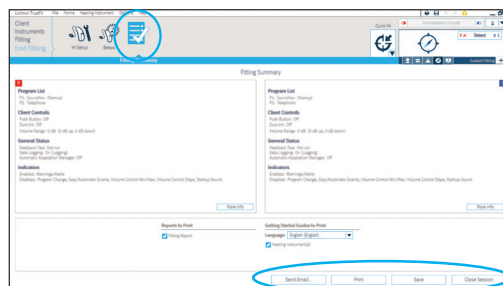

Efter at have lukket session

Patienterne vil først kunne opleve den fulde nyttevirkning af deres teknologiske niveau, efter at høreapparatet genstartes.

For at genstarte høreapparatet efter brug af iCube II skal du åbne og lukke batteridøren.

For at genstarte høreapparatet efter brug af NOAHlink / HI-PRO skal du aftage programmeringskabel, isætte batterier og lukke batteridøren.

Få mere at vide om tilpasning af Moxi familie høreapparater og Unitron TrueFit-tilpasningssoftware under Funktionen Hjælp i Unitron TrueFit.