


Stride familien

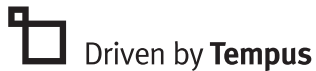

Unitron TrueFit tilpasningsvejledning

Denne hurtige tilpasningsvejledning vil guide dig igennem tilpasningen af et Stride™ høreapparat med Unitron TrueFit™ tilpasningssoftware.

Unitron TrueFit-software kan fås enten som en standalone version, eller som et modul i NOAH.

Før Stride-høreapparater registreres, skal du vælge den ønskede programmeringsenhed.

- Hvis du vælger iCube II, så sæt batterier i høreapparaterne og luk batterilågen.
- Hvis du vælger NOAHlink eller HI-PRO med BTE apparater, åbn batterilågen og indsæt programmeringskablet i kabelstikket.
- Hvis det er NOAHlink eller HI-PRO med ITE-apparater, så fjern batterilågen og indsæt programmeringskablet.

Under programmering er de følgende funktioner deaktiverede; automatisk program, høreapparatets betjeningselementer, tilbehør, easy-t, lydstreaming og adaptive mikrofon-funktioner.

Indtast klientens information

Information (standalone version)


Under **Klient** skal du klikke på **Information**. Klik på knappen **Ny Klient**, indtast klientens information og klik på **Gem**. Klik på knappen **Blank Session** for at begynde en ny session.

Erfaring

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaringsniveau** og indtast klientens erfaring med høreapparater.

Audiogram (Standalone version)

Under **Klient** skal du klikke på **Audiogram** og angive kundens audiogram og derefter vælge transduceren, der blev anvendt til audiometri.

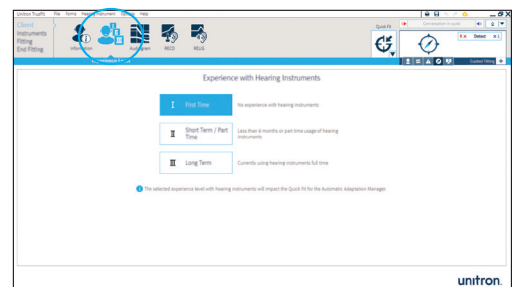

Registrer høreapparater

I menuen [Høreapparater](#) skal du klikke på [Valg](#) og vælge den ønskede programmeringsenhed fra rullemenuen under registreringsknappen.


Klik på knappen [Detekter](#). Høreapparatets model-, stil- og serienummer vises og kommunikationsstatus opdateres.

Guidet tilpasning

Denne tilpasningsindstilling er automatisk tilgængelig for alle høreapparater uden en gemt tilpasning. Guidet tilpasning kan også tilgås via ruden Hurtig visning.

Tilpasninger kan udføres ved at følge de angivne trin.

Markeringer bekræfter, hvilke trin der er udført, mens et spørgsmålstegn angiver trin, der skal udføres. Spørgsmålstegn i en boks indikerer at der mulighed for trin.

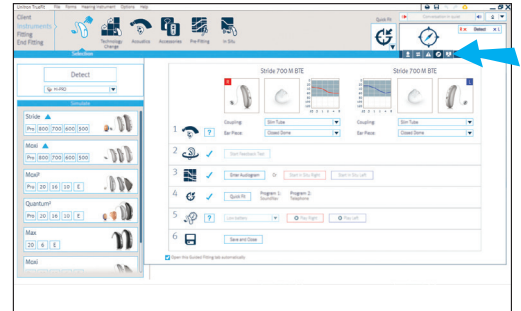

Programmeringen af dine høreapparater er udført, efter alle de nødvendige trin har markeringer.

Traditionel tilpasning

I menuen Høreapparater

Valg af akustik til Stride BTE

I Høreapparater, klik på [Akustik](#).

- Indtast IntelliVent-koden for automatisk konfiguration af ventilation for formstøbte ørepropper (hvis anvendeligt)
- Vælg Almindelig slange eller Slim Tube
- Ved tilpasning med almindelige slanger, skal du vælge øreproptype, vent størrelse, Hook-type og den slangetype der passer til
- Ved tilpasning med slim tube, skal du vælge øreprop og slangelængde som passer

Valg af akustik til Stride ITE

I Høreapparater, klik på [Akustik](#).

- Konfigurer vent (hvis relevant)
- Hvis du har bestilt ITE'er med IntelliVent, vil softwaren automatisk aflæse koden og konfigurere høreapparaterne til optimal ventilation

Quick Fit-høreapparater


Klik på knappen **Quick Fit** ved siden af ruden Hurtig visning.

Ændringer til software kan betyde at Quick Fit-knappen bliver gul. Hvis dette sker, klik på Quick Fit-knappen for at installere programmeringsændringer.

Tilbehør til parring

Under **Høreapparater** skal du klikke på **Tilbehør**. Du skal bruge et USB kabel til at forbinde til tilbehøret. Klik på det tilbehørsikon, som du vil parre med et eller flere høreapparater.

Klik på knappen **Aktiver** for at tilføje det valgte tilbehør. Følg instruktionerne på skærmen.

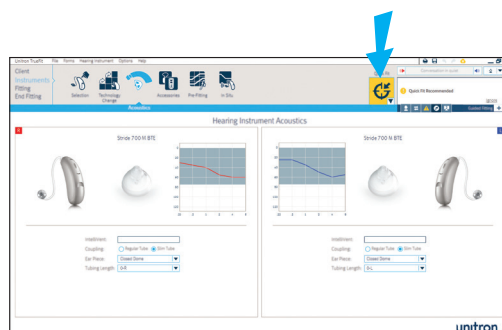

I menuen Tilpasning

Feedback optimering

Under **Tilpasning** skal du trykke på **Feedback Optimering**. Klik på knappen **Start feedback-test**, og følg vejledningen på skærmen.

Note: Brug af denne test anbefales for at fjerne vedvarende feedback.

Justering

I Tilpasning, klik på **Tilpasningsmanager** for at ændre indstillingerne. Det er det bedste sted at starte med justeringerne. En tjekboks er tilgængelig så man kan deaktivere den automatiske tilpasning, hvis man ønsker det.

Klik på **Justering** for yderligere at finjustere høreapparaterne.

Hvis nødvendigt kan råd til tilpasning bruges til at foreslå og anvende løsninger til finjustering.

I menuen Afslut tilpasning

Konfigurer høreapparatets opsætning


Under **Afsluttende tilpasning** skal du vælge **HA-opsætning** for at konfigurere høreapparater fra standard HA-opsætning.

Konfigurer bip

Under **Afsluttende tilpasning** skal du vælge **bip** for at demonstrere og konfigurere bip fra standardindstillinger.

For at afslutte sessionen

Klik på **Tilpasningsresume** og tryk på **Print**, **Gem** og **Email** knapperne. Luk sessionen ved at bruge knappen **Luk sessionen**.

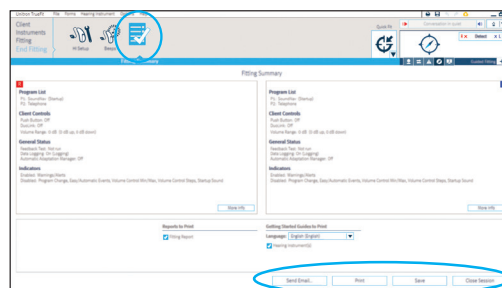

Efter tilpasningssessionen er lukket

Patienterne vil først kunne opleve den fulde virkning af deres teknologiske niveau, efter at høreapparatet genstartes.

For at genstarte høreapparaterne efter brug af iCube II, åbn og luk batterilågen.

For at genstarte høreapparaterne efter brug af Noahlink eller HI-PRO, fjern programmeringskablet, indsæt batterier og luk batterilågerne.

Få mere at vide om tilpasning af Stride høreapparater og Unitron TrueFit-tilpasningssoftware under Funktionen Hjælp i Unitron TrueFit.