

Aanbevolen systeemvereisten

Systeem component	Aanbevolen
Processor	Pentium i5, 3 GHz of sneller
RAM	8 GB of meer
Harde-schijfruimte	4 GB of meer
Geschikte besturingssystemen	• Windows Vista, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 7, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 8, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 8.1, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 10, 32-bits/64-bits, laatste SP
Schermbresolutie	1280 x 1024 pixels of meer
Resolutie tweede scherm (voor cliënt)	1366 x 768 pixels of meer
Grafische kaart	16 miljoen (24-bits) schermkleuren of meer
Station	DVD-ROM
Seriële COM-poort	Eén voor HI-PRO als deze wordt gebruikt via een seriële COM-poort

Systeem component	Aanbevolen
USB poorten	Eén voor elk van de onderstaande: • Bluetooth adapter • Accessoires programmeren • HI-PRO USB/HI-PRO 2/iCube II
Programmeerinterfaces	• iCube / iCube II • NOAHlink • HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink driver	NOAHlink-eigenschappen en NOAHlink-kernel: nieuwste beschikbare versie
Internetverbinding	Sterk aanbevolen
Browser	• Internet Explorer® laatste versie • Mozilla® Firefox® laatste versie • Google® Chrome™ laatste versie • Microsoft Edge® laatste versie
Geluidskaart	Stereo
Afspeelsysteem	20 Hz – 14 kHz
NOAH versie	NOAH 4.6 (NOAH 3.7.1 of nieuwer vereist)

unitron TrueFit™ software

Succesvolle aanpassingen. Eenvoudig.

Unitron TrueFit v3.4
Installatiegids

A Sonova brand

Unitron TrueFit software installeren


1. Plaats de Unitron TrueFit DVD in uw DVD-ROM speler. Het installatieprogramma zou automatisch moeten starten via uw besturingssysteem.
Wanneer dit niet gebeurt, kunt u het volgende doen:

Ga naar: Windows Start, kies Uitvoeren... vul de bestandsinformatie in. (bv. d:\setup.exe, waarbij d: de letter van uw DVD-ROM station is) en klik op OK.


OF

Gebruik Windows Verkenner (Deze Computer) om het bestand **setup.exe** te vinden op de DVD-ROM en dubbelklik op de bestandsnaam.

2. Selecteer de installatietaal van uw voorkeur: Engels, Frans, Duits of Nederlands (alleen voor de installatieprocedure).

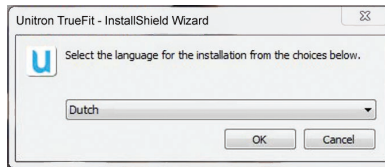

3. Wanneer het Unitron TrueFit installatiescherm wordt weergegeven volgt u de instructies op het scherm, zoals het selecteren van het type installatie van uw voorkeur: NOAH of Standalone.

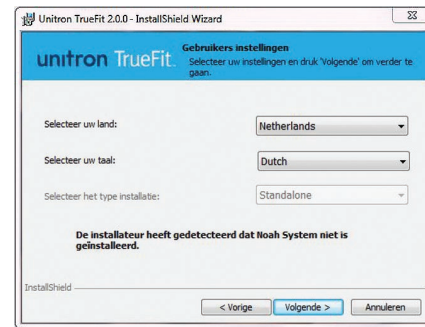

 Instructies zijn beschikbaar op www.unitron.com/instr in Adobe® Acrobat® PDF-indeling. Als u deze wilt bekijken, moet Adobe Acrobat Reader zijn geïnstalleerd. Ga naar Adobe.com om te downloaden.

 Neem contact op met Unitron via de telefoonnummers of adressen in deze handleiding om een gratis exemplaar van de instructies te verkrijgen. Het exemplaar wordt binnen 7 dagen naar u verzonden.

Hebt u assistentie nodig?

Australië - 1800 212 313
België - +31 88 600 88 10
Brazilië - +55 11 3748 0960
Canada - 1 800 265 8255
China - +86 21 61205533
Denemarken - +45 64 41 78 87
Duitsland - +49 711 658538 0
Europese vertegenwoordiging
- +41 58 928 01 01
Frankrijk - 04 26 23 22 00
India - +91-22-26871151
Nederland - +31 88 600 88 10

Nieuw-Zeeland - 0800 864 8766
Norway - +47 22 47 76 30
Oostenrijk - +49 711 658538 0
Rusland - +7 495 788 02 04
Spanje - +34 902 494 960
Sweden - +46 (0) 8 546 20 960
V.K.- +44 (0) 1925 247810
V.S. - 1 800 888 8882
Zuid-Afrika - (011) 467 7662/52
Zuid-Korea - +82 2 859 4902
Zwitserland - 0800 928 800

Voor niet geregistreerde landen - +1 519 895 0100



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



sonova
HEAR THE WORLD