

Серия Moxi



Driven by **Tempus**

Краткое справочное руководство по настройке Unitron TrueFit

В этом кратком справочном руководстве описаны шаги по настройке слухового аппарата Moxi™ с помощью программного обеспечения Unitron TrueFit™

Программное обеспечение Unitron TrueFit доступно в автономной версии или в виде модуля внутри программатора NOAH.

Перед подключением слуховых аппаратов Moxi выберите желаемый интерфейс программирования.

- Если вы используете iCube II, вставьте батареи в слуховые аппараты и закройте крышку батарейного отсека.
- Если вы используете NOAHlink или HI-PRO, откройте крышку батарейного отсека и вставьте шнур для программирования в программатор.

Во время программирования отключены следующие функции: автоматическая программа, элементы управления аппаратом, easy-t, потоковая передача звука и адаптивный микрофон.

Ввод информации о клиенте

Информация (автономная версия)


На вкладке [Клиент](#) нажмите [Информация](#). Нажмите кнопку [Новый клиент](#), введите информацию о клиенте и нажмите [Сохранить](#). Нажмите кнопку [Новая сессия](#), чтобы начать новую сессию.

Аудиограмма (автономная версия)

На вкладке [Клиент](#) нажмите [Аудиограмма](#), введите аудиограмму клиента и выберите преобразователь, используемый при аудиометрии.

Опыт ношения

На вкладке [Клиент](#) нажмите кнопку [Опыт ношения](#) и укажите опыт клиента в пользовании слуховыми аппаратами.

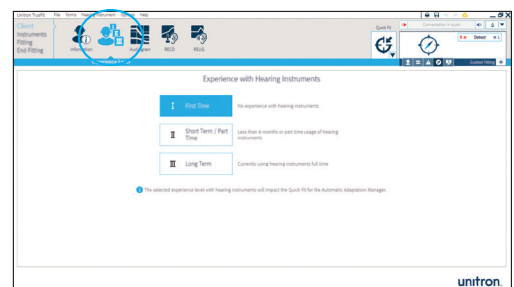

Обнаружение слуховых аппаратов

На вкладке **Инструменты** нажмите **Выбор** и из раскрывающегося списка под кнопкой поиска выберите желаемый интерфейс программирования.

Нажмите кнопку **Поиск**. Отобразятся модель, стиль и серийный номер слухового аппарата, и обновится статус подключения.


Управляемая настройка

Этот вариант настройки автоматически доступен для любых слуховых аппаратов без сохраненных параметров. Управляемую настройку можно также выбрать на панели быстрого просмотра.

Настройка проводится путем выполнения указанных шагов.

Галочками отмечаются выполненные шаги, а вопросительным знаком — шаги, которые предстоит выполнить. Галочками в рамке отмечаются необязательные шаги.

Слуховые аппараты будут успешно запрограммированы после того, как все обязательные шаги будут отмечены галочками.

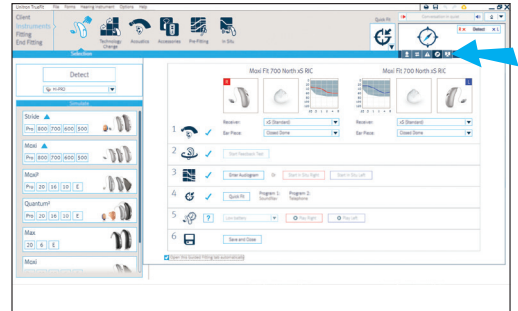

Традиционный вариант настройки

В меню инструментов

Выбор акустики

В меню инструментов нажмите **Акустика**.

- Введите код IntelliVent, чтобы автоматически настроить вент для индивидуального вкладыша (если применимо)
- Выберите тип ресивера (т. е. xS, xP)
- Выберите типа вкладыша (т. е. открытый, закрытый)
- Выберите вент, чтобы настроить его вручную (если применимо)
- Выберите длину провода в целях ведения записи

Быстрая настройка слуховых аппаратов

Нажмите кнопку **Быстрая настройка**, расположенную рядом с панелью быстрого просмотра.

При внесении изменений внутри программного обеспечения кнопка быстрой настройки может стать желтой. В этом случае нажмите кнопку быстрой настройки, чтобы применить программные изменения.



Подключение аксессуаров

На вкладке **Инструменты** нажмите **Аксессуары**. Для подключения любого из наших аксессуаров потребуется USB-кабель. Нажмите значок аксессуара, подключаемого к слуховым аппаратам.

Нажмите кнопку **Активировать** для подключения выбранного аксессуара. Следуйте инструкциям на экране.

В меню настройки

Оптимизация обратной связи

На вкладке **Настройка** нажмите **Оптимизация обратной связи**. Нажмите кнопку **Начать проверку обратной связи** и следуйте инструкциям на экране.

Примечание. Выполните проверку обратной связи, если обратная связь слышна и о ее наличии сообщает клиент.

Точная настройка

На вкладке **Настройка** нажмите **Точная настройка**, чтобы вручную провести тонкую подстройку стандартных параметров слуховых аппаратов.

Нажмите **Система адаптации**, чтобы изменить рекомендуемые параметры. При желании автоматическую адаптацию можно отключить, сняв соответствующий флажок.

При необходимости можно использовать функцию совета по настройке, которая предлагает и применяет параметры тонкой настройки.

В меню завершения настройки

Настройте конфигурацию слухового аппарата


На вкладке **Завершение настройки** выберите **Конфигурация HI**, чтобы настроить слуховые аппараты с использованием стандартных параметров конфигурации HI.

Настройка звуковых сигналов

На вкладке **Завершение настройки** выберите **Звуковые сигналы**, чтобы продемонстрировать и настроить стандартные параметры звуковых сигналов.

Завершение настройки

Для завершения настройки нажмите **Отчет о настройке** и нажмите кнопки **Печать**, **Сохранить** и **Отправить электронное сообщение**. Закройте сессию, нажав кнопку **Заккрыть сессию**.

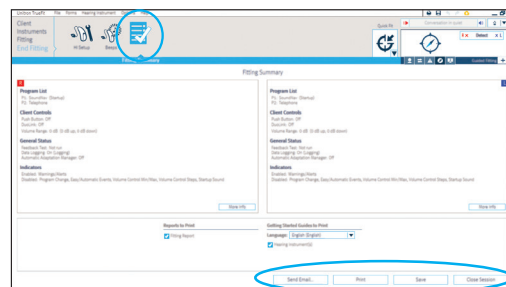

После закрытия сессии

Клиенты смогут в полной мере воспользоваться преимуществами их технологического уровня только после перезагрузки слухового аппарата.

Чтобы перезагрузить слуховой аппарат после использования iCube II, откройте и закройте крышку батарейного отсека.

Чтобы перезагрузить слуховой аппарат после использования NOAHlink или HI-PRO, извлеките шнур для программирования, вставьте батареи и закройте батарейный отсек.

Чтобы узнать подробнее о настройке слуховых аппаратов серии Moxi или о программном обеспечении Unitron TrueFit, воспользуйтесь функцией Справка в программе Unitron TrueFit.