

Moxi-familjen



Driven by **Tempus**

Snabbguide för anpassning i Unitron TrueFit

Denna snabbguide vägleder dig genom anpassningen av din Moxi™-hörapparat med hjälp av anpassningsprogramvaran Unitron TrueFit™.

Programvaran Unitron TrueFit finns både som en fristående version och som en modul i NOAH.

Välj önskat programmeringsgränssnitt innan du påbörjar sökningen efter din(a) Moxi-hörapparat(er).

- Om du använder iCube II sätter du i batterierna i hörapparaterna och stänger batteriluckan.
- Om du använder NOAHlink / HI-PRO öppnar du batteriluckan och ansluter programmeringskabeln till programmeringsporten.

Under pågående programmering är följande funktioner inaktiverade: automatiskt program, hörapparatkontroller, tillbehör, easy-t, ljudstreaming och adaptiva mikrofonfunktioner.

Ange brukarinformation

Information (fristående version)


I fönstret [Brukare](#) klickar du på [Information](#). Klicka på knappen [Ny brukare](#) och ange brukarens uppgifter. Klicka sedan på [Spara](#). Klicka på knappen [Blank Session](#) om du vill starta en ny session.

Audiogram (fristående version)

Under [Brukare](#) klickar du på [Audiogram](#) och anger brukarens audiogram och väljer vilken överföring som använts för audiometri.

Erfarenhet

Under [Brukare](#) klickar du på [Erfarenhetsnivå](#) och anger brukarens erfarenhet av hörapparater.

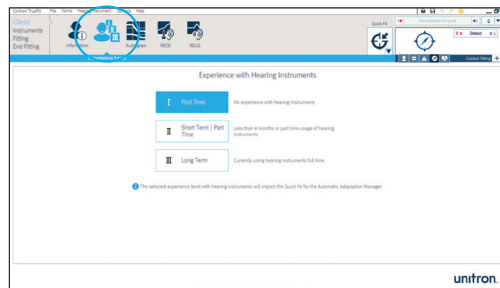

Sökning efter hörapparater

I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Val** och väljer programmeringsgränssnitt i listrutan under knappen Sök.

Klicka på knappen **Sök**. Hörapparatserie, modell och serienummer visas och kommunikationsstatusen uppdateras.

Guidad anpassning


Detta anpassningsalternativ är automatiskt tillgängligt i alla hörapparater som inte har någon lagrad anpassning. Guidad anpassning kan även väljas via Översiktspanelen.

Anpassningar genomförs genom att följa de angivna stegen.

Bockmarkeringar bekräftar vilka steg som har slutförts medan frågetecken anger vilka steg som ännu måste genomföras.

En bockmarkering i en ruta innebär att steget är valfritt.

Dina hörapparater är färdigprogrammerade när alla obligatoriska steg har försetts med en bockmarkering.

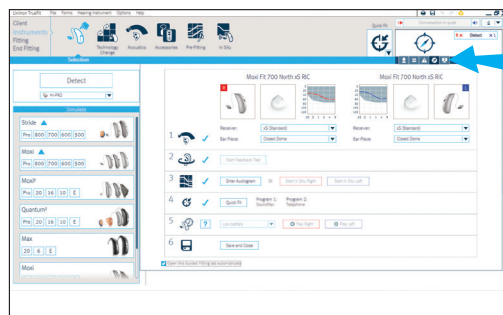

Traditionell anpassning

Under menyn Hörapparater

Ställ in akustik


Under menyn Hörapparater klickar du på **Akustik**.

- Ange IntelliVent-koden för att automatiskt konfigurera ventilationen för en i-örat-enhet (om tillämpligt)
- Välj hörtelefonstyp (t.ex. xS, xP)
- Välj i-örat-enhet (t.ex. öppen eller tät)
- Välj Ventilation för att manuellt konfigurera ventilationen (om tillämpligt)
- Välj slanglängd i dokumentationssyfte

Quick fit-hörapparater

Klicka på knappen **Quick Fit** som du hittar ovanför Översiktspanelen.

Quick Fit-knappen kan ändra färg till gul när ändringar görs i programvaran. I så fall klickar du på Quick Fit-knappen för att tillämpa programmeringsändringarna.

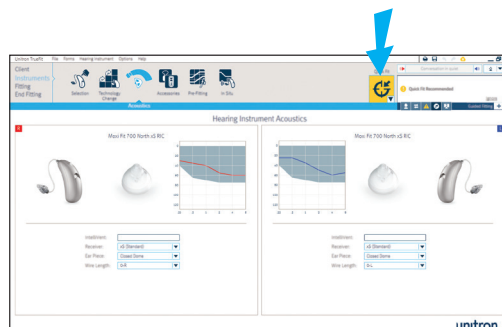

Länka tillbehör

I menyn [Hörapparater](#) klickar du på [Tillbehör](#). Du behöver en USB-kabel för att ansluta till något av våra tillbehör. Klicka på ikonerna för tillbehöret som du vill ansluta till hörapparaten(-erna).

Klicka på knappen [Aktivera](#) för att länka det valda tillbehöret. Följ instruktionerna på skärmen.

Under menyn Anpassning

Återkopplingstest

I fönstret [Anpassning](#) klickar du på [Återkopplingstest](#). Klicka på knappen [Starta återkopplingstest](#) och följ instruktionerna på skärmen.

Obs! Utför återkopplingstestet om hörbar återkoppling noteras eller rapporteras.

Justera

Under [Anpassning](#) klickar du på [Justera](#) för att manuellt finjustera hörapparaterna utifrån standardinställningarna.

Klicka på [Tillvänjningshanterare](#) för att justera utifrån rekommenderade inställningar. Det finns en kryssruta där du kan inaktivera automatisk tillvänjning om så önskas.

Vid behov kan anpassningsråd användas för att föreslå och tillämpa finjusteringsalternativ.

Under menyn Slutlig anpassning

Konfigurera hörapparatsinställningar


Under [Slutlig anpassning](#) väljer du [HA-inställningar](#) för att konfigurera hörapparaterna utifrån HA-standardinställningar.

Konfigurera Pip

Under [Slutlig anpassning](#) väljer du [Pip](#) för att spela upp och konfigurera pipen utifrån standardinställningarna.

Slutlig anpassning

För att avsluta anpassningen klickar du på [Sammanfattning](#) och väljer någon av knapparna [Skriv ut](#), [Spara eller Skicka E-post](#). Stäng sessionen med knappen [Stäng session](#).

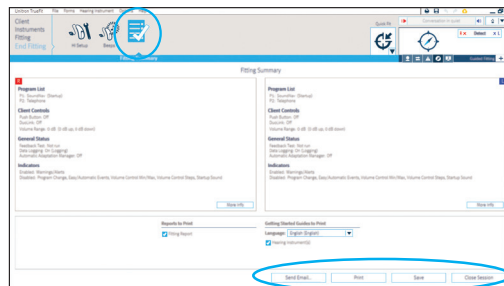

Efter session har stängts

Brukaren kommer att kunna uppleva alla fördelar med sin teknologinivå först efter att hörapparaten har startats om.

För att starta om hörapparaten efter att ha använt iCube II öppnar du och stänger batteriluckan.

För att starta om hörapparaten efter att ha använt NOAHlink / HI-PRO kopplar du ur programmeringskabeln, sätter i batterierna och stänger batteriluckan.

Mer information om utprovning av hörapparater i Moxi-familjen och Unitrons programvara TrueFit finns i Hjälpfunktionen i Unitron TrueFit.