

Max

Unitron TrueFit tilpasningsvejledning

Max™ giver maksimal power og maksimal beskyttelse. Max er den eneste Super Power-model på markedet med Power Tilpasningsmanager, der giver en første tilpasning, som dine kunder ønsker, så de skånsomt og automatisk med tiden vænner sig til mere sikre lydniveauer, der i sidste ende vil beskytte deres hørelse. Max, der er drevet af Era™, tilbyder funktioner, der er beregnet til de svært til dybt hørehæmmede, og fokuserer på at maksimere taleforståelsen, uden at det går ud over opmærksomheden. Undgå overforstærkning, og opnå de bedste langsigtede høreresultater med Max.

Programmér Max med Unitron TrueFit-software

Denne hurtige tilpasningsvejledning hjælper dig gennem de forskellige trin og gør tilpasningen af Max-høreapparater nem, ved at bruge Unitrons TrueFit™-tilpasningssoftware.

Vælg den ønskede programmeringsenhed for at registrere et eller flere høreapparater.

- Hvis du bruger iCube, skal du sætte batterierne i høreapparatet og lukke batterilågen.
- Hvis du bruger NOAHlink eller HI-PRO, skal du åbne programmeringslågen og sætte programmeringskablet i programmeringslågen.

Bemærk: Høreapparatknapper, tilbehør, easy-t, easy-DAI, lydstreaming og automatiske mikrofonfunktioner vil blive deaktiveret under programmeringen.

1. Klient

NOAH

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaring** og angive kundens erfaringsniveau med høreapparater.

Standalone

a. Information


Under **Klient** skal du klikke på **Information**. Klik på knappen **Ny Klient**, indtast klientens information og klik på **Gem**. Klik på knappen **Tom Session** for at begynde en ny session.

b. Erfaring

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaring** og angive kundens erfaringsniveau med høreapparater.

c. Audiogram


Under **Klient** skal du klikke på **Audiogram** og angive kundens audiogram og derefter vælge transduceren, der blev anvendt til audiometri.

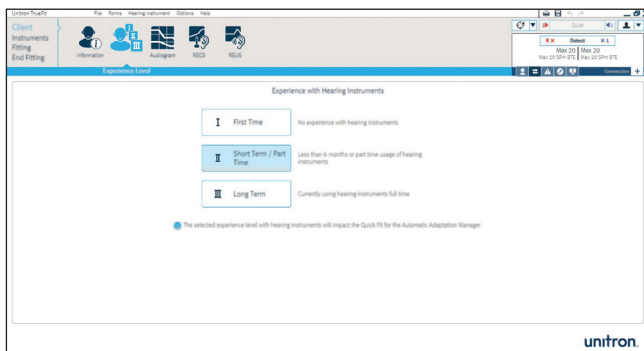

2. Høreapparater

a. Valg

1. I menuen **Høreapparater** skal du klikke på **Valg** og vælge den ønskede programmeringsgrænseflade fra rullemenuen under registreringsknappen.
2. Klik på knappen **Detekter**. Der fremkommer en oversigt over høreapparatets modeltype, design og serienummer og kommunikationsstatus opdateres.

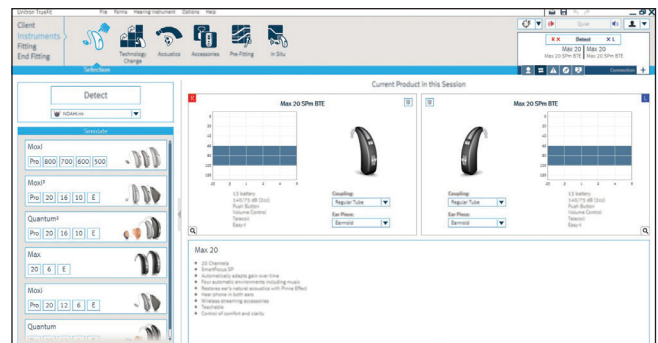


b. Akustik

1. Under **Høreapparater** skal du klikke på **Akustik** for at konfigurere emner som for eksempel: sammenkobling, ventilation, hook, slange, ørestykke og slangelængde.
2. Hvis du har bestilt en øreprop med IntelliVent skal du indtaste koden så softwaren automatisk kan konfigurere høreapparatet til optimal ventilering.
3. Du kan vælge Almindelig slange eller Power Slim Tube (tynd Power-slange).
4. Med Power Slim Tube skal du vælge øreproptype, ventilation og slangelængde.
5. Med almindelig slange og en hook skal du vælge ventilationsstørrelse, hook og slangetype.
6. Klik på knappen **Hurtig Tilpasning**. 



c. Tilbehør

1. Under **Høreapparater** skal du klikke på **Tilbehør**.
2. Klik på det tilbehørsikon, som du vil parre med et eller flere høreapparater.
3. Tryk på knappen **Aktiver** for at tilføje det valgte tilbehør. Følg instruktionerne på skærmen.

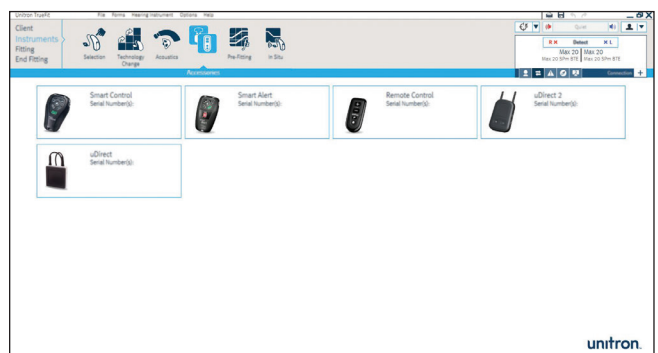


3. Tilpasning

a. Feedback optimering

1. Under **Tilpasning** skal du trykke på **Feedback Optimering**.
2. Klik på knappen **Start feedback test**, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre feedback optimering på hvert enkelt høreapparat.

b. Justering


1. Under **Tilpasning** skal du klikke på **Justering** for at finjustere høreprogrammerne manuelt. Du kan konfigurere tilpasningsmanageren, okklusions-manageren, basforstærkeren, knapperne dæmpet/moderat/høj, MPO/Gain/CR /TK og frekvenskomprimering efter behov. Tilpasningsråd kan også bruges til at foreslå og tilføje finjusteringsløsninger.
2. Klik på knapperne **Svag/Mod/Kraftig**. Vælg de(t) program(mer), du ønsker at tilføje. Vælg det ønskede indgangsniveau (dæmpet, moderat, høj eller alle) og de frekvenser, du vil installere. Brug knapperne +/- til at skrue op og ned for funktionerne.
3. Klik på **MPO/Gain/CR/TK**. Vælg de(t) program(mer), du ønsker at tilføje. Vælg den ønskede justering (MPO, Gain, CR eller TK) og frekvensområde for justering. Brug knapperne +/- til at skrue op og ned for funktionerne.

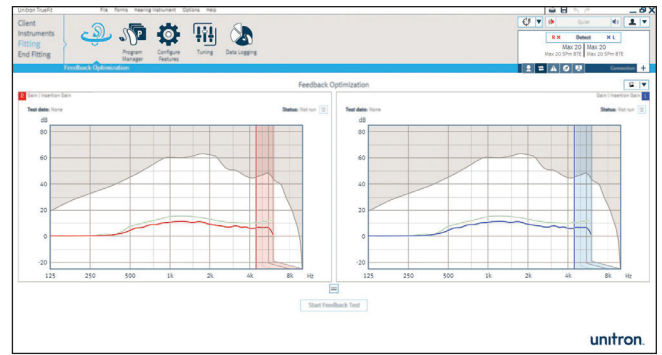

4. Afslut tilpasning

Under **Endelig Tilpasning** kan du konfigurere volumenkontrolindstillinger, trykknapper, brug af håndtag og biptyde sammen med andre indstillinger af høreapparatet.

1. For at afslutte tilpasningen skal du klikke på knappen **Tilpasningsresume** og trykke på **Udskriv** og **Gem**.
2. Tryk på knappen **Luk Session** for at lukke sessionen.
3. Når menuen er lukket:
 - Når du anvender iCube, skal du genstarte høreapparatet ved at åbne og lukke batterilågen.
 - Når du anvender NOAHlink eller HI-PRO, skal du fjerne programmeringskablet, isætte batterierne og lukke batterilågen.

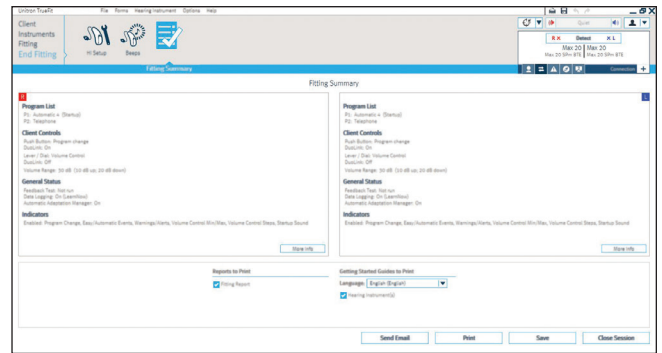

Få mere at vide om tilpasning af Max-høreapparater og Unitrons TrueFit-tilpasningssoftware under Funktionen **Hjælp** i Unitron TrueFit.