

Moxi familien

Unitron TrueFit tilpasningsvejledning

Era™ er drivkraften bag, hvert Moxi™ og Moxi² høreapparater, som er udstyret med en RIC (Receiver-in-Canal) spækket med teknologier, der sikrer uforstyrret lytning i alle situationer.

Programmér Moxi og Moxi² med Unitron TrueFit-software

Denne hurtige tilpasningsvejledning hjælper dig gennem de forskellige trin og gør tilpasningen af Moxi og Moxi²-høreapparater nem ved at bruge Unitrons TrueFit™-tilpasningssoftware.

Vælg den ønskede programmeringsenhed for at registrere et eller flere høreapparater.

- Hvis du bruger iCube, skal du sætte batterierne i høreapparatet og lukke batterilågen.
- Hvis du bruger NOAHlink eller HI-PRO, skal du åbne programmeringslågen og sætte programmeringskablet i programmeringslågen.

Bemærk: Hvis du ønsker det kan kabelværktøjet anvendes sammen med høreapparatet til at hjælpe med indsættelsen af programmeringskablet.

Bemærk: Høreapparatknapper, tilbehør, easy-t, lydstreaming og automatiske mikrofonfunktioner vil blive deaktiveret under programmeringen.

1. Klient

NOAH

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaring** og angive kundens erfaringsniveau med høreapparater.

Standalone

a. Information


Under **Klient** skal du klikke på **Information**. Klik på knappen **Ny Klient**, indtast klientens information og klik på **Gem**. Klik på knappen **Tom Session** for at begynde en ny session.

b. Erfaring

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaring** og angive kundens erfaringsniveau med høreapparater.

c. Audiogram

Under **Klient** skal du klikke på **Audiogram** og angive kundens audiogram og derefter vælge transduceren, der blev anvendt til audiometri.

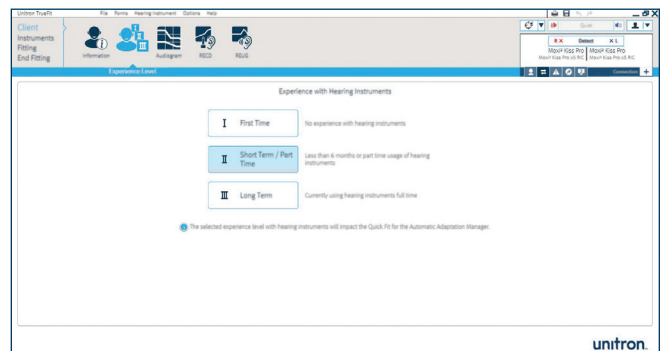

2. Høreapparater

a. Valg


1. I menuen **Høreapparater** skal du klikke på **Valg** og vælge den ønskede programmeringsgrænseflade fra rullemenuen under registreringsknappen.
2. Klik på knappen **Detekter**. Der fremkommer en oversigt over høreapparatets modeltype, design og serienummer og kommunikationsstatus opdateres.

b. Akustik

1. Under **Høreapparater**, skal du klikke på **Akustisk**.
2. Konfigurer receptortypen (xS, xP, xSP eller xSP plus), øreprop og ventilation (hvis relevant) fra dropdown-menuen for hvert høreapparat. Hvis du ønsker det kan du angive receiverlængden til dine optegnelser.
3. Til klientens øreprop med IntelliVent indtastes koden og softwaren vil automatisk konfigurere høreapparatet til optimal ventilation.
4. Klik på knappen **Hurtig Tilpasning**. 

c. Tilbehør

1. Under **Høreapparater** skal du klikke på **Tilbehør**.
2. Klik på det tilbehørsikon, som du vil parre med et eller flere høreapparater.
3. Tryk på knappen **Aktiver** for at tilføje det valgte tilbehør. Følg instruktionerne på skærmen.

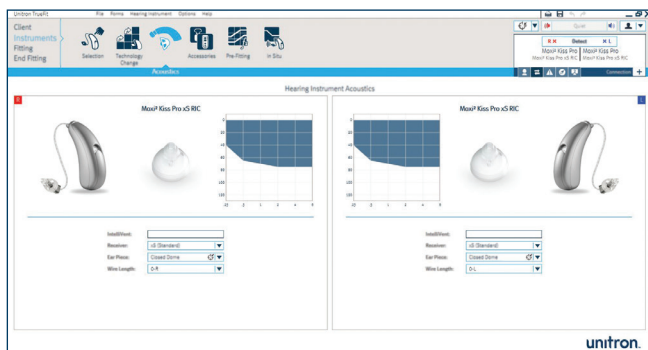

3. Tilpasning

a. Feedback optimering

1. Under **Tilpasning** skal du trykke på **Feedback Optimering**.
2. Klik på knappen **Start feedback test**, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre feedbackoptimering på hvert enkelt høreapparat.

b. Justering


1. Under menuen **Tilpasning**, skal du trykke på **Justering** for manuelt at justere lytteprogrammer. Du kan konfigurere tilpasnings-manageren, okklusions-manageren samt knapperne Svag/Mod/Kraftig og MPO/Gain/CR efter behov. Tilpasningsråd kan også bruges til at foreslå og tilføje finjusteringsløsninger.
2. Klik på knapperne **Svag/Mod/Kraftig**. Vælg de(t) program(mer), du ønsker at tilføje. Vælg det ønskede indgangsniveau (dæmpet, moderat, høj eller alle) og de frekvenser, du vil installere. Brug knapperne +/- til at skrue op og ned for funktionerne.
3. Klik på **MPO/Gain/CR**. Vælg de(t) program(mer), du ønsker at tilføje. Vælg den ønskede justering (MPO, Gain eller CR) og frekvensområde for justering. Brug knapperne +/- til at skrue op og ned for funktionerne.



4. Afslut tilpasning

I menuen **Afslut Tilpasning**, kan du konfigurere bilyde, volumenkontrol og opsætningindstillinger samt andre egenskaber for høreapparatet.

1. For at afslutte tilpasningen skal du klikke på knappen **Tilpasningsresume** og trykke på **Udskriv** og **Gem**.
2. Tryk på knappen **Luk Session** for at lukke sessionen.
3. Når menuen er lukket:
 - Når du anvender iCube, skal du genstarte høreapparatet ved at åbne og lukke batterilågen.
 - Når du anvender NOAHlink eller HI-PRO, skal du fjerne programmeringskablet, isætte batterierne og lukke batterilågen.

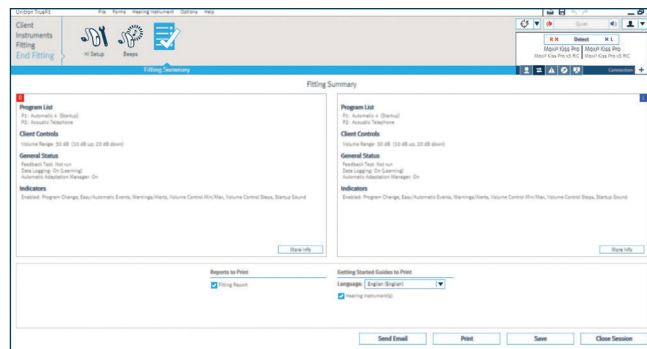

Få mere at vide om tilpasning af Moxi familie høreapparater og Unitrons TrueFit-tilpasningssoftware under Funktionen **Hjælp** i Unitron TrueFit.