

Quantum familien

Unitron TrueFit tilpasningsvejledning

Era™ er drivkraften bag Quantum™ og Quantum² høreapparater, der gengiver tydelig tale selv i de mest vanskelige omgivelser. Med intuitiv automatisk ydeevne og lyd kvalitet helt i top, sikrer disse høreapparater kunderne en mere naturlig høreelse. Overalt.

Programmér Quantum og Quantum² med Unitron TrueFit-software

Denne tilpasningsguide hjælper dig gennem de forskellige trin og gør tilpasningen af Quantum- og Quantum² -høreapparater nem ved at anvende Unitrons nye TrueFit™-tilpasningssoftware.

Vælg den ønskede programmeringsenhed for at registrere et eller flere høreapparater.

- Hvis du bruger iCube, skal du sætte batterierne i høreapparatet og lukke batterilågen.
- Hvis du bruger NOAHlink eller HI-PRO til BTE-enheder, skal du åbne batterilågen og sætte programmeringskablet i programmeringsporten.
- Hvis du bruger NOAHlink eller HI-PRO til ITE-enheder, skal du fjerne batterilågen og indsætte programmeringskablet.

Bemærk: For Quantum og Quantum² micro CIC eller Quantum² 10A ITE er skal du sørge for at du bruger det hvide programmeringskabel for at undgå at beskadige høreapparatet.

Bemærk: Høreapparatknapper, tilbehør, easy-t, easy-DAI, lydstreaming og automatiske mikrofonfunktioner vil blive deaktiveret under programmeringen.

1. Klient

NOAH

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaring** og angive kundens erfaringsniveau med høreapparater.

Standalone

a. Information


Under **Klient** skal du klikke på **Information**. Klik på knappen **Ny Klient**, indtast klientens information og klik på **Gem**. Klik på knappen **Tom Session** for at begynde en ny session.

b. Erfaring

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaring** og angive kundens erfaringsniveau med høreapparater.

c. Audiogram

Under **Klient** skal du klikke på **Audiogram** og angive kundens audiogram og derefter vælge transduceren, der blev anvendt til audiometri.

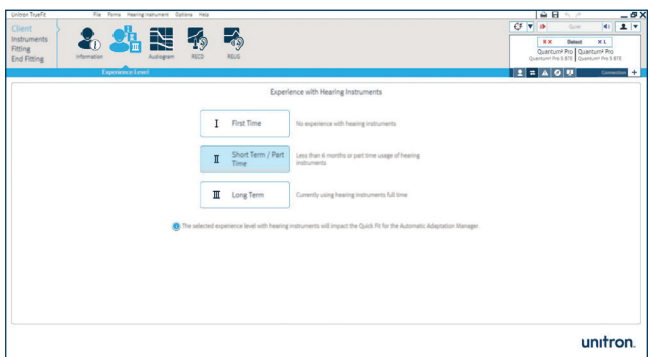

2. Høreapparater

a. Valg



1. I menuen **Høreapparater** skal du klikke på **Valg** og vælge den ønskede programmeringsgrænseflade fra rullemenuen under registreringsknappen.
2. Klik på knappen **Detekter**. En oversigt over høreapparaternes modeltype, design og serienummer vises og kommunikationsstatus opdateres.

b. Akustik

1. Under **Høreapparater** skal du klikke på **Akustik** for at konfigurere emner som for eksempel: sammenkobling, ventilation, hook, slange og ørestykke.
2. Hvis du har bestilt en øreprop/ørestykke med IntelliVent-teknologi til et BTE-apparat, skal du indtaste koden, hvorefter softwaren automatisk vil konfigurere høreapparatet til at opnå optimal ventilation.
3. Du har mulighed for at vælge almindelig slange eller Slim Tube (tynd slange) til BTE-apparaterne.
4. Til BTE-apparater med Slim Tube (tynd slange) kan du vælge ørestykketype og slangelængde (valgfrit).
5. Til BTE-apparater med almindelig slange og en hook kan du vælge ventilationsstørrelse, hooktype og slangetype.
6. På ITE-apparaterne kan ventilationen konfigureres. Hvis du har bestilt et ITE-apparat med IntelliVent, vil softwaren automatisk aflæse koden og konfigurere høreapparatet til at opnå optimal ventilation.
7. Klik på knappen **Hurtig Tilpasning**. 

c. Tilbehør

1. Under **Høreapparater** skal du klikke på **Tilbehør**.
2. Klik på det tilbehørsikon, som du vil parre med et eller flere høreapparater.
3. Tryk på knappen **Aktiver** for at tilføje det valgte tilbehør. Følg instruktionerne på skærmen.

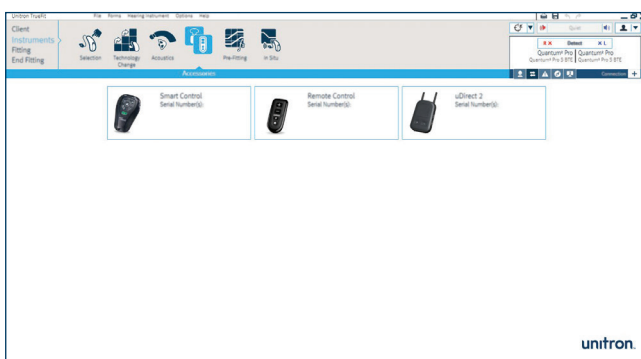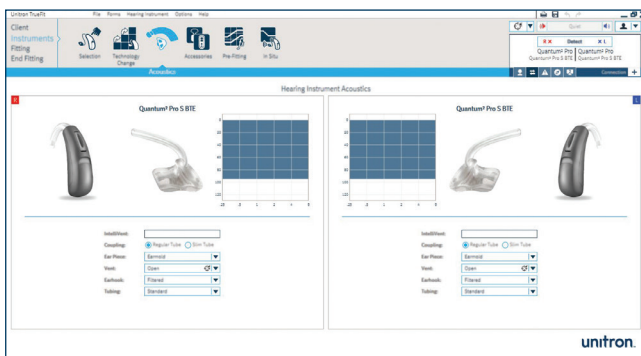


3. Tilpasning

a. Feedback optimering

1. Under **Tilpasning** skal du trykke på **Feedback Optimering**.
2. Klik på knappen **Start feedback test**, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre feedback optimering på hvert enkelt høreapparat.

b. Justering


1. Under **Tilpasning** skal du klikke på **Justering** for at finjustere høreprogrammerne manuelt. Du kan konfigurere tilpasnings-manageren, okklusions-manageren samt knapperne Svag/Mod/Kraftig og MPO/Gain/CR efter behov. Tilpasningsråd kan også bruges til at foreslå og tilføje finjusteringsløsninger.
2. Klik på knapperne **Svag/Mod/Kraftig**. Vælg de(t) program(mer), du ønsker at tilføje. Vælg det ønskede indgangsniveau (dæmpet, moderat, høj eller alle) og de frekvenser, du vil installere. Brug knapperne +/- til at skrue op og ned for funktionerne.
3. Klik på **MPO/Gain/CR**. Vælg de(t) program(mer), du ønsker at tilføje. Vælg den ønskede justering (MPO, Gain, eller CR) og frekvensområde for justering. Brug knapperne +/- til at skrue op og ned for funktionerne.

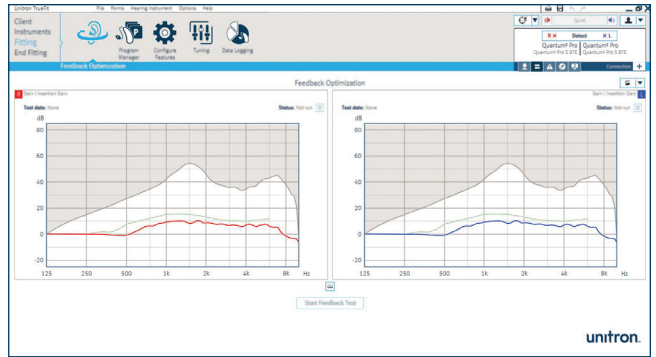

4. Afslut tilpasning

Under **Afslut Tilpasning** kan du konfigurere bilyde, volumenkontrol, trykknapper og brug af håndtag/drejeskive sammen med andre indstillinger af høreapparatet.

1. For at afslutte tilpasningen skal du klikke på knappen **Tilpasningsresume** og trykke på **Udskriv** og **Gem**.
2. Tryk på knappen **Luk Session** for at lukke sessionen.
3. Når menuen er lukket:
 - Når du anvender iCube, skal du genstarte høreapparatet ved at åbne og lukke batterilågen.
 - Når du anvender NOAHlink eller HI-PRO, skal du fjerne programmeringskablet, isætte batterierne og lukke batterilågen.

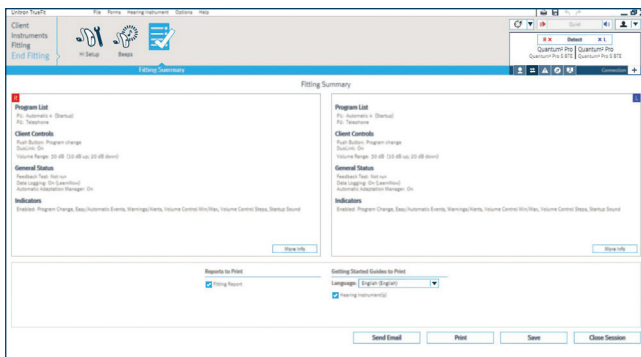

Få mere at vide om tilpasning af Quantum familie høreapparater og Unitrons TrueFit-tilpasningssoftware under Funktionen **Hjælp** i Unitron TrueFit.