

Shine Rev-familien

Unitron TrueFit tilpasningsvejledning

Drevet af Era;[™] platformen, der er betroet at levere den lydkvalitet, som patienter foretrækker, leverer Shine[™] Rev de bedste funktioner i sin klasse, som arbejder sammen om at bringe naturlig hørelse inden for alles rækkevidde.

Programmer Shine Rev med Unitron TrueFit-software

Denne hurtige tilpasningsvejledning hjælper dig gennem de forskellige trin og gør tilpasningen af Shine Rev-høreapparater nem, ved at bruge Unitrons TrueFit[™]-tilpasningssoftware.

Vælg den ønskede programmeringsgrænseflade for at tilkoble et eller flere høreapparater.

- Hvis du bruger NOAHlink eller HI-PRO til BTE-enheder, skal du sætte programmeringskablet i programmeringslågen. På BTE M sidder programmeringslågen inde i batterilågerummet.
- Hvis du bruger NOAHlink eller HI-PRO til ITE-enheder, skal du fjerne batterilågen og indsætte programmeringskablet.

Bemærk: Høreapparatets kontrolenheder er deaktiverede under programmering.


1. Detekter på forhånd

NOAH

a. Erfaringsniveau

I NOAH er landingssiden **erfaringsniveauet**.

Indtast klientens erfaring med høreapparater.

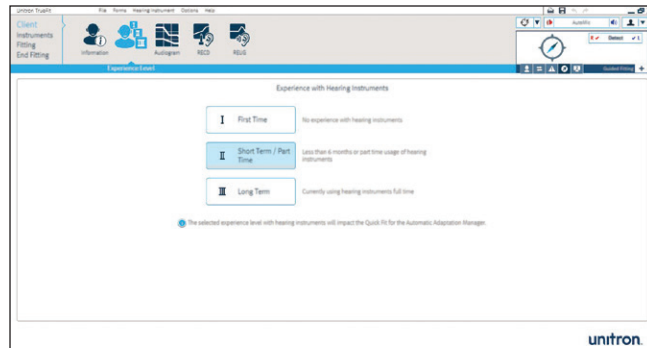

Standalone


a. Information

Under **Klient** skal du klikke på **Information**.

Klik på knappen **Ny Klient**, indtast klientens information og klik på **Gem**. Klik på knappen **Tom Session** for at begynde en ny session.

b. Erfaringsniveau

Under **Klient** skal du klikke på **Erfaringsniveau** og indtaste kundens erfaringsniveau med høreapparater.

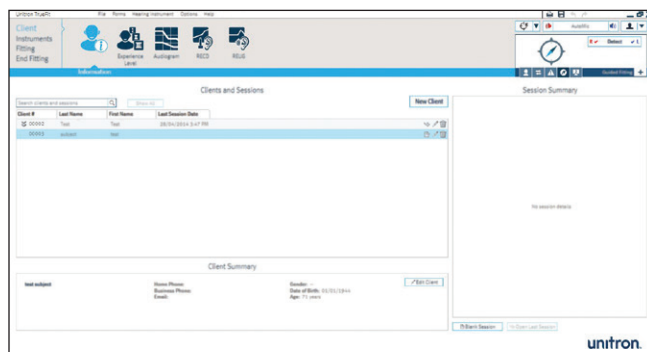

2. Detekter

Klik på knappen **Detekter**. Der fremkommer en oversigt over høreapparatets modeltype, design, matrix og serienummer, og kommunikationsstatus opdateres.

3. Guidet tilpasning

Visningen Guidet tilpasning vil åbne efter detektion af et høreapparat, som ikke har nogen gemte data. Følgende 6 trin vil guide dig gennem en vellykket første tilpasning.

1. Akustik

Til BTE-tilpasninger kan slangen vælges i dette trin. Ørestykket kan kun vælges til tilpasning af en tynd slange.

Til skræddersyede tilpasninger (ITE'er) vil skal- og modtageroplysninger blive vist. Ventilering vil blive konfigureret i overensstemmelse med høretabet.

2. Feedback-test

Klik på knappen **Start feedback-test**, og følg vejledningen på skærmen.

3. Audiometriske oplysninger

Indtast audiometriske oplysninger - patientens høretabsdata kan indtastes i begge processer.

Audiogram: klik på knappen **Audiogram**, og indtast data.

In situ: klik på knappen **In situ**, og følg vejledningen på skærmen.

4. Hurtig tilpasning

Klik på knappen **Hurtig tilpasning** – dette vil programmere høreapparatet til dine patienters hørebehov.

5. Bipløde

Dette er et valgfrit trin til nemt at demonstrere bipløde (for eksempel bipløden for lavt batteri) over for din patient.

6. Gem og luk

Dette vil gemme data til høreapparatet og databasen.

Bemærk: Visningen Guidet tilpasning vil vise flueben for at angive fuldførelsen af hvert trin. På ethvert tidspunkt under guidet tilpasning kan du tilgå en anden TrueFit-skærm og vende tilbage for at fuldføre de tilbageværende trin på et senere tidspunkt.

