

## Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung

# BlackBerry (6 OS)

## Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit dem BlackBerry

Laden Sie das BlackBerry® und uDirect™ 2 auf, und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

### Bluetooth®-Funktion des BlackBerry einschalten (6 OS)


1. Im Home Bildschirm klicken Sie oben im Bildschirm auf Verbindungen oder auf das Icon **Verbindungen verwalten**.
2. Um die Bluetooth Technologie zu aktivieren, wählen Sie das Auswahlfeld Bluetooth.

### uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen

Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (<>)Taste von uDirect 2 ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

### Nach uDirect 2 suchen und die Kopplung mit dem Kenncode 0000 (vier Nullen) bestätigen

1. Im Home Bildschirm klicken Sie oben im Bildschirm auf Verbindungen oder auf das Icon **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Netzwerke und Verbindungen > Bluetooth Verbindungen > Neues Gerät hinzufügen > Suche**
3. Wählen Sie Unitron uDirect 2 aus.
4. Wenn Sie nach einem Code oder Passwort gefragt werden, geben Sie bitte **0000** (vier Nullen) ein. Lassen Sie den Geräten Zeit, um den Kopplungsvorgang abschließen zu können. Beim BlackBerry wird uDirect 2 als ein verbundenes Gerät angezeigt. Wählen Sie **uDirect 2** unter den verbundenen Geräten aus.
5. Am uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam und zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

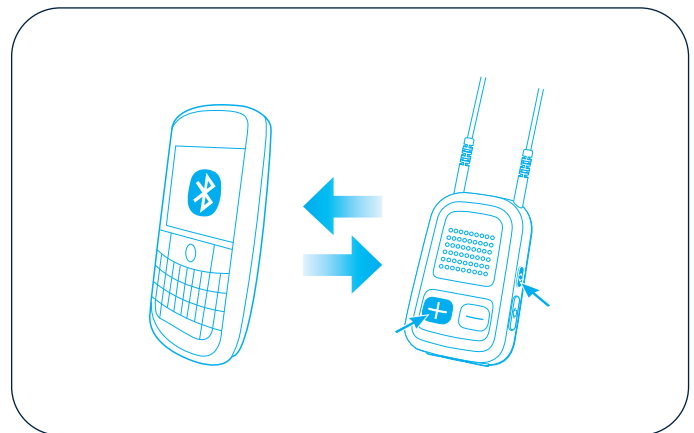

### uDirect 2 mit dem BlackBerry verbinden

Zusätzlich zur Kopplung, die nur ein Mal durchgeführt wird, müssen uDirect 2 und das BlackBerry miteinander verbunden werden.

1. Im Home Bildschirm klicken Sie oben im Bildschirm auf Verbindungen oder auf das Icon **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Netzwerke und Verbindungen > Bluetooth Verbindungen**.
3. Wählen Sie Unitron uDirect 2 und drücken Sie die Taste Verbinden.

### BlackBerry-Kompatibilität

Leider sind manche Bluetooth-fähigen BlackBerry-Modelle nur mit bestimmten Gerätearten kompatibel. Falls bei der Anbindung des BlackBerry an uDirect 2 ein Problem auftritt, oder Sie sich hinsichtlich der Bluetooth-Fähigkeit des BlackBerry nicht sicher sind, ziehen Sie bitte die Betriebsanleitung des BlackBerry zu Rate, oder wenden Sie sich an den BlackBerry-Fachhändler.

## Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung

# BlackBerry (Geräte Software v 5.0)

## Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit dem BlackBerry

Laden Sie das BlackBerry® und uDirect™ 2 auf, und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

### Bluetooth®-Funktion des BlackBerry einschalten


1. Klicken Sie auf die Menü-Taste.
2. Scrollen Sie zu **Optionen** (bzw. **Einstellungen** für manche Telefone), und klicken Sie auf das Auswahlrad (Taste), um die Option auszuwählen.
3. Wählen Sie **Bluetooth**, und aktivieren Sie die **Bluetooth-Funktion**.

### uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen

Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (<>)Taste von uDirect 2 ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

### Nach uDirect 2 suchen und die Kopplung mit dem Kenncode 0000 (vier Nullen) bestätigen

1. Am BlackBerry wählen Sie „Gerät hinzufügen“ und „Suche“. Das BlackBerry beginnt nun nach Bluetooth-fähigen Geräten zu suchen.
2. In der Liste der verfügbaren Geräte wählen Sie uDirect 2.
3. Wenn Sie nach einem Code oder Passwort gefragt werden, geben Sie bitte 0000 (vier Nullen) ein. Lassen Sie den Geräten Zeit, um den Kopplungsvorgang abschließen zu können. Beim BlackBerry wird uDirect 2 als ein verbundenes Gerät angezeigt. Wählen Sie **uDirect 2** unter den verbundenen Geräten aus.
4. Am uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam und zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

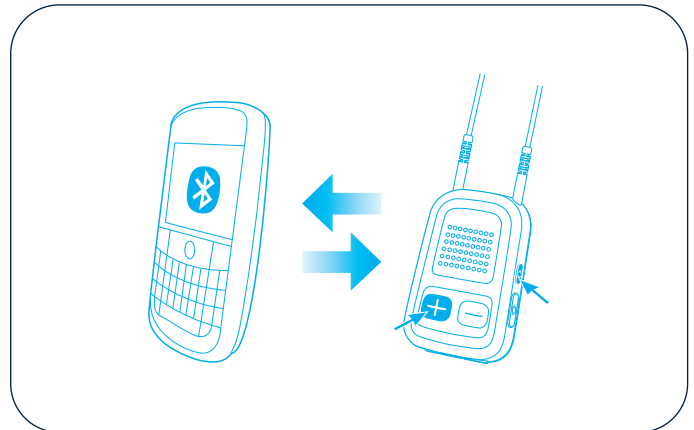

### uDirect 2 mit dem BlackBerry verbinden

Zusätzlich zur Kopplung, die nur ein Mal durchgeführt wird, müssen uDirect 2 und das BlackBerry miteinander **verbunden** werden.

1. Im Bluetooth-Menü des BlackBerry wählen Sie „Verbinden“.
2. Damit uDirect mit dem BlackBerry in Zukunft ohne Bestätigung immer wieder eine Verbindung herstellen kann, klicken Sie auf das Auswahlrad, wählen dann Geräteparameter und klicken noch einmal auf das Auswahlrad.
3. Wählen Sie **Fragen** oder **vertrauenswürdig** und dann **Ja**. uDirect 2 ist nun als sicheres Gerät eingerichtet.
4. Klicken Sie auf Zurück (die Taste rechts neben dem Auswahlrad), und wählen Sie **Speichern**.

### BlackBerry-Kompatibilität

Leider sind manche Bluetooth-fähigen BlackBerry-Modelle nur mit bestimmten Gerätearten kompatibel. Falls bei der Anbindung des BlackBerry an uDirect 2 ein Problem auftritt, oder Sie sich hinsichtlich der Bluetooth-Fähigkeit des BlackBerry nicht sicher sind, ziehen Sie bitte die Betriebsanleitung des BlackBerry zu Rate, oder wenden Sie sich an den BlackBerry-Fachhändler.

# Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung BlackBerry (6 OS)

## Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit dem BlackBerry

Laden Sie das BlackBerry® und uDirect™ 2 auf, und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

### Bluetooth®-Funktion des BlackBerry einschalten (6 OS)


1. Im Home Bildschirm klicken Sie oben im Bildschirm auf Verbindungen oder auf das Icon **Verbindungen verwalten**.
2. Um die Bluetooth Technologie zu aktivieren, wählen Sie das Auswahlfeld Bluetooth.

### uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen

Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (<>)Taste von uDirect 2 ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

### Nach uDirect 2 suchen und die Kopplung mit dem Kenncode 0000 (vier Nullen) bestätigen

1. Im Home Bildschirm klicken Sie oben im Bildschirm auf Verbindungen oder auf das Icon **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Netzwerke und Verbindungen > Bluetooth Verbindungen > Neues Gerät hinzufügen > Suche**
3. Wählen Sie Unitron uDirect 2 aus.
4. Wenn Sie nach einem Code oder Passwort gefragt werden, geben Sie bitte **0000** (vier Nullen) ein. Lassen Sie den Geräten Zeit, um den Kopplungsvorgang abschließen zu können. Beim BlackBerry wird uDirect 2 als ein verbundenes Gerät angezeigt. Wählen Sie **uDirect 2** unter den verbundenen Geräten aus.
5. Am uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam und zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

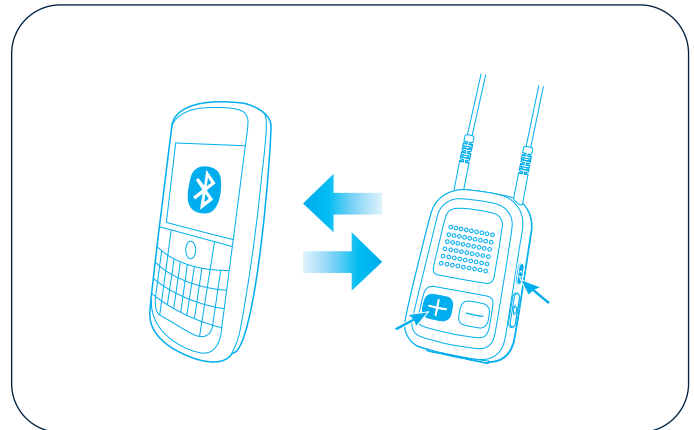

### uDirect 2 mit dem BlackBerry verbinden

Zusätzlich zur Kopplung, die nur ein Mal durchgeführt wird, müssen uDirect 2 und das BlackBerry miteinander verbunden werden.

1. Im Home Bildschirm klicken Sie oben im Bildschirm auf Verbindungen oder auf das Icon **Verbindungen verwalten**.
2. Klicken Sie auf **Netzwerke und Verbindungen > Bluetooth Verbindungen**.
3. Wählen Sie Unitron uDirect 2 und drücken Sie die Taste Verbinden.

### BlackBerry-Kompatibilität

Leider sind manche Bluetooth-fähigen BlackBerry-Modelle nur mit bestimmten Gerätearten kompatibel. Falls bei der Anbindung des BlackBerry an uDirect 2 ein Problem auftritt, oder Sie sich hinsichtlich der Bluetooth-Fähigkeit des BlackBerry nicht sicher sind, ziehen Sie bitte die Betriebsanleitung des BlackBerry zu Rate, oder wenden Sie sich an den BlackBerry-Fachhändler.