

Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung

Mobiltelefon

Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit Ihrem Mobiltelefon

Laden Sie das Mobiltelefon und uDirect™ 2 auf, und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons einschalten

1. Suchen Sie die Verbindungseinstellungen des Telefons.
2. Suchen Sie im **Menü** oder einem Untermenü nach **Bluetooth**, und schalten Sie die Bluetooth-Funktion **EIN**.

Hinweis: Falls die Bluetooth-Einstellungen nicht im Menü aufgeführt sind, suchen Sie unter: Optionen, Tools, Einstellungen, Verbindungen, Konnektivität, Anwendungen, Systemsteuerung, Setup oder einer Kombination dieser Möglichkeiten (z.B. Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth).

uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen


Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (<>)Taste von uDirect 2 ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

Nach uDirect 2 suchen und die Kopplung mit dem Kenncode 0000 (vier Nullen) bestätigen

1. Am Mobiltelefon wählen Sie „**neues Bluetooth-Gerät hinzufügen**“. Das Telefon beginnt nach bluetooth-fähigen Geräten in seiner Reichweite zu suchen.
2. In der Liste der verfügbaren Geräte wählen Sie **uDirect 2**, und wenn Sie nach dem Kenncode gefragt werden, geben Sie **0000** (vier Nullen) ein. Warten Sie bis die Kopplung der Geräte abgeschlossen ist. Am Mobiltelefon wird uDirect 2 als ein gekoppeltes Gerät angezeigt und am uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam. Dies zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden

uDirect 2 mit dem Mobiltelefon verbinden

Zusätzlich zur Kopplung, die nur ein Mal durchgeführt wird, müssen uDirect 2 und das Mobiltelefon miteinander verbunden werden. Dies erfolgt entweder automatisch oder über das Menü des Mobiltelefons.

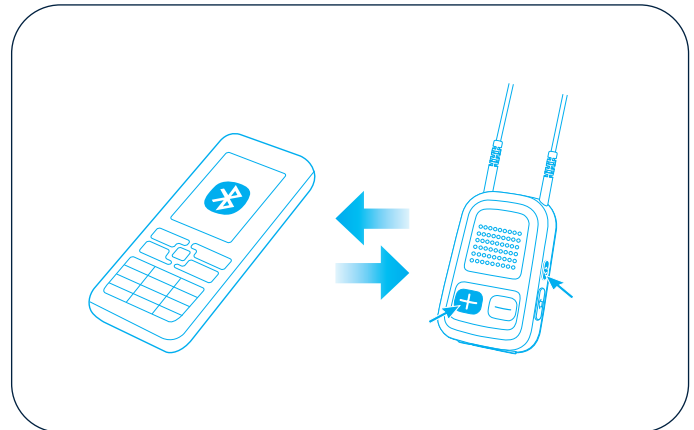

1. Im Bluetooth-Menü wählen Sie „**Gekoppelte Geräte**“ oder „**Meine Geräte**“.
2. Markieren Sie uDirect 2 und wählen Sie „**Verbinden**“.
3. Manche Mobiltelefone fragen vielleicht, welche Bluetooth-Dienste Sie aktivieren wollen. Wählen Sie **Kopfhörer** und falls verfügbar **Stereo-Kopfhörer**. Bei manchen Mobiltelefonen weist das Kopfhörersymbol darauf hin, dass uDirect 2 verbunden ist.
4. Falls Sie aufgefordert werden, die automatische Verbindung zu gestatten, tun Sie dies. Dann können uDirect 2 und das Mobiltelefon immer wieder eine Verbindung herstellen, wenn sie sich in Reichweite zueinander befinden.

Mobiltelefon-Kompatibilität

Die Bluetooth-Fähigkeit kann je nach Mobiltelefonhersteller unterschiedlich ausgeführt sein. Leider sind manche bluetooth-fähige Mobiltelefonmodelle nur mit bestimmten Gerätearten kompatibel. Falls bei der Anbindung des Mobiltelefons an uDirect 2 ein Problem auftritt oder Sie sich hinsichtlich der Bluetooth-Fähigkeit des Mobiltelefons nicht sicher sind, ziehen Sie bitte die Betriebsanleitung des Mobiltelefons zu Rate, oder wenden Sie sich an den Telefonfachhändler.