

# Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung

# iPhone

## Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit dem iPhone

Laden Sie das iPhone® und uDirect™ 2 auf, und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

### Bluetooth®-Funktion des iPhone® einschalten


1. Wählen Sie im Home Bildschirm die Anwendung **Einstellungen**.
2. Wählen Sie „**Allgemein**“.
3. Wählen Sie **Bluetooth** und schalten Sie die Bluetooth-Funktion **EIN**. Das iPhone beginnt nach Bluetooth-fähigen Geräten in seiner Nähe zu suchen.

### uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen

Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (<>)Taste von uDirect 2 ca. über 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

### Nach uDirect 2 suchen und die Kopplung mit dem Kenncode 0000 (vier Nullen) bestätigen

In der Liste der verfügbaren Geräte wählen Sie **uDirect 2**, und wenn Sie nach dem Kenncode gefragt werden, geben Sie **0000** (vier Nullen) ein. Warten Sie bis die Kopplung der Geräte abgeschlossen ist. Am iPhone wird uDirect 2 als ein gekoppeltes Gerät angezeigt, und am uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam. Dies zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

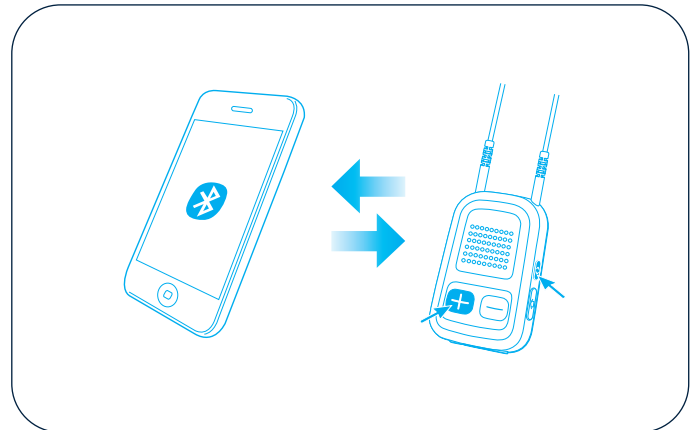

### uDirect 2 mit dem iPhone verbinden

Zusätzlich zur Kopplung, die nur ein Mal durchgeführt wird, müssen uDirect 2 und das iPhone miteinander verbunden werden. Dies erfolgt entweder automatisch oder über das Menü des iPhone.

Falls Sie aufgefordert werden, die automatische Verbindung zu gestatten, tun Sie dies. Dann können uDirect 2 und das iPhone immer wieder eine Verbindung herstellen, wenn sie sich in Reichweite zueinander befinden.

### iPhone-Kompatibilität

Leider sind bluetooth-fähige iPhone-Modelle nur mit bestimmten Gerätearten kompatibel. Falls bei der Anbindung des iPhone an uDirect 2 ein Problem auftritt oder Sie sich hinsichtlich der Bluetooth-Fähigkeit des iPhone nicht sicher sind, ziehen Sie bitte die Betriebsanleitung des iPhone zu Rate, oder wenden Sie sich an den Apple®-Fachhändler.