

Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung

LG

Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit Ihrem LG Mobiltelefon

Laden Sie das Mobiltelefon und uDirect™ 2 auf, und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

Bluetooth®-Funktion des LG® einschalten

- Suchen Sie die Verbindungseinstellungen Ihres Telefons. Für die meisten LG-Modelle trifft eine der folgenden Navigationsoptionen zu:

Menü > Einstellungen und Extras > Bluetooth, oder

Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth > Gekoppelte Geräte, oder

Menü > Extras > Bluetooth, oder

Menü > Einstellungen > Wireless + Netzwerke > Bluetooth

uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen

Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (↔) Taste von uDirect 2 ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

uDirect 2 mit dem Mobiltelefon koppeln

- Wählen Sie im Bluetooth-Menü eine der folgenden Optionen aus. Je nach Modell wird folgende Kopplungsauswahl geboten:


„Neues Gerät hinzufügen“ oder

„Neu hinzufügen“ > „Suchen“

Das Telefon wird nach bluetooth-fähigen Geräten in seiner Reichweite suchen.

Hinweis: Falls Sie die Bluetooth-Funktion nicht aktiviert haben, werden Sie möglicherweise gefragt, ob Sie Bluetooth einschalten möchten. Damit wird die Suche nach Bluetooth-Geräten gestartet. Ihr Mobiltelefon sollte eine Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte anzeigen.

- Aus der Liste verfügbarer Geräte wählen Sie **„uDirect 2“**, und falls Sie nach dem Kenncode gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein. Warten Sie bis die Kopplung der Geräte abgeschlossen ist. Am Mobiltelefon wird

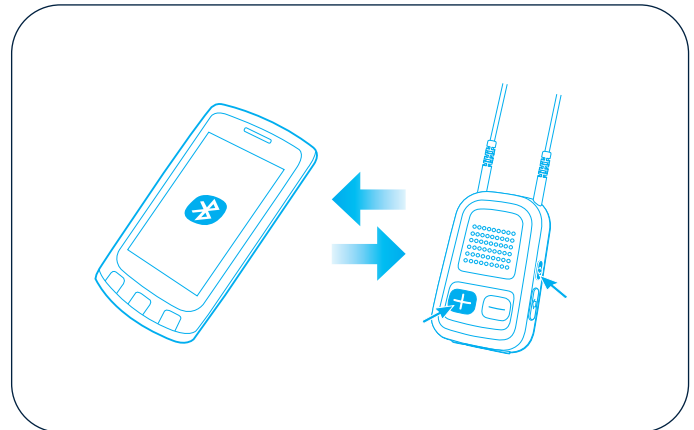

uDirect 2 als gekoppeltes Gerät angezeigt und am uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam. Dies zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

uDirect 2 mit Ihrem Mobiltelefon verbinden

Zusätzlich zur Kopplung, die nur einmal durchgeführt werden muss, müssen uDirect 2 und das Mobiltelefon miteinander verbunden werden. Normalerweise wird uDirect 2 nach dem Koppeln automatisch verbunden.

- Um die Anbindung manuell herzustellen, wählen Sie **„uDirect 2“** im Menü **„Gekoppelte Geräte“** aus und
- Wählen dann **„Optionen“ > „Verbinden“**

Bei einigen Telefonen können Sie die Option **„Zugangsberechtigt“** für Ihr uDirect 2 wählen. Dann kann uDirect 2 die Verbindung ohne Bestätigung automatisch herstellen.

- Falls Sie aufgefordert werden, die automatische Verbindung zu gestatten, tun Sie dies. Dann können uDirect 2 und das Mobiltelefon immer wieder eine Verbindung herstellen, wenn sie sich in Reichweite zueinander befinden.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Navigieren zu den Bluetooth-Einstellungen haben, ziehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons zu Rate oder wenden Sie sich an Ihren Mobiltelefon-Fachhändler.