

Anleitung zur uDirect 2 Bluetooth-Kopplung

Nokia

Kopplung und Verbindung von uDirect 2 mit Ihrem Nokia Mobiltelefon

Laden Sie das Mobiltelefon und uDirect™ 2 auf und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie die Geräte nebeneinander.

Bluetooth®-Funktion des Nokia® Mobiltelefons einschalten

Suchen Sie die Verbindungseinstellungen Ihres Telefons. Für die meisten Nokia-Modelle trifft folgendes Navigationsschema zu:

Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth

Hinweis: Bluetooth ist aktiviert, wenn die Einstellung EIN angezeigt wird.

uDirect 2 in Kopplungsmodus versetzen

Leiten Sie das Kopplungsverfahren am uDirect 2 ein, indem Sie die (+) und (<>)Taste von uDirect 2 ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten bis die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet und schnell blinkt. uDirect 2 befindet sich nun 2 Minuten lang, bzw. so lange bis der Kopplungsprozess beendet ist, im Kopplungsmodus.

uDirect 2 mit Ihrem Mobiltelefon koppeln

1. Wählen Sie im Bluetooth-Menü eine der folgenden Optionen aus. Je nach Modell wird folgende Kopplungsauswahl geboten:


„Suche nach Audio-Erweiterung“ oder Rechts drücken, um zum Tab „Gekoppelte Geräte“ umzuschalten.

Wählen Sie „Optionen“ > „Neues gekoppeltes Gerät“

Das Telefon wird nach bluetooth-fähigen Geräten in seiner Reichweite zu suchen.

Hinweis: Falls Sie die Bluetooth-Funktion nicht aktiviert haben, werden Sie möglicherweise gefragt, ob Sie Bluetooth einschalten möchten. Damit wird die Suche nach Bluetooth-Geräten gestartet. Ihr Mobiltelefon sollte eine Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte anzeigen.

2. Aus der Liste verfügbarer Geräte wählen Sie „uDirect 2“, und falls Sie nach dem Kenncode gefragt werden, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein. Warten Sie bis die Kopplung der Geräte abgeschlossen ist. Am Mobiltelefon wird uDirect 2 als gekoppeltes Gerät angezeigt und am

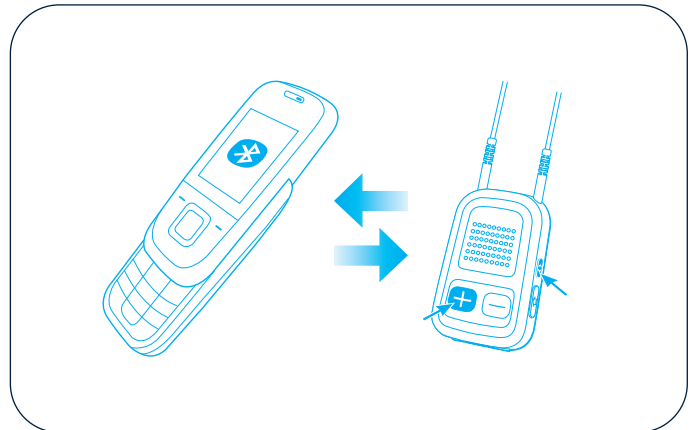

uDirect 2 blinkt die Bluetooth-LED-Anzeige langsam. Dies zeigt an, dass die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

uDirect 2 mit Ihrem Mobiltelefon verbinden

1. Zusätzlich zur Kopplung, die nur einmal durchgeführt werden muss, müssen uDirect 2 und das Mobiltelefon miteinander verbunden werden. Wählen Sie „uDirect 2“ im Menü „Gekoppelte Geräte“ an Ihrem Mobiltelefon aus.
2. Wählen Sie dann „Verbinden“ oder „Mit Audiogerät verbinden“. Bei einigen Telefonen können Sie die automatische Anbindung in den Zugangseinstellungen für die Geräte-Details konfigurieren.
3. Falls Sie aufgefordert werden, die automatische **Verbindung zu gestatten**, tun Sie dies. Dann können uDirect 2 und das Mobiltelefon immer wieder eine Verbindung herstellen, wenn sie sich in Reichweite zueinander befinden.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Navigieren zu den Bluetooth-Einstellungen haben, ziehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons zu Rate oder wenden Sie sich an Ihren Mobiltelefon-Fachhändler.