

Guías de emparejamiento de uDirect 2 y Bluetooth

BlackBerry (6 OS)

Emparejamiento y conexión de uDirect 2 con un BlackBerry

Cargue y encienda tanto el teléfono móvil BlackBerry como el dispositivo uDirect™ 2. Coloque uno al lado del otro.

Activación de la función Bluetooth® del BlackBerry® (6 OS)


1. En la pantalla de Inicio, pulse el área de conexiones arriba del todo de la pantalla, o pulse el botón de **Gestión de Conexiones**.
2. Para encender la tecnología Bluetooth, seleccione la casilla **Bluetooth**.

Configuración de uDirect 2 en modo de emparejamiento

Para iniciar el proceso de emparejamiento en el dispositivo uDirect 2, configure uDirect 2 en el modo de emparejamiento: pulse y mantenga pulsado el botón (+) y (<>) durante sobre dos segundos, hasta que el indicador LED de Bluetooth cambie a color azul y parpadee rápidamente. uDirect 2 estará ahora en modo de emparejamiento durante dos minutos o hasta que el emparejamiento haya finalizado.

Búsqueda de uDirect 2 y confirmación del emparejamiento mediante la contraseña 0000 (cuatro ceros)

1. En la pantalla de Inicio, pulse el área de conexiones arriba del todo de la pantalla, o pulse el icono de **Gestión de Conexiones**.
2. Pulse **Redes y Conexiones > Bluetooth > Añada Nuevo Dispositivo > Buscar**.
3. Seleccione el uDirect 2 de Unitron.
4. Introduzca la clave **0000** (4 ceros) cuando se le pregunte por el código o clave de acceso. Permita a los dispositivos completar el proceso de emparejamiento. En BlackBerry, el uDirect 2 se muestra como un dispositivo emparejado. Bajo **dispositivos emparejados**, seleccione **uDirect 2**.
5. En el dispositivo uDirect 2, el indicador LED de Bluetooth parpadeará lentamente, lo cual indica que se ha llevado a cabo correctamente el emparejamiento.

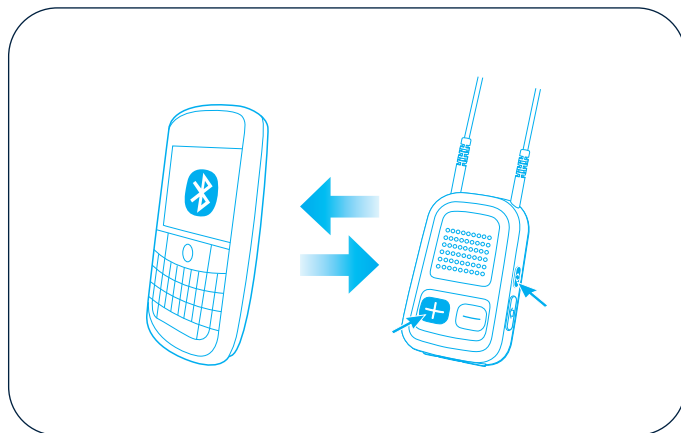

Conexión de uDirect 2 con el teléfono móvil BlackBerry

Además del proceso de emparejamiento, que se efectúa una vez solamente, es necesario **conectar** el dispositivo uDirect 2 al teléfono móvil BlackBerry.

1. En la pantalla de Inicio, seleccione el área de conexiones arriba del todo de la pantalla, o seleccione el icono de **Gestión de Conexiones**.
2. Seleccione **Redes y Conexiones > Conexiones Bluetooth**.
3. Resalte uDirect 2 de Unitron y, pulse la tecla Conectar.

Problemas de compatibilidad con el teléfono móvil BlackBerry

Desafortunadamente algunos modelos de teléfono móvil BlackBerry que tienen la función Bluetooth solamente son compatibles con ciertos tipos de dispositivos. En caso de problemas de conexión entre el BlackBerry y el dispositivo uDirect 2, o bien en caso de dudas sobre la compatibilidad Bluetooth del BlackBerry, consulte el manual del usuario del BlackBerry o póngase en contacto con su proveedor local de BlackBerry.

Guías de emparejamiento de uDirect 2 y Bluetooth

BlackBerry (software de dispositivo v 5.0)

Emparejamiento y conexión de uDirect 2 con un BlackBerry

Cargue y encienda tanto el teléfono móvil BlackBerry como el dispositivo uDirect™ 2. Coloque uno al lado del otro.

Activación de la función Bluetooth® del BlackBerry®

1. Pulse la tecla **Menu** (menú).
2. Seleccione **Options** (opciones; en algunos modelos es Settings/configuración) y pulse la rueda (el botón) de **selección** para elegir dicha opción.
3. Seleccione la opción **Bluetooth** y luego **Enable Bluetooth** (activar Bluetooth).

Configuración de uDirect 2 en modo de emparejamiento


Para iniciar el proceso de emparejamiento en el dispositivo uDirect 2, configure uDirect 2 en el modo de emparejamiento: pulse y mantenga pulsado el botón (+) y (<>) durante sobre dos segundos, hasta que el indicador LED de Bluetooth cambie a color azul y parpadee rápidamente. uDirect 2 estará ahora en modo de emparejamiento durante dos minutos o hasta que el emparejamiento haya finalizado.

Búsqueda de uDirect 2 y confirmación del emparejamiento mediante la contraseña 0000 (cuatro ceros)

1. Seleccione en el BlackBerry la opción **Add device** (agregar dispositivo) y busque. El BlackBerry empezará la búsqueda de los dispositivos con Bluetooth activado.
2. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione uDirect 2.
3. Escriba la contraseña: **0000** (cuatro ceros) cuando le pregunten por el código o clave de acceso. Deje que los dispositivos terminen el proceso de emparejamiento. En el BlackBerry aparecerá uDirect 2 como dispositivo emparejado. En la lista de **dispositivos emparejados** (Paired devices), seleccione **uDirect 2**.
4. En el dispositivo uDirect 2, el indicador LED de Bluetooth parpadeará lentamente, lo cual indica que se ha llevado a cabo correctamente el emparejamiento.

Conexión de uDirect 2 con el teléfono móvil BlackBerry

Además del proceso de emparejamiento, que se efectúa una vez solamente, es necesario conectar el dispositivo uDirect 2 al teléfono móvil BlackBerry.

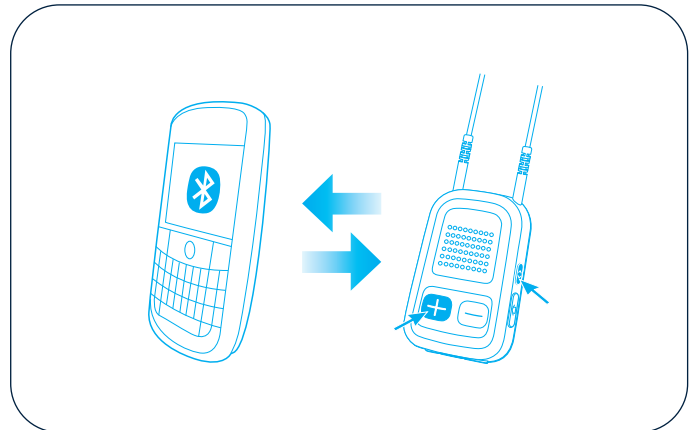

1. Seleccione en el menú Bluetooth del BlackBerry la opción de **Connect** (conexión).
2. Para que el dispositivo uDirect 2 se **conecte al** BlackBerry nuevamente en el futuro sin necesidad de confirmación, pulse la rueda de selección, elija **Device Properties** (propiedades del dispositivo) y vuelva a pulsar la rueda.
3. Seleccione **"Ask"** (preguntar) o de confianza y luego **"Yes"** (sí). uDirect 2 está ahora configurado como un dispositivo emparejado (trusted device).
4. Pulse el **botón para retroceder** (el botón cuyo icono está a la derecha de la rueda de selección) y elija la opción **Save** (guardar).

Problemas de compatibilidad con el teléfono móvil BlackBerry

Desafortunadamente algunos modelos de teléfono móvil BlackBerry que tienen la función Bluetooth solamente son compatibles con ciertos tipos de dispositivos. En caso de problemas de conexión entre el BlackBerry y el dispositivo uDirect 2, o bien en caso de dudas sobre la compatibilidad Bluetooth del BlackBerry, consulte el manual del usuario del BlackBerry o póngase en contacto con su proveedor local de BlackBerry.