

# Guías de emparejamiento de uDirect 2 y Bluetooth

## Teléfono Móvil

### Emparejamiento y conexión de uDirect 2 con un teléfono móvil

Cargue y encienda tanto el teléfono móvil como el dispositivo uDirect™ 2. Coloque uno al lado del otro.

#### Activación de la función Bluetooth® del teléfono móvil

1. Busque los ajustes de conectividad inalámbrica del teléfono.
2. Busque Bluetooth en el **Menu** o submenús, y **active** la función Bluetooth.


*Nota: Si los ajustes de Bluetooth no está bajo el Menú, podrían encontrarse aquí: Opciones, Herramientas, Ajustes, Conexiones, Conectividad, Aplicaciones, Panel de Control, Inicio, o en una combinación de (Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth)*

#### Configuración de uDirect 2 en modo de emparejamiento

Para iniciar el proceso de emparejamiento en el dispositivo uDirect 2, configure uDirect 2 en el modo de emparejamiento: pulse y mantenga pulsado el botón (+) y (<>) durante dos segundos, hasta que el indicador LED de Bluetooth cambie a color azul y parpadee rápidamente. uDirect 2 estará ahora en modo de emparejamiento durante dos minutos o hasta que el emparejamiento haya finalizado.

#### Buscar uDirect 2 y confirmar emparejamiento con contraseña 000 (cuatro ceros)

1. En su teléfono móvil, elija añadir un dispositivo Bluetooth. El teléfono empieza a buscar dispositivos habilitados con Bluetooth dentro del rango.
2. Bajo la lista de dispositivos disponibles, seleccione **uDirect 2** e introduzca **0000** (cuatro ceros) cuando le pregunte por la contraseña. Permita a los dispositivos completar el proceso de emparejamiento. En el teléfono móvil, uDirect 2 se muestra como un dispositivo emparejado y en uDirect 2, el indicador LED parpadea despacio, indicando que los dispositivos se han emparejado con éxito.

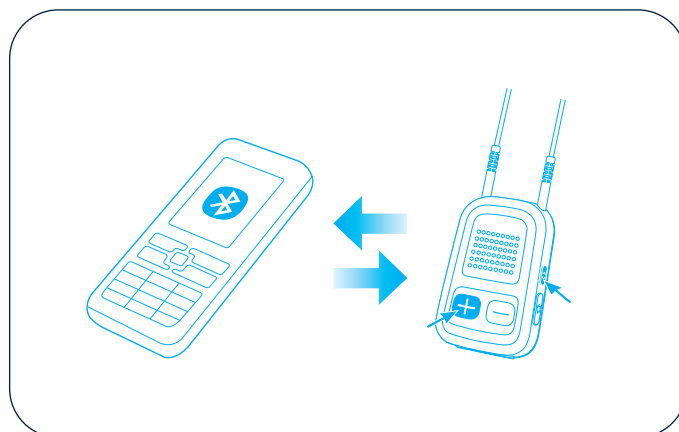

#### Conectar uDirect 2 con su teléfono móvil

Además de ser emparejado, que se realiza una vez, su uDirect 2 y teléfono móvil necesitan conectarse. Esto se realiza automáticamente o vía el menú del teléfono móvil.

1. Bajo el menú de Bluetooth, seleccione **Emparejar dispositivos** o **Mis dispositivos**.
2. Realce **uDirect 2** y seleccione **Conectar**.
3. Algunos teléfonos móviles pueden preguntarle qué servicio Bluetooth desea habilitar. En algunos móviles, el icono de auriculares indica que uDirect 2 está conectado.
4. Si se le solicita que realice conexión automática, hágalo. De esta forma, uDirect 2 y su teléfono móvil conectarán de nuevo donde sea dentro del rango.

#### Problemas de compatibilidad con el teléfono móvil

La funcionalidad de Bluetooth se lleva a cabo de distintas maneras dependiendo del fabricante de teléfonos móviles. Desafortunadamente, algunos modelos de teléfonos con Bluetooth sólo son compatibles con ciertos tipos de dispositivos. Si ocurre un problema con la conexión entre su teléfono móvil y uDirect 2, o si no está seguro de las capacidades de su teléfono, consulte la guía de instrucciones de su teléfono móvil, o a su distribuidor de teléfonos móviles.