

# Guías de emparejamiento de uDirect™ y Bluetooth®

## BlackBerry®\*\*

### Emparejamiento y conexión de uDirect™ con un teléfono móvil BlackBerry®\*\*

Cargue y encienda tanto el teléfono móvil BlackBerry® como el dispositivo uDirect™.

Coloque uno al lado del otro.

#### Activación de la función Bluetooth® del BlackBerry®

1. Pulse la tecla Menu (menú).
2. Seleccione Options (opciones; en algunos modelos es Settings/configuración) y pulse la rueda (el botón) de selección para elegir dicha opción.
3. Seleccione la opción Bluetooth® y luego Enable Bluetooth (activar Bluetooth).

#### Configuración de uDirect™ en modo de emparejamiento


Para iniciar el proceso de emparejamiento en el dispositivo uDirect, configure uDirect en el modo de emparejamiento: pulse y mantenga pulsado el botón Bluetooth durante dos segundos, hasta que el indicador LED del botón Bluetooth cambie a color azul y parpadee rápidamente. uDirect estará ahora en modo de emparejamiento durante dos minutos o hasta que el emparejamiento haya finalizado.

#### Búsqueda de uDirect™ y confirmación del emparejamiento mediante la contraseña 0000 (cuatro ceros)

1. Seleccione en el BlackBerry la opción Add device (agregar dispositivo). El BlackBerry empezará la búsqueda de los dispositivos con Bluetooth activado.
2. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione uDirect.
3. Escriba la contraseña: 0000 (cuatro ceros) y pulse la rueda (botón) de selección. Deje que los dispositivos terminen el proceso de emparejamiento. En el BlackBerry aparecerá uDirect como dispositivo emparejado. En la lista de dispositivos emparejados ("Paired devices"), seleccione uDirect.
4. En el dispositivo uDirect, el indicador LED de Bluetooth parpadeará lentamente, lo cual indica que se ha llevado a cabo correctamente el emparejamiento.

#### Conexión de uDirect™ con el teléfono móvil BlackBerry®

Además del proceso de emparejamiento, que se efectúa una vez solamente, es necesario conectar el dispositivo uDirect

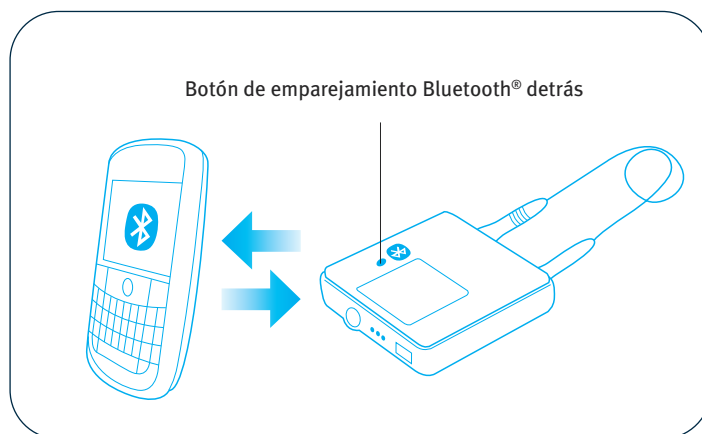

al teléfono móvil BlackBerry.

1. Seleccione en el menú Bluetooth del BlackBerry la opción de conexión ("Connect").
2. Para que el dispositivo uDirect se conecte al BlackBerry nuevamente en el futuro sin necesidad de confirmación, pulse la rueda de selección, elija Device Properties (propiedades del dispositivo) y vuelva a pulsar la rueda.
3. Seleccione "Ask" (preguntar) y luego "Yes" (sí). uDirect está ahora configurado como un dispositivo emparejado (trusted device).
4. Pulse el botón para retroceder (el botón cuyo icono está a la derecha de la rueda de selección) y elija la opción Save (guardar).

#### Problemas de compatibilidad con el teléfono móvil BlackBerry

Desafortunadamente algunos modelos de teléfono móvil BlackBerry que tienen la función Bluetooth solamente son compatibles con ciertos tipos de dispositivos. En caso de problemas de conexión entre el BlackBerry y el dispositivo uDirect, o bien en caso de dudas sobre la compatibilidad Bluetooth del BlackBerry, consulte el manual del usuario del BlackBerry o póngase en contacto con su proveedor local de BlackBerry.

\* La marca comercial registrada Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

\*\* BlackBerry es una marca comercial registrada de Research In Motion.