

Teléfono móvil

Emparejamiento y conexión de uDirect™ con un teléfono móvil

Cargue y encienda tanto el teléfono móvil como el dispositivo uDirect™. Coloque uno al lado del otro.

Activación de la función Bluetooth® del teléfono móvil

1. Busque la configuración de conectividad del teléfono móvil.
2. Elija la opción Bluetooth en el menú principal o en uno de los submenús correspondientes y ACTIVE la función Bluetooth

Nota: si la configuración de Bluetooth no aparece bajo el menú principal, es posible que esté bajo uno de los menús siguientes: Opciones, Herramientas, Configuración, Conexiones, Conectividad, Aplicaciones, Panel de control, o bien una combinación de dichas opciones (por ejemplo, Menús > Configuración > Conectividad > Bluetooth).

Configuración de uDirect™ en modo de emparejamiento


Para iniciar el proceso de emparejamiento en el dispositivo uDirect™, configure uDirect en el modo de emparejamiento: pulse y mantenga pulsado el botón Bluetooth durante dos segundos, hasta que el indicador LED del botón Bluetooth cambie a color azul y parpadee rápidamente. uDirect estará ahora en modo de emparejamiento durante dos minutos o hasta que el emparejamiento haya finalizado.

Búsqueda de uDirect™ y confirmación del emparejamiento mediante la contraseña 0000 (cuatro ceros)

1. Elija en el teléfono móvil la opción para agregar un nuevo dispositivo Bluetooth. El teléfono móvil empezará la búsqueda de los dispositivos cercanos con Bluetooth activado.
2. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione uDirect y escriba 0000 (cuatro ceros) cuando se le solicite la contraseña o clave de acceso. Deje que los dispositivos terminen de efectuar el proceso de emparejamiento. En el teléfono móvil aparecerá uDirect como dispositivo emparejado y, en el dispositivo uDirect, el indicador LED de Bluetooth parpadeará lentamente, lo cual indica que se ha llevado a cabo correctamente el emparejamiento.

Conexión de uDirect™ con el teléfono móvil

Además del proceso de emparejamiento, que se efectúa una

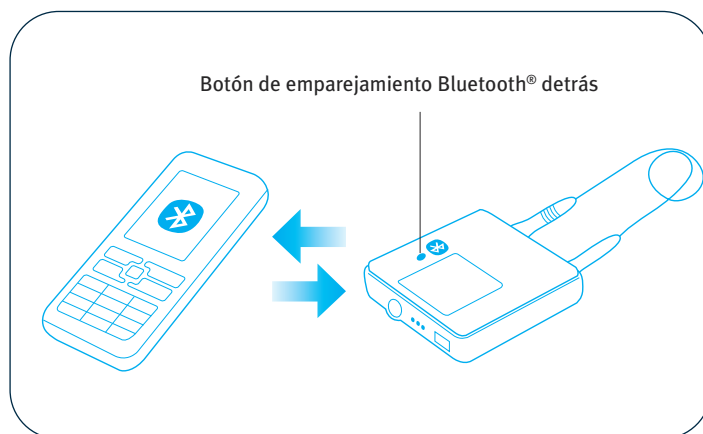

vez solamente, es necesario conectar el dispositivo uDirect al teléfono móvil. Este proceso se lleva a cabo automáticamente o mediante el menú correspondiente del teléfono móvil.

1. Seleccione en el menú Bluetooth la opción de dispositivos emparejados o de mis dispositivos.
2. Resalte la opción uDirect y seleccione la opción de conexión.
3. Algunos teléfonos móviles pueden pedirle que indique cuál es el servicio Bluetooth que desea activar. Seleccione la opción de auricular y, si está disponible, la opción de auricular estéreo. En algunos teléfonos móviles, el icono de auricular indica si uDirect se ha conectado.
4. En caso de que se le solicite permitir la reconexión automática, confírmelo. Esto permitirá la reconexión entre uDirect y el teléfono móvil siempre que estén a una distancia de conexión cercana.

Problemas de compatibilidad con el teléfono móvil

La función Bluetooth se activa de diferentes maneras y depende de la configuración predeterminada del teléfono móvil. Desafortunadamente algunos modelos de teléfono móvil que tienen la función Bluetooth solamente son compatibles con ciertos tipos de dispositivos. En caso de problemas de conexión entre el teléfono móvil y el dispositivo uDirect, o bien en caso de dudas sobre la compatibilidad Bluetooth del teléfono móvil, consulte el manual del usuario del teléfono móvil o póngase en contacto con su proveedor local del teléfono móvil.