

Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth

BlackBerry (6 OS)

Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 avec un appareil BlackBerry

D'abord, chargez le BlackBerry® et le dispositif uDirect^{MC} 2 puis allumez-les. Placez-les côte à côte.

Activation de la fonction Bluetooth® de l'appareil BlackBerry® (6 OS)


1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur zones de connexion en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gestion des Connexions**.
2. To turn on Bluetooth technology, select the **Bluetooth** checkbox.

Réglage du dispositif uDirect 2 en mode de couplage

Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (<>) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.

Recherche du dispositif uDirect 2 et confirmation du couplage à l'aide du code 0000 (quatre zéros)

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur zones de connexion en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gestion des Connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et Connexions > Connexions Bluetooth > Ajouter un nouveau Dispositif > Recherche**.
3. Sélectionnez l'uDirect 2 d'Unitron.
4. Entrez le code d'accès : **0000** (quatre zéros) quand on vous demande le code d'accès ou le code passe. Autorisez les dispositifs à effectuer le processus de couplage. Sur le BlackBerry, uDirect 2 est montré comme dispositif couplé. Sous **Dispositifs couplés**, sélectionnez **uDirect 2**.
5. Sur le dispositif uDirect 2, le voyant DEL Bluetooth clignote lentement, ce qui indique que les deux appareils ont été appariés avec succès.

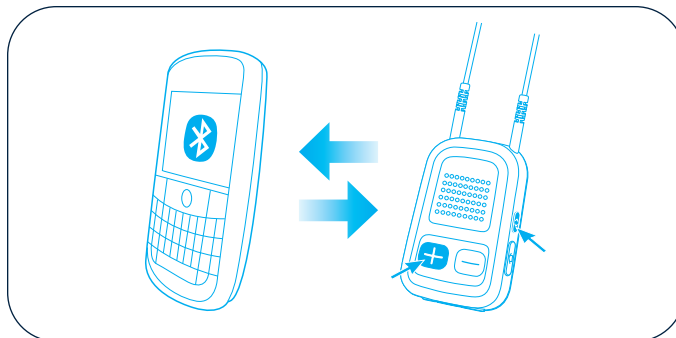

Connexion du dispositif uDirect 2 à l'appareil BlackBerry

En plus de l'appariement, qui ne doit être fait qu'une seule fois, le dispositif uDirect 2 et le BlackBerry doivent être connectés.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur zones de connexion en haut de l'écran ou cliquez sur l'icône **Gestion des Connexions**.
2. Cliquez sur **Réseaux et Connexions > Connexions Bluetooth**.
3. Mettez en surbrillance l'uDirect 2 d'Unitron et appuyez sur la touche Connecter.

Problèmes de compatibilité avec l'appareil BlackBerry

Malheureusement, certains modèles de BlackBerry munis de la fonction Bluetooth ne sont compatibles qu'avec certains types de dispositifs. Si un problème survient dans la connexion entre le BlackBerry et le dispositif uDirect 2, ou si vous ne connaissez pas les capacités Bluetooth de votre BlackBerry, consultez le guide de l'utilisateur ou informez-vous auprès de votre marchand de BlackBerry.

Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth

BlackBerry (Dispositif logiciel v 5.0)

Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 avec un appareil BlackBerry

D'abord, chargez le BlackBerry® et le dispositif uDirect^{MC} 2 puis allumez-les. Placez-les côte à côte.

Activation de la fonction Bluetooth® de l'appareil BlackBerry®


1. Appuyez sur la touche Menu.
2. Faites défiler la liste jusqu'à Options (sur certains téléphones, jusqu'à Réglages), et appuyez sur la roulette (touche) de sélection pour choisir cette option.
3. Sélectionnez l'option Bluetooth, puis l'option Activer la fonction Bluetooth.

Réglage du dispositif uDirect 2 en mode de couplage

Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (<>) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.

Recherche du dispositif uDirect 2 et confirmation du couplage à l'aide du code 0000 (quatre zéros)

1. Sur l'appareil BlackBerry, sélectionnez **Ajouter un dispositif**. Le BlackBerry commence alors à chercher les dispositifs activés pour la fonction Bluetooth.
2. Dans la liste des dispositifs disponibles, sélectionnez le dispositif uDirect 2.
3. Entrez le code d'accès : **0000** (quatre zéros) quand on vous demande le code d'accès ou le mot de passe. Autorisez les dispositifs à effectuer le processus d'appairage. Sur le BlackBerry, uDirect 2 est montré comme dispositif couplé. Sous **Dispositifs couplés**, sélectionnez **uDirect 2**.
4. Sur le dispositif uDirect 2, le voyant DEL Bluetooth clignote lentement, ce qui indique que les deux appareils ont été appariés avec succès.

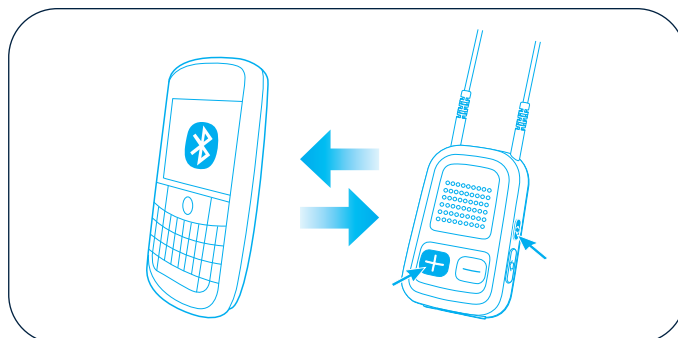

Connexion du dispositif uDirect 2 à l'appareil BlackBerry

En plus de l'appariement, qui ne doit être fait qu'une seule fois, le dispositif uDirect 2 et le BlackBerry doivent être connectés.

1. Dans le menu Bluetooth du BlackBerry, sélectionnez **Connecter**.
2. Afin de pouvoir reconnecter à l'avenir le dispositif uDirect 2 au BlackBerry sans avoir à passer par l'étape de la confirmation, appuyez sur la roulette de sélection, choisissez l'option **Propriétés du dispositif**, puis appuyez de nouveau sur la roulette de sélection.
3. Sélectionnez **Demander** ou **Sécurisé**, puis **Oui**. Le dispositif uDirect fait maintenant partie des dispositifs reconnus.
4. Appuyez sur le bouton **Retour** (le bouton se trouvant à la droite de la roulette de sélection), puis choisissez l'option **Sauvegarder**.

Problèmes de compatibilité avec l'appareil BlackBerry

Malheureusement, certains modèles de BlackBerry munis de la fonction Bluetooth ne sont compatibles qu'avec certains types de dispositifs. Si un problème survient dans la connexion entre le BlackBerry et le dispositif uDirect 2, ou si vous ne connaissez pas les capacités Bluetooth de votre BlackBerry, consultez le guide de l'utilisateur ou informez-vous auprès de votre marchand de BlackBerry.