

Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth

Téléphone portable

Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 avec votre téléphone portable

Chargez et allumez votre téléphone portable et uDirect^{MC} 2.
Placez-les côte à côte.

Activation de la fonction Bluetooth® de votre téléphone portable

1. Cherchez les paramètres de connectivité du téléphone.
2. Cherchez l'option **Bluetooth** dans **Menu** ou dans un de ses sous-menus, et activez la fonction Bluetooth.

Remarque : Si les paramètres Bluetooth ne sont pas dans Menu, ils peuvent se trouver dans :


Options, Outils, Paramètres/Réglages, Connexions, Connectivité, Applications, Panneau de configuration, ou une combinaison de ces options (par ex. Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth).

Réglage du dispositif uDirect 2 en mode de couplage

Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (<>) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.

Recherche du dispositif uDirect 2 et confirmation de l'appariement à l'aide du code 0000 (quatre zéros)

1. Sur votre téléphone portable, choisissez d'**ajouter un nouvel appareil Bluetooth**. Le téléphone commence à rechercher les appareils Bluetooth à portée.
2. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez **uDirect 2** et entrez **0000** (quatre zéros) lorsque le code, ou la clé, vous est demandé. Laissez aux appareils le temps d'effectuer le processus d'appariement. Sur le téléphone portable, uDirect 2 est affiché en tant que dispositif apparié, tandis que le voyant bleu Bluetooth clignote lentement sur uDirect 2 pour indiquer que les appareils sont bien appariés.

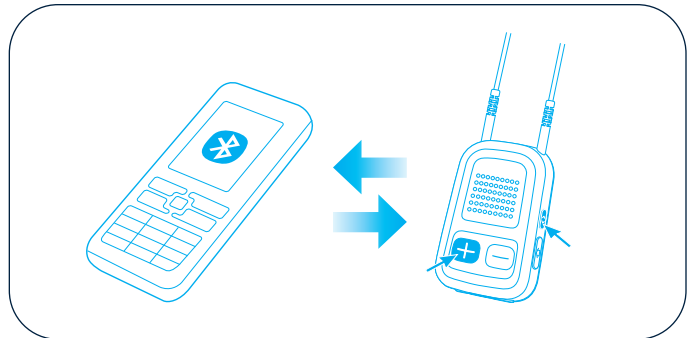

Connexion du dispositif uDirect 2 à votre téléphone portable

Après l'appariement, qui ne doit être effectué qu'une seule fois, votre téléphone portable et uDirect 2 doivent être connectés. Si cette procédure ne s'effectue pas automatiquement, vous pouvez utiliser le menu du téléphone portable.

1. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Appareils couplés** ou **Mes appareils**.
2. Sélectionner **uDirect 2** puis **Connecter**.
3. Certains téléphones portables vous demanderont quelle option Bluetooth vous souhaitez activer. Sélectionnez **Casque** et, si disponible, **Casque stéréo**. Sur certains téléphones, l'icône illustrant un casque indique que uDirect 2 est connecté.
4. S'il vous est demandé d'autoriser la reconnexion automatique, acceptez. De cette manière, uDirect 2 et votre téléphone portable se reconnecteront chaque fois qu'ils se trouveront à portée.

Problèmes de compatibilité avec les téléphones portables

La fonctionnalité Bluetooth est intégrée de différentes façons selon le fabricant de téléphones portables. Certains modèles de téléphones portables équipés de cette fonctionnalité ne sont compatibles qu'avec quelques types d'appareils. Si un problème survient au cours de la connexion entre votre téléphone portable et uDirect 2 ou si vous êtes incertain des capacités de la fonction Bluetooth de votre téléphone, consultez le guide d'utilisation du téléphone ou contactez votre fournisseur.