

Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth

LG

Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 avec votre téléphone cellulaire LG

D'abord, chargez le téléphone cellulaire et le dispositif uDirect^{MC} 2 puis allumez-les. Placez-les côte à côte.

Activation de la fonction Bluetooth[®] du téléphone cellulaire LG[®]

1. Trouvez le réglage de connectivité du téléphone cellulaire. Sur la plupart des modèles LG, l'une ou l'autre de ces options de navigation s'applique :

Menu > Settings & Tools (Réglages et outils) > **Bluetooth**, ou

Menu > Settings (Réglages) > **Connectivity** (Connectivité) > **Bluetooth** > **Paired devices** (Dispositifs appariés), ou

Menu > Tools (Outils) > **Bluetooth**, ou

Menu > Settings > Wireless + Networks > Bluetooth

Réglage du dispositif uDirect 2 en mode de couplage

Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (↔) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.

Couplage du dispositif uDirect 2 avec un téléphone cellulaire

1. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez l'une des options suivantes. Selon le modèle, la sélection pour l'appariement peut être l'une des suivantes :


Add new device (Ajouter un nouveau dispositif), **Search** (Chercher), ou

Add New (Ajouter un nouvel élément) > **Search** (Chercher)

Le téléphone commence alors à chercher les dispositifs activés pour la fonction Bluetooth qui se trouvent à sa portée.

Remarque : Si vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth, il se peut qu'on vous demande de procéder à son activation. Cette action amorcera la recherche de dispositifs Bluetooth. Le téléphone cellulaire devrait alors présenter une liste des dispositifs Bluetooth trouvés.

2. Dans la liste des dispositifs disponibles, sélectionnez le dispositif uDirect 2 et entrez le code 0000 (quatre zéros) lorsqu'on vous demande d'entrer un code d'accès. Attendez

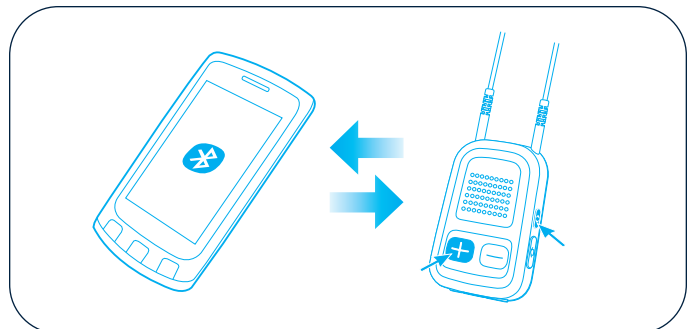

quelques instants pour laisser le temps aux deux appareils d'effectuer le processus d'appariement. Sur le téléphone cellulaire, le dispositif uDirect 2 s'affiche en tant que dispositif apparié, alors que sur le dispositif uDirect 2, le voyant DEL Bluetooth clignote lentement, ce qui indique que les deux appareils ont été appariés avec succès.

Connexion du dispositif uDirect 2 avec un téléphone cellulaire

En plus de l'appariement, qui ne doit être fait qu'une seule fois, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire doivent être connectés. Habituellement, le dispositif uDirect 2 sera connecté automatiquement après l'appariement.

1. Pour effectuer la connexion manuellement, sélectionnez **uDirect 2** dans le menu **Paired devices** (Dispositifs appariés).
2. Sélectionnez **Options > Connect** (Connecter).

Sur certains téléphones, il est possible de régler le dispositif uDirect 2 de sorte qu'il soit autorisé. Ce réglage permet au dispositif uDirect 2 de se connecter automatiquement sans confirmation.

3. Si vous recevez une demande d'autorisation pour une reconnexion automatique, acceptez-la. De cette façon, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire se reconnecteront ensemble dès qu'ils se trouveront dans le même champ de transmission.

Si vous éprouvez des difficultés à naviguer jusqu'aux réglages de la fonction Bluetooth, consultez le guide de l'utilisateur ou informez-vous auprès de votre marchand de téléphones cellulaires.