

# Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth

## Motorola

### Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 avec votre téléphone cellulaire Motorola

D'abord, chargez le téléphone cellulaire et le dispositif uDirect<sup>MC</sup> 2 puis allumez-les. Placez-les côte à côte.

#### Activation de la fonction Bluetooth<sup>®</sup> du téléphone cellulaire Motorola<sup>®</sup>

1. Trouvez le réglage de connectivité du téléphone. Sur la plupart des modèles Motorola, l'une ou l'autre de ces options de navigation s'applique :

**Menu > Connexion > Lien Bluetooth, ou**

**Menu > Lien Bluetooth > Dispositifs appariés > Options, ou**

**Réglages > Connexion > Lien Bluetooth > Mains libres, ou**

**Panneau de configuration > Onglet Connexions > Bluetooth > Onglet Dispositifs ou**

**Menu > Réglages > Wireless + Réseaux > Réglages Bluetooth**

*Remarque : La fonction Bluetooth est activée lorsque le réglage indique ON.*

#### Réglage du dispositif uDirect 2 en mode de couplage

Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (<>) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.

#### Couplage du dispositif uDirect 2 avec un téléphone cellulaire


1. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez l'une des options suivantes. Selon le modèle, la sélection pour l'appariement peut être l'une des suivantes :

**Ajouter un dispositif audio, Nouveau dispositif apparié, Chercher des dispositifs, ou Ajouter.**

Le téléphone commence alors à chercher les dispositifs activés pour la fonction Bluetooth qui se trouvent à sa portée.

*Remarque : Si vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth, il se peut qu'on vous demande de procéder à son activation. Cette action amorcera la recherche de dispositifs Bluetooth.*

2. Dans la liste des dispositifs disponibles, sélectionnez le dispositif uDirect 2. Certains modèles de téléphone

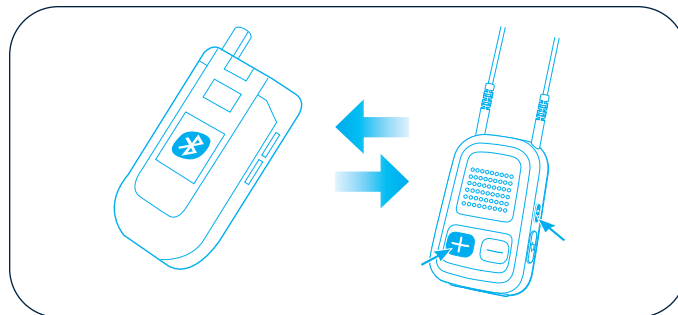

établiront une liaison avec le dispositif uDirect 2. Si on vous demande d'établir une liaison avec le dispositif uDirect 2, confirmez en répondant « Oui ». Lorsqu'on vous demande d'entrer un code d'accès, utilisez le code 0000 (quatre zéros). Le dispositif uDirect 2 sera alors ajouté à la liste des dispositifs Bluetooth. Attendez quelques instants pour laisser le temps aux deux appareils d'effectuer le processus d'appariement. Sur le téléphone cellulaire, le dispositif uDirect 2 s'affiche en tant que dispositif apparié, alors que sur le dispositif uDirect 2, le voyant DEL Bluetooth clignote lentement, ce qui indique que les deux appareils ont été appariés avec succès. Pour les téléphones androïdes, sous Réglages Bluetooth, recherchez les dispositifs et cliquez uDirect 2 pour vous connecter.

#### Connexion du dispositif uDirect 2 avec un téléphone cellulaire

En plus de l'appariement, qui ne doit être fait qu'une seule fois, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire doivent être connectés. Sur certains téléphones, vous pouvez configurer la connexion automatique dans les réglages d'accès se trouvant dans les détails relatifs aux dispositifs. Ce réglage permet au dispositif uDirect 2 de se connecter automatiquement sans confirmation. Si vous recevez une demande d'autorisation pour une reconnexion automatique, acceptez-la. De cette façon, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire se reconnecteront ensemble dès qu'ils se trouveront dans le même champ de transmission. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer jusqu'aux réglages de la fonction Bluetooth, consultez le guide de l'utilisateur ou informez-vous auprès de votre marchand de téléphones cellulaires.