

Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth

Nokia

Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 avec votre téléphone cellulaire Nokia

D'abord, chargez le téléphone cellulaire et le dispositif uDirect^{MC} 2, puis allumez-les. Placez-les côte à côte.

Activation de la fonction Bluetooth® du téléphone cellulaire Nokia®

Trouvez le réglage de connectivité du téléphone. Sur la plupart des modèles Nokia, le chemin de navigation suivant s'applique :

Menu > Settings (Réglages) > Connectivity (Connectivité) > Bluetooth

Remarque : La fonction Bluetooth est activée lorsque le réglage indique ON.

Réglage du dispositif uDirect 2 en mode de couplage

Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (<>) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.


Couplage du dispositif uDirect 2 avec votre téléphone cellulaire

1. Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez l'une des options suivantes. Selon le modèle, la sélection pour l'appariement peut être l'une des suivantes : **Search for Audio Enhancement** (Rechercher des dispositifs d'amélioration audio), ou appuyez vers la droite pour passer à l'onglet **Paired Devices** (Dispositifs appariés).

Sélectionnez **Options > New paired device** (Nouveau dispositif apparié)

Le téléphone commence alors à chercher les dispositifs activés pour la fonction Bluetooth qui se trouvent à sa portée.

Remarque : Si vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth, il se peut qu'on vous demande de procéder à son activation. Cette action amorcera la recherche de dispositifs Bluetooth. Le téléphone cellulaire devrait alors présenter une liste des dispositifs Bluetooth trouvés.

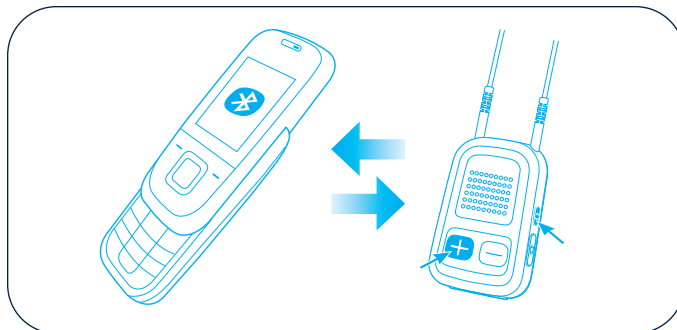

2. Dans la liste des dispositifs disponibles, sélectionnez le dispositif **uDirect 2** et entrez le code **0000** (quatre zéros) lorsqu'on vous demande d'entrer un code d'accès. Attendez quelques instants pour laisser le temps aux deux appareils d'effectuer le processus d'appariement. Sur le téléphone cellulaire, le dispositif uDirect 2 s'affiche en tant que dispositif apparié, alors que sur le dispositif uDirect 2, le voyant DEL Bluetooth clignote lentement, ce qui indique que les deux appareils ont été appariés avec succès.

Connexion du dispositif uDirect 2 avec le téléphone cellulaire

1. En plus de du couplage, qui ne doit être fait qu'une seule fois, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire doivent être connectés. Dans le menu **PAIRED DEVICES** (Dispositifs appariés) du téléphone cellulaire, sélectionnez uDirect 2.
2. Sélectionnez **Connect** (Connecter) ou **Connect To Audio Device** (Se connecter à un dispositif audio). Sur certains téléphones, vous pouvez configurer la connexion automatique dans les réglages d'accès se trouvant dans les détails relatifs aux dispositifs.
3. Si vous recevez une demande d'autorisation pour une **reconnexion automatique**, acceptez-la. De cette façon, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire se reconnecteront ensemble dès qu'ils se trouveront dans le même champ de transmission.

Si vous éprouvez des difficultés à naviguer jusqu'aux réglages de la fonction Bluetooth, consultez le guide de l'utilisateur ou informez-vous auprès de votre marchand de téléphones cellulaires.