

Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth


Ordinateur personnel (PC)

Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 à un ordinateur personnel (PC)

Vous pouvez utiliser uDirect^{MC} 2 pour écouter le son de votre PC si ce dernier prend en charge la fonction Bluetooth®. Vous devez d'abord coupler uDirect 2 et votre PC en suivant la procédure ci-dessous.

Pour coupler uDirect 2 et un ordinateur personnel (PC) :

1. Chargez et allumez votre PC et uDirect 2. Placez-les côte à côte.
2. Vérifiez que la connectivité Bluetooth est activée. Activez la fonctionnalité Bluetooth intégrée ou branchez l'adaptateur Bluetooth externe à votre PC.
3. Sur votre PC, ouvrez **Mes périphériques Bluetooth** et sélectionner **Ajouter un appareil Bluetooth**. Vous pouvez aussi cliquer sur **Démarrer > Panneau de configuration** et sélectionnez **Assistant Appareil Bluetooth**.
4. Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (<>) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.
5. Naviguez sur votre PC pour rechercher et ajouter un appareil Bluetooth donné.
6. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, choisissez uDirect 2.
7. Lorsque l'ordinateur demande un mot de passe ou un code NIP, entrez 0000 (quatre zéros).
8. Laissez aux appareils le temps de créer un lien sécurisé.
9. L'ordinateur peut vous proposer plusieurs options Bluetooth. Choisissez **Casque stéréo** pour diffuser le son en stéréo.

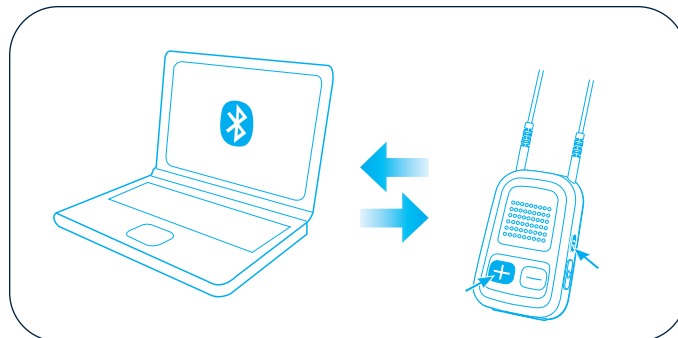

10. Après avoir choisi les options que vous souhaitez activer, achevez la connexion et quitter la configuration de votre PC. Le voyant bleu Bluetooth clignote lentement pour indiquer que les appareils sont bien appariés.

Problèmes de compatibilité avec les PC

La fonctionnalité Bluetooth est intégrée de différentes façons selon le fabricant de PC. Certains modèles de PC équipés de la fonction Bluetooth ne sont compatibles qu'avec certains types d'appareils. Si un problème survient au cours de la connexion entre votre PC et uDirect 2 ou si vous êtes incertain des capacités Bluetooth de votre PC, consultez le guide d'utilisation de ce dernier ou contactez votre fournisseur.