

# Guides pour le couplage d'un dispositif uDirect 2 avec un appareil Bluetooth

## Sony Ericsson

### Couplage et connexion du dispositif uDirect 2 avec votre téléphone cellulaire Sony Ericsson

D'abord, chargez le téléphone cellulaire et le dispositif uDirect<sup>MC</sup> 2 puis allumez-les. Placez-les côte à côte.

#### Activation de la fonction Bluetooth<sup>®</sup> du téléphone cellulaire Sony Ericsson<sup>®</sup>

1. Trouvez le réglage de connectivité du téléphone. Sur la plupart des téléphones Sony Ericsson, l'une ou l'autre de ces options de navigation s'applique :

**Menu > Réglages > Onglet Connectivité > Bluetooth > Mes dispositifs, ou**

**Menu > Connectivité > Bluetooth > Mes dispositifs, ou**

**Outils ou Menu principal > Panneau de configuration > Connexions > Onglet Dispositifs Bluetooth**

**Applications > Réglages > Wireless + Réseaux > Bluetooth**

#### Réglage du dispositif uDirect 2 en mode de couplage


Pour amorcer le processus d'appariement sur le dispositif uDirect 2, réglez le dispositif en mode d'appariement en appuyant sur les boutons (+) et (<>) et en le tenant enfoncé pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le voyant DEL Bluetooth soit bleu et clignote rapidement. Le dispositif uDirect 2 restera alors en mode d'appariement pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le processus d'appariement soit terminé.

#### Couplage du dispositif uDirect 2 avec un téléphone cellulaire

1. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Nouveau dispositif** ou **Ajouter** ou **recherchez de nouveaux dispositifs**.

*Remarque : Si vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth, il se peut qu'on vous demande de procéder à son activation. Cette action amorcera la recherche de dispositifs Bluetooth.*

2. Dans la liste des dispositifs accessibles, sélectionnez le dispositif **uDirect 2** et entrez le code **0000** (quatre zéros) lorsqu'on vous demande d'entrer un code d'accès. Attendez quelques instants pour laisser le temps aux deux appareils d'effectuer le processus d'appariement. Sur le

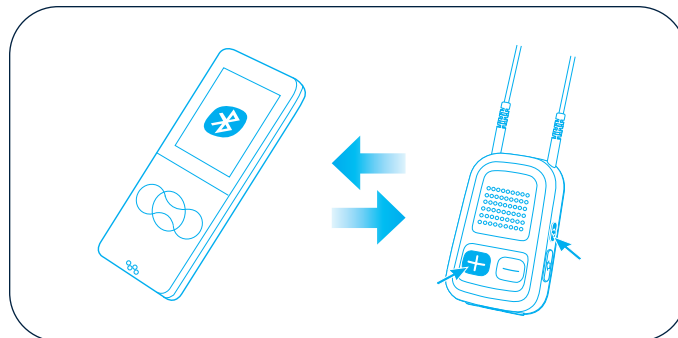

téléphone cellulaire, le dispositif uDirect 2 s'affiche en tant que dispositif apparié, alors que sur le dispositif uDirect 2, le voyant DEL Bluetooth clignote lentement, ce qui indique que les deux appareils ont été appariés avec succès.

#### Connexion du dispositif uDirect 2 avec le téléphone cellulaire

En plus de l'appariement, qui ne doit être fait qu'une seule fois, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire doivent être connectés.

1. Dans le menu **Mes dispositifs**, ou **Bluetooth** sélectionnez **uDirect 2**.
2. Sélectionnez **Connecter**.

Sur certains téléphones, vous pouvez configurer la connexion automatique dans les réglages d'accès se trouvant dans les détails relatifs aux dispositifs. Ce réglage permet au dispositif uDirect 2 de se connecter automatiquement sans confirmation.

3. Si vous recevez une demande d'autorisation pour une reconnexion automatique, acceptez-la. De cette façon, le dispositif uDirect 2 et le téléphone cellulaire se reconnecteront ensemble dès qu'ils se trouveront dans le même champ de transmission.

Si vous éprouvez des difficultés à naviguer jusqu'aux réglages de la fonction Bluetooth, consultez le guide de l'utilisateur ou informez-vous auprès de votre marchand de téléphones cellulaires.