

Max

Snabbguide för anpassning i Unitron TrueFit

Max™ erbjuder maximal styrka och maximalt skydd. Max är den enda Super Power på marknaden med Tillväjningshanterare Power som möter brukarnas förväntningar vid första utprovningen, och får dem att varsamt gå över till förstärkningsnivåer som bevarar deras hörsel i längden. Max är utrustad med Era™ och kommer med funktioner optimerade för svår till grav hörselnedsättning som fokuserar på maximerad talförståelse utan att kompromissa med medvetenheten. Reducera överförstärkning och få bästa möjliga hörselupplevelse på lång sikt med Max.

Programmera Max i programvaran Unitron TrueFit

Den här snabbguiden tar dig genom de olika stegen i en förenklad utprovning av Max-hörapparater med hjälp av programvaran Unitron TrueFit™.

För att ansluta hörapparaterna så väljer du önskad programmeringsenhet.

- Om du använder iCube ska du sätta i batterierna i hörapparaterna och stänga batteriluckan.
- Om du använder NOAHlink eller HI-PRO lyfter du på luckan till programmeringsporten och ansluter programmeringskabeln till programmeringsporten.

Obs! Hörapparatreglagen, tillbehör, easy-t, easy-DAI, streaming av ljud och automatiska mikrofonalternativ är inaktiverade vid programmering.

1. Brukare

NOAH

Under **Brukare** klickar du på **Information** och anger brukarens erfarenhetsnivå för hörapparater.

Standalone

a. Information


I fönstret **Brukare** klickar du på **Information**. Klicka på knappen **Ny brukare** och ange brukarens uppgifter. Klicka sedan på **Spara**. Klicka på knappen **Blank Session** om du vill starta en ny session.

b. Erfarenhet

Under **Brukare** klickar du på **Information** och anger brukarens erfarenhetsnivå för hörapparater.

c. Audiogram

Under **Brukare** klickar du på **Audiogram** och anger brukarens audiogram och väljer vilken överföring som använts för audiometri.

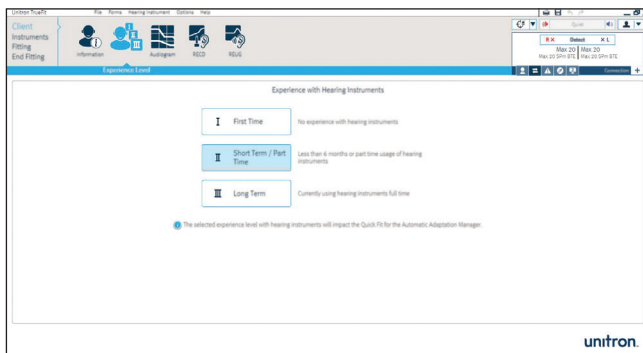

2. Hörapparater

a. Val

1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Val** och väljer programmeringsgränssnitt i listrutan under knappen Sök.
2. Klicka på knappen **Sök**. Hörapparatsens modell, format och serienummer visas och kommunikationsstatusen uppdateras.




b. Akustik

1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Akustik** för att konfigurera parametrar som: anpassning, ventilation, slangfäste, slang, insats och längd på ljudslang.
2. Om du har beställt en insats med IntelliVent behöver du bara ange koden, så konfigureras hörapparaten automatiskt med bästa ventilation.
3. Du kan välja mellan Vanlig Slang och Tunn Ljudslang Power.
4. För Tunn Ljudslang Power väljer du insats, ventilation och längd på ljudslang.
5. För vanlig ljudslang och slangfäste väljer du ventilationsstorlek samt typ av slangfäste och ljudkanal.
6. Klicka på knappen **Quick Fit**. 



c. Tillbehör

1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Tillbehör**.
2. Klicka på ikonen för tillbehöret som du vill ansluta till hörapparaten(-erna).
3. Klicka på knappen **Aktivera** för att länka det valda tillbehöret. Följ instruktionerna på skärmen.

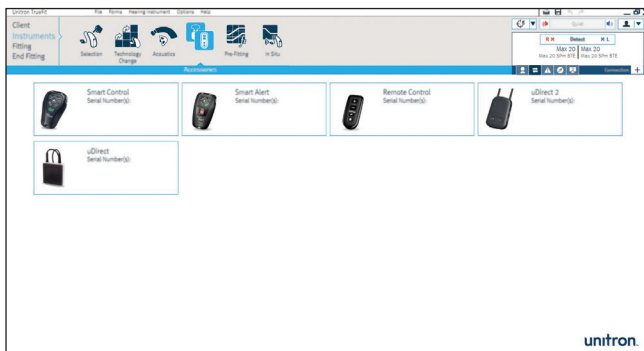

3. Anpassning

a. Återkopplingstest

1. I fönstret **Anpassning** klickar du på **Återkopplingstest**.
2. Klicka på knappen **Starta återkopplingstest** och följ anvisningarna på skärmen för att optimera återkopplingen för varje hörapparat.

b. Justera


1. I fönstret **Anpassning** klickar du på **Justera** för att manuellt finjustera lyssningsprogrammen. Du kan konfigurera Tillvänjningshanteraren, Ocklusionshanteraren, Basförstärkaren, inställningar för Svag/Måttlig/Stark innivå, MPO/Förstärkning/CR/TK samt Frekvenskompression. Anpassningshjälpen kan användas för att ge förslag på lösningar för finjusteringar.
2. Klicka på **Svag/Måttlig/Stark kontroller**. I programlistan väljer du det program som du vill ändra. Välj önskad innivå (svag, måttlig, stark eller alla) och frekvensområde för justering. Öka eller minska inställningarna med knapparna +/-.
3. Klicka på **MPO/Förstärkning/CR/TK**. I programlistan väljer du det program som du vill ändra. Välj önskad justering (MPO, Förstärkning, CR eller TK) och frekvensområde för justering. Öka eller minska inställningarna med knapparna +/-.



4. Slutlig anpassning

I **Slutlig Anpassning** kan du konfigurera inställningarna för volym, tryckknapp- och spakinställningar, pipsignaler samt ytterligare alternativ för hörapparaten.

1. För att avsluta utprovningsen, klicka på **Sammanfattning** och välj knappen **Skriv ut** och **Spara**.
2. Stäng sessionen genom att klicka på knappen **Stäng session**.
3. När du har stängt sessionen:
 - Om du använder iCube ska du starta om din(a) hörapparat(er) genom att öppna och stänga batteriluckan(orna).
 - Om du använder NOAHlink eller HI-PRO, tar du ut programmeringskabeln, sätter i batterier och stänger batteriluckan.

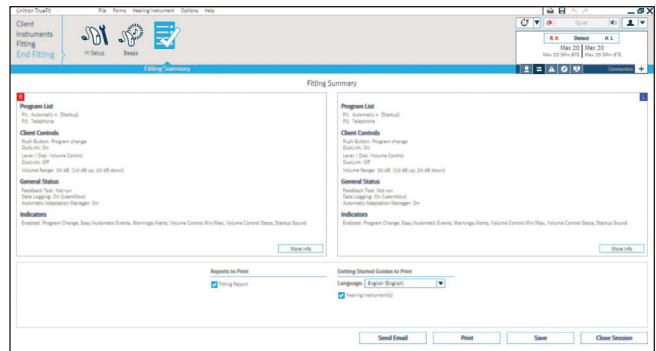

Mer information om utprovning av Max-hörapparater och programvaran Unitron TrueFit finns i **Hjälpfunktionen** i Unitron TrueFit.