

Moxi-familjen

Snabbguide för anpassning i Unitron TrueFit

Med hjälp av Era™ blir hörapparaterna Moxi™ och Moxi² en RIC (Receiver-in-Canal) fullpackad med teknik för att ge ett bra hörande i alla situationer utan ansträngning.

Programmering av Moxi och Moxi² i programvaran Unitron TrueFit

Den här snabbguiden tar dig genom de olika stegen i en förenklad utprovning av Moxi- och Moxi² hörapparater med hjälp av programvaran Unitron TrueFit™.

För att ansluta hörapparaterna så väljer du önskad programmeringsenhet.

- Om du använder iCube ska du sätta i batterierna i hörapparaterna och stänga batteriluckan.
- Vid användning av NOAHlink eller HI-PRO, öppna batteriluckan och anslut programmeringskabeln till hörapparaternas programmeringsport.

Obs! Om så önskas kan kabelverktyget användas med hörapparaten för att underlätta vid insättning av programmeringskabeln.

Obs! Hörapparatreglagen, tillbehör, easy-t, audiostreaming och automatiska mikrofonalternativ är inaktiverade under programmering.

1. Brukare

NOAH

Under **Brukare** klickar du på **Information** och anger brukarens erfarenhetsnivå för hörapparater.

Standalone

a. Information


I fönstret **Brukare** klickar du på **Information**. Klicka på knappen **Ny brukare** och ange brukarens uppgifter. Klicka sedan på **Spara**. Klicka på knappen **Blank Session** om du vill starta en ny session.

b. Erfarenhet

Under **Brukare** klickar du på **Information** och anger brukarens erfarenhetsnivå för hörapparater.

c. Audiogram


Under **Brukare** klickar du på **Audiogram** och anger brukarens audiogram och väljer vilken överföring som använts för audiometri.

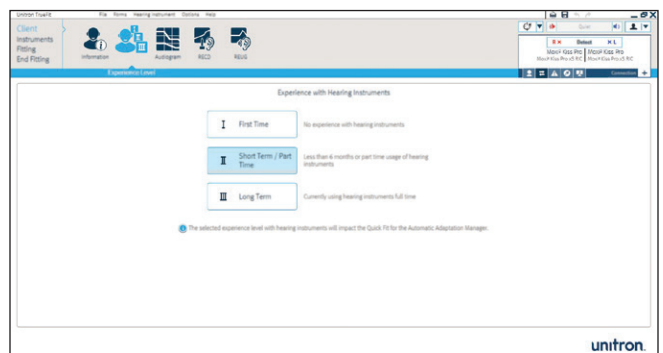

2. Hörapparater


a. Val

1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Val** och väljer programmeringsgränssnitt i listrutan under knappen Sök.
2. Klicka på knappen **Sök**. Hörapparatsmodell, format och serienummer visas och kommunikationsstatusen uppdateras.

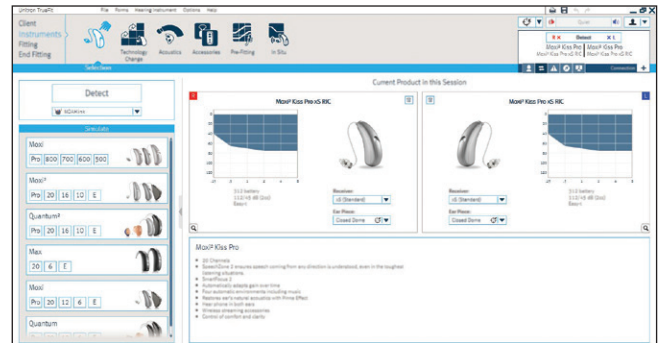

b. Akustik

1. Under menyn **Hörapparater** klickar du på **Akustik**.
2. Välj typ av hörtelefon (xS, xP, xSP eller xSP plus), dome och ventilationsegenskaper (om tillämpligt) i rullistan för varje hörapparat. Om du vill kan du specificera kabellängden i arkiveringssyfte.
3. För gjutna domer med IntelliVent anger du bara koden, så konfigureras hörapparaten automatiskt med bästa ventilation.
4. Klicka på knappen **Quick Fit**. 

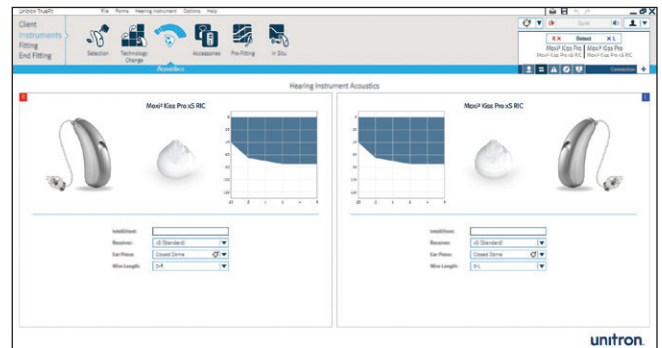

c. Tillbehör

1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Tillbehör**.
2. Klicka på ikonen för tillbehöret som du vill ansluta till hörapparaten(-erna).
3. Klicka på knappen **Aktivera** för att länka det valda tillbehöret. Följ instruktionerna på skärmen.



3. Anpassning

a. Återkopplingstest

1. I fönstret **Anpassning** klickar du på **Återkopplingstest**.
2. Klicka på knappen **Starta återkopplingstest** och följ anvisningarna på skärmen för att optimera återkopplingen för varje hörapparat.

b. Justera


1. Under menyn **Anpassning** klickar du på **Justera** för att manuellt finjustera lyssningsprogrammen. Du kan konfigurera tillvänjningshanteraren, ocklusionshantering, inställningar för svaga/måttliga/starka innivåer och MPO/Förstärkning/CR. Anpassningshjälpen kan användas för att ge förslag på lösningar för finjusteringar.
2. Klicka på **Svag/Måttlig/Stark kontroller**. I programlistan väljer du det program som du vill ändra. Välj önskad innivå (svag, måttlig, stark eller alla) och frekvensområde för justering. Öka eller minska inställningarna med knapparna +/-.
3. Klicka på **MPO/Förstärkning/CR**. I programlistan väljer du det program som du vill ändra. Välj önskad justering (MPO, Förstärkning, eller CR) och frekvensområde för justering. Öka eller minska inställningarna med knapparna +/-.



4. Slutlig anpassning

Under **Slutlig anpassning** kan du konfigurera pipsignaler, inställningar för volym, startinställningar och andra alternativ för hörapparaten.

1. För att avsluta utprovningen, klicka på **Sammanfattning** och välj knappen **Skriv ut** och **Spara**.
2. Stäng sessionen genom att klicka på knappen **Stäng session**.
3. När du har stängt sessionen:
 - Om du använder iCube ska du starta om din(a) hörapparat(er) genom att öppna och stänga batteriluckan(orna).
 - Om du använder NOAHlink eller HI-PRO, tar du ut programmeringskabeln, sätter i batterier och stänger batteriluckan.

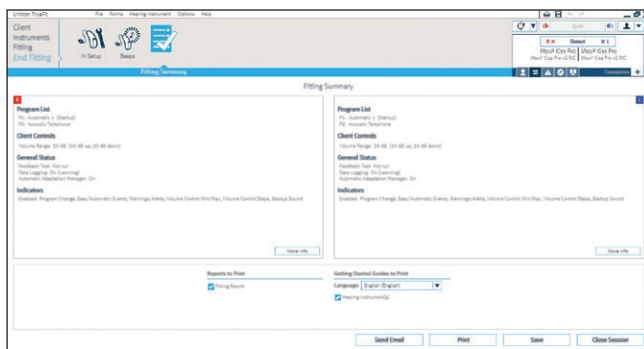

Mer information om utprovning av hörapparater i Moxi-familjen och Unitrons programvara TrueFit finns i **Hjälpfunktionen** i Unitron TrueFit.