

Quantum-familjen

Snabbguide för anpassning i Unitron TrueFit

Med hjälp av Era™ ger produkterna Quantum™ och Quantum² en tydlig talförståelse, även i de mest utmanande ljudmiljöerna. Med intuitiv automatisk prestanda och fantastisk ljudkvalitet ger dessa hörapparater användaren ett mer naturligt hörande. Överallt.

Programmering av Quantum och Quantum² i programvaran Unitron TrueFit

Den här snabbguiden tar dig genom de olika stegen i en förenklad utprovning av Quantum och Quantum² hörapparater med hjälp av programvaran Unitron TrueFit™.

För att ansluta hörapparaterna så väljer du önskad programmeringsenhet.

- Om du använder iCube ska du sätta i batterierna i hörapparaterna och stänga batteriluckan.
- Om du använder NOAHlink eller HI-PRO med BÖ-apparater så öppnar du batteriluckan och ansluter programmeringskabeln till programmeringsporten.
- Om du använder NOAHlink eller HI-PRO med IÖ apparater tar du av batteriluckan och sätter i programmeringskabeln.

Obs! För Quantum och Quantum² micro CIC eller Quantum² 10A IÖ ska du säkerställa att du använder den vita programmeringskabeln för att inte skada hörapparaten.

Obs! Hörapparatreglagen, tillbehör, easy-t, easy-DAI, streaming av ljud och automatiska mikrofonalternativ är inaktiverade vid programmering.

1. Brukare

NOAH

Under **Brukare** klickar du på **Information** och anger brukarens erfarenhetsnivå för hörapparater.

Standalone

a. Information

I fönstret **Brukare** klickar du på **Information**.


Klicka på knappen **Ny brukare** och ange brukarens uppgifter. Klicka sedan på **Spara**. Klicka på knappen **Blank Session** om du vill starta en ny session.

b. Erfarenhet

Under **Brukare** klickar du på **Information** och anger brukarens erfarenhetsnivå för hörapparater.

c. Audiogram

Under **Brukare** klickar du på **Audiogram** och anger brukarens audiogram och väljer vilken överföring som använts för audiometri.

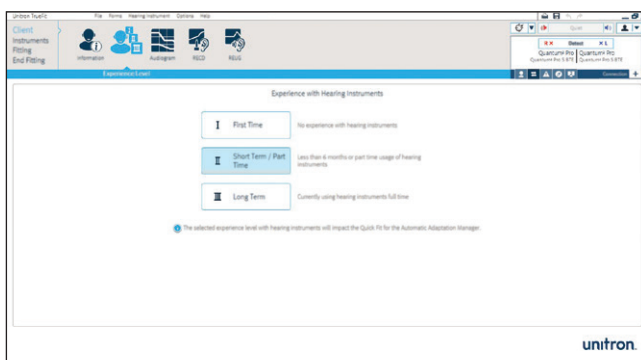

2. Hörapparater

a. Val


1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Val** och väljer programmeringsgränssnitt i listrutan under knappen Sök.
2. Klicka på knappen **Sök**. Hörapparatsens modell, format och serienummer visas och kommunikationsstatusen uppdateras.

b. Akustik

1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Akustik** för att konfigurera parametrar som: dome, ventilation, slangfäste, slang och insats.
2. För BÖ hörapparater – om du har beställt en insats med IntelliVent behöver du bara ange koden, så konfigureras hörapparaten automatiskt med bästa ventilation.
3. För BÖ hörapparater kan du välja vanlig eller tunn ljudslang.
4. För BÖ hörapparater med tunn ljudslang väljer du typ av dome och längd på ljudslang (valfritt).
5. För BÖ hörapparater med vanlig ljudslang och slangfäste väljer du ventilationsstorlek samt typ av slangfäste och ljudslang.
6. För IÖ-apparater kan du konfigurera ventilationen. Om du har beställt IÖ hörapparater med IntelliVent läses koden av automatiskt och hörapparaten konfigureras för bästa ventilation.
7. Klicka på knappen **Quick Fit**. 

c. Tillbehör

1. I fönstret **Hörapparater** klickar du på **Tillbehör**.
2. Klicka på ikonen för tillbehöret som du vill ansluta till hörapparaten(-erna).
3. Klicka på knappen **Aktivera** för att länka det valda tillbehöret. Följ instruktionerna på skärmen.

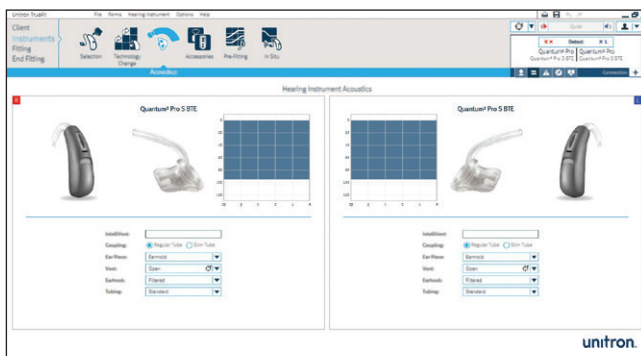


3. Anpassning

a. Återkopplingstest

1. I fönstret **Anpassning** klickar du på **Återkopplingstest**.
2. Klicka på knappen **Starta återkopplingstest** och följ anvisningarna på skärmen för att optimera återkopplingen för varje hörapparat.

b. Justera


1. I fönstret **Anpassning** klickar du på **Justera** för att manuellt finjustera lyssningsprogrammen. Du kan konfigurera tillvänjningshanteraren, ocklusionshantering, inställningar för svaga/måttliga/starka nivåer och MPO/Förstärkning/CR. Anpassningshjälpen kan användas för att ge förslag på lösningar för finjusteringar.
2. Klicka på **Svag/Måttlig/Stark Kontroller**. I programlistan väljer du det program som du vill ändra. Välj önskad nivå (svag, måttlig, stark eller alla) och frekvensområde för justering. Öka eller minska inställningarna med knapparna +/-.
3. Klicka på **MPO/Förstärkning/CR**. I programlistan väljer du det program som du vill ändra. Välj önskad justering (MPO, Förstärkning, eller CR) och frekvensområde för justering. Öka eller minska inställningarna med knapparna +/-.

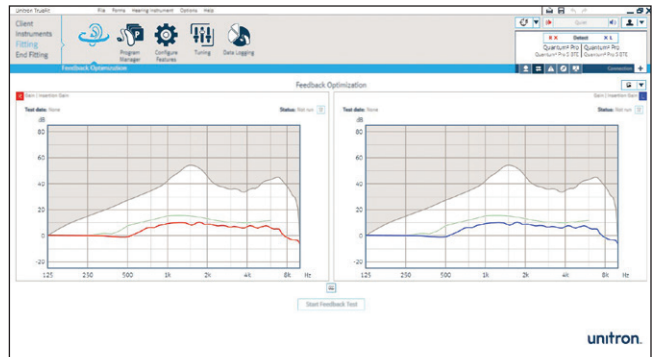

4. Slutlig anpassning

Under **Slutlig anpassning** kan du konfigurera pipsignaler, inställningar för volym, tryckknappar och spak- och hjulreglage samt andra alternativ för hörapparaten.

1. För att avsluta utprovningen, klicka på **Sammanfattning** och välj knappen **Skriv ut** och **Spara**.
2. Stäng sessionen genom att klicka på knappen **Stäng session**.
3. När du har stängt sessionen:
 - Om du använder iCube ska du starta om din(a) hörapparat(er) genom att öppna och stänga batteriluckan(orna).
 - Om du använder NOAHlink eller HI-PRO, tar du ut programmeringskabeln, sätter i batterier och stänger batteriluckan.

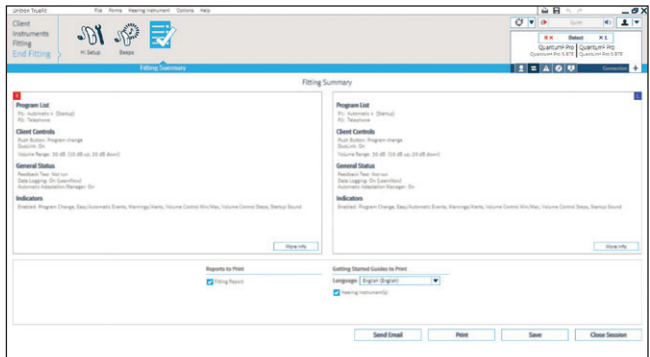

Mer information om utprovning av hörapparater i Quantum-familjen och Unitrons programvara TrueFit finns i **Hjälpfunktionen** i Unitron TrueFit.