

Shine Rev familjen

Snabbguide för anpassning i Unitron TrueFit

Vår plattform Era™ som troget levererar den ljudkvalitet patienterna föredrar och Shine™ Rev som levererar förstklassiga funktioner i samverkan för att göra en naturlig hörsel tillgänglig för alla.

Programmera Shine Rev i programvaran Unitron TrueFit

Den här snabbguiden tar dig genom de olika stegen i en förenklad utprovning av Shine Rev hörapparater med hjälp av programvaran Unitron TrueFit™

För att ansluta hörapparaterna så väljer du önskad programmeringsenhet.

- Om du använder NOAHlink eller HI-PRO med BÖ-apparater ansluts programmeringskabeln till programmeringsporten. För BÖ M, hittas programmeringsporten i batteriluckan.
- Om du använder NOAHlink eller HI-PRO med IÖ apparater tar du av batteriluckan och sätter i programmeringskabeln.

Obs! Hörapparaternas reglage avaktiveras under programmering.


1. Föranslut

NOAH

a. Erfarenhetsnivå

I NOAH är startsidan **Erfarenhetsnivå**.

Ange brukarens erfarenhet av hörapparater.

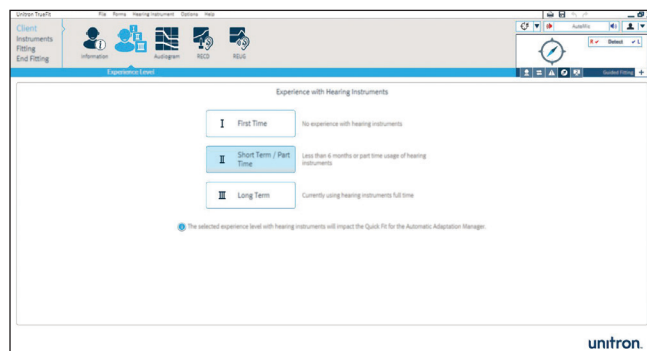

Standalone


a. Information

I fönstret **Brukare** klickar du på **Information**.

Klicka på knappen **Ny brukare** och ange brukarens uppgifter. Klicka sedan på **Spara**. Klicka på knappen **Blank Session** om du vill starta en ny session.

b. Erfarenhetsnivå

Under **Brukare** klickar du på **Erfarenhetsnivå** och anger brukarens erfarenhet av hörapparater.

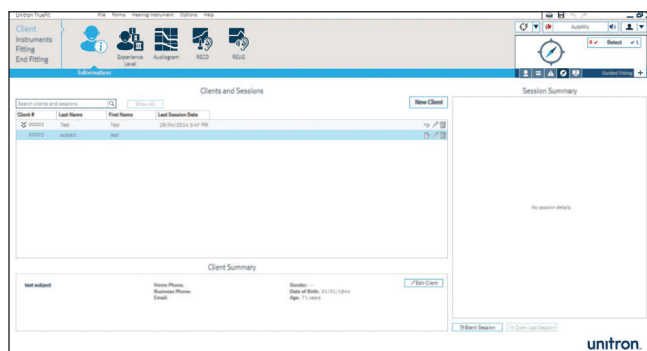

2. Sök

Klicka på knappen **Sök**. Hörapparatens modell, format och serienummer visas och kommunikationsstatusen uppdateras.

3. Utprovning med vägledning

Anpassning med vägledning kommer att öppnas efter att en hörapparat har anslutits som inte har någon sparad information. Följande sex steg vägleder dig genom en första lyckad utprovning.

1. Akustik

För BÖ-apparater kan ljudslangar väljas i det här steget. Dome kan endast väljas vid anpassning av tunn ljudslang.

För allt-i-örat-apparater (AIÖ) visas information för skalmodell och hörtelefon. Ventilationen konfigureras beroende på hörselnedsättning.

2. Återkopplingstest

Klicka på knappen **Starta återkopplingstest** och följ instruktionerna på skärmen.

3. Audiometrisk information

Ange audiometrisk information – Patientdata rörande hörselnedsättning kan anges under hela anpassningen.

Audiogram: klicka på knappen **Audiogram** och ange data.

In Situ: klicka på knappen **In situ** och följ instruktionerna på skärmen.

4. Quick Fit

Klicka på knappen **Quick Fit** – programmerar hörapparaten i enlighet med dina patienters hörselbehov.

5. Pip

Detta är ett valfritt steg för att enkelt demonstrera pip (till exempel pip för svagt batteri) för din patient.

6. Spara och Stäng

Det här sparar data i hörapparaten och i databasen.

Obs! Vyn vägledad utprovning visar bockmarkeringar för att indikera fullbordandet av varje steg. När som helst under vägledad utprovning kan du tillgå en annan TrueFit-sida och gå tillbaka för att avsluta de resterande stegen vid ett senare tillfälle.

För mer information om utprovning av hörapparater i Shine Rev-familjen eller Unitron TrueFit programvara, besök **Hjälpfunktionen** i Unitron TrueFit.

