

Max™ 6 SP

BÖ hörapparatserie

Prestandaprofil

6 kanaler

Specifika Super power-funktioner

Tillväjningshanterare Power

Ger en gradvis reducering av förstärkningen över tid. Starta på den förstärkningsnivå som brukaren förväntar sig, som ibland kraftig kan överstiga det föreskrivna målet. Funktionen kommer sedan automatiskt, sakta och säkert reducera förstärkningen och MPO till en mer säker nivå för att maximera talförståelse och värna om hörselhälsan

Frekvenskompression

Genom att flytta ljud från de områden där hörseln är mest skadad och komprimera in dem i det hörbara området kan brukaren uppleva ett rikare omfång av ljud vilket ökar medvetenheten och talförståelsen

SmartFocus SP

Den optimerade prestandan hos riktverkande mikrofoner, talförbättring, brusreducering och förstärkning samverkar med varandra så att brukare med grav till mycket grav hörselnedsättning automatiskt upplever den bästa talförståelsen eller komfort som situationen kräver, utan att det går ut över medvetenheten

Basförstärkare

Ger ytterligare förstärkning i de låga frekvenserna genom en enkel programvarukontroll

Signaturegenskaper

Automatiskt program

Brukarna får uppleva en överlägsen automatisk prestanda med den optimala blandningen av två lyssningsmiljöer

Återkopplingshanterare

Återkopplingshanteraren erbjuder mer användbar förstärkning genom att undertrycka återkopplingstoppar innan de blir hörbara

Trådlös teknik

DuoLink – program- och volymjusteringar som utförs på den ena hörapparaten sker per automatik i den andra hörapparaten

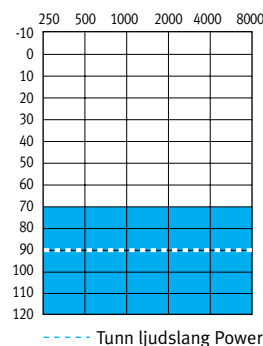
uDirect™ 2 (tillval) – trådlös enhet mellan hörapparaterna och Bluetooth® aktiverade enheter (t.ex. mobiltelefon)

uTV™ 2 (tillval) – streamar ljud från TV eller annan ljudkälla till uDirect 2

Ytterligare egenskaper

- 3 manuella + 3 trådlösa streamingprogram
- Multibandsadaptiv riktverkan
- AntiShock™
- Vindbrushantering
- Easy-DAI
- Easy-t och telespole
- MyMusic™
- Förbättrad taluppfattning LD
- Brusreducering
- Datalogging
- Tillvalbar fjärrkontroll
- Tillvalbart Smart Alert™ System
- Valbar trådlös programmering med iCube
- IntelliVentteknologi finns som val till individuellt anpassade hörselhjälpmiddel

Anpassningsområde



Max 6 SP passar för anpassning av grava till mycket grava hörselnedsättningar och klarar audiogramkonfigurationer från omvänd kurva till kraftigt sluttande.

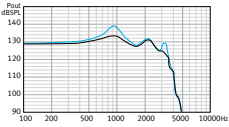
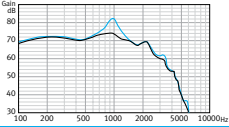
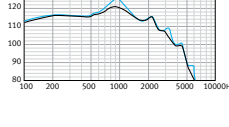
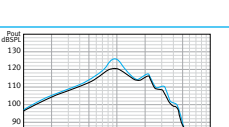
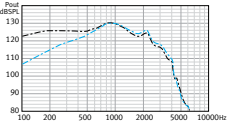
Max 6 SP BÖ-serie

Max 6 SP
tunn ljudslang power

Max 6 SP
filtrerat slangfäste

Max 6 SP
ofiltrerat slangfäste

ANSI 3.22 2003/IEC 118-7 2CC COUPLER TEKNISK DATA

	Referenstestfrekvens – IEC 118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
	OSPL₉₀			
	Maximal (dB SPL)	142	135	142
	Nominell (dB SPL)	139	133	139
	ANSI HFA (dB SPL)	124	129	133
	vid RTF (dB SPL)	122	128	129
	Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)			
	Maximal (dB)	82	75	82
	ANSI HFA (dB)	65	69	73
	vid RTF (dB)	61	68	69
	Frekvenssvar (ANSI 2003)			
	Frekvensomfång (Hz)	< 100-5000	< 100-5000	< 100-4900
	Referenstest förstärkning (dB)	47	52	56
	Strömförbrukning vid RTG (mA)	2.0	2.0	2.0
	Typisk batterilivslängd (h)	320	320	320
	Ekvivalent innivå för brus vid RTG (dB SPL)	19	19	19
	Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	4/2/1	4/2/1	4/2/1
	Induktionspolekänslighet (ANSI 2003, 31.6 mA/m)			
	HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	108/1	113/1	117/1
	 Mik vid 70 dB SPL vs. induktionspole vid 100 mA/m — Mik — Induktionspole			

Elektromagnetisk kompatibilitet

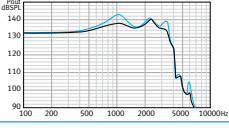
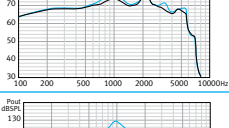
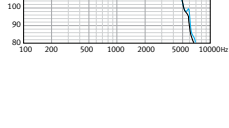
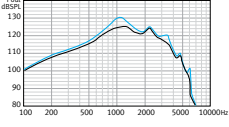
EMC-immunitet enligt ANSI C63.19-2001 EMC, rundupptagande/telespole

M2/T2

M2/T2

M2/T2

IEC 118-0 OES COUPLER TEKNISK DATA

	Referenstestfrekvens – IEC 118-0 (kHz)	1.6	1.6	1.6
	OSPL₉₀			
	Maximal (dB SPL)	144	139	144
	vid RTF (dB SPL)	130	135	136
	Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)			
	Maximal (dB)	85	80	85
	vid RTF (dB)	71	77	77
	Frekvenssvar			
	Frekvensomfång (DIN 45605) (Hz)	< 100-5000	< 100-5000	< 100-5000
	Referenstest förstärkning (dB)	53	60	61
	Strömförbrukning vid RTG (mA)	1.3	1.3	1.3
	Typisk batterilivslängd (h)	500	500	500
	Ekvivalent innivå för brus vid RTG (dB SPL)	19	19	19
	Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	5/3/2	5/3/2	5/3/2
	Induktionspolekänslighet			
	vid RTF (grafen visar 31.6 mA/m vid RTG) (dB SPL)	115	123	124

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet vid IEC 60118-13, fältstyrka 75/50 V/m, rundupptagande IRIL lågt/högt band (dB SPL)

24/52

24/52

24/52

FÖRKLARING

- Max 6 SP
- filtrerat slangfäste
- Max 6 SP
- ofiltrerat slangfäste

TESTFÖRHÅLLANDEN

Batteristorlek: 675; Källa: spänning 1.3 V; Slang: längd 25 mm, diameter insida 1.93 mm; Längd ljudslang power: 1
Uppmätt data erhålls med en stängd konfiguration vid användandet av en HA-2 coupler (ANSI-3.7-1995) eller en ockluderad öronsimulator (EN 60711, ansluten enligt fig. 4 i teststandarden), och ställs in i linjärt och rundupptagande läge med de adaptiva funktionerna avstängda. Ljudtrycksnivån i dessa hörapparater överskrider 132 dB SPL. Vi reserverar oss rätten att ändra specifikationsdata utan meddelande då förbättringar av produkten införs.