


Flex:tracker

Guide étape par étape Flex:tracker


Ce document fournit les instructions d'utilisation de Flex:tracker dans le logiciel TrueFit^{MC} d'Unitron.

1. Attribuer des instruments auditifs


1. Détectez vos instruments auditifs comme vous le faites habituellement dans le logiciel TrueFit d'Unitron.

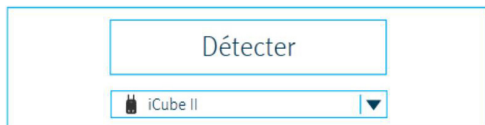


2. Lorsque le logiciel TrueFit d'Unitron aura détecté vos instruments auditifs, il vérifiera si ce sont des appareils Flex:trial^{MC}. Si tel est le cas, et si c'est la première fois que le logiciel TrueFit d'Unitron détecte ces appareils d'essai, il vous sera demandé si vous souhaitez faire le suivi de ces appareils Flex:trial à l'aide de Flex:tracker.

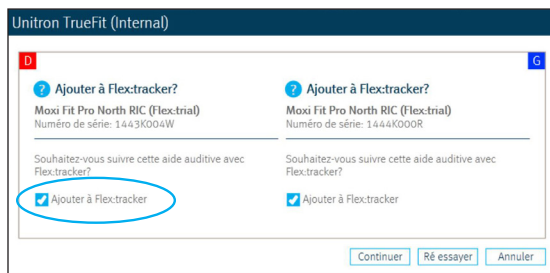


3. Une fois la session enregistrée, il vous sera demandé si vous souhaitez attribuer les appareils Flex:trial au client actuel.

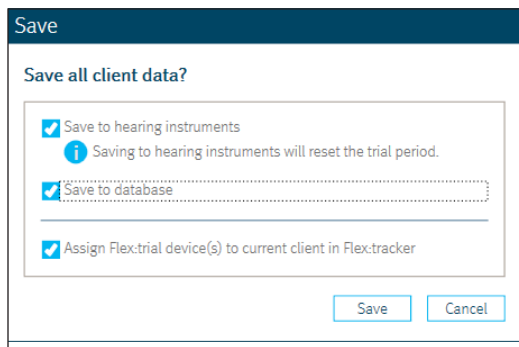


4. Le logiciel TrueFit d'Unitron vous invitera également à indiquer une date de rendez-vous, sauf si vous avez désélectionné cette option dans vos préférences.

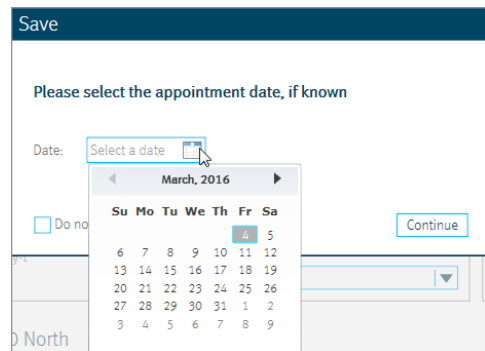

5. Connectez-vous à Flex:tracker.

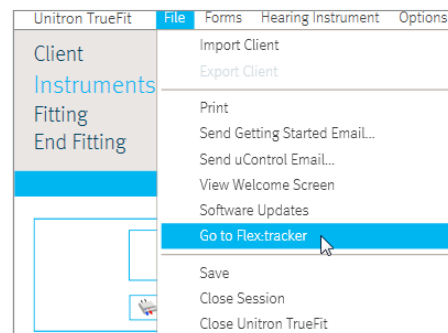

6. Une fois les appareils Flex:trial attribués, l'état des appareils Flex:trial changera pour passer à **Assigné** dans le Tableau d'état de Flex:tracker.

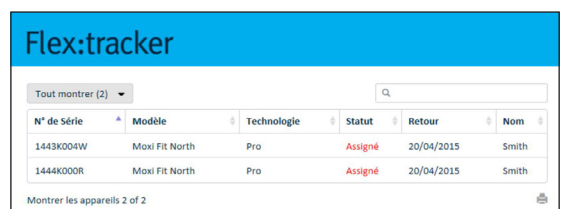


N° de Série	Modèle	Technologie	Statut	Retour	Nom
1443K004W	Moxi Fit North	Pro	Assigné	20/04/2015	Smith
1444K000R	Moxi Fit North	Pro	Assigné	20/04/2015	Smith

- Vous trouverez des renseignements détaillés sur l'attribution des appareils sur le côté droit du Tableau d'état. Si vous souhaitez les modifier, cliquez sur le bouton **Editer**.

- L'écran **Editer les détails d'assignation** vous permet de modifier les renseignements relatifs à l'attribution, si vous le souhaitez. Vous pouvez également saisir des commentaires.

2. Retourner des appareils Flex:trial

- Connectez-vous à Flex:tracker. Vous pouvez accéder au site Web Flex:tracker à l'aide de la commande de menu présentée ici.

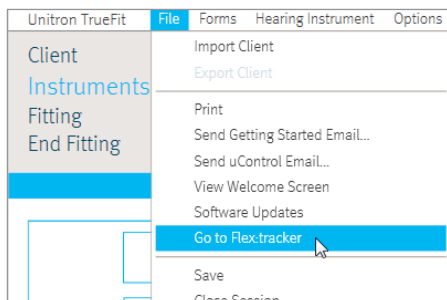

- Consultez le Tableau d'état et sélectionnez l'appareil Flex:trial qui doit être retourné. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour trouver le nom de famille du client.

N° de Série	Modèle	Technologie	Statut	Retour	Nom
1443K004W	Moxi Fit North	Pro	Assigné	20/04/2015	Smith
1444K000R	Moxi Fit North	Pro	Assigné	20/04/2015	Smith

- Sélectionnez l'appareil Flex:trial qui doit être retourné et cliquez sur le bouton **Retourner**.

- Confirmez le retour.

3. Réserver des appareils Flex:trial avec Flex:tracker

- Pour réserver des appareils Flex:trial avec Flex:tracker, sélectionnez d'abord un appareil Flex:trial disponible.


N° de Série	Modèle	Technologie	Statut	Retour	Nom
1443K004W	Moxi Fit North	Pro	Disponible	-	-
1444K000R	Moxi Fit North	Pro	Disponible	-	-

- Cliquez sur le bouton **Réserver** pour l'appareil souhaité.

- Saisissez les renseignements relatifs à la réservation.

4. Annuler une réservation avec Flex:tracker


1. Pour annuler la réservation d'un instrument Flex:trial avec Flex:tracker, sélectionnez d'abord l'instrument réservé.

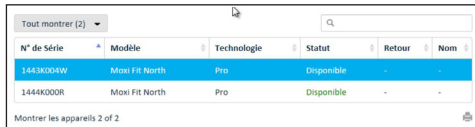

N° de Série	Modèle	Technologie	Statut	Retour	Nom
1443K004W	Moxi Fit North	Pro	Disponible	-	-
1444K000R	Moxi Fit North	Pro	Disponible	-	-

Montrer les appareils 2 of 2

2. Cliquez sur le bouton [Annuler la réservation](#) pour l'instrument souhaité.

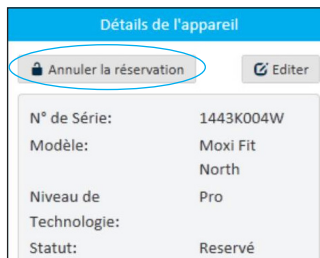


Détails de l'appareil

[Annuler la réservation](#) [Editer](#)

N° de Série: 1443K004W
Modèle: Moxi Fit North
Niveau de Technologie: Pro
Statut: Reservé

5. Comment le logiciel TrueFit d'Unitron fonctionne-t-il pour les instruments Flex:trial réservés?

1. Lors de l'appareillage d'un instrument Flex:trial réservé dans Flex:tracker, le logiciel TrueFit d'Unitron vous informe que cet instrument est réservé et vous donne la possibilité de continuer ou d'annuler (pour pouvoir sélectionner un autre instrument qui n'a pas été réservé).

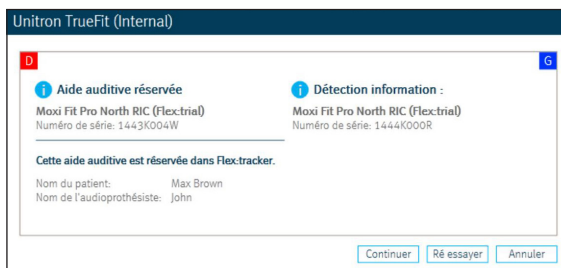

Unitron TrueFit (Internal)

Aide auditive réservée
Moxi Fit Pro North RIC (Flex:trial)
Numéro de série: 1443K004W

Détection information :
Moxi Fit Pro North RIC (Flex:trial)
Numéro de série: 1444K000R


Cette aide auditive est réservée dans Flex:tracker.

Nom du patient: Max Brown
Nom de l'audioprothésiste: John

[Continuer](#) [Ré essayer](#) [Annuler](#)

6. Retirer un appareil Flex:trial de Flex:tracker

1. Pour retirer un appareil Flex:trial de Flex:tracker, sélectionnez l'appareil puis cliquez sur le bouton [Effacer](#).

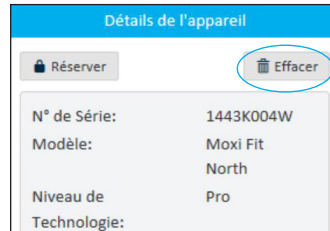


Détails de l'appareil

[Réserver](#) [Effacer](#)

N° de Série: 1443K004W
Modèle: Moxi Fit North
Niveau de Technologie: Pro

2. Confirmez l'effacement.

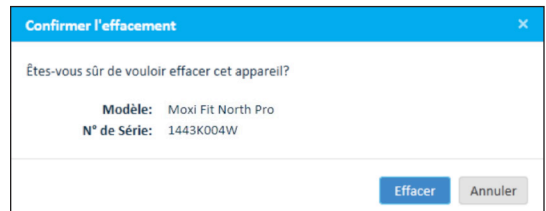

Confirmer l'effacement

Êtes-vous sûr de vouloir effacer cet appareil?

Modèle: Moxi Fit North Pro
N° de Série: 1443K004W

[Effacer](#) [Annuler](#)

Pour de plus amples renseignements au sujet de Flex:tracker ou du logiciel d'appareillage TrueFit d'Unitron, consultez la section Aide du logiciel TrueFit d'Unitron.