

Aanbevolen systeemvereisten

Systeem component	Aanbevolen
Processor	Pentium i5, 3 GHz of sneller
RAM	8 GB of meer
Harde-schijfruimte	4 GB of meer
Geschikte besturingssystemen	• Windows Vista, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 7, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 8, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 8.1, 32-bits/64-bits, laatste SP • Windows 10, 32-bits/64-bits, laatste SP
Schermpixelresolutie	1280 x 1024 pixels of meer
Resolutie tweede scherm (voor cliënt)	1366 x 768 pixels of meer
Grafische kaart	16 miljoen (24-bits) schermkleuren of meer
Station	DVD-ROM
Seriële COM-poort	Eén voor HI-PRO als deze wordt gebruikt via een seriële COM-poort

Systeem component	Aanbevolen
USB poorten	Eén voor elk van de onderstaande: • Bluetooth adapter • Accessoires programmeren • HI-PRO USB/HI-PRO 2/iCube II
Programmeerinterfaces	• iCube / iCube II • NOAHlink • HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink driver	NOAHlink-eigenschappen en NOAHlink-kernel: nieuwste beschikbare versie
Internetverbinding	Sterk aanbevolen
Browser	• Internet Explorer® laatste versie • Mozilla® Firefox® laatste versie • Google® Chrome™ laatste versie • Microsoft Edge® laatste versie
Geluidskaart	Stereo
Afspeelsysteem	20 Hz – 14 kHz
NOAH versie	NOAH 4.5 (NOAH 3.7.1 of nieuwer vereist)

unitron TrueFit™ software

Succesvolle aanpassingen. Eenvoudig.

Unitron TrueFit v3.3
Installatiegids

A Sonova brand

Unitron TrueFit software installeren

1. Plaats de Unitron TrueFit DVD in uw DVD-ROM speler. Het installatieprogramma zou automatisch moeten starten via uw besturingssysteem.


Wanneer dit niet gebeurt, kunt u het volgende doen:

Ga naar: Windows Start, kies Uitvoeren... vul de bestandsinformatie in. (bv. d:\setup.exe, waarbij d: de letter van uw DVD-ROM station is) en klik op OK.


OF

Gebruik Windows Verkenner (Deze Computer) om het bestand setup.exe te vinden op de DVD-ROM en dubbelklik op de bestandsnaam.

2. Selecteer de installatietaal van uw voorkeur: Engels, Frans, Duits of Nederlands (alleen voor de installatieprocedure).

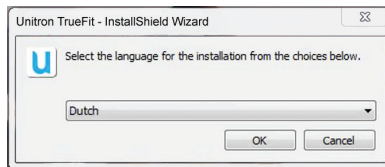

3. Wanneer het Unitron TrueFit installatiescherm wordt weergegeven volgt u de instructies op het scherm, zoals het selecteren van het type installatie van uw voorkeur: NOAH of Standalone.

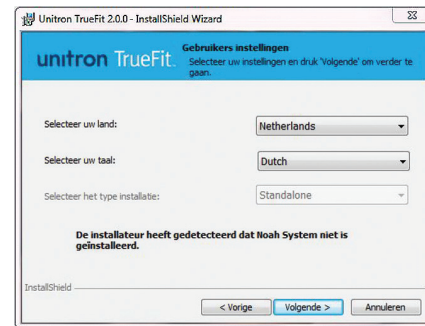

-  Instructies zijn beschikbaar op www.unitron.com/instr in Adobe® Acrobat® PDF-indeling. Als u deze wilt bekijken, moet Adobe Acrobat Reader zijn geïnstalleerd. Ga naar Adobe.com om te downloaden.
-  Neem contact op met Unitron via de telefoonnummers of adressen in deze handleiding om een gratis exemplaar van de instructies te verkrijgen. Het exemplaar wordt binnen 7 dagen naar u verzonden.

Hebt u assistentie nodig?

Australië - 1800 212 313
België - +31 88 600 88 10
Brazilië - +55 11 3748 0960
Canada - 1 800 265 8255
China - +86 21 61205533
Colombia - +57 1 2149045
Denemarken - +45 64 41 78 87
Duitsland - +49 711 658538 0
Europese vertegenwoordiging
- +41 58 928 01 01
Frankrijk - 04 26 23 22 00
India - +91-22-26871151

Nederland - +31 88 600 88 10
Nieuw-Zeeland - 0800 864 8766
Norway - +47 22 47 76 30
Oostenrijk - +49 711 658538 0
Rusland - +7 495 788 02 04
Spanje - +34 902 494 960
Sweden - +46 (0) 8 546 20 960
V.K. - +44 (0) 1925 247810
V.S. - 1 800 888 8882
Zuid-Afrika - (011) 467 7662/52
Zuid-Korea - +82 2 859 4902
Zwitserland - 0800 928 800

Voor niet geregistreerde landen - +1 519 895 0100



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



sonova
HEAR THE WORLD