

Stride-familjen



Snabbguide för anpassning i Unitron TrueFit

Denna snabbguide vägleder dig genom anpassningen av din Stride™-hörapparat med hjälp av anpassningsprogramvaran Unitron TrueFit™.

Programvaran Unitron TrueFit finns både som en fristående version och som en modul i NOAH.

Välj önskat programmeringsinterface innan du påbörjar sökningen efter din(a) Stride-hörapparat(er).

- Om du använder iCube II sätter du i batterierna i hörapparaterna och stänger batteriluckan.
- Om du använder NOAHlink eller HI-PRO med BÖ-hörapparater, öppnar du batteriluckan och ansluter programmeringskabeln till programmeringsporten.
- Om du använder NOAHlink eller HI-PRO med ITE-apparater, avlägsna batterifacket och anslut programmeringskabeln.

Under pågående programmering är följande funktioner inaktiverade: automatiskt program, hörapparatskontroller, tillbehör, easy-t, ljudstreaming och adaptiva mikrofonfunktioner.

Ange brukarinformation

Information (fristående version)


I fönstret [Brukare](#) klickar du på [Information](#). Klicka på knappen [Ny brukare](#) och ange brukarens uppgifter. Klicka sedan på [Spara](#). Klicka på knappen [Blank Session](#) om du vill starta en ny session.

Erfarenhet

Under [Brukare](#) klickar du på [Erfarenhetsnivå](#) och anger brukarens erfarenhet av hörapparater.

Audiogram (fristående version)

Under [Brukare](#) klickar du på [Audiogram](#) och anger brukarens audiogram och väljer vilket tillvägagångssätt som använts för audiometri.

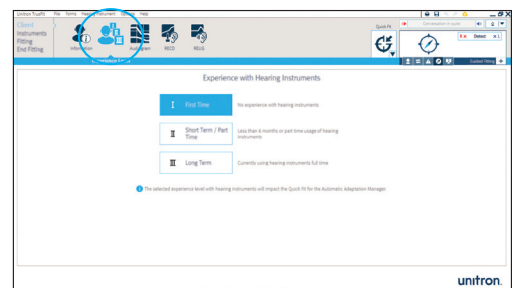

Anslut hörapparater

I fönstret [Hörapparater](#) klickar du på [Val](#) och väljer programmeringsgränssnitt i listrutan under knappen Sök.

Klicka på knappen [Sök](#). Hörapparatserie, modell och serienummer visas och kommunikationsstatusen uppdateras.


Guidad anpassning

Detta anpassningsalternativ är automatiskt tillgängligt i alla hörapparater som inte har någon lagrad anpassning. Guidad anpassning kan även väljas via Översiktspanelen.

Anpassningar genomförs genom att följa de angivna stegen.

Bockmarkeringar bekräftar vilka steg som har slutförts medan frågetecken anger vilka steg som ännu måste genomföras. En bockmarkering i en ruta innebär att steget är valfritt.

Dina hörapparater är färdigprogrammerade när alla obligatoriska steg har försetts med en bockmarkering.

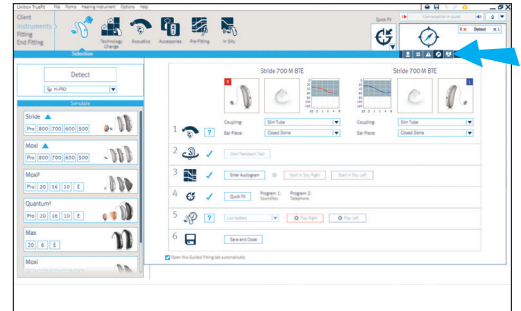

Traditionell anpassning

Under menyn Hörapparater

Välja akustik till en Stride BTE

Under menyn Hörapparater klickar du på [Akustik](#).

- Ange IntelliVent-koden för att automatiskt konfigurera ventilationen för en gjuten dome (om tillämpligt)
- Välj slangfäste eller tunn ljudslang
- För anpassning med slangfäste, välj insats, ventstorlek, typ av slangfäste och ljudkanal
- För tunn ljudslang, välj dome och passande slanglängd

Välja akustik till en Stride ITE

Under hörapparater, välj [Akustik](#).

- Konfigurera ventilation (om tillgängligt)
- Om du har beställt ITE med Intellivent kommer programvaran automatiskt läsa av koden och konfigurera hörapparaterna för optimal ventilation

Quick fit-hörapparater


Klicka på knappen **Quick Fit** som du hittar ovanför Översiktspanelen.

Quick Fit-knappen kan ändra färg till gul när ändringar görs i programvaran. I så fall klickar du på Quick Fit-knappen för att tillämpa programmeringsändringarna.

Länka tillbehör

I menyn **Hörapparater** klickar du på **Tillbehör**. Du behöver en USB-sladd för att ansluta till tillbehören. Klicka på ikonen för tillbehöret som du vill ansluta till hörapparaten(-erna).

Klicka på knappen **Aktivera** för att länka det valda tillbehöret. Följ instruktionerna på skärmen.

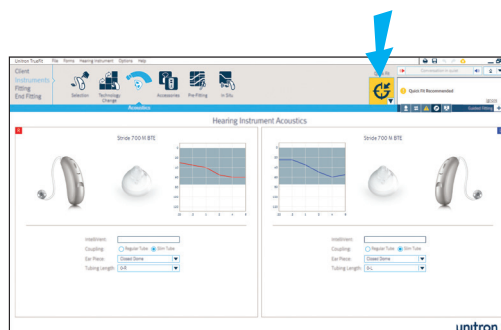

Under menyn Anpassning

Återkopplingstest

I fönstret **Anpassning**, klickar du på **Återkopplingstest**. Klicka på knappen **Starta återkopplingstest** och följ instruktionerna på skärmen.

Notera: Detta test rekommenderas enbart för att eliminera befintlig återkoppling.

Justera

Under **Anpassning**, välj **Tillväjningshanterare** för att ändra inställningar. Detta är ett lämpligt ställe att börja på vid grovjustering av förstärkningen. Använd kryssrutan för att avaktivera Tillväjningshanteraren om så önskas.

Välj **Justera** för att finjustera hörapparaterna.

Vid behov kan anpassningsråd användas för att föreslå och tillämpa finjusteringsalternativ.

Under menyn Slutlig anpassning

Konfigurera hörapparatsinställningar


Under **Slutlig anpassning** väljer du **HA-inställningar** för att konfigurera hörapparaterna utifrån HA-standardinställningar.

Konfigurera Pip

Under **Slutlig anpassning** väljer du **Pip** för att spela upp och konfigurera pipen utifrån standardinställningarna.

För att avsluta anpassningen

Välj **Sammanfattning** och **Skriv ut, Spara eller Skicka E-post**. Stäng sessionen med hjälp av **Stäng session**.

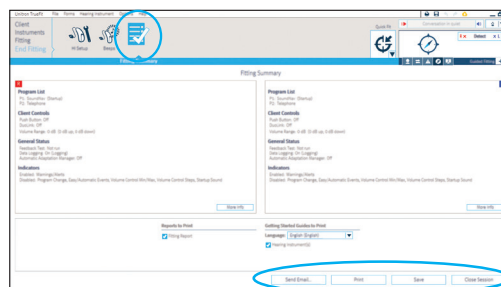

Efter anpassningen är avslutad

Brukaren kommer att kunna uppleva alla fördelar med sin teknologinivå först efter att hörapparaten har startats om.

För att starta om hörapparaterna efter iCube II använts, öppna och stäng batterifacket.

För att starta om hörapparaterna efter NOAHlink eller HI-PRO använts, avlägsna programmeringskablarna, sätt i batteri och stäng batteriluckan.

Mer information om utprovning av hörapparater i Stride-familjen och Unitrons programvara TrueFit finns i Hjälpfunktionen i Unitron TrueFit.